

Resetowanie aparatów słuchowych w aplikacji dla wielu użytkowników.

Instrukcja użytkowania



Wprowadzenie

Do wszystkich urządzeń używanych przez wielu pacjentów (np. urządzeń próbnych, wypożyczanych) należy stosować standardy higieny.

Obejmuje to wszystkie sekcje urządzeń wspomagających słyszenie: aparaty słuchowe typu RIC lub BTE oraz zewnętrzne słuchawki RIC. Każda sekcja musi zostać dokładnie wyczyszczona, zdezynfekowana i zresetowana przed ponownym użyciem u innego pacjenta.

Aparaty RIC/BTE: Oprócz czyszczenia/dezynfekcji wymagane jest usunięcie danych osobowych z pomocy słuchowej oraz kontrola wyglądu i działania.

Zewnętrzne słuchawki RIC: Jeśli słuchawka była noszona przez pacjenta w celu krótkotrwałego przymierzenia, zazwyczaj trwającego do 15 minut, można ją wyczyścić i zdezynfekować w celu przekazania innemu pacjentowi. Jeśli zewnętrzna słuchawka była noszona przez dłuższy czas, można ją przenieść do aparatu zakupionego przez pacjenta lub, jeśli nie jest wymagana, należy ją zutylizować.

Czyszczenie i dezynfekcja

1. Procedura czyszczenia

Podczas czyszczenia i dezynfekcji urządzenia należy nosić rękawiczki

Aparaty RIC

- Należy pozostawić zewnętrzną słuchawkę podłączoną lub użyć kitu, aby zapobiec przedostawaniu się płynu czyszczącego do portu słuchawki

Aparaty BTE

- Zdjąć wkładkę uszną pacjenta

Zewnętrzne słuchawki

- Zewnętrzne słuchawki noszone do krótkotrwałego przymierzania mogą być higienicznie czyszczone w celu ponownego użycia
- Zdjąć i wyrzucić nakładkę i filtr przeciwwoskowinowy

2. Czyszczenie i Dezynfekcja

- Do czyszczenia i dezynfekcji należy użyć chusteczki z następującymi składnikami aktywnymi: czwartorzędowym amonikiem i alkoholem
- Najpierw przetrzyj urządzenie(a) w celu usunięcia widocznych zanieczyszczeń (np. woskowina)

- Owinąć urządzenie(-a) świeżymi chusteczkami, zapewniając kontakt powierzchniowy z urządzeniem(-ami)
- Nie ma konieczności owijania urządzeń pojedynczo, wiele aparatów RIC/BTE /zewnątrznych słuchawek może być jednocześnie owiniętych tymi samymi chusteczkami

Aparaty RIC i BTE

- Upewnić się, że aparaty mają kontakt z chusteczką przez co najmniej 8 minut
- Jeśli chusteczka wyschnie, użyj świeżej chusteczki, aby upewnić się, że aparaty pozostaną wilgotne przez cały czas czyszczenia

Zewnętrzne słuchawki

- Upewnij się, że zewnętrzne słuchawki mają kontakt z chusteczką przez co najmniej 4 minuty

3. Suszenie

- Aby usunąć pozostałości płynu czyszczącego z aparatów / zewnętrznych słuchawek, należy przetrzeć je niestrzępiącą się ściereczką zwilżoną bieżącą wodą
- Pozostawić urządzenia do całkowitego wyschnięcia przed ponownym użyciem

Kontrola

Przeprowadzić następujące kontrole:

- Brak widocznych oznak fizycznej degradacji powierzchni, np. zarysowania obudowy.
- Pomoc słuchowa może być ładowana (w przypadku urządzeń akumulatorowych), komora baterii jest nienaruszona (w przypadku urządzeń baterijnych).
- Przeprowadzić test akustyczny, wyzwalając sprzężenie zwrotne. W przypadku aparatów RIC należy podłączyć zewnętrzną słuchawkę do aparatu w celu wywołania sprzężenia zwrotnego.

W przeciwnym razie, w przypadku zewnętrznych słuchawek: wyrzucić; w przypadku pomocy słuchowych: wysłać do dystrybutora w celu naprawy (opłata za naprawę obowiązuje, jeśli aparat nie jest objęty gwarancją, w zależności od kraju) lub, jeśli nie jest już potrzebny, wyrzucić.

Przywracanie ustawień fabrycznych

Wszystkie urządzenia próbne muszą zostać zresetowane do ustawień fabrycznych na koniec każdego okresu próbnego. Można to zrobić za pomocą programu do dopasowania aparatów słuchowych, przechodząc do opcji [Testy i narzędzia] > [Przywróć ustawienia fabryczne] > [Resetuj].

Jeśli pomoc słuchowa nie może zostać podłączona do programu do dopasowania aparatów słuchowych lub ulegnie awarii podczas dopasowania, należy wysłać go do dystrybutora w celu naprawy (obowiązuje opłata za naprawę, jeśli aparat nie jest objęty gwarancją, w zależności od kraju) lub, jeśli nie jest już potrzebny, wyrzucić.



Sonova Deutschland GmbH
Max-Eyth-Strasse 20
70736 Fellbach-Oeffingen
Niemcy

Importer do UE:

Sonova Polska Sp. z o.o.
plac Bankowy 1
00-139 Warszawa, Polska



Producent:

Sonova AG
Laubisrütistrasse 28
CH-8712 Stäfa
Szwajcaria
www.phonak.com

V2.00/2025-06/ZT

sonova
HEAR THE WORLD

