

Resetovanie načúvacích prístrojov pre použitie viacerými používateľmi.

Návod na použitie



Úvod

Pri všetkých prístrojoch, ktoré používajú viacerí užívatelia, sa musia dodržať hygienické normy.

Sem patria všetky súčasti posluchového systému: načúvací prístroj RIC alebo BTE, reproduktor RIC. Každá časť sa musí dôkladne vyčistiť, dezinfikovať a systém sa musí resetovať pred ďalším použitím iným užívateľom.

Načúvacie prístroje RIC/BTE: Okrem čistenia/dezinfekcie je potrebné tiež vymazať osobné údaje z načúvacieho prístroja a vykonať kontrolu so zhodnotením vzhľadu a funkčnosti.

Reproduktory u načúvacieho prístroja RIC: Ak bol reproduktor použitý klientom na krátkodobé vyskúšanie, ktoré obvykle trvá maximálne 15 minút, je možné ho vyčistiť a vydezinfikovať, aby mohol byť použitý u iného klienta. Ak bol reproduktor používaný dlhšie, je možné ho buď preniesť na načúvací prístroj, ktorý si klient nakoniec zakúpil, alebo by sa mal zlikvidovať, ak už nie je potrebný.

Postup čistenia

1. Príprava

Počas čistenia a dezinfekcie prístroja noste rukavice

RIC

- Reproduktor majte pripojený alebo použite tmel, aby sa čistiaci prípravok nedostal do vstupu reproduktora

BTE

- Vyberte tvarovku užívateľa

Reproduktry

- Reproduktry nosené počas krátkeho skúšania je možné hygienicky vyčistiť na ďalšie použitie
- Vyberte a zlikvidujte továrenskú koncovku a filter proti ušnému mazu

2. Čistenie a Dezinfekcia

- Na čistenie a dezinfekciu používajte utierku s nasledujúcimi účinnými látkami: kvartérny amónny a alkohol
- Najprv utrite zariadenie (zariadenia), aby ste odstránili viditeľné nečistoty (napr. ušný maz)

- Zabalte zariadenie (zariadenia) čerstvými utierkami, aby sa zabezpečil povrchový kontakt so zariadením (zariadeniami)
- Nemusíte zabaliť načúvacie prístroje jednotlivo, do rovnakého obrúsku je možné zabaliť niekoľko načúvacích prístrojov RIC/BTE/reproduktorov naraz

RIC a BTE

- Načúvacie prístroje musia byť v kontakte s obrúskom minimálne 8 minút celkového času
- Ak obrúsok vyschne, použite nový, aby povrch načúvacích prístrojov zostal počas celej doby čistenia navlhčený

Reproduktory

- Reprodukto(r)y musí byť v kontakte s obrúskom minimálne 4 minút celkového času

3. Vysušanie

- Ak chcete odstrániť zvyšky tekutiny z načúvacích prístrojov/reproduktorov, utrite ich handričkou, ktorá nepúšťa vlákna, navlhčenou vo vode z vodovodu
- Pred ďalším použitím nechajte načúvacie prístroje úplne vyschnúť

Kontrola

Vykonajte tieto kontroly:

- Nie sú viditeľné žiadne známky fyzického poškodenia povrchu, napr. poškriabaný kryt.
- Načúvací prístroj sa dá nabiť (v prípade nabijateľných načúvacích prístrojov), dvierka priehradky pre batériu sú nepoškodené (pri načúvacích prístrojov na batériu).
- Vykonajte akustický test spustením spätnej väzby. Pri načúvacích prístrojoch RIC k nim pripojte reproduktory a vykonajte test spätnej väzby.

Ak tieto body platia, pokračujte s prípravou načúvacích prístrojov na ďalšie použitie; v opačnom prípade reproduktory zlikvidujte; v prípade načúvacích prístrojov: odošlite ich GC na opravu (v prípade, že ide o opravu mimo záruky, účtujú sa v závislosti od krajiny poplatky za opravu) alebo, ak nie je reproduktor viac potrebný, zlikvidujte ho.

Obnovenie nastavení z výroby

Na všetkých skúšobných prístrojoch sa na konci každého skúšobného obdobia musia obnoviť nastavenia z výroby. Toto urobíte pomocou nastavovacieho softvéru v položke [Skúška a nástroje] > [Obnovenie nastavení z výroby] > [Obnovenie].

Ak nie je možné načúvací prístroj pripojiť k nastavovaciemu softvéru alebo počas nastavovania zlyhá, pošlite ho GC na opravu (v prípade, že ide o opravu mimo záruky, účtujú sa v závislosti od krajiny poplatky za opravu) alebo, ak nie je viac potrebný, zlikvidujte ho.



Sonova Deutschland GmbH
Max-Eyth-Strasse 20
70736 Fellbach-Oeffingen
Nemecko



Výrobca:

Sonova AG
Laubisrütistrasse 28
CH-8712 Stäfa
Švajčiarsko
www.phonak.com

Distibútor pre Slovenskú republiku:

Artsonic s. r. o.
so sídlom Radlinského 27,
811 07 Bratislava
www.artsonic.sk
www.phonak.sk

V2.00/2025-06/ZT

sonova
HEAR THE WORLD

