

# Ponastavitev slušnih aparatov za uporabo z več uporabniki.

Navodila za uporabo



# Uvod

Higienski standardi morajo veljati za vse naprave, ki se uporabljajo z več strankami (npr. preskusne naprave, izdelki, ki se izposojajo).

To vključuje vse dele slušnega sistema: RIC ali BTE, RIC sprejemnik. Vsak del je treba temeljito očistiti, razkužiti in sistem ponastaviti, preden ga ponovno uporabi druga stranka.

Naprave RIC/BTE: poleg čiščenja/razkuževanja je potreben tudi izbris osebnih podatkov na slušnem aparatu ter pregled, s katerim se oceni videz in delovanje.

Sprejemniki RIC: če je stranka nosila sprejemnik za kratkotrajno preizkušanje, ki običajno traja do 15 minut, je tega možno očistiti in razkužiti, ter ga nato predati drugi stranki. Če je bil sprejemnik nošen dlje, ga je mogoče prenesti na strankino kupljeno napravo. V primeru, da ga stranka ne potrebuje, ga je treba zavreči.

# Postopek čiščenja

## 1. Priprava

---

Med čiščenjem in razkuževanjem naprave nosite rokavice

---

### RIC

- Sprejemnik naj bo priključen ali pa uporabite kit, da preprečite vstop čistilne tekočine v vrata sprejemnika

### BTE

- Odstranite ušesni vstavek stranke

### Sprejemniki

- Sprejemnike, ki so nošeni za kratkotrajno preizkušanje, je mogoče higiensko očistiti za ponovno uporabo
- Odstranite in zavržite olivo in zaščito pred ušesnim maslom

## 2. Čiščenje in Razkuževanje

---

- Za čiščenje in razkuževanje uporabite krpico z naslednjimi učinkovinami: kvartarni amonij in alkohol
- Najprej obrišite napravo(-e), da odstranite vidno kontaminacijo (npr. maslo)
- Naprave(-e) ovijte(-e) s svežimi robčki, ki zagotavljajo površinski stik s pripomočki(-ami)
- Naprav ni treba oviti posamično, kar pomeni, da je možno več RIC/BTE/sprejemnikov hkrati oviti v iste robčke

---

### RIC in BTE

- Zagotovite, da je/so naprava(-e) v stiku z robčkom vsaj 8 minut
- Če se robček posuši, uporabite svež robček, da zagotovite, da naprave ostanejo mokre ves čas čiščenja

### Sprejemniki

- Zagotovite, da je/so sprejemnik(-i) v stiku z robčkom vsaj 4 minute

## 3. Sušenje

---

- Če želite odstraniti ostanke čistilne tekočine z naprav/sprejemnikov, jih obrišite s krpo, ki ne pušča vlaken, navlaženo z vodo iz pipe.
- Pred ponovno uporabo pustite naprave počivati, da se popolnoma posušijo

# Pregled

Izvedite naslednja preverjanja:

- Ni vidnih znakov fizične degradacije površine, npr. opraskano ohišje.
- Slušni aparat je možno polniti (za polnilne naprave), vratca baterije so nepoškodovana (za baterijske naprave).
- Izvedite akustični preizkus s sprožitvijo povratnih informacij. Za izvedbo preizkusa s povratnimi informacijami pri napravah RIC na napravo priključite sprejemnik.

Če so naloge v teh točkah uspešno opravljene, nadaljujte s pripravo naprav za ponovno uporabo. V nasprotnem primeru sprejemnike zavrzite; slušne aparate pa pošljite v GC na popravilo (če niso v garanciji se zaračuna strošek popravila, odvisno od države) ali pa jih zavrzite, če jih ne potrebujete več.

# Ponastavitev na tovarniške nastavitve

Vse preskusne naprave je treba na koncu vsakega preskusnega obdobja ponastaviti na tovarniške nastavitve. To lahko storite s pomočjo programske opreme za namestitev tako, da odprete [Trial & tools] (Preizkus in orodja) > [Reset to factory settings] (Ponastavitev na tovarniške nastavitve) > [Reset] (Ponastavi).

Če slušnega aparata ni mogoče povezati s programsko opremo za namestitev ali odpove med namestitvijo, ga pošljite v GC na popravilo (če ni v garanciji se zaračuna strošek popravila, odvisno od države) ali pa ga zavržite, če ga ne potrebujete več.



Sonova Deutschland GmbH  
Max-Eyth-Strasse 20  
70736 Fellbach-Oeffingen  
Nemčija



**Proizvajalec:**

Sonova AG  
Laubisrütistrasse 28  
CH-8712 Stäfa  
Švica  
[www.phonak.com](http://www.phonak.com)

V2.00/2025-06/ZT

**sonova**  
HEAR THE WORLD



**CE**  
0459

