

# Återställa hörapparater för användning av annan användare ●

Bruksanvisning



# Inledning

Hygienstandarder måste tillämpas på alla apparater som används av flera användare (t.ex. Trial-apparater, låneapparater).

Detta inkluderar alla delar av hörapparaten: RIC-apparat eller bakom-örat-apparat samt den externa hörtelefonen. Varje del måste genomgå en grundlig rengöring, desinfektion och systemåterställning innan den återanvänds av en annan användare.

RIC-apparater/bakom-örat-apparater: Utöver rengöring/desinfektion krävs radering av personliga data i hörapparaten och en inspektion som bedömer hölje och prestanda.

Externa hörtelefoner: Om en hörtelefon har använts av en klient för kortvarig utprovning, upp till 15 minuter, kan den rengöras och desinficeras för att kunna användas av någon annan. Om en hörtelefon har använts längre än så kan den överföras till samma användares hörapparat. Om den inte behövs bör den kasseras.

# Procedur för rengöring

## 1. Förberedelser

---

Använd handskar under rengöring och desinfektion av apparaten

---

### RIC-apparat

- Behåll hörtelefonen ansluten eller använd kitt för att förhindra att rengöringsvätska kommer in i hörtelefonens kontakt

### Bakom-örat-apparat

- Avlägsna klientens öroninsats

### Hörtelefoner

- Hörtelefoner som används för kortvarig utprovning kan rengöras för återanvändning
- Avlägsna och kassera dome och vaxfilter

## 2. Rengöring & Desinfektion

---

- För rengöring och desinfektion, använd en våtservett med följande aktiva ingredienser: kvartärt ammonium och alkohol
- Torka först av enheten/enheterna för att ta bort synlig förorening (t.ex. vax)

- Linda in enheten/enheterna med nya våtservetter för att säkerställa ytkontakt med enheten/enheterna
- Det är inte nödvändigt att vira in enheterna var för sig, flera RIC-apparater/bakom-örat-apparater/hörtelefoner kan viras in i samma våtservetter

---

#### RIC-apparater och bakom-örat-apparater

- Se till att enheten/enheterna är i kontakt med vårservetten i minst 8 minuter totalt
- Om våtservetten blir torr, använd en ny våtservett för att säkerställa att enheterna förblir våta under hela rengöringstiden

#### Hörtelefoner

- Se till att hörtelefonen/hörtelefonerna är i kontakt med våtservetten i minst 4 minuter totalt

### 3. Torkning

---

- För att avlägsna rester av rengöringsvätska från apparaterna/hörtelefonerna, torka av dem med en luddfri duk fuktad i kranvatten
- Låt enheterna vila för att torka helt innan de används igen

# Inspektion

Utför följande kontroller:

- Inga tecken på fysisk ytförsämring, t.ex. repor i höljet, är synliga.
- Hörapparaten kan laddas (laddningsbara apparater), batteriluckan är intakt (för apparater med batteri).
- Utför ett akustiskt test genom att skapa återkoppling. För hörapparater med extern hörtelefon, anslut en hörtelefon till apparaten för återkopplingstestet.

Om dessa punkter utförts utan anmärkning, fortsätt med att förbereda enheterna för återanvändning. Om inte, gör följande: Hörtelefoner: kassera dem. Hörapparater: skicka dem för reparation (reparationsavgift tillkommer om det är utanför garantin, vilket kan vara fallet). Om de inte kan användas längre, kassera dem.

# Återställ till fabriksinställningar

Alla Trial-apparater måste återställas till fabriksinställningarna i slutet av varje provperiod. Du kan göra detta via Target genom att gå till [Trial och verktyg] > [Återställ till fabriksinställningar] > [Återställ].

Om hörapparaten inte kan anslutas till programvaran eller inte fungerar under anpassningen, skicka den för reparation (reparationsavgift tillkommer om det är utanför garantin, vilket kan vara fallet). Om den inte kan användas längre, kassera den.



Sonova Deutschland GmbH  
Max-Eyth-Strasse 20  
70736 Fellbach-Oeffingen  
Tyskland



**Tillverkare:**

Sonova AG  
Laubisrütistrasse 28  
CH-8712 Stäfa  
Schweiz  
[www.phonak.com](http://www.phonak.com)

V2.00/2025-06/ZT

**sonova**  
HEAR THE WORLD



**CE**  
0459

