


Uso de RogerDirect™ en un audífono de Phonak

Importante: Se recomienda mantener una distancia mínima de 3 m entre cada Instalador Roger durante la instalación o desinstalación, así como mantener apagados todos los demás audífonos que estén cerca del Instalador Roger. Se recomienda apagar los dispositivos Roger que estén cerca del Instalador Roger durante la instalación.

Instalación del receptor Roger™ en un audífono de Phonak desde Roger X

- Enchufe el Roger X en el Instalador Roger (3).
- Encienda el Instalador Roger (1) (el indicador luminoso (2) pasará a ser verde fijo).
- El indicador luminoso (4) pasará a ser verde fijo (Roger X está preparado para la instalación).
- Encienda el audífono y colóquelo en el logotipo del audífono.
- Espere a que el indicador luminoso (5) parpadee en verde (la instalación está en curso). Cuando el indicador luminoso pase a ser verde fijo, la instalación habrá finalizado.
- Apague el Instalador Roger. Retire y guarde el Roger X. El audífono está preparado para utilizarse con RogerDirect.

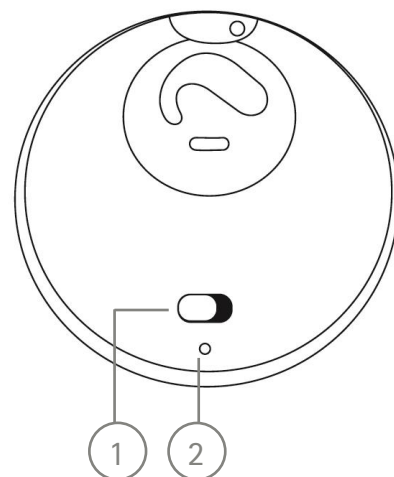

Desinstalación del receptor Roger de un audífono de Phonak al Roger X

- Enchufe el Roger X en el Instalador Roger (3).
- Encienda el Instalador Roger (1) (el indicador luminoso (2) pasará a ser verde fijo).
- El indicador luminoso (4) permanecerá inactivo durante varios segundos (Roger X está preparado para desinstalarse).
- Encienda el audífono y colóquelo en el logotipo del audífono.
- Espere a que el indicador luminoso (5) pase a ser verde fijo (lo que confirma que Roger está instalado en el audífono).
- Cuando comience la desinstalación, el indicador luminoso (5) parpadeará en verde hasta que el proceso haya finalizado.
- El indicador luminoso (4) pasará a ser verde fijo cuando la desinstalación haya finalizado (Roger está ahora instalado en el Roger X).
- Apague el Instalador Roger. Retire el Roger X. El audífono ya no puede utilizarse con Roger.

