


Comenzamos un nuevo capítulo en Paradise

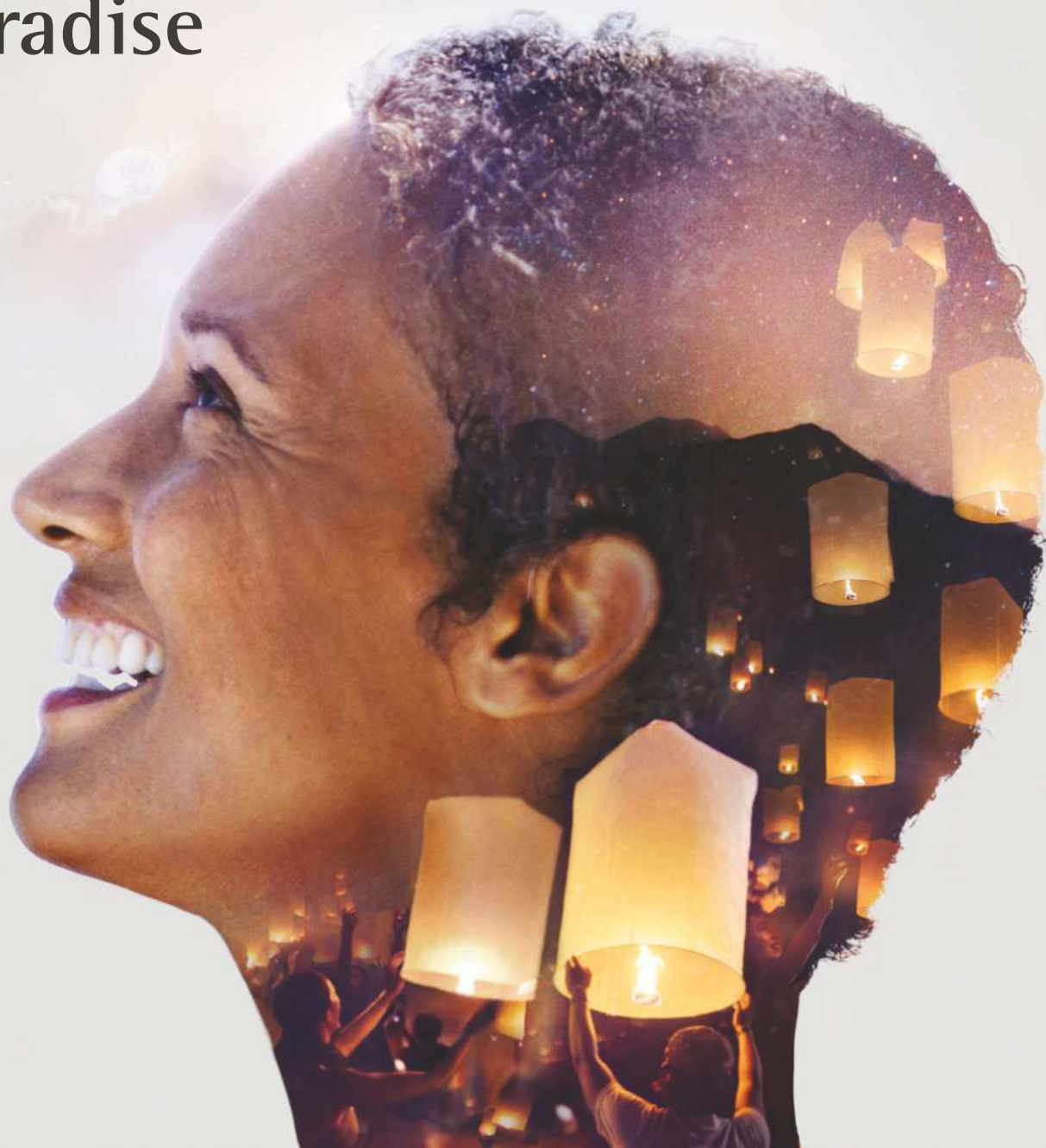

Auricular Phonak ActiveVent™

Nada iguala el sonido de Paradise

Le damos la
bienvenida al
nuevo capítulo
de Paradise



Con el lanzamiento de Phonak Audéo™ Paradise, creamos audífonos que proporcionaron a los usuarios una experiencia auditiva incomparable¹. Ese primer capítulo empezó hace doce meses. Desde entonces, en nuestra vida diaria han ocurrido grandes cambios y llevar mascarilla se considera ahora la "nueva normalidad". Para algunos usuarios de audífono, esto ha supuesto otro grado de dificultad, ya que no les es posible ver los labios cuando les hablan.

Los audífonos Phonak Paradise con AutoSense OS™ 4.0 se adaptan fácilmente a una gran variedad de ambientes sonoros, lo que les facilita a los usuarios desenvolverse en diversos entornos. Como no es necesario que los usuarios ajusten sus audífonos, hemos eliminado un aspecto potencial de complejidad.

Esto puede tener una influencia directa en el bienestar de los usuarios de audífonos. Al facilitar la comunicación de más usuarios con pérdida auditiva, estos pueden mantener las conexiones sociales, prosperar mentalmente y crecer emocionalmente.

Phonak se enorgullece de presentar el nuevo capítulo de Paradise: al incorporar su exclusivo sonido natural y nítido, Paradise proporciona una experiencia auditiva incomparable¹ en aún más ambientes.



Presentamos el auricular ActiveVent™

El primer auricular inteligente de audífono del mundo

Paradise es reconocido por su¹ calidad sonora incomparable⁴ con una brillante comprensión verbal^{3,4,5} y un cancelador de ruido personalizado. Ahora comenzamos un nuevo capítulo con el lanzamiento del auricular ActiveVent.


El nuevo auricular ActiveVent™ es el primer auricular de audífono inteligente del mundo y tiene la capacidad de encontrar el equilibrio de forma inteligente entre la claridad verbal en ambientes ruidosos y el confort auditivo² a fin de reforzar todavía más la¹ calidad sonora incomparable⁴ de Phonak Paradise en usuarios con pérdida auditiva de leve a moderada.

Esta tecnología innovadora de auricular cuenta con una abertura conmutable de forma mecánica que AutoSense OS 4.0 controla sin problemas. Por lo tanto, combina de forma inteligente el rendimiento auditivo de una adaptación cerrada con el confort de una adaptación abierta². Esto ofrece a los usuarios una solución auditiva sin concesiones, que les permite disfrutar de la conciencia del entorno y la naturalidad de su propia voz, a la vez que perciben una mejora en la inteligibilidad verbal en ambientes ruidosos⁶.




¿Cómo funciona el auricular ActiveVent?

ActiveVent es un auricular que incluye una abertura integrada junto con un pequeño disco que cambia entre dos posiciones: abierta y cerrada. AutoSense OS 4.0 controla todo este proceso de forma inteligente y el clic de comprobación le comunica al usuario que el disco ha cambiado de posición.

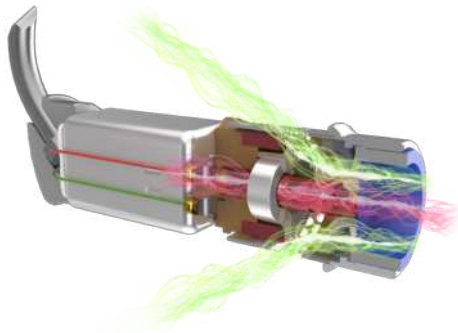

Cuando el disco está en la posición abierta, el sonido directo pasa a través de la abertura integrada del auricular y, por lo tanto, ofrece el confort de una adaptación abierta, la naturalidad de la propia voz y la conciencia de los sonidos ambientales².

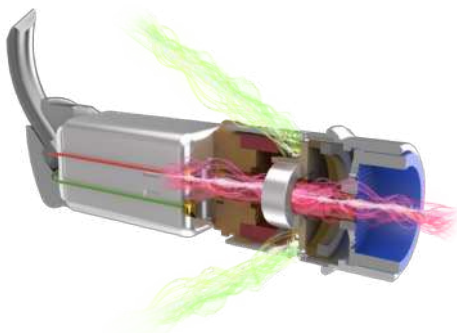

En ambientes sonoros complejos con discurso con ruido elevado o al transmitir contenido multimedia, el disco cambia a la posición cerrada y evita que los ruidos ambientales entren directamente al oído, por lo que enfatiza más la palabra que procede de la parte frontal o el contenido transmitido.

Acoplamiento acústico de ActiveVent

1. Universal SlimTip AV

Gracias al nuevo Universal SlimTip Av, puede realizar fácilmente una demostración del auricular ActiveVent a los usuarios.

Los Universal SlimTip se diseñaron a partir de los datos recogidos de miles de escaneos de oído, lo que permitió a los desarrolladores crear cuatro modelos de formas con una alta tasa de adaptación. Los Universal SlimTip son una solución temporal excelente para demostraciones y periodos de prueba mientras el usuario espera su SlimTip Titanium AV personalizado.

2. SlimTip Titanium AV personalizado

Con el objetivo de conseguir un rendimiento acústico óptimo, el auricular ActiveVent se diseñó para usarse a largo plazo con SlimTip Titanium, que proporciona una carcasa totalmente personalizada de un material duradero y cómodo.

Características destacables

- Equilibrio con inteligencia entre claridad verbal en ambientes ruidosos y confort auditivo.²
- Proporciona calidad de sonido superior para transmisión multimedia.^{6,7}
- Controlado por AutoSense OS 4.0 de forma inteligente.
- Compatible con todos los audífonos recargables Audéo Paradise⁸.

Consideraciones sobre la adaptación de ActiveVent

- Para mantener un rendimiento óptimo, debe sustituir los auriculares cada seis meses. Esto se puede hacer fácilmente en la consulta.
- Los candidatos ideales son quienes tienen muy poco cerumen y buena destreza.
- Es necesario limpiar y cambiar los filtros anticerumen con regularidad.
- No es adecuado para personas con acúfenos severos e hiperacusia.



ActiveVent Rendimiento +: ventajas para los usuarios

El auricular ActiveVent es compatible con todos los audífonos recargables Audéo Paradise, lo que ofrece distintos grados de ventajas en función del nivel de rendimiento del audífono. ActiveVent Rendimiento + es el conjunto de ventajas a las que podrán acceder los usuarios con sus audífonos gracias al auricular ActiveVent.


Equilibrio con inteligencia entre claridad verbal en ambientes ruidosos y confort auditivo²

Los auriculares ActiveVent son ideales para usuarios con un estilo de vida activo que pasan un tiempo considerable en ambientes ruidosos, tales como restaurantes, reuniones sociales o lugares públicos con mucho ruido externo. En estos ambientes se puede dificultar todavía más la audición. Con los auriculares ActiveVent, a medida que el nivel de ruido aumenta, AutoSense OS 4.0 cierra automáticamente la abertura, lo que permite que el usuario de audífono se beneficie del mejor rendimiento de una adaptación cerrada (disponible en el nivel de rendimiento Superior). Cuando el nivel de ruido disminuye, la abertura se abre para que los usuarios puedan disfrutar del confort de una adaptación abierta. Con los auriculares ActiveVent, los usuarios también tienen acceso a programas manuales cuando la abertura está cerrada (disponible en niveles de rendimiento Superior, Avanzado y Estándar).

Calidad de sonido superior para transmisión multimedia^{6,7}

Gracias a la abertura cerrada, ahora los usuarios también pueden disfrutar de una calidad de sonido superior para transmisión multimedia. Lo que hace realmente especial a estos auriculares es que si el usuario desea pasar de oír una transmisión a hablar en una conversación, con un sencillo doble toque se pausa el contenido transmitido y el auricular ActiveVent se abre para conseguir una transición sin esfuerzo (disponible en todos los niveles de rendimiento).

Ventajas

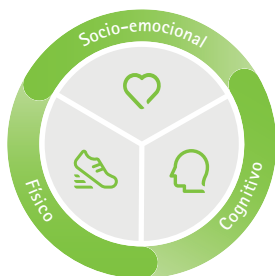

- El auricular ActiveVent proporciona una comprensión verbal en ruido un 10 % mejor, al tiempo que ofrece sonido natural en diversos ambientes sonoros⁶.
- Los Universal SlimTip facilitan poner a prueba y realizar demostraciones del auricular ActiveVent.
- El auricular ActiveVent ayuda a los usuarios a mantenerse conectados tanto en ruido como en silencio, lo que garantiza que puedan socializar con familiares y amigos, y mantener sus excelentes conexiones.



Nada iguala el sonido de Paradise


Con el lanzamiento de Paradise, Phonak consolidó su posición como uno de los líderes del sector en cuanto a excelencia audiológica. Paradise utiliza el mejor hardware del sector como base y ahora incorpora todavía más funciones para que ayude a los usuarios a descubrir la maravilla del sonido en aún más ambientes, a la vez que mejora su bienestar general. Con el rendimiento demostrado del chip PRISM™, estas funciones trabajan juntas sin interrupciones para proporcionar una experiencia auditiva incomparable¹.

Calidad sonora sin rival

- **Nuevo auricular ActiveVent**
 - Nuevo ActiveVent Rendimiento +
- **Sensor de movimiento**
- **APD 2.0**
- **AutoSense OS™ 4.0**
 - Enfatizador del habla
 - Cancelador de ruido dinámico
 - Sensor auditivo de movimiento



► Tecnología fiable recargable



Soluciones digitales personalizadas

- **Actualización de myPhonak app**
 - Sensibilidad personalizada de Tap Control
 - AudiogramDirect (con Remote Support)
 - Mando a distancia
- **Nuevo Target 7.1.9**

Conectividad universal

- **Conexión a teléfonos inteligentes, TV y más**
- **RogerDirect™**
- **Hecho para todos**
- **Múltiples conexiones Bluetooth®**
- **Tap Control para obtener acceso fácil a las funcionalidades Bluetooth**



La vida se disfruta más

En Phonak, creemos que oír bien es igual que sentirse bien y que es esencial para vivir la vida al máximo. Durante más de 70 años, hemos permanecido apasionados por crear un mundo mejor para todos, "life is on". Nuestras innovadoras soluciones auditivas están diseñadas para personas de todas las edades y todos los grados de pérdida auditiva, para conectarse socialmente, prosperar mentalmente y crecer emocionalmente.

www.phonakpro.es



028-2308-06/V4.00/2021-07/MLG © 2021 Sonova AG All rights reserved



Sonova AG · Laubisrütistrasse 28
CH-8712 Stäfa · Suiza



Sonova Deutschland GmbH
Max-Eyth-Str. 20
70736 Fellbach-Oeffingen · Alemania

