

Roger NeckLoop pour la transcription instantanée

Instructions d'installation

Vous pouvez connecter le Roger NeckLoop à un ordinateur, à une tablette ou à un smartphone pour générer des sous-titres automatiques en temps réel grâce à un logiciel externe de transcription instantanée.


Préparation

1. Vérifiez que votre Roger NeckLoop et votre microphone Roger sont chargés.
2. Vérifiez qu'un logiciel externe de transcription instantanée, de transcription en temps réel ou une application de dictée est installé(e) sur votre ordinateur, votre smartphone ou votre tablette.

Connexion à l'ordinateur


Vous avez besoin : du câble USB-C vers USB-A fourni.

1. Branchez le câble USB au Roger NeckLoop et à votre ordinateur :

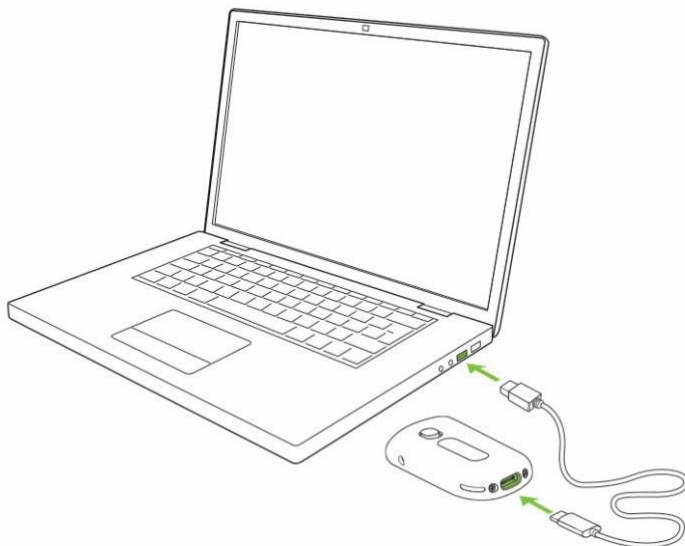

2. Mettez le Roger NeckLoop en marche.

3. Sur votre ordinateur, vérifiez que le Roger NeckLoop est sélectionné comme source d'entrée (réglages de son) :

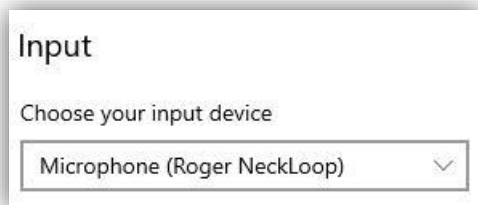

4. Lancez le logiciel de transcription instantanée (application tierce) sur votre ordinateur. Sinon, vous pouvez utiliser la fonction « Dicter » de Microsoft Word :




5. À présent, parlez dans le microphone Roger ; le logiciel de transcription instantanée ou MS Word transcrit les mots prononcés en texte.

Connexion à un smartphone ou à une tablette avec une prise USB-C

Vous avez besoin : du câble USB-C vers USB-A fourni et d'un adaptateur On-the-Go (OTG), OU d'un câble USB-C vers USB-C.

1. Connectez le Roger NeckLoop à votre smartphone ou tablette à l'aide d'un adaptateur OTG et du câble USB fourni, OU utilisez un câble USB-C vers USB-C.
2. Mettez le Roger NeckLoop en marche.
3. Lancez l'application de transcription instantanée (par exemple, Google Transcribe) sur votre smartphone ou tablette.
4. Si nécessaire, sélectionnez le Roger NeckLoop comme source d'entrée.
5. Parlez dans le microphone Roger ; l'application de transcription instantanée transcrit les mots prononcés en texte.

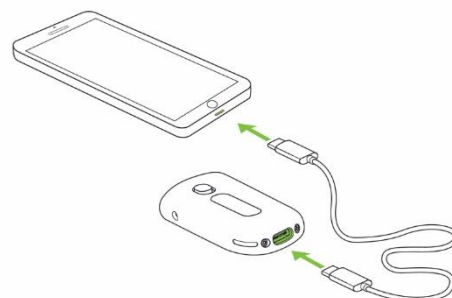

Connexion à un smartphone ou à une tablette avec une prise Lightning

Vous avez besoin : du câble USB-C vers USB-A fourni et d'un adaptateur pour caméra Lightning vers USB 3. Votre chargeur de téléphone.

1. Connectez l'adaptateur à votre smartphone.
2. Connectez votre chargeur de téléphone à l'adaptateur.
3. Connectez le Roger NeckLoop à l'adaptateur à l'aide du câble USB-C vers USB-A fourni.
4. Mettez le Roger NeckLoop en marche.
5. Lancez l'application de transcription instantanée sur votre smartphone ou tablette.
6. Si nécessaire, sélectionnez le Roger NeckLoop comme source d'entrée.
7. Parlez dans le microphone Roger ; l'application de transcription instantanée transcrit les mots prononcés en texte.

