


Utilisation de RogerDirect™ avec une aide auditive Phonak

Important : Il est recommandé de maintenir une distance minimale de 3 m entre chaque Roger Installer pendant la procédure d'installation/désinstallation, et de veiller à ce que toutes les autres aides auditives à proximité de Roger Installer restent éteintes. Il est recommandé d'éteindre les dispositifs Roger à proximité de Roger Installer pendant la procédure d'installation.

Installation du récepteur Roger™ dans une aide auditive Phonak à partir de Roger X

- Connectez le Roger X à Roger Installer (3).
- Allumez Roger Installer (1) (le témoin lumineux [2] passe au vert fixe).
- Le témoin lumineux (4) passe au vert fixe (Roger X est prêt pour l'installation).
- Allumez l'aide auditive et placez-la sur le logo de l'aide auditive.
- Attendez que le témoin lumineux (5) clignote en vert (installation en cours). L'installation est terminée quand le témoin lumineux passe au vert fixe.
- Éteignez Roger Installer. Retirez et rangez le Roger X. L'aide auditive est prête à être utilisée avec RogerDirect.

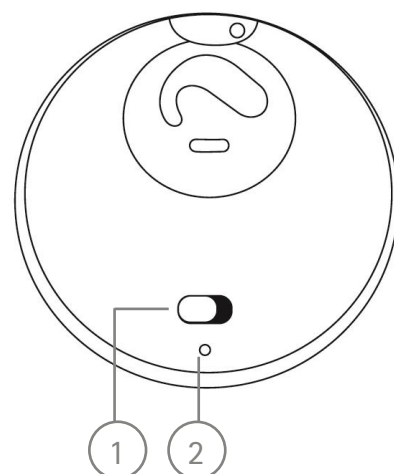

Désinstallation du récepteur Roger dans une aide auditive Phonak vers Roger X

- Connectez le Roger X à Roger Installer (3).
- Allumez Roger Installer (1) (le témoin lumineux [2] passe au vert fixe).
- Le témoin lumineux (4) reste éteint pendant plusieurs secondes (Roger X est prêt à être désinstallé).
- Allumez l'aide auditive et placez-la sur le logo de l'aide auditive.
- Attendez que le témoin lumineux (5) passe au vert fixe (confirmation que Roger est installé sur cette aide auditive).
- Quand la procédure de désinstallation est lancée, le témoin lumineux (5) clignote en vert jusqu'à la fin de l'opération.
- Le témoin lumineux (4) passe au vert fixe à la fin de la désinstallation (Roger est désormais installé sur le Roger X).
- Éteignez Roger Installer. Retirez le Roger X. L'aide auditive ne peut plus être utilisée avec Roger.

