


Phonak

Guide TV du Roger Select


Câble analogique branché dans la sortie casque

Branchez le câble analogique fourni dans la sortie casque ou audio du téléviseur. Cela peut mettre les haut-parleurs du téléviseur en sourdine. Certains téléviseurs permettent d'utiliser un casque et les haut-parleurs en parallèle. Veuillez vérifier les paramètres audio de votre téléviseur. Vous trouverez peut-être également une sortie audio sur le décodeur ou le boîtier de diffusion du téléviseur.

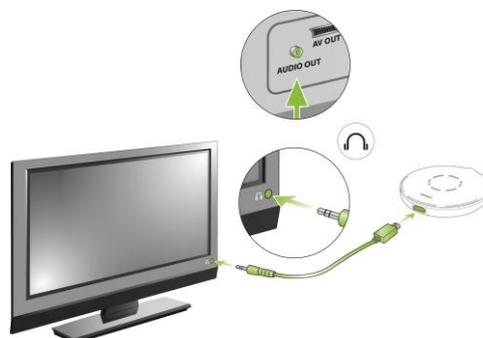

Roger Select placé à proximité d'un haut-parleur

Placez le Roger Select à proximité du haut-parleur du téléviseur. Sur les écrans plats, les haut-parleurs se trouvent généralement à l'arrière de l'appareil. Par conséquent, vous devrez peut-être placer le Roger Select derrière votre téléviseur.

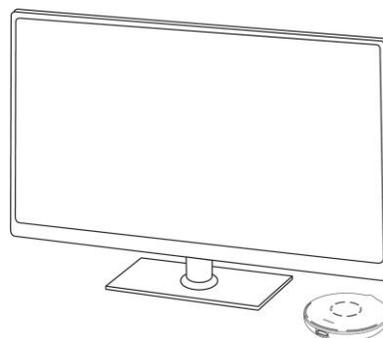

Câble analogique avec adaptateur Cinch

Pièces requises : câble d'adaptateur Cinch

Branchez le câble Cinch dans la sortie audio de votre téléviseur. Branchez le câble audio dans l'autre extrémité du câble Cinch et dans votre Roger Select.



Câble numérique avec convertisseur numérique-analogique

Pièces requises : convertisseur numérique-analogique

Branchez le câble optique dans la sortie audio numérique de votre téléviseur. Branchez l'autre extrémité du câble optique dans le convertisseur numérique-analogique. Branchez ensuite le câble audio fourni dans la prise audio de votre convertisseur numérique-analogique, puis branchez l'autre extrémité du câble dans le Roger Select. Allumez le téléviseur, le Roger Select et le convertisseur

