

Lyric



SoundLync
Guide
Rapide



MARCHE 1 bip (retirer)

VEILLE 2 bips (retirer)

ARRÊT 2 bips (maintenir)
4 bips

PHONAK

Lyric



SoundLync Guide Rapide

VOLUME

2 bips (retirer 2 secondes)

1 bip (maintenir)

L'augmentation du volume commence

1 niveau plus fort

Chaque niveau: 1 bip plus fort

Volume max: 2 bips

Important: Lyric est mis en sourdine pendant la modification du volume

03.08-12.20-0-4/12.014-0/5/1m/1Prime d/in XXXXX © Phonak AG/All rights

PHONAK