Phonak Audéo™ P



Phonak Audéo P est la gamme RIC complète destinée aux pertes auditives légères à profondes. Phonak Audéo P inclut cinq designs différents, quatre niveaux de performances et cinq écouteurs externes, notamment le nouvel écouteur ActiveVent™. Fortes des possibilités innovantes de la plateforme Phonak Paradise, les aides auditives Phonak Audéo P sont une solution pour tous les patients qui recherchent des boîtiers RIC flexibles et discrets.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.phonakpro.fr



Description des produits











| | | Audéo P-312 Audéo P-312 Trial P90/P70/P50/P30 | Audéo P-13T Audéo P-13T Trial P90/P70/P50/P30 | Audéo P-R Audéo P-R Trial P90/P70/P50/P30 | Audéo P-RT Audéo P-RT Trial P90/P70/P50/P30 | Audéo P-RL Audéo P-RL Trial P90/P70/P50/P30 |
|-----------------------------------|----------------------------|---|---|---|---|---|
| Taille de batterie | | 312 | 13 | | | |
| Bouton multifonctions | | • | • | • | • | • |
| Bobine d'induction | | | • | | • | |
| Bluetooth® | | • | • | • | • | • |
| Revêtement hydrophobe | | • | • | • | • | • |
| Indice de protection | | IP681 | IP681 | IP681 | IP681 | IP681 |
| Dimensions | LxIxP | 26,8 x 11,2 x 7,1 mm (1,05 x 0,44 x 0,28 po) | 29,0 x 11,9 x 8,1 mm (1,13 x 0,47 x 0,32 po) | 28,0 x 11,9 x 8,0 mm (1,11 x 0,47 x 0,32 po) | 30,5 x 12,5 x 8,0 mm (1,20 x 0,49 x 0,32 po) | 30,0 x 13,1 x 8,8 mm (1,18 x 0,52 x 0,35 po) |
| | Poids | 1,1 g (0,04 oz) | 1,4 g (0,05 oz) | 2,1 g (0,07 oz) | 2,4 g (0,08 oz) | 2,75 g (0,97 oz) |
| Temps de charge ² | 0 % à 100 % | | | 3 h | 3 h | 3 h |
| | 0 % à 80 % | | | 1,5 h | 1,5 h | 1,5 h |
| | 30 min d'appareillage | | | 10 min | 10 min | 10 min |
| Écouteur S | | | | | | |
| Niveau max. (dB SPL) | Coupleur 2 cm ³ | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 |
| Gain max. (dB) | Coupleur 2 cm ³ | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 |
| Bande passante (Hz) | | < 100 - > 8 000 | < 100 - > 8 000 | < 100 - > 8 000 | < 100 - > 8 000 | < 100 - > 8 000 |
| Courant de fonctionnement (mA) | | 1,4 | 1,4 | | | |
| Écouteur M | | | | | | |
| Niveau de sortie maximum (dB SPL) | Coupleur 2 cm ³ | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 |
| Gain max. (dB) | Coupleur 2 cm ³ | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 |
| Bande passante (Hz) | | < 100 - > 8 000 | < 100 - > 8 000 | < 100 - > 8 000 | < 100 - > 8 000 | < 100 - > 8 000 |
| Courant de fonctionnement (mA) | | 1,4 | 1,4 | | | |
| Écouteur MAV | | | | | | |
| Niveau de sortie maximum (dB SPL) | Coupleur 2 cm ³ | | | 119 | 119 | 119 |
| Gain max. (dB) | Coupleur 2 cm ³ | | | 50 | 50 | 50 |
| Bande passante (Hz) | | | | < 100 - > 8 000 | < 100 - > 8 000 | < 100 - > 8 000 |
| Courant de fonctionnement (mA) | | | | | | |
| Écouteur P | | | | | | |
| Niveau de sortie maximum (dB SPL) | Coupleur 2 cm ³ | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 |
| Gain max. (dB) | Coupleur 2 cm ³ | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 |
| Bande passante (Hz) | | < 100 - 6 300 | < 100 - 6 300 | < 100 - 6 300 | < 100 - 6 300 | < 100 - 6 300 |
| Courant de fonctionnement (mA) | | 1,5 | 1,5 | | | |
| Écouteur UP | | | | | | |
| Niveau max. (dB SPL) | Coupleur 2 cm ³ | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 |
| Gain max. (dB) | Coupleur 2 cm ³ | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 |
| Bande passante (Hz) | | < 100 - 6 100 | < 100 - 6 100 | < 100 - 6 100 | < 100 - 6 100 | < 100 - 6 100 |
| Courant de fonctionnement (mA) | | 1,4 | 1,4 | | | |

Couleurs des boîtiers



Dune de Sable



Beige



Santal



Noisette



Champagne





Gris Carbone



Velours Noir

¹ L'indice IP68 indique que l'aide auditive est résistante à l'eau et à la poussière. Elle n'a pas été endommagée après une immersion continue de 60 minutes dans 1 mètre d'eau fraîche et après 8 heures dans une chambre à poussière, selon la norme CEI60529.
2 La durée de charge réelle dépend de l'autonomie restante de la batterie, mais n'excédera pas 3 heures.

Niveaux de performances

| | Premium | Avancé | Standard | Essentiel | Fonctions | Premium | Avancé | Standard | Essentiel |
|---------------------------------|---------|--------|----------|-----------|----------------------------------|---------|--------|----------|-----------|
| AutoSense OS™ 4.0 | Premium | Avancé | Standard | Essentiel | UltraZoom | | • | • | • |
| Confort dans les situations | • | | | | Suppression dynamique du bruit | • | | | |
| réverbérantes | | | | | Amélioration de la parole | • | | | |
| Parole en voiture | • | | | | EchoBloc | • | | | |
| Parole dans le bruit intense | • | | | | Contrôle tactile ^{a)} | | | | |
| Musique | • | • | | | - Siri/Assistant Google | • | • | | |
| Confort dans le bruit | • | • | • | | - Mettre en pause/reprendre | • | • | | |
| Parole dans le bruit | • | • | • | • | la diffusion | | | | |
| Situation calme | • | • | • | • | - Accepter/mettre fin à un appel | • | • | | |
| Parole média + micro | • | • | • | • | téléphonique | | | | |
| Musique média + micro | • | • | • | • | StereoZoom | • | • | | |
| Programmes supplémentaires | | | | | WindBloc | • | • | | |
| Programmes supplémentaires max. | 4 | 4 | 4 | 4 | SoundRelax | • | • | | |
| Confort dans les situations | • | | | | Directivité avec capteur | • | • | • | |
| réverbérantes | | | | | de mouvements ^{a)} | | | | |
| Parole dans le bruit intense | • | • | | | DuoPhone | • | • | • | |
| Conversation à 360° | • | • | | | Real Ear Sound | • | • | • | |
| Parole dans le bruit | • | • | • | • | Réglage Roger et directivité | • | • | • | |
| Situation calme | • | • | • | • | SoundRecover2 | • | • | • | • |
| Confort dans le bruit | • | • | • | • | LarsenBloc | • | • | • | • |
| Musique | • | • | • | • | NoiseBloc | • | • | • | • |
| Téléphone acoustique | • | • | • | • | RogerDirect™ | • | • | • | • |
| Programme personnalisé | • | • | • | • | Correction de sonie | • | • | • | • |
| Programmes de diffusion | | | | | QuickSync | • | • | • | • |
| RogerDirect + micro | • | • | • | • | AOV | • | • | • | • |
| PartnerMic + micro | • | • | • | • | Tinnitus Balance | • | • | • | • |
| Appel téléphonique + micro | • | • | • | • | Auto acclimatation | • | • | • | • |
| | | | | | Balance environnementale | • | • | • | • |
| | | | | | Canaux d'adaptation fine | 20 | 20 | 16 | 12 |

a) Disponible seulement pour Phonak Audéo P-R, RT et RL

Appareillage

| | Audéo P-312 Audéo P-312 Trial | Audéo P-13T Audéo P-13T Trial | Audéo P-R Audéo P-R Trial | Audéo P-RT Audéo P-RT Trial | Audéo P-RL Audéo P-RL Trial |
|-------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Phonak Target | 7.0 ou version ultérieure | 7.0 ou version ultérieure | 7.2 ou version ultérieure | 7.2 ou version ultérieure | 7.2 ou version ultérieure |
| Noahlink Wireless | • | • | • | • | • |
| NOAHLink | | • | | | |
| HI-PRO, HI-PRO2 | | • | | | |

Le nom de marque et les logos Bluetooth® sont des marques déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de telles marques par Sonova AG est faite sous licence.

Couplage acoustique

| Longueur | Écouteur S | Écouteur M | Écouteur MAV | Écouteur P | Écouteur UP |
|---|--|-------------------------|-----------------------------------|--|--|
| Disponibles dans quatre longueurs différentes (0, 1, 2, 3), | • | • | • | • | • |
| en version gauche et droite | | | | | |
| Dôme | | | | | |
| Dôme cap | • | • | | • | |
| Dôme ouvert Disponible en trois tailles (S, M, L) | • | • | | • | |
| Dôme obturant Disponible en trois tailles (S, M, L) | • | • | | • | |
| Dôme puissant Disponible en trois tailles (S, M, L) | • | • | | • | |
| SlimTip* | | | | | |
| Acrylique | • | • | | • | |
| Silicone | • | • | | • | |
| Titane AV | | | • | | |
| Universel AV Disponible en quatre formes (A, B, C, D) | | | • | | |
| cShell | | | | | |
| Acrylique | • | • | | • | • |
| Titane | • | • | | • | • |
| Plages d'application | | | | | |
| | dB Perte auditive 10 10 20 30 40 50 60 60 90 110 1125 280 500 1000 2000 4000 81 Perte auditive légère à moyennement-sévère. | dB Perte auditive 10 | 0 125 250 500 1000 2000 4000 8000 | d8 Perte auditive 0 10 20 30 40 50 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 | dB Perte auditive 0 10 20 30 40 50 60 60 70 70 90 90 100 1125 250 500 1 000 2 000 4 000 8 000 Perte auditive moyenne à profonde. |

Écouteur ActiveVent™

Le tout nouvel écouteur ActiveVent (MAV) offre l'avantage d'un appareillage à la fois ouvert et fermé dans un seul écouteur. Il est compatible avec tous les appareils Audéo P rechargeables. Les écouteurs ActiveVent peuvent être appareillés de manière instantanée pour des démonstrations en centre auditif ou pour un essai chez le patient de courte durée, avec un SlimTip Universel AV, disponible en 4 formes standards. Un SlimTip Titanium AV sur mesure en fonction de l'oreille des patients est recommandé pour un port de longue durée, ainsi que pour garantir des performances acoustiques optimales.

Phonak Audéo P Trial™

Les aides auditives Phonak Audéo P Trial peuvent être configurées rapidement pour offrir le niveau de performances souhaité qui convient selon votre recommandation. Tous les niveaux de technologie dans une même aide auditive Phonak Audéo P Trial vous offrent de nombreuses options pour offrir une solution auditive dès le premier rendez-vous ou pour combler un besoin pendant des réparations.

^{*}Disponible avec conduit extra long en option

Options de charge de Phonak Audéo P



Phonak Écrin de Charge

Le Phonak Écrin de charge est composé d'un chargeur, d'un kit de séchage et d'une coque de protection, offrant un boîtier robuste et résistant aux éclaboussures.



Phonak Power Pack

Pour recharger les aides auditives rechargeables lorsque vous êtes en déplacement, le Phonak Power Pack peut facilement être fixé au-dessous du Phonak Écrin de Charge.



Phonak Charger Case Go et Phonak Life Charger Il existe deux options pour Audéo P-RL. Le Phonak Charger Case Go est doté d'une batterie intégrée qui peut recharger deux aides auditives jusqu'à trois fois.

Phonak Audéo P - Versions Bluetooth®

Diffusion sans fil d'appels directs / audio Technologie sans fil Bluetooth® 4.2 et la plupart des téléphones Bluetooth plus anciens

Le nom de marque et les logos Bluetooth® sont des marques déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de telles marques par Sonova AG est faite sous licence.

Gamme de communication sans fil

| | Audéo P-312 Audéo P-312 Trial P90/P70/P50/P30 | Audéo P-13T Audéo P-13T Trial P90/P70/P50/P30 | Audéo P-R Audéo P-R Trial P90/P70/P50/P30 | Audéo P-RT Audéo P-RT Trial P90/P70/P50/P30 | Audéo P-RL Audéo P-RL Trial P90/P70/P50/P30 |
|----------------------|---|---|---|---|---|
| Accessoire sans fil | | | | | |
| TV Connector | • | • | • | • | • |
| Phonak PartnerMic | • | • | • | • | • |
| Phonak RemoteControl | • | • | • | • | • |
| Roger | | | | | |
| RogerDirect™ | • | • | • | • | • |
| Applications | | | | | |
| myPhonak | • | • | • | • | • |

Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site www.phonakpro.fr/audeoparadise Pour plus d'informations sur les microphones Roger, rendez-vous sur www.phonakpro.fr/roger Pour plus d'informations sur les eSolutions, rendez-vous sur www.phonakpro.com/smartapps

life is on*

Au sein de Phonak, nous croyons que bien entendre est synonyme de bien vivre et essentiel pour vivre pleinement sa vie. Depuis plus de 70 ans, nous demeurons passionnés par la création d'un monde où « la vie s'exprime » pour tous. Nos solutions auditives novatrices sont conçues pour les personnes de tous âges, quel que soit leur degré de perte auditive, pour établir des liens sociaux, s'épanouir mentalement et émotionnellement. *Et la vie s'exprime.

www.phonak.fr



037-0802-04/VE 00/2022-01/NLG @ 2022 Sonava AG Taue draite récennée





