

Phonak CROS P

Informations produit



Phonak CROS P est une solution pour la perte auditive unilatérale conçue pour aider l'utilisateur à suivre* les conversations, peu importe d'où elles viennent**¹. CROS P se porte sur l'oreille non appareillée afin de capter les sons et de les transmettre sans fil à une aide auditive Phonak Audéo™ P portée sur l'oreille avec la meilleure audition. CROS P ne dispose d'aucune sortie acoustique.

CROS P est disponible en deux modèles et est compatible avec les aides auditives Audéo P-13T, Audéo P-R et Audéo P-RT à tous les niveaux de performances. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.phonakpro.fr



* Suivre : signifie que l'utilisateur peut participer aux conversations.

** lors de l'utilisation d'un système CROS comparé à une oreille non appareillée

¹ Stewart, E. et Woodward, J. (2021). Out of the (Head) Shadow: A Systematic Review of CROS/BiCROS Literature.

The Hearing Review, 28(8), 22-25. Disponible sur <https://www.hearingreview.com/inside-hearing/research/head>, consulté le 9 août 2021.

Description des produits

		
	CROS P-R	CROS P-13
Pile	rechargeable	taille 13
Bouton multifonctions	•	•
Balance CROS	•	•
Indice de protection	IP68 ¹	IP68 ¹
Dimensions	L x l x P 28 x 11,9 x 8 mm (1,11 x 0,47 x 0,32 po)	29 x 11,9 x 8,1 mm (1,13 x 0,47 x 0,32 po)
	Poids 2,1 g (0,07 oz)	1,4 g (0,05 oz)
Temps de charge ²	0 % à 100 %	3 h
	0 % à 80 %	1,5 h
	30 min d'appareillage	10 min
Compatibilité avec les aides auditives	Audéo P-R, Audéo P-RT	Audéo P-13T

Couleurs des boîtiers



Options d'embout

Dôme standard (tube CROS)	<ul style="list-style-type: none">• Dôme standard disponible en trois tailles (S, M, L)• Tube CROS disponible en version gauche/droite et en quatre longueurs différentes (0, 1, 2, 3)
SlimTip (tube CROS)	<ul style="list-style-type: none">• Embout sur-mesure• Tube CROS disponible en version gauche/droite et en quatre longueurs différentes (0, 1, 2, 3)
CROS Tip	<ul style="list-style-type: none">• Embout entièrement sur-mesure pour CROS, disponible en quatre longueurs différentes (0,1,2,3)

Options de chargeur de Phonak CROS P-R

CROS P-R peut être chargé en même temps qu'une aide auditive Audéo P-R ou Audéo P-RT appairée à l'aide du Phonak Écrin de Charge ou du Phonak Mini Écrin de Charge.

Pour plus d'informations, veuillez consulter les informations produit de Phonak Audéo P.

¹ L'indice IP68 indique que l'aide auditive est résistante à l'eau et à la poussière. Elle n'a pas été endommagée après une immersion continue de 60 minutes dans 1 mètre d'eau fraîche et après 8 heures dans une chambre à poussière, selon la norme CEI60529.

² La durée de charge réelle dépend de l'autonomie restante de la batterie, mais n'excédera pas 3 heures.

Appareillage

	CROS P-R	CROS P-13
Phonak Target	7.1.9 ou version ultérieure	7.1.9 ou version ultérieure
Noahlink Wireless	•	•
NOAHLink		•
HI-PRO, HI-PRO2		•

Gamme de communication sans fil

Lorsque vous utilisez des accessoires sans fil, ceux-ci se connectent à l'aide auditive de l'oreille avec la meilleure audition. Lorsqu'un accessoire émet un signal, le signal CROS s'interrompt. Ce dernier reprend dès que l'accessoire arrête d'émettre un signal. Veuillez consulter les informations produit de l'aide auditive Phonak Audéo P pour obtenir une liste complète des accessoires compatibles.

Fonctions clés

CROS P peut être appareillé à une aide auditive Audéo P de n'importe quel niveau de performances. Par conséquent, les fonctions dont bénéficie un patient portant un système CROS P dépendent principalement du niveau de performances de l'aide auditive Audéo P. Pour plus d'informations, veuillez consulter les informations produit de Phonak Audéo P.

StereoZoom

StereoZoom peut aider à améliorer l'intelligibilité vocale dans les environnements bruyants difficiles¹. StereoZoom est disponible pour les aides auditives dotées d'un niveau de performances Premium ou Avancé.

Balance CROS

La balance CROS ajuste le niveau de sonie entre l'appareil CROS et l'aide auditive.

AutoSense OS™ 4.0

AutoSense OS 4.0 détecte automatiquement et en temps réel l'environnement auditif de votre patient. Il tire parti de plusieurs fonctions et les mélange avec précision pour offrir une expérience auditive fluide.

¹ Stewart E., Rakita L. et Drexler J. (2019). StereoZoom, 1re partie : l'avantage de la directivité étroite connectée sans fil des aides auditives Phonak en termes d'intelligibilité vocale. Phonak Compendium, disponible sur www.phonakpro.fr/evidence, consulté en août 2021

Performances de CROS P

CROS P offre le programme Parole dans le bruit intense avec StereoZoom. Ce programme est disponible pour les aides auditives dotées d'un niveau de performances Premium ou Avancé. Pour les niveaux de performance Standard et Essentiel, CROS P offre les modes Real Ear Sound et microphone omnidirectionnel. Les patients appareillés avec CROS P profitent pleinement de toutes les fonctions Paradise sur leur meilleure oreille.

Niveaux de performances de l'aide auditive	Modes de microphone disponibles pour CROS P		
	StereoZoom	Real Ear Sound	Omnidirectionnel
Premium	•	•	•
Avancé	•	•	•
Standard		•	•
Essentiel			•


Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.phonakpro.fr/cros-p

Pour plus d'informations sur les aides auditives Audéo P, rendez-vous sur www.phonakpro.fr/audeoparadise

Life is on*

Chez Phonak, nous croyons que bien entendre est synonyme de bien-être et essentiel pour vivre pleinement sa vie. Depuis plus de 70 ans, nous demeurons passionnés par la création d'un monde où « la vie s'exprime » pour tous. Nos solutions auditives novatrices sont conçues pour les personnes de tous âges quel que soit leur degré de perte auditive, pour établir des liens sociaux, s'épanouir mentalement et émotionnellement. *Et la vie s'exprime !

www.phonakpro.com

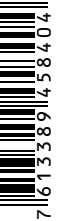

027-0622-04/V2.00/2021-09/NLG © 2021 Sonova AG Tous droits réservés