

Phonak Virto™ Paradise



Phonak Virto P est la gamme complète d'aides auditives ITE pour les pertes auditives légères à profondes. Virto P comprend quatre modèles, quatre niveaux de puissance et quatre niveaux de performances, et inclut un générateur de bruit pour la gestion des acouphènes. Dotées de la technologie innovante de la plateforme Paradise de Phonak, les aides auditives Virto P sont la solution idéale pour les patients qui souhaitent une solution sur mesure avec les meilleures performances auditives.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur <https://www.phonakpro.com/fr/fr/accueil.html>

A Sonova brand

*la vie s'exprime

PHONAK
life is on



Description des produits

	 Virto P-Titanium P90/P70	 Virto P-10 NW O P90/P70/P50/P30	 Virto P-312 NW O P90/P70/P50/P30	 Virto P-312 P90/P70/P50/P30
Niveau de puissance				
M	•	•	•	•
P	•	•	•	•
SP	•	•	•	•
UP**				•
Configuration matérielle / options / technologie				
Taille de pile	10	10	312	312
Bouton-poussoir (programme/volume)	En option	En option	En option	•
EasyPhone (pour téléphone acoustique)	En option	•	•	
MiniControl (pour le changement de volume ou de programme)	•	•		
Contrôle du volume (rotatif)		En option	En option	En option
Bobine d'induction	En option	En option	En option	
Technologie microphonique	Omni	Omni	Omni	Directionnel
Indice IP (sans CV)	IP68 ¹	IP68 ¹		
Bluetooth®				•
Technologie binaurale VoiceStream				•

Couleurs

Couleurs de la faceplate

Titanium uniquement :
Couleur de la coque gris titane et couleurs de la faceplate



26
Rose



22
Cocoa



28
Marron



06
Noir



26
Rose



22
Cocoa



06
Noir

Couleurs de coques en acrylique



21
Transparent



26
Rose



22
Cocoa



28
Marron



06
Noir



R
Rouge transparent



B
Bleu transparent

Styles de coque

	 Virto P-Titanium	 Virto P-10 NW O	 Virto P-312 NW O	 Virto P-312
Invisible dans le conduit (IIC)	•	•		
Complètement dans le conduit (CIC)	•	•		
Mini-conduit (MC)		•	•	
Dans le conduit (ITC)		•	•	
Demi-conque (HS)		•	•	•
Intra-conque (FS)		•	•	•

Niveaux de performances

	Premium P90	Avancé P70	Standard P50	Essentiel P30	Fonctions	Premium P90	Avancé P70	Standard P50	Essentiel P30
AutoSense OS [®] 4.0					UltraZoom	Premium	Avancé	Standard	Essentiel
Parole dans le bruit intense*	•				Suppression dynamique du bruit	•			
Parole en voiture	•				Renforcement de la parole	•			
Confort en cas d'écho	•				EchoBloc	•			
Musique	•	•			WindBloc	•	•		
Confort dans le bruit	•	•	•		SoundRelax	•	•		
Parole dans le bruit	•	•	•	•	DuoPhone	•	•	•	
Situation calme	•	•	•	•	Roger et réglage directionnel*	•	•	•	
Parole média + micro*	•	•	•	•	SoundRecover2	•	•	•	•
Musique média + micro*	•	•	•	•	Correction de sonie	•	•	•	•
Programmes supplémentaires					LarsenBloc	•	•	•	•
Programmes supplémentaires max.	4	4	4	4	NoiseBloc	•	•	•	•
Confort en cas d'écho	•				QuickSync*	•	•	•	•
Parole dans le bruit intense*	•	•			Évent acoustiquement optimisé	•	•	•	•
Parole à 360°*	•	•			Tinnitus Balance	•	•	•	•
Parole dans le bruit	•	•	•	•	Auto acclimatation	•	•	•	•
Situation calme	•	•	•	•	Balance environnementale	•	•	•	•
Confort dans le bruit	•	•	•	•	RogerDirect*	•	•	•	•
Musique	•	•	•	•	Canaux d'adaptation fine	20	20	16	12
Téléphone acoustique	•	•	•	•					
Programme personnalisé	•	•	•	•					
Programmes de diffusion									
RogerDirect + micro*	•	•	•	•					
PartnerMic + micro*	•	•	•	•					
Appel téléphonique + micro*	•	•	•	•					

Appareillage

Logiciel	Phonak Target 7.3 ou supérieur
Interfaces	Noahlink Wireless, câble de programmation, HI-PRO, HI-PRO2

* Seulement pour Virto P-312
** Disponible uniquement dans certains pays
1. IP68 L'indice IP68 indique que l'aide auditive est résistante à l'eau et à la poussière. Elle n'a pas été endommagée après une immersion continue de 60 minutes dans 1 mètre d'eau et après 8 heures dans une chambre à poussière, selon la norme CEI 60529.


La marque et les logos Bluetooth[®] sont des marques déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc.
IOS est une marque de commerce de Cisco, Inc.
Android est une marque de commerce de Google, Inc.

Couplage acoustique


Niveau de puissance

		M	P	SP	UP**
Niveau de sortie maximum (dB SPL)	Coupleur 2 cm ³	109	115	119	127
Gain maximum (dB)	Coupleur 2 cm ³	40	50	60	70
Bande passante (Hz)	Coupleur 2 cm ³	<100 - 7 000	<100 - 6 700	<100 - 7 000	<100 - 5 200
Courant de fonctionnement (mA)	Non doté de la transmission sans fil	1,1	1,2	1,1	
	Transmission sans fil	1,7	1,8	1,7	1,7


Plage d'application

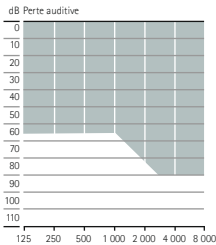


Pertes auditives légères à moyennes, toutes configurations audiométriques

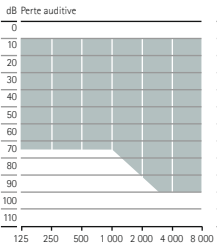

Pertes auditives légères à moyennement sévères, toutes configurations audiométriques

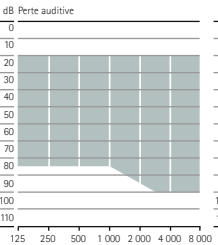

Pertes auditives moyennes à sévères, toutes configurations audiométriques

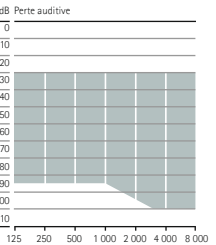

Pertes auditives moyennes à profondes, toutes configurations audiométriques

Gamme de communication sans fil

	Virto P-Titanium P90/P70	Virto P-10 NW O P90/P70/P50/P30	Virto P-312 NW O P90/P70/P50/P30	Virto P-312 P90/P70/P50/P30
Accessoire sans fil				
TV Connector				•
Phonak PartnerMic				•
Phonak RemoteControl				•
Roger				
RogerDirect™				•
Applications				
myPhonak				•

Pour plus d'informations sur Virto Paradise, rendez-vous sur www.phonakpro.com/virtoparadise

Pour plus d'informations sur les microphones Roger, rendez-vous sur <https://www.phonakpro.com/fr/fr/about-phonak/technologies/roger-wireless.html>

Pour plus d'informations sur les applications Phonak, rendez-vous sur

<https://www.phonakpro.com/fr/fr/esolutions/solutions/overview.html?r=http%3A%2F%2Fwww.phonakpro.fr%2Fsmartapps>

Et la vie s'exprime

Au sein de Phonak, nous croyons que bien entendre est synonyme de bien vivre et essentiel pour vivre pleinement sa vie. Depuis plus de 70 ans, nous demeurons passionnés par la création d'un monde où « la vie s'exprime » pour tous. Nos solutions auditives novatrices sont conçues pour les personnes de tous âges, quel que soit leur degré de perte auditive, pour établir des liens sociaux, s'épanouir mentalement et grandir émotionnellement.

www.phonakpro.fr

