

Phonak

Target 11

Guide d'utilisation pour Target/ALPS



Phonak Target/ALPS vous permet de synchroniser directement des données depuis Phonak Target vers ALPS. Ce procédé évite la double saisie des informations et facilite la gestion de l'ensemble des souscriptions et réglages Lyric.

Pour utiliser cette synchronisation, l'ordinateur sur lequel vous effectuez vos réglages doit disposer d'une connexion internet.

Après l'installation de Phonak Target, les nouvelles fonctionnalités seront activées automatiquement. Pour chaque réglage Lyric, vous serez automatiquement connecté à ALPS. Un assistant vous guidera à travers toutes les étapes nécessaires.

Plus d'informations sont également disponibles dans [Aide Internet].


Contenu

Créer un nouveau patient dans Phonak Target/ALPS	2
Accéder aux réglages et aux données ALPS d'un patient	6
Remplacer un appareil (incl. l'observation du conduit auditif)	7
Cas touriste: Insertion d'un nouvel appareil dans votre centre	10
Cas touriste: Un de vos clients a renouvelé son appareillage dans un centre agréé Lyric	11
Renouvellement automatique de la souscription	12
Annuler une souscription active	13
Synchroniser des modifications effectuées hors connexion	14
Trouver les raccourcis vers ALPS	16
Activer l'historique détaillé pour l'assistance	20
Information et description des symboles et de la configuration requise du système	20

Créer un nouveau patient dans Phonak Target/ALPS

Pour créer un nouveau patient dans Phonak Target et insérer un appareil Lyric de votre stock :

1. Allez dans [Appareils] puis [Aides auditives] pour sélectionner un appareil Lyric
2. Allez dans [Configuration Lyric] et cliquez sur [Sélectionner un appareil] pour ouvrir le portail de connexion Phonak Target/ALPS.

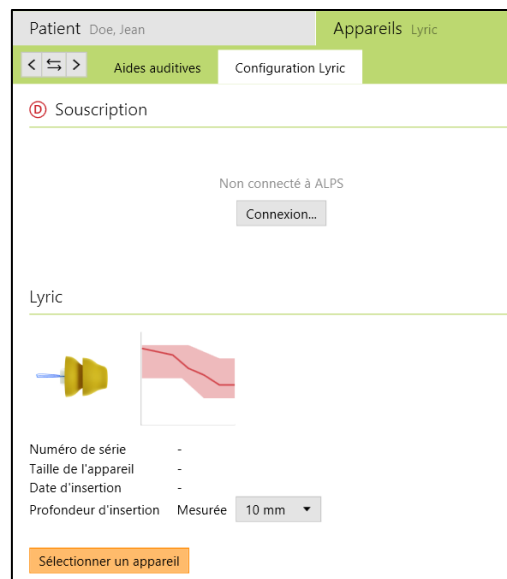

La couleur du bouton ALPS indique le statut de connexion:


- Vert - connecté
- Noir – déconnecté




Connectez-vous à votre compte Lyric grâce à vos identifiants.

Nous recommandons de cocher la case [Connexion automatique]. Ainsi, vous serez toujours connectés à votre compte sans avoir besoin d'entrer à nouveau vos identifiants et/ou de confirmer la connexion, offrant ainsi un gain de temps appréciable.


En cas d'oubli de votre mot de passe, vous avez la possibilité de cliquer sur le lien [Oublié] puis de le changer sur www.phonakpro.com directement.

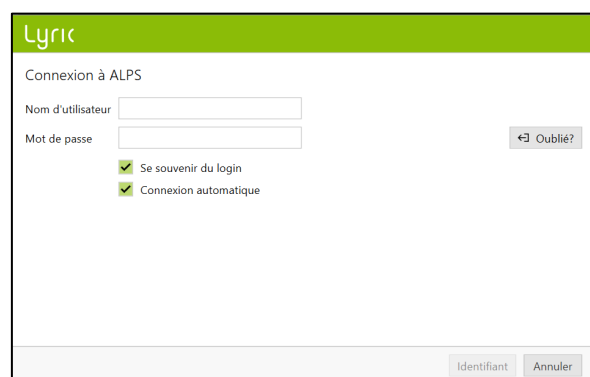

Vous êtes maintenant invité à sélectionner [Ajouter le patient actuel à votre compte ALPS]. Les identifiants de votre compte sont visibles sur l'écran, ce qui est pratique pour les audioprothésistes travaillant avec plusieurs comptes.

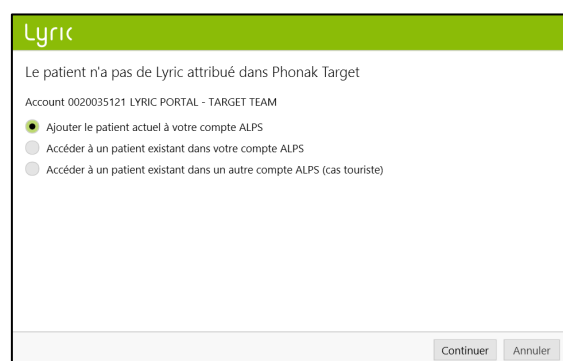

Si vous souhaitez travailler depuis un autre compte ALPS, choisissez la fonction [Changer de login...] sous le bouton ALPS et connectez-vous avec l'identifiant souhaité.

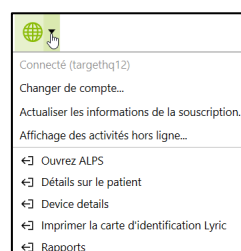

Vous avez la possibilité de contrôler et de corriger les données du client, telles que son prénom, nom, date de naissance et genre, enregistrés dans Phonak Target.

Les informations complémentaires (date de naissance et genre) sont facultatives. Si vous ne souhaitez pas transmettre ces données, décocher la ligne [Fournir des renseignements additionnels].

Il vous est ensuite demandé de confirmer que le client accepte que ses données soient transférées à Sonova à des fins de traitement. Si la case n'est pas cochée, le réglage ne peut pas continuer.

Lyric

Saisir le données patient

Prénom

Nom

Date de naissance: 01.01.1948

Genre: -

☒ Fournir des renseignements additionnels

☒ Je confirme par la présente que j'ai pleinement informé mon client que ses données personnelles seront transférées au fabricant de l'aide auditive à des fins de traitement. Mon client a consenti à un tel transfert.

Créer un identifiant Lyric Annuler

Sélectionnez le modèle Lyric voulu ainsi que sa taille et choisissez l'appareil que vous souhaitez utiliser. Privilégiez l'appareil avec la date d'expiration la plus proche. Les appareils sur le point d'expirer dans les 30 jours sont marqués en rouge

Veuillez noter que les appareils dont la date d'expiration est dépassée ne sont plus utilisables. Utilisez le [Retour d'appareils] dans ALPS, sélectionnez le numéro de série et le motif d'expiration et envoyez le à Phonak.

Lyric

Ⓛ Sélectionner un appareil Lyric dans votre stock dépôt

Taille de corolle de l'appareil: XXL

Q N° de série Date d'insertion: 14.03.2023

N° de série	Modèle	Taille de l'appareil	XXL	Mis en place..
2307NYSEH	Lyric4	XXL		30.03.2023
2307NYSEK	Lyric4	XXL		05.04.2023
2307NYSEL	Lyric4	XXL		05.04.2023
2307NYSEJ	Lyric4	XXL		09.04.2023
2307NYSF2	Lyric4	XXL		13.04.2023
2307NYSEP	Lyric4	XXL		17.02.2024
2307NYSEW	Lyric4	XXL		17.02.2024
2307NYSEV	Lyric4	XXL		17.02.2024
2307NYSEU	Lyric4	XXL		17.02.2024

Sélectionner Annuler

Sélectionnez la profondeur d'insertion mesurée.

Lyric

Ⓛ Sélectionnez la profondeur d'insertion mesurée

Insertion initiale d'un appareil dans cette oreille.

- 3 mm
- 4 mm
- 5 mm
- 6 mm
- 7 mm
- 8 mm
- 9 mm
- 10 mm
- 11 mm
- 12 mm
- 13 mm
- 14 mm
- 15 mm

Continuer Annuler

Sélectionnez la durée de souscription choisie pour votre patient. Assurez-vous de choisir l'option si votre client désire porter Lyric pour traiter les acouphènes.

Lyric

Ⓛ Sélectionner les données de la souscription

Durée de la souscription:

Modalité de paiement:

Date de début:

☒ Lyric est utilisé pour la prise en charge des acouphènes

Continuer Annuler

Phonak Target confirme la sélection de l'appareil. Vous pouvez visualiser des [Informations supplémentaires] sur la souscription ou [Fermer] la fenêtre. Dans le cas d'une adaptation binaurale, vous êtes invité à [Passer à l'autre côté], ce qui vous permet de choisir directement un autre appareil de votre stock.

Lyric

Informations sur les souscriptions du patient

Prénom: John
Nom: Doe
Identifiant Lyric: P000087951

Information	Droit	Gauche
Souscription	En essai (30 jours restant)	Pas de souscription
Date de début	04.08.2014	
Date de fin		
Appareils restants		
Périphérique	Lyric3	
Numéro de série	1406NY236	

Passer à l'autre côté Fermer

Sous la date de début et la date de fin de souscription, vous trouverez la date de fin de l'essai ainsi que le nombre d'appareils restants. Il est maintenant possible de prolonger l'essai de 10 jours supplémentaires. La nouvelle date de fin d'essai sera alors visible dans Target/ALPS.

Souscription 2000509767

Statut Période d'essai (30 jours restants) Annuler l'essai

Date de début 04.05.2020 Prolonger l'essai

Date de fin C*

Date de fin de l'essai 03.06.2020 Renouveler la souscription

Appareils restants C* Lien ALPS ▼

Lyric4

Numéro de série 2016NY5EX (Code: F3A6)

Taille de l'appareil XXS

Date d'insertion Aujourd'hui

Profondeur d'insertion Mesurée 4 mm ▼

Remplacer / retirer l'appareil

Si vous avez entré un faux numéro de série par erreur, vous pouvez le remettre dans votre stock en cliquant sur « Retourner au stock ».

Serial number 2016NY3EG (Code: E396)

Seal size XL

Insertion date 04.05.2020

Insertion depth Measured 7 mm ▼

Exchange/remove device Return device to stock

Vous avez la possibilité d'afficher le Gain (oreille réelle et coupleur 0.4cc) ou le Niveau de sortie (SPL oreille réelle et le coupleur 0.4cc) lors du réglage des appareils Lyric. Cliquez [Sortie] ou [Gain] dans le menu pour sélectionner l'affichage de la courbe désirée. Lors de la sélection de l'affichage du niveau de sortie, vous pouvez également choisir d'afficher ou de masquer le seuil d'audition et l'UCL.

Gain - 0.4cc ▼

☒ Gain

0.4cc ▼

☐ Sortie

Sortie - coupleur 0.4cc - Coupler 0.4cc ▼

☐ Gain - coupleur 0.4cc

☒ Sortie - coupleur 0.4cc

Coupler 0.4cc ▼

☒ Afficher le niveau auditif et l'inconfort

Si la profondeur d'insertion atteinte diffère de celle mesurée, une profondeur d'insertion mesurée et une profondeur d'insertion atteinte peuvent être saisies dans l'onglet [Appareillage]. Un message d'avertissement s'affichera si la profondeur d'insertion atteinte est supérieure à celle mesurée.

PROFONDEUR D'INSERTION Atteinte 11 mm ▼

VOL. MIN. -2 ▼


VOLUME 7 ▼

Validation de la profondeur d'insertion


La profondeur d'insertion atteinte est plus grande que la profondeur d'insertion mesurée.

→ Configuration Lyric


Sélectionnez [Enregistrer dans la base de données] pour synchroniser les réglages dans ALPS à la fin de la session.

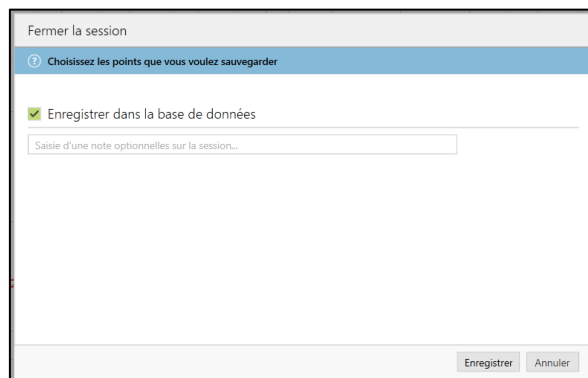


Si vous désirez écrire plus de notes dans le dossier patient, une nouvelle section de notes est disponible.

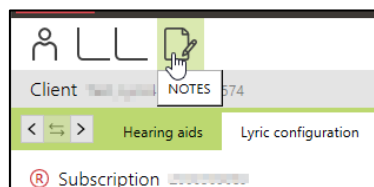

Une nouvelle note pour être ajoutée. Vous pouvez également choisir «Note visible (au prochain rendez-vous)» pour que cette note apparaisse lors du prochain rendez-vous.

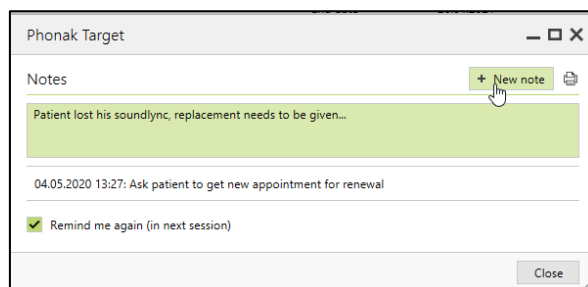

Toutes les notes sont visible sous [Client, notes].

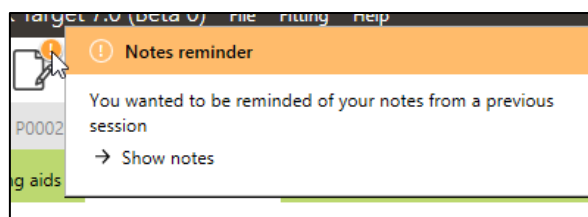

Les rapports suivants peuvent être imprimés à partir du menu [Fichier], [Imprimer les rapports...], puis [Professionnel] :

- Rapport d'appareillage
- Fiche technique

[Patient]:

- Instructions de l'aide auditive
- Conseils et stratégies de communication
- Journal d'observations
- Guide sur la perte



Accéder aux réglages et aux données ALPS d’un patient

Si le client existe dans ALPS mais pas dans Target (ou dans le cas d’un premier réglage dans un laboratoire secondaire), choisissez [Accéder à un client existant dans votre compte ALPS].

Après avoir créé un patient dans Noah, les données seront transférées dans Phonak Target. Continuez jusqu’à atteindre l’écran où vous êtes invité à ajouter ou à accéder à un patient existant.

Saisissez l’identifiant Lyric de votre patient ainsi que son nom et prénom.

Pour accéder à l’identifiant Lyric ID de votre patient, vous pouvez vous connecter au portail ALPS ou l’obtenir à partir de la carte d’identification Lyric de votre patient.

L’identifiant Lyric ne vous est demandé que lors de la première connexion à partir de Target. Lors de l’ouverture d’une session, vous serez automatiquement connecté aux données ALPS.

Si le patient a été identifié par ALPS, l’écran affichera les données actualisées.

Lyric

Le patient actuel n'a pas d'identifiant Lyric dans Phonak Target. Comment voulez-vous procéder?

☐ Ajouter le client actuel à votre compte ALPS

☒ Accéder à un client existant dans votre compte ALPS

☐ Accéder à un client existant dans un autre compte ALPS (cas touriste)

Continuer

Annuler

Lyric

Patient Lyric

Prénom: John

Nom: Doe

Identifiant Lyric: P000087951

Date de naissance: 01.02.1949

Sexe: Masculin

Chercher

☒ Inclure la date de naissance et le sexe

Continuer

Annuler

Lyric

Informations sur les souscriptions du patient

Prénom: John

Nom: Doe

Identifiant Lyric: P000087951

Information	 Droit	 Gauche
Souscription	En essai  (30 jours restant)	En essai  (30 jours restant)
Date de début	04.08.2014	04.08.2014
Date de fin	03.08.2015	03.08.2015
Appareils restants	6	6
Périphérique	Lyric3	Lyric3
Numéro de série	1406NY24G	1406NY237

Continuer

Annuler

Remplacer un appareil (incl. l’observation du conduit auditif)

Pour remplacer un appareil Lyric, connectez-vous à Phonak Target, sélectionnez [Appareils], [Configuration Lyric] et cliquez sur [Remplacer / retirer l’appareil].

Patient Doe, Jean P000168650

Appareils Lyric (L | -)

Aides auditives

Configuration Lyric

Souscription

Statut

En essai (30 jours restants)

Date de début

22.11.2017

Date de fin

Date de fin de l'essai

22.12.2017

Date de facturation

Appareils restants

Annuler l'essai

Renouveler la souscription

Lien ALPS

Lyric3

Numéro de série

1736NYLUH (Code: E376)

Taille de l'appareil

L

Date d'insertion

Aujourd'hui

Profondeur d'insertion

Mesurée 9 mm

Remplacer / retirer l'appareil

Sélectionnez si l’aide auditive a été retirée par l’audioprothésiste ou par le patient et précisez la date de retrait si elle diffère de la date d’aujourd’hui. Sélectionnez la raison du retrait, raisons qui sont groupées selon quatre catégories (Inconfort, Relatif à l’appareil, Relatif à l’appareillage, Retrait anticipé et Souscription annulée).

Lyric

Retirer l'appareil Lyric

Numéro de série

1849NV3G3

Retiré par

☒ Audioprothésiste

☐ Patient lui-même

Date du retrait

☒ Aujourd'hui

☐ Auparavant

Raison du retrait

-- sélectionner --

Inconfort

Relatif à l'appareil

Relatif à l'appareillage

Retrait anticipé

Cancelled subscription

Enlever

Annuler

Le survol d’une catégorie fait apparaitre une info-bulle avec plus de détails pour vous aider à choisir correctement la raison du retrait.

Lyric

Retirer l'appareil Lyric

Numéro de série

1849NV3G3

Retiré par

☒ Audioprothésiste

☐ Patient lui-même

Date du retrait

☒ Aujourd'hui

☐ Auparavant

Raison du retrait

-- sélectionner --

Inconfort

Relatif à l'appareil

Relatif à l'appareillage

Retrait anticipé

Cancelled subscription

L'appareil est devenu faible

Pas de réponse / réponse intermittente au s

Artifact sonore

Cycle de l'appareil / Remplacement de l'inducteur

Son statique ou autres sons anormaux

Appareil défectueux

Enlever

Annuler

Phonak Target vous demandera alors de décrire l'état du conduit auditif observé : [OK pour réinsertion immédiate], [OK pour réinsertion après repos] ou [Avis médical nécessaire]. Si vous sélectionnez [OK pour réinsertion immédiate], l'échange de l'appareil peut se faire immédiatement. Si le conduit auditif est irrité et nécessite du repos avant réinsertion ou même un avis médical, le système vous alertera*. Les commentaires concernant la raison du retrait et l'observation du conduit auditif sont tous deux facultatifs.

Dans le cas [Avis médical nécessaire], des détails supplémentaires à propos de l'état du conduit auditif seront demandés.

Si l'autre appareil doit aussi être retiré, cliquez sur [Passer à l'autre côté]. Certaines raisons (retrait planifié, appareil proche de sa fin de vie et retrait anticipé par l'audioprothésiste) seront partagées par défaut sur l'autre côté. Elles seront néanmoins modifiables si les 2 appareils ne sont pas retirés pour les mêmes raisons.

* Si vous avez choisi [OK pour réinsertion après repos] ou [Avis médical nécessaire], Phonak Target vous informera sur la page d'accueil du logiciel.

Lyric

Retirer l'appareil Lyric

Numéro de série

1633H00L1

Retiré par

☒ Audioprothésiste

☐ Patient lui-même

Date du retrait

☐ Aujourd'hui

☒ Auparavant

10.11.2016

Raison du retrait

Inconfort

Détails supplémentaires (optionnel)...

Observation du conduit auditif

-- sélectionner --

OK pour réinsertion immédiate

OK pour réinsertion après repos

Avis médical nécessaire

Enlever

Annuler

Lyric

Retirer l'appareil Lyric

Numéro de série

1849NY3G3

Retiré par

☒ Audioprothésiste

☐ Patient lui-même

Date du retrait

☒ Aujourd'hui

☐ Auparavant

Raison du retrait

Occlusion

Détails supplémentaires (optionnel)...

Observation du conduit auditif

Avis médical nécessaire

Détails supplémentaires

-- sélectionner --

Rougeur des tissus

Fluide en excès sur la peau

Poche de sang coagulé sous les tissus (hématome)

Plaie ou ulcération des tissus

Renflement medial / excroissance

Sang / saignement

Gestion du cérumen

Other reason

Annuler

Lyric

Appareil retiré avec succès

Imprimer le bon de retour

Passer à l'autre côté

Fermer

Sélectionner un appareil

OK pour réinsertion après repos (04.08.2014)

Avant de valider l'échange de l'appareil, il est obligatoire de confirmer que le conduit auditif est [OK pour une réinsertion immédiate].

Après avoir confirmé que l'oreille est OK pour une réinsertion immédiate, choisissez un nouvel appareil Lyric.

N° de série	Modèle	Lyric3	Taille de la corolle	XS	Mis en place...
1406NY24E	Lyric3		XS		
1406NY23X	Lyric3		XS		
1406NY23R	Lyric3		XS		
1406NY24H	Lyric3		XS		
1406NY24M	Lyric3		XS		
1406NY24K	Lyric3		XS		
1406NY24J	Lyric3		XS		
1406NY233	Lyric3		XS		
1406NY232	Lyric3		XS		

Les commentaires que vous aurez éventuellement saisis seront enregistrés dans l'onglet [Patient] puis [Détails] rubrique [Notes].

Notes

Saisir une nouvelle note de session...

04.08.2014 15:26: ECO Droit: OK pour réinsertion immédiate.

04.08.2014 15:23: ECO Droit: OK pour réinsertion après repos.

ECO Droit: OK pour réinsertion après repos.

Observation du conduit auditif après retrait de l'appareil.

Le conduit auditif est légèrement irrité.

Veuillez noter que si l'appareil est porté depuis plus de 30 jours, le [Remplacement rapide] est activé et affiche les valeurs par défaut:

- L'appareil est retiré par l'audioprothésiste
- L'appareil est retiré aujourd'hui
- Le retrait est un retrait planifié
- Le conduit auditif est «correct pour une pose immédiate»


Cliquez sur [Supprimer], puis choisissez un nouvel appareil en conséquence.
Si les critères ne correspondent pas à la valeur par défaut, modifiez-les et continuez.

Cas touriste: Insertion d'un nouvel appareil dans votre centre


Dans le cas où vous souhaitez insérer Lyric à un patient initialement appareillé par un autre partenaire agréé Lyric, vous devez avoir accès à ses données d'appareillage (autre compte ALPS). Pour cela, vous avez besoin de l'identifiant Lyric du client.

Pour commencer, procédez comme pour un nouveau client, jusqu'à ce que Target vous demande d'identifier le client. Sélectionnez [Accéder à un client existant dans un autre compte ALPS (cas touriste)].

Saisissez l'identifiant Lyric du patient, et vérifiez que le nom s'affiche correctement comme indiqué sur la carte d'identification Lyric (en respectant majuscule, minuscule et espace). Procédez au remplacement de l'appareil et, si nécessaire, adaptez les paramètres d'appareillage.

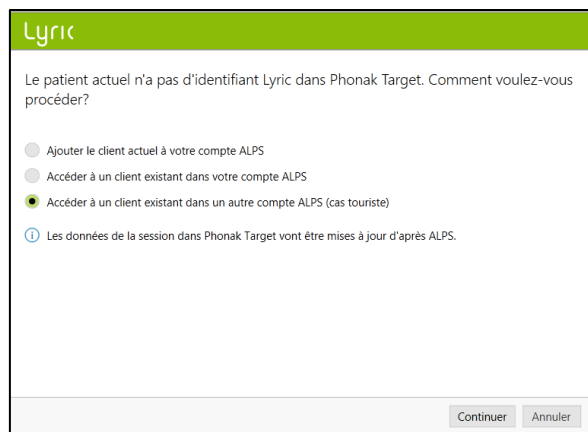

The screenshot shows the Lyric application interface. At the top, there is a green header with the word "Lyric". Below the header, a message states: "Le patient actuel n'a pas d'identifiant Lyric dans Phonak Target. Comment voulez-vous procéder?". There are three radio button options: "Ajouter le client actuel à votre compte ALPS", "Accéder à un client existant dans votre compte ALPS", and "Accéder à un client existant dans un autre compte ALPS (cas touriste)". The third option is selected. Below the options, there is a blue information icon and a note: "Les données de la session dans Phonak Target vont être mises à jour d'après ALPS." At the bottom right, there are two buttons: "Continuer" and "Annuler".

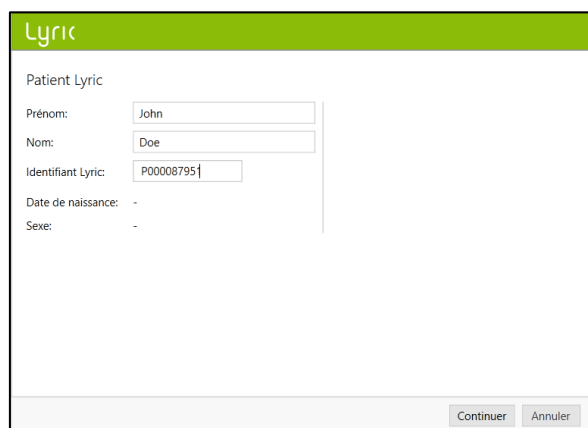

The screenshot shows the Lyric application interface for patient identification. At the top, there is a green header with the word "Lyric". Below the header, the title "Patient Lyric" is displayed. There are four input fields: "Prénom:" with the value "John", "Nom:" with the value "Doe", "Identifiant Lyric:" with the value "P000087951", and "Date de naissance:" and "Sexe:" both with a hyphen "-" as a placeholder. At the bottom right, there are two buttons: "Continuer" and "Annuler".

Cas touriste: Un de vos clients a renouvelé son appareillage dans un centre agréé Lyric

Lorsque vous saisissez le nom du client, un message d'information vous indique un conflit de données entre ALPS (Adaptation d'un autre centre agréé Lyric) et Phonak Target (votre session d'appareillage). Le message indique que le numéro de série a été modifié.

Cliquez sur [Continuer] pour mettre à jour le système avec le dernier numéro de série adapté.

Lyric

Conflit de données entre ALPS et Phonak Target

Prénom: John

Nom: Doe

Identifiant Lyric: P000087951

Les données de l'appareil dans ALPS et dans Phonak Target ne correspondent pas:

Information

Droit

Gauche

Souscription

En essai (30 jours restant)

En essai (30 jours restant)

ALPS

1349NY427

Pas de N° de série

Phonak Target

1406NY24E

1406NY237

Action

Le numéro de série va être actualisé dans Phonak Target

Le numéro de série va être actualisé dans Phonak Target

Pressez sur "Annuler" pour résoudre manuellement les conflits.

Continuer

Annuler

Dans le cas où l'audioprothésiste a également modifié les paramètres d'appareillage, un message d'avertissement s'affiche. Vous pouvez résoudre le conflit en choisissant l'option désirée.

Veuillez noter que les données ALPS sont les informations dernièrement mises à jour par le centre agréé Lyric qui a procédé au remplacement de l'appareil de votre client. Les données Phonak Target correspondent à vos propres données.

Lyric

Incompatibilité des paramètres d'appareillage!

Les paramètres d'appareillage enregistrés dans ALPS et dans Phonak Target ne correspondent pas.

Droit

Gauche

Résoudre le conflit:

Les paramètres d'appareillage sont identiques

Utiliser les données de Phonak Target

Dernière mise à jour: 04.08.2014 15:26

Utiliser les données ALPS (le plus récent)

Dernière mise à jour: 04.08.2014 15:58

Mise à jour par l'audioprothésiste vu en dépl...

Le conflit sera résolu en cliquant sur "Continuer". Cliquez sur "Annuler" pour résoudre le conflit manuellement.

Continuer

Annuler

Renouvellement automatique de la souscription

Deux mois avant la date d'expiration de la souscription, vous recevrez un rappel dans Target/ALPS qui vous informera de la date du renouvellement automatique. Lorsque la date est atteinte, le renouvellement est alors effectué de façon automatique pour une année supplémentaire.

Au cas où cela ne serait pas souhaité par le client, vous disposez des choix suivants :

1. Renouveler la souscription de façon manuelle et choisir un autre type de paiement ou une autre durée de souscription (uniquement valable en France)
2. Annuler le renouvellement de la souscription.

Cancel auto renewal

Annuler la souscription

Renouveler la souscription

Lien ALPS

Automatic renewal

Be aware that the subscription is due for auto renewal as soon as the end date is reached. The renewal will be for a 1 year period with yearly payment. Any other changes to the contract will need manual adjustment by clicking on "Renew subscription".

If no renewal is requested by the customer, click "Cancel auto renewal" before expiration date of the contract.

Cancel auto renewal

Annuler la souscription

Renouveler la souscription

Lien ALPS

Lyric

Renew current subscription

Current status Active (17 days left)

End date 06.12.2019

New subscription

Subscription type 1-year subscription

Payment type --select--

Yearly upfront

Monthly upfront

Continue Cancel

Au cas où le client ne souhaite pas renouveler sa souscription, il vous est demandé d'entrer la raison du non renouvellement lorsque vous annulez la souscription subséquente.

Une souscription renouvelée est active par défaut, sans période d'essai.

Lyric

Cancel automatic subscription renewal

Current status Active (17 days left)

End date 06.12.2019

Cancellation reason --select--

Likes Lyric but too expensive

Discomfort

Medical reasons or ear health issue

Early device removal

Feedback

Sound quality issues

Occlusion

Needs more power/gain

Prefers self-insertion/removal

Continue Cancel

Annuler une souscription active

S'il était nécessaire d'annuler une souscription active (pour des raisons médicales), cliquez sur [Annuler la souscription] dans l'onglet [Configuration Lyric].

Pour confirmer la demande d'annulation, choisissez le motif d'annulation et cliquez sur [Continuer]. La demande d'annulation sera envoyée à votre service client Phonak.

Veuillez noter que de nouvelles raisons d'annulation ont été ajoutées : [Patient décédé] et [Patient incommodé par les échanges].

Patient: Doe John

Appareils: Lyric

Aides auditives Configuration Lyric

Souscription

Statut: actif

Date de début: 04.08.2014

Date de fin: 03.08.2015

Date de fin de l'essai: 04.08.2014

Appareils restants: 0

Annuler la souscription

Renouveler la souscription

Lien ALPS

Lyric

Annuler la souscription actuelle

Statut actuel: En essai (29 jours restants)

Date de fin: 08.11.2017

Date de fin de l'essai: 09.12.2016

Raison de l'annulation: -- sélectionner --

- Aime Lyric, mais le trouve trop cher
- Préfère insérer / retirer lui-même
- Patient incommodé par les échanges
- Inconfort
- Apparence du conduit auditif
- Intelligibilité vocale
- Larsen
- Occlusion
- Pannes précoces de l'appareil
- Qualité sonore
- Migration
- Patient décédé

Continuer Annuler

Synchroniser des modifications effectuées hors connexion

Il existe des situations (comme une absence de connexion internet temporaire ou un problème informatique), où vous devez travailler hors connexion. Cela signifie que les nouvelles données de Phonak Target ne sont pas synchronisées avec ALPS.

Le retrait d'un appareil Lyric hors connexion fonctionne de la même manière que le retrait du dispositif lorsque vous êtes connectés avec ALPS.

Vous êtes maintenant invité à [Insérer un nouvel appareil] Lyric. Entrez le numéro de série ainsi que le code visible sur l'emballage Lyric. Puis, entrez la profondeur d'insertion mesurée. Si nécessaire, les paramètres d'ajustement peuvent être changés.

Configuration Lyric

Retirer l'appareil Lyric

Numéro de série

1633H00L1

Retiré par

☒ Audioprothésiste

☐ Patient lui-même

Date du retrait

☐ Aujourd'hui

☒ Auparavant

10.11.2016

Raison du retrait

Inconfort

Détails supplémentaires (optionnel)...

Observation du conduit auditif

OK pour réinsertion immédiate

Observation supplémentaire du conduit auditif (optionnel)...

Pas de connexion à ALPS. Toutes les modifications seront synchronisées ultérieurement.

Enlever

Annuler

Configuration Lyric

Saisir les informations sur l'appareil

Numéro de série

1633H00KR

Code

E396

Modèle

Lyric3

Taille de l'appareil

XL

Pas de connexion à ALPS. Toutes les modifications seront synchronisées ultérieurement.



Sélectionner

Annuler

Dès que Phonak Target est reconnecté à ALPS, les réglages hors connexion sont automatiquement synchronisés dans ALPS.

Vous êtes informés de la réussite de la synchronisation.

Après un réglage hors ligne, des fichiers log sont disponibles sur votre ordinateur.

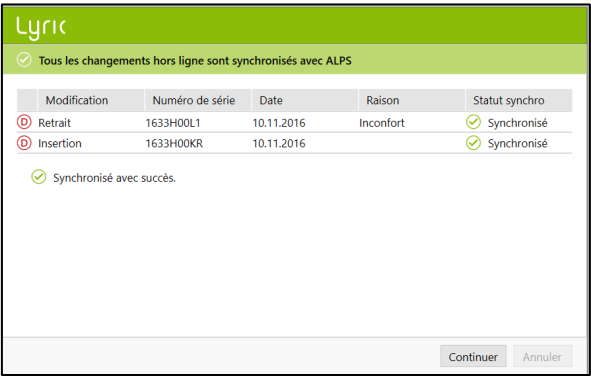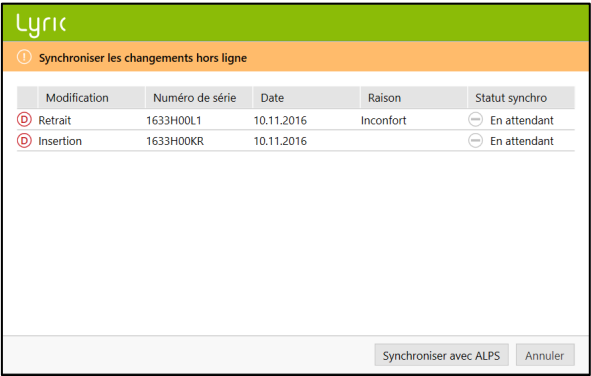


Trouver les raccourcis vers ALPS

Certaines actions doivent être réalisées dans ALPS :


- Ouvrez ALPS
- Détails sur le patient
- Détails sur l'appareillage
- Imprimer la carte d'identification Lyric
- Rapports

Alternativement, ALPS peut également être ouvert via Phonakpro.com.

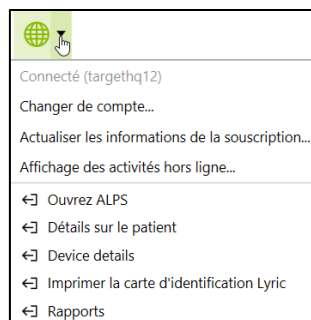

Sur la [page d'accueil] vous avez un aperçu de :

- Audit de l'inventaire
- Essais à expiration -7 jours
- Souscriptions à expiration – 90 jours
- Appareils à expiration -120 jours

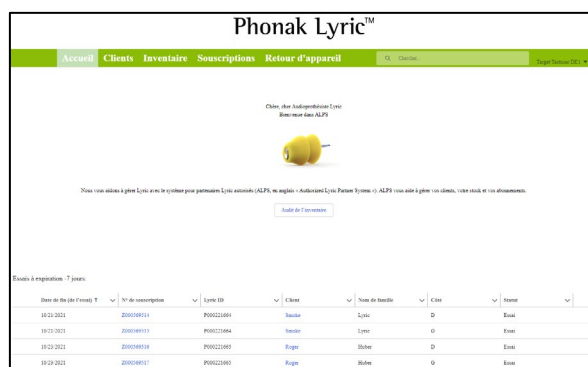

La section [Clients] vous donne un aperçu de tous vos clients. En cliquant sur le prénom (marqué en bleu), vous aurez accès aux informations suivantes :

- Imprimer la carte d'identification Lyric
- Souscription de la client
- Renouveler souscription
- Retirer l'appareil
- Client détails

Classe	Titre	Identifiant Patient Lyric	Classe de la	Nombre de copies Plasmid
10-Sep-2021	10-Sep-2021	P00021688	1.100	0200074643
1407	TC	P00187088	4.100	0200074643
1407 changed	TC	P00187088	4.100	0200074643
7-18	Baculov	P00021688	1.100	0200074643
ss	ss	P00021689	1.100	0200074643
ssss	ssss	P00021689	1.100	0200074643
Alba	Alba	P00020096	2.100	0200074643
ALP1	Tes	P00021683	1.100	0200074643
Alp	Lyse	P00021683	1.100	0200074643
Alp	Lyse	P00021767	2.100	0200074643
alp	alp	P000217642	1.100	0200074643
ANDE	ANDE	P00021686	1.100	0200074643
Accession#090001	Accession#090001	P00021689	1.100	0200074643
ant		P00021683	1.100	0200074643
Don-7	Tes	P00187087	4.100	0200074643
Chad	Dynalid	P00021642	1.100	0200074643
check	ss	P00021689	1.100	0200074643
check/Waterbury	Tes	P00189524	4.100	0200074643
Cleer	ALP1	P00021682	1.100	0200074643

En cliquant sur le numéro d'abonnement (marqué en bleu), vous accédez aux informations détaillées sur l'abonnement :

- Modalités et conditions
- Annuler la souscription
- Historique de l'appareillage

[illegible]

Si vous cliquez sur le numéro d'appareil (marqué en bleu), vous accéderez aux informations suivantes :

- Statut
- Code de l'appareil
- Date de garantie
- Souscriptions/Insertions
- Extraction
- Retours

Appareil 2123NVTN	
Etat	Description
En service	Lynch4 (20)
Compte	
Lynch4 (20) (1)	Date de création
	07/7/2021
Titulaire de l'acte	Editions
2123NVTN	01/10/2022
Cible	
F506	
Souscriptions / Abonnements	
Souscriptions	
2000700443	Date d'expiration
	07/7/2021
Extraction	
Identifiant de l'entité de l'appareil	Date d'expiration
Observations supplémentaires	
Retour	
Raison de retour	Date de retour

[L'Inventaire] affiche tous les appareils du compte respectif, triés par taille d'appareil. Cette liste peut également être exportée vers Excel.

Accueil

Clients

Inventaire

Souscriptions

Retour d'app

Rapport : Comptes avec des appareils

Available Stock Detailed

Nombre total d'enregistrements

18

Taille de l'appareil	Appareil : Numéro de série	Référence	Description	Echéance
☐ L (6)	2132N9Y41 2132N9Y45 2132N9Y46 2132N9Y48 2132N9Y43 2132N9Y4C			

 078-0064 078-0064 078-0064 078-0064 078-0064 078-0064 | lyric4 (L) lyric4 (L) lyric4 (L) lyric4 (L) lyric4 (L) lyric4 (L) | 8/13/2022 8/13/2022 8/13/2022 8/13/2022 8/13/2022 8/13/2022 || ☐ M (3) | 2132N9Y8Y 2132N9Y8C 2132N9Y8C 078-0063 078-0063 078-0063 | lyric4 (M) lyric4 (M) lyric4 (M) | 8/13/2022 8/13/2022 8/13/2022 | |
☐ S (3)	2132N9Y7Y 2132N9Y7KA 2132N9Y7KC 078-0062 078-0062 078-0062	lyric4 (S) lyric4 (S) lyric4 (S)	8/6/2022 8/6/2022 8/6/2022	
☐ XL (6)	2132N9YWV 2132N9YWV 2132N9YWF 078-0065 078-0065 078-0065	lyric4 (XL) lyric4 (XL) lyric4 (XL)	8/6/2022 8/6/2022 8/6/2022	
Nombres de lignes ☒ Lignes de détail ☒ Sous-totaux ☐ Total général ☐				

Sous [Souscription], tous les abonnements peuvent être trouvés. Lorsque vous travaillez dans un bureau satellite connecté au système, tous les clients sont visibles mais séparés par numéro de compte. Cette liste peut être exportée vers Excel.

Numéro de série	Taille de l'appareil	Échéance
2132NY7JY	S	8/6/2022
2132NY7KC	S	8/6/2022
2132NY7KA	S	8/6/2022
2132NY9WK	XL	8/6/2022
2132NY9WD	XL	8/6/2022
2132NY9WC	XL	8/6/2022
2132NY9WG	XL	8/6/2022
2132NY9WF	XL	8/6/2022
2132NY9WE	XL	8/6/2022
2132NY941	L	8/13/2022
2132NY94C	L	8/13/2022
2132NY943	L	8/13/2022
2132NY948	L	8/13/2022
2132NY946	L	8/13/2022
2132NY945	L	8/13/2022
2132NY8AY	M	8/13/2022
2132NY8C0	M	8/13/2022
2132NY8C4	M	8/13/2022

La section [Retour d'appareil] vous permet de retourner à Phonak les appareils pour les raisons suivantes :

- Neuf (stock excessif)
- Muet à la livraison
- Erreur de livraison
- Expiré

Choisissez les appareils qui seront retournés à Phonak. Sélectionnez les appareils et choisissez la raison du retour. Cliquez sur « sélectionner » et imprimez le formulaire de retour, à envoyer avec l'appareil (si nécessaire).

Les rubriques suivantes se trouvent sous votre nom :

- Menu general
- Mon profil
- Mon compte
- Déconnexion

Dans [Mon profil] vous pouvez changer la langue.

Sous [Mon compte], vous pouvez choisir votre emplacement actuel (lorsque vous travaillez dans différents endroits).

Veillez sélectionner votre compte :

Votre compte actuel est le suivant :

812301643
Lyon-Testbureau #3
Lyon-Testbureau #3
Changement 17/04

Vous désirez un compte	Nom de compte Phoenix	Nom du compte	Adresse	Ville	Code postal
☐	812301643	Lyon-Testbureau #3	Muscardin 1	Strasbourg	67078

Changer

Si vous souhaitez recevoir un e-mail hebdomadaire sur les essais, les abonnements et le stock sur le point d'expirer, vous pouvez ajouter jusqu'à cinq adresses. Vous pouvez également choisir le nombre de mois avant expiration des abonnements pour recevoir cette notification. Pour les bureaux satellites, un rapport avec un aperçu complet de tous les bureaux peut également être demandé en cochant la case correspondante.

Notification par courriel

Nom du compte: Lyon-Testbureau #3

Notification par e-mail 1:

Notification par e-mail 2:

Notification par e-mail 3:

Notification par e-mail 4:


Notification par e-mail 5:

Délai de notification d'expiration: 1 mois

Notification pour toutes vos associations: ☐

Enregistrer

Le [tableau de bord] vous donne une indication sur la façon dont votre entreprise se porte. L'explication se trouve plus en détail dans la légende du tableau de bord.

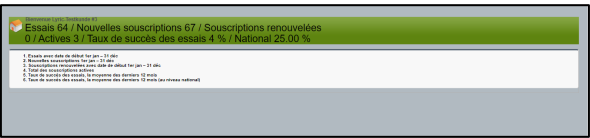

Le formulaire d'analyse de l'appareil peut être téléchargé.

Formulaires à télécharger

Modèle de contrat client, paiement annuel

Modèle de contrat client, paiement mensuel

Formulaire pour produit retourné

Le champ de recherche vous permet de rechercher directement des données par numéro d'abonnement, nom de client, appareil, etc.


Chercher...

Activer l'historique détaillé pour l'assistant Ce mode d'emploi

est applicable au logiciel d'appareillage Target 9.0 et aux versions ultérieures du logiciel d'appareillage Target 9. Pour les versions précédentes du logiciel d'appareillage veuillez contacter votre représentant local Phonak.

Si vous rencontrez un problème avec Target, un enregistrement avancé des événements peut aider notre support Target à en déterminer la source.

Allez dans [Aide] & [Fichiers log] et choisissez la façon d'envoyer les informations à Phonak.

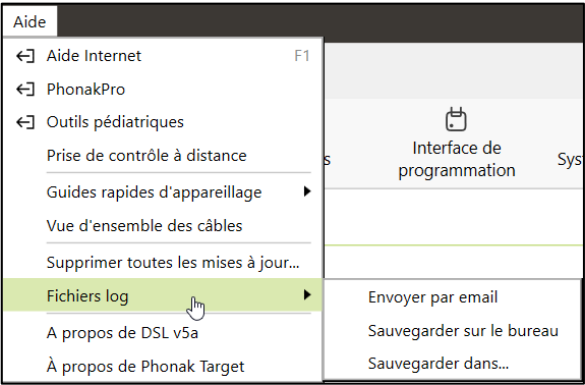

Information et description des symboles et de la configuration requise du système

Le « Phonak Target Fitting Guide » contient les informations et la description des symboles et de la configuration requise du système.

Ce mode d'emploi est applicable au logiciel d'appareillage Target 11.0 et aux versions ultérieures du logiciel d'appareillage Target 11. Pour les versions précédentes du logiciel d'appareillage veuillez contacter votre représentant local Phonak.



Sonova AG • Laubisrütistrasse 28 •
CH-8712 Stäfa • Switzerland



Sonova Deutschland GmbH
Max-Eyth-Str. 20
70736 Fellbach-Oeffingen • Germany

