

Phonak

Roger™ iN mikrofonok

A Roger iN mikrofon telepítési útmutatója

Tartalom


A Roger vevők telepítése egy hallókészülékpárhoz a RogerDirect™ segítségével.....	1
A Roger vevők számának ellenőrzése a Roger iN mikrofonban.....	2
A Roger vevő leválasztása a hallókészülékről	3

A Roger vevők telepítése egy hallókészülékpárhoz a RogerDirect™ segítségével


Győződjön meg róla, hogy a hallókészülék a Phonak Target 6.1 vagy újabb verziójában elérhető legfrissebb FW-vel rendelkezik.

A telepítés lépései:


1. Kapcsolja be a Roger iN mikrofont
2. Tartsa nyomva a telepítógombot két másodpercig, amíg a jelzőfény zölden kezd villogni:

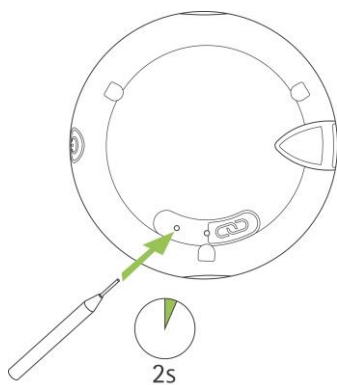

Roger Select™ iN

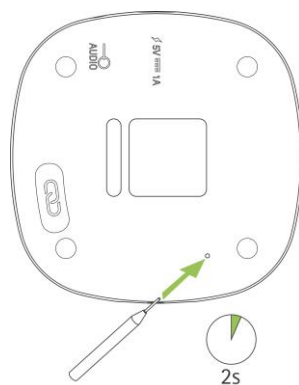


Roger Table Mic II iN

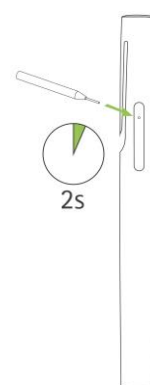

Roger Pen™ iN

3. Helyezze a Roger iN mikrofont az asztalra
4. Kapcsolja be az egyik hallókészüléket (a másik legyen kikapcsolva)

5. Helyezze a hallókészüléket a Roger iN mikrofon közelébe (10 centiméteren belüli távolságba)

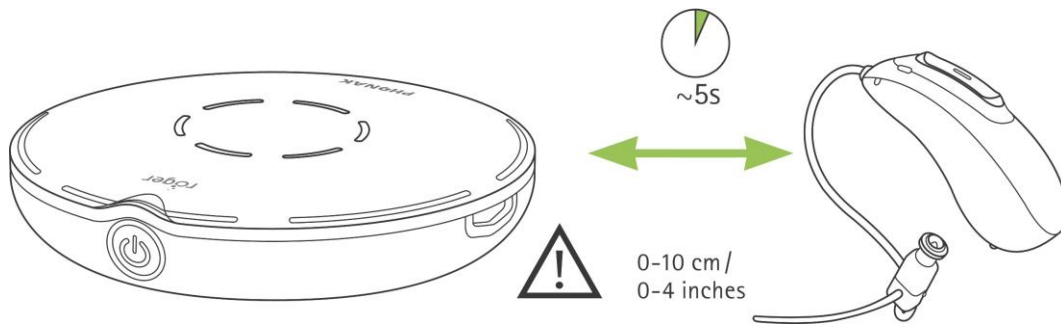

6. Várjon nagyjából 5 másodpercet, amíg a Roger iN mikrofon jelzőfénye folyamatos zöld fényre vált

7. A másik hallókészülékkel is ismételje meg a 2-6. lépést.


Megjegyzés: A hallókészülékek automatikusan csatlakoznak a Roger iN mikrofonhoz.

Ha a jelzőfény a telepítést követően pirosra vált, akkor a folyamat sikertelen volt. Ez az alábbi okok miatt következhet be:


- Túl nagy volt a távolság a Roger iN mikrofon és a hallókészülék között
- A Roger iN mikrofonhoz nincsenek Roger vevők telepítve
- A hallókészülékhez már telepítették a Rogert
- A hallókészülék nem RogerDirect-kompatibilis.

A Roger vevők számának ellenőrzése a Roger iN mikrofonban


A Roger iN mikrofon bekapcsolását követően nyomja meg röviden a mikrofon telepítőgombját:

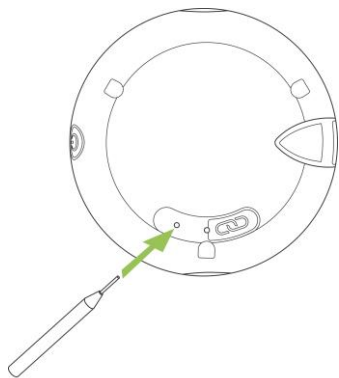

Roger Select iN

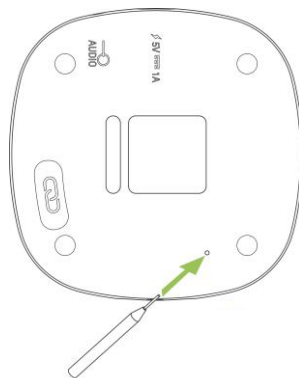

Roger Table Mic II iN

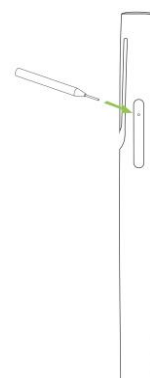

Roger Pen iN


A jelzőfény tájékoztatni fogja Önt arról, hogy hány Roger vevő áll rendelkezésre:

- ● Két Roger vevő érhető el
- ● Egy Roger vevő érhető el
- ● Nem érhető el Roger vevő


A Roger vevő leválasztása a hallókészülekről

A leválasztás lépései:


1. Kapcsolja be a Roger iN mikrofont
2. Tartsa nyomva a telepítógombot két másodpercig, amíg a jelzőfény zölden kezd villogni

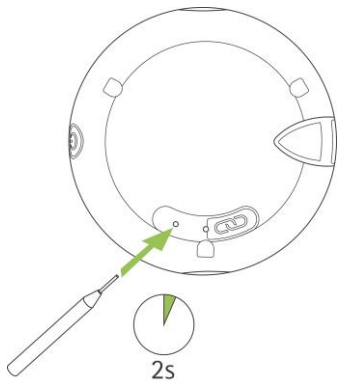

Roger Select iN

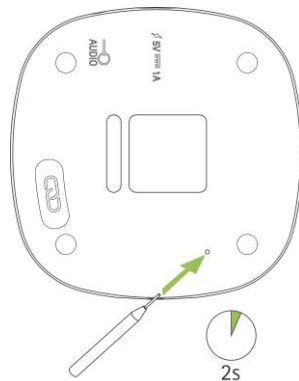


Roger Table Mic II iN

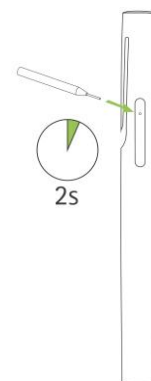

Roger Pen iN

3. Helyezze a Roger iN mikrofont az asztalra
4. Kapcsolja be az egyik hallókészüléket (a másik legyen kikapcsolva)
5. Helyezze a hallókészüléket a Roger iN mikrofon közelébe (10 centiméteren belüli távolságba)

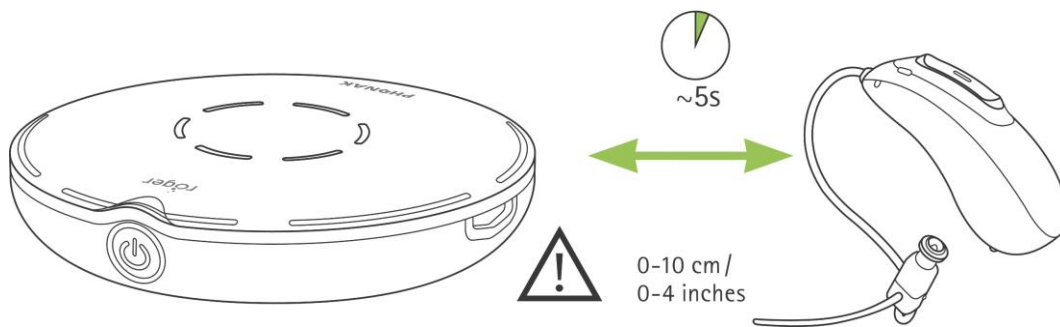

6. Várjon nagyjából 5 másodpercet, amíg a Roger iN mikrofon jelzőfénye folyamatos zöld fényre vált
7. A másik hallókészülékkel is ismételje meg a 2-6. lépést, amennyiben szükséges.

Ha a jelzőfény a leválasztást követően pirosra vált, akkor a leválasztási folyamat sikertelen volt. Ez az alábbi okok miatt következhet be:

- Túl nagy volt a távolság a Roger iN mikrofon és a hallókészülék között
- A Roger iN mikrofonhoz már telepítettek két Roger vevőt
- A hallókészülékhez nem telepítették a Rogert
- A hallókészülék nem RogerDirect-kompatibilis.