

Roger NeckLoop per la trascrizione del parlato

Istruzioni per l'installazione

Roger NeckLoop può essere collegato a un computer, a un tablet o a uno smartphone per creare sottotitoli automatici in diretta utilizzando un software terzo di trascrizione del parlato.


Preparazione

1. Controlla che Roger NeckLoop e il microfono Roger siano carichi.
2. Verifica che sul computer, smartphone o tablet sia installata un'applicazione terza di trascrizione del parlato o dettatura dal vivo.

Collegamento al computer


Che cosa serve: Il cavo da USB-C a USB-A fornito in dotazione.

1. Collega il cavo USB al Roger NeckLoop e al computer:

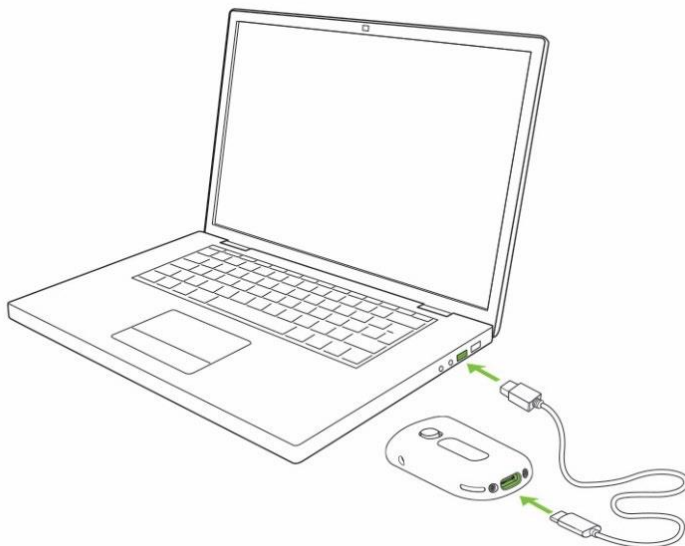

2. Accendi Roger NeckLoop.

- Sul computer, controlla che Roger NeckLoop sia selezionato come sorgente di input (impostazioni audio):

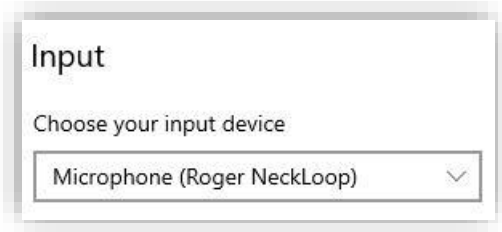

- Esegui il software di trascrizione del parlato (applicazione terza) sul computer.
Come alternativa puoi anche eseguire la funzione “Dettato” di Microsoft Word:




- Ora parla nel microfono Roger e il software di trascrizione del parlato o MS Word trascriveranno le parole dette trasformandole in testo.

Collegamento a smartphone o tablet con presa USB-C

Che cosa serve: Il cavo da USB-C a USB-A fornito in dotazione e un adattatore On-the-Go (OTG), **OPPURE** un cavo da USB-C a USB-C.

- Collega Roger NeckLoop allo smartphone o tablet con un adattatore OTG e il cavo USB fornito in dotazione, **OPPURE** usa un cavo da USB-C a USB-C.
- Accendi Roger NeckLoop.
- Esegui l'app di trascrizione del parlato (ad esempio Google Transcribe) sul tuo smartphone o tablet.
- Se necessario, seleziona Roger NeckLoop come sorgente di input.
- Parla nel microfono Roger e l'app di trascrizione del parlato trascriverà le parole dette trasformandole in testo.

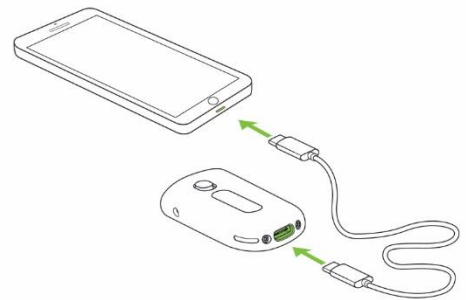

Collegamento a smartphone o tablet con presa Lightning

Che cosa serve: Il cavo da USB-C a USB-A fornito in dotazione e un adattatore per fotocamere da Lightning a USB 3. Il caricatore del tuo telefono.

- Collega l'adattatore allo smartphone.
- Collega il caricatore del telefono all'adattatore.
- Collega Roger NeckLoop all'adattatore con il cavo da USB-C a USB-A fornito in dotazione.
- Accendi Roger NeckLoop.
- Esegui l'app di trascrizione del parlato sul tuo smartphone o tablet.
- Se necessario, seleziona Roger NeckLoop come sorgente di input.
- Parla nel microfono Roger e l'app di trascrizione del parlato trascriverà le parole dette trasformandole in testo.

