

Phonak Sky™ Marvel



Amore al primo suono

Per maggiori informazioni, visitare il sito www.phonakpro.com

Sky Marvel possiede una tecnologia allo stato dell'arte per una performance sonora ottimale e assicura comfort, sicurezza e robustezza in tutti gli aspetti della vita dei bambini.

Con la nuova gamma Sky Marvel, presentiamo una combinazione unica di innovazioni tecnologiche a livello mondiale e caratteristiche fondamentali specifiche per bambini. Il nostro intento è fornire ai minori le soluzioni migliori per lo sviluppo del linguaggio, per l'intelligibilità del parlato e la semplicità d'uso. Sviluppato per ottimizzare al massimo l'input udibile a livello quantitativo e qualitativo, Sky Marvel supporta lo sviluppo sociale, emotivo e cognitivo del bambino con amore fin dal primo suono.

Suono chiaro e ricco di sfumature

Il primo sistema operativo al mondo progettato specificamente per bambini

Il sistema operativo AutoSense Sky OS 3.0 è progettato per riconoscere le situazioni di ascolto che possono rappresentare una sfida nelle esperienze quotidiane dei bambini e per offrire la giusta combinazione di gestione adattiva del rumore, per assicurare maggiore comfort e minore fatica di ascolto.¹

Con Sky Marvel introduciamo il sistema operativo AutoSense Sky OS 3.0, capace ora di classificare anche i segnali trasmessi in streaming. Grazie a ciò, i bambini ricevono un suono chiaro e ricco di sfumature durante lo streaming del parlato da media esterni e una qualità sonora ottimizzata durante lo streaming della musica.

Si collega a smartphone, microfoni Roger™ e altri dispositivi

Streaming diretto sia da iOS® che da Android™

A differenza di qualsiasi altro apparecchio acustico pediatrico, Sky Marvel si collega in modo diretto a praticamente tutti gli smartphone e i dispositivi Bluetooth®. Supporta il doppio accoppiamento e trasmette l'audio a entrambe le orecchie. In un mondo in cui i dispositivi moderni costituiscono una parte centrale della vita sociale e dell'istruzione di un bambino, Sky Marvel consente un accesso intuitivo e uno streaming di qualità sonora stereo per parlato, app, musica, e-book e molto altro ancora.



1 Feilner, M., Rich, S., & Jones, C. (2016). Automatic and directional for kids - Scientific background and implementation of pediatric optimized automatic functions. Phonak Insight, ripreso da www.phonakpro.com/evidence, consultato il 19 agosto 2019.

iOS è un marchio commerciale di Cisco Technology, Inc. / Android è un marchio commerciale di Google, LLC.



Streaming diretto dai microfoni Roger

Con RogerDirect™, ora i bambini possono accedere alla tecnologia Roger senza dover collegare un ricevitore esterno. I ricevitori Roger possono essere installati in modalità wireless negli apparecchi acustici Marvel, eliminando così ogni problematica di compatibilità dei ricevitori. Questa combinazione insuperabile, permetterà ai bambini di accedere più facilmente a un maggior numero di parole e conversazioni.² Sky con Roger ora è fino al 42% più piccolo e fino al 32% più leggero rispetto alla generazione precedente.*

Ricaricabile

Sky M-PR si ricarica completamente in appena 3 ore e offre un'intera giornata di ascolto, comprese 10 ore di Roger o di streaming multimediale.** Genitori, tutori, insegnanti e bambini possono stare tranquilli sapendo che gli apparecchi acustici rimarranno in funzione.

Design studiato per bambini

Solidità leader del settore

Con Sky Marvel, i bambini hanno la libertà di esplorare e giocare, anche quando la vita li porta a bagnarsi un po'. Gli apparecchi acustici Marvel sono costruiti con un involucro robusto che li rende resistenti all'acqua e a prova di polvere (classe di protezione IP68).***

Caratteristiche con blocco pediatrico

I piccoli ascoltatori sono protetti grazie alla curvettina con blocco pediatrico e al nuovo blocco vano pila, che tiene le batterie al sicuro all'interno dell'apparecchio acustico, lontano dalle loro manine e dalla loro bocca. Con lo Sky M-PR la batteria ricaricabile agli ioni di litio integrata non può essere rimossa né ingerita.

Nuovo indicatore LED

Sky Marvel presenta un nuovo indicatore LED intuitivo e discreto, che permette di verificare con chiarezza lo stato dell'apparecchio acustico.

² Benitez-Barrera, C.R., Angley G., & Tharpe, A.M. (2018). Remote microphone system use at home: Impact on caregiver talk. Journal of Speech, Language and Hearing Research, Vol. 61, 399-409.

* Confronto tra Sky M-M e Sky B-P + Roger 18 (ricevitore integrato nel design)

** Il tempo effettivo di carica dipende dalla carica residua della batteria, ma non supera le 3 ore.

*** IP68 indica che l'apparecchio acustico è resistente all'acqua e alla polvere. (NB. L'apparecchio non è impermeabile, seguire le istruzioni riportate nella guida utente del prodotto per maggiori informazioni) Ha resistito a un'immersione di 1 metro in acqua per 60 minuti e 8 ore in una camera di raccolta polvere, come richiesto dallo standard IEC 60529.


Descrizione del prodotto



Sky M-M
Sky M-M Trial
M90/M70/M50/M30

Batteria	312	
Tasto multi-funzione	•	
Bobina telefonica	•	
Bluetooth®	•	
Nano rivestimento	•	
Classe di protezione IP	IP68	
Dimensioni (lunghezza x mm larghezza x profondità) pollici	31,3 x 14,1 x 7,3 1,23 x 0,56 x 0,29"	
Peso g/oncia	2,18 / 0,077	
Tempi di carica	0% - 100%	
	0% - 80%	
	Per una sessione di fitting di 30 min.	
Livello massimo di potenza in uscita (accoppiatore 2 cc) dB SPL	SlimTube 4.0	HE11 680
	122	128
	58	63
Range di frequenza Hz	<100 - 6500	<100 - 8000
Corrente di funzionamento mA	1,5	1,6

Range di fitting

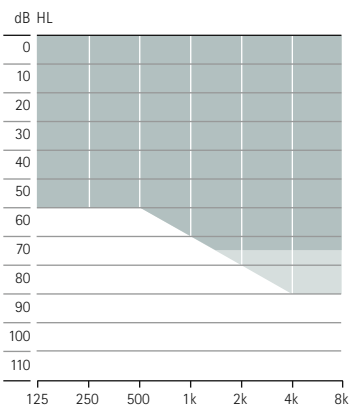


Ipoacusia da lieve a grave, tutte le configurazioni audiometriche



Sky M-PR
Sky M-PR Trial
M90/M70/M50/M30

Batteria	integrata ricaricabile	
Tasto multi-funzione	•	
Bobina telefonica	•	
Bluetooth®	•	
Nano rivestimento	•	
Classe di protezione IP	IP68	
Dimensioni (lunghezza x mm larghezza x profondità) pollici	36,7 x 16,4 x 8,5 1,44 x 0,65 x 0,33"	
Peso g/oncia	3,71 / 0,131	
Tempi di carica	3 h	
	1,5 h	
	10 min.	
Livello massimo di potenza in uscita (accoppiatore 2 cc) dB SPL	SlimTube 4.0	HE11 680
	127	130
	60	66
Range di frequenza Hz	<100 - 7000	<100 - 6800
Corrente di funzionamento mA		

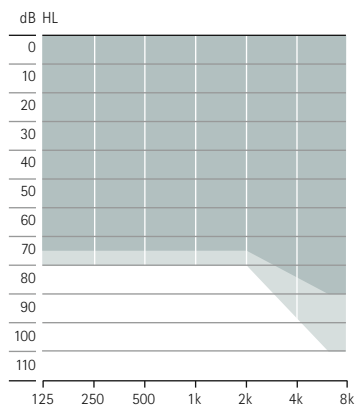


Ipoacusia da lieve a severa, tutte le configurazioni audiometriche



Sky M-SP
Sky M-SP Trial
M90/M70/M50/M30

Batteria	13	
Tasto multi-funzione	•	
Bobina telefonica	•	
Bluetooth®	•	
Nano rivestimento	•	
Classe di protezione IP	IP68	
Dimensioni (lunghezza x mm larghezza x profondità) pollici	40 x 16,9 x 8,5 1,57 x 0,67 x 0,33"	
Peso g/oncia	4,4 / 0,155	
Tempi di carica	3 h	
	1,5 h	
	10 min.	
Livello massimo di potenza in uscita (accoppiatore 2 cc) dB SPL	HE11	HE11 680
	139	133
	81	75
Range di frequenza Hz	<100 - 5000	<100 - 5000
Corrente di funzionamento mA	2,1	2,0

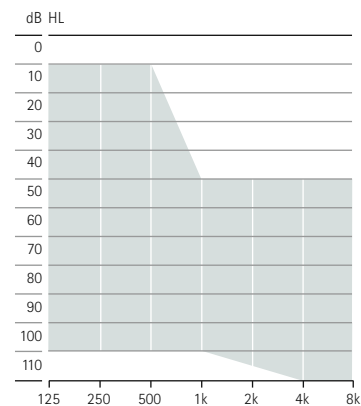

Ipoacusia da lieve a profonda, tutte le configurazioni audiometriche

■ SlimTube 4.0
■ HE11 680

Colori dell'involucro e della curvetta

Involucro



H0
Beige



P1
Beige sabbia



P3*
Sandalo



P4*
Castano



P5*
Champagne



P6
Grigio Argento



P8
Nero Velluto



Q2
Verde elettrico



Q3
Blu caraibico



T3
Rosa tenue



T7
Bianco
Ghiaccio



M6
Rosso Fuoco



M7
Blu oceano



M8
Viola Majesty

Curvetta



R1
Verde



R2
Giallo



R3
Rosa



Q6
Blu



I3
Trasparente



Q7
Viola



R4
Arancione

*I colori P3, P4 e P5 non sono disponibili per il livello di performance M30.

Livelli di performance

	Premium M90	Avanzata M70	Standard M50	Essenziale M30
AutoSense Sky OS 3.0				
Situazione di quiete	•	•	•	•
Parlato nel rumore	•	•	•	•
Comfort nel rumore	•	•	•	
Musica	•	•		
Parlato con rumore di fondo elevato ³	•			
Parlato in auto	•			
Comfort in ambiente riverberante	•			
Parlato da dispositivi multimediali + microfono	•	•	•	•
Musica da dispositivi multimediali + microfono	•	•	•	•
Programmi aggiuntivi				
Max. programmi aggiuntivi	3	3	3	3
Comfort in ambiente riverberante	•			
Parlato con rumore di fondo elevato	•	•		
Parlato a 360°	•	•		
Parlato nel rumore	•	•	•	•
Situazione di quiete	•	•	•	•
Comfort nel rumore	•	•	•	•
Musica	•	•	•	•
Telefono acustico	•	•	•	•
Programma personalizzato	•	•	•	•
Programmi di streaming				
RogerDirect + mic	•	•	•	•
PartnerMic + mic	•	•	•	•
Chiamata telefonica + mic	•	•	•	•

	Premium M90	Avanzata M70	Standard M50	Essenziale M30
Funzioni				
UltraZoom	•	•	•	•
SNR-Boost	•	•	•	
DuoPhone	•	•	•	
SoundRecover2	•	•	•	•
Regolazioni Preferite dall'Utente	•	•	•	•
Real Ear Sound	•	•	•	
Canali Regolazione Fine	20	16	12	8
WhistleBlock	•	•	•	•
NoiseBlock	•	•	•	•
WindBlock	•	•		
EchoBlock	•			
SoundRelax	•	•		
QuickSync	•	•	•	•
Ventilazione acustica ottimizzata	•	•	•	•
Auto Adattamento	•	•	•	•
Bilanciamento ambientale	•	•	•	•
RogerDirect™	•	•	•	•
Impostazione Roger e direzionalità	•	•	•	

Fitting

	Sky M-M Sky M-M Trial M90/M70/M50/M30	Sky M-PR Sky M-PR Trial M90/M70/M50/M30	Sky M-SP Sky M-SP Trial M90/M70/M50/M30
Phonak Target	6.1 o versioni successive	6.1 o versioni successive	6.2 e versioni successive
Noahlink Wireless	•	•	•
Noahlink			•
HI-PRO e HI-PRO 2			•

Accoppiamento acustico

Uscita del suono	Curvetta standard	Con attenuazione (HE 11 680), trasparente e in altri 6 colori pediatrici (vedere pagina 4) per Sky M-M e Sky M-PR Senza attenuazione (HE 11) solo nel colore trasparente per Sky M-SP	
	Curvetta con blocco pediatrico	Modello mini con attenuazione (HE 11 680), trasparente e in altri 6 colori pediatrici (vedere pagina 4) per Sky M-M e Sky M-PR Modello mini senza attenuazione (HE 11), solo nel colore trasparente per Sky M-SP	
	SlimTube 4.0	Disponibile per lato sinistro e destro e in cinque lunghezze diverse (00, 0, 1, 2, 3)	
Auricolare per SlimTube	Cupola	Cupola Cap	
		Cupola aperta	disponibile in tre misure (S, M, L)
		Cupola ventilata	disponibile in tre misure (S, M, L)
		Cupola Power	disponibile in tre misure (S, M, L)
	SlimTip™	Acrilico	
		Silicone	
		Titanio	
Auricolare per curvetta	Auricolare		
	Peduncolo universale		

Phonak Sky Marvel Trial

I nuovi apparecchi acustici Phonak Sky M Trial possono essere rapidamente impostati ai livelli di performance necessari per adattarsi a quanto da voi consigliato. I vari livelli di tecnologia presenti in un apparecchio acustico Phonak Sky M Trial vi forniscono numerose opzioni per offrire la soluzione uditiva al primo appuntamento o per colmare il vuoto durante le riparazioni.

Phonak Charger BTE RIC

Questo caricatore è adatto per tutti gli apparecchi acustici ricaricabili Marvel BTE e RIC. È dotato di uno spazio per supportare auricolari di grandi dimensioni, un ingresso di carica USB-C e un indicatore LED.



Versioni Phonak Sky M Bluetooth®

Chiamate dirette / streaming audio

Telefoni con tecnologia wireless Bluetooth® 4.2 e versioni precedenti

Portfolio Accessori Wireless

		Sky M-M Sky M-M Trial M90/M70/M50/M30	Sky M-PR Sky M-PR Trial M90/M70/M50/M30	Sky M-SP Sky M-SP Trial M90/M70/M50/M30
Accessorio wireless	TV Connector	•	•	•
	Phonak PartnerMic™	•	•	•
	Phonak RemoteControl	•	•	•
Roger™	Microfoni Roger	•	•	•

Per maggiori informazioni visitare il sito



www.phonakpro.com/skymarvel



www.phonakpro.com/roger

Life is on

Noi di Phonak crediamo che un buon udito sia fondamentale per vivere la vita al meglio. Da più di 70 anni siamo fedeli alla nostra missione, sviluppando soluzioni uditive all'avanguardia che cambiano la vita delle persone a livello sociale ed emotivo. Life is on.

www.phonakpro.it