

Phonak Target™ 10

インストールガイド



必要システム構成

Phonak Target™10 のインストールにあたって必要なコンピュータシステムは、下記のとおりです。事前にご確認ください。

なお、本ソフトウェアは Phonak Target オンラインアップデートでの供給となります。ドライブ等 DVD-ROM と互換性のないシステムまたはネット環境がない場合にはインストールできませんのでご注意ください。

プロセッサ	Intel Core プロセッサ (マルチコア・クロック 2 GHz 以上を推奨)
メインメモリ	4GB 以上 (8GB 以上を推奨)
HDD 空き容量	3GB 以上 (20GB 以上を推奨)
	Windows 11 64 ビット版 Windows 10 64 ビット版 いずれも最新のサービスパックを適用していること ※ Windows XP/Vista/7/8/8.1 はインストール不可
ディスプレイ解像度	1280 x 1024 ピクセル 以上
グラフィックカード	1600 万色 (24 ビット) 以上
光学ドライブ	DVD-ROM または互換性のある光学ドライブ
シリアルポート	旧タイプの HI-PRO を使用する際 1 ポート必要

USB ポート	各デバイス用にそれぞれ 1 ポート必要 • Bluetooth®アダプタ (iCube II・NOAHlink など) • アクセサリ (iCube II・Phonak ComPilot II など) • HI-PRO2 または HI-PRO USB • USB シリアル変換ケーブル経由による旧タイプの HI-PRO • Noahlink Wireless 2 / Noahlink Wireless
プログラミング機器	Noahlink Wireless 2、Noahlink Wireless、iCube II、NOAHlink、HI-PRO、HI-PRO USB、HI-PRO 2
Noah バージョン	最新バージョン (Noah 4.4 以降)
インターネット接続	推奨 (オンラインアップデートには必須)
Noahlink Wireless、NOAHlink ドライバソフトウェア	最新バージョンを推奨
サウンドカード	5.1ch サラウンドシステム またはステレオ

※ 上記はスタンドアローン版の場合です。Noah 版をインストールする際は Noah の必要システム要件も満たす必要があります。

【重要】 Phonak Target 9.0 以降は Windows 8.1 でインストールできません。Windows 10 以降でインストールをお願いいたします。

Phonak Target™ 10 インストール DVD の内容

- DVD
- Phonak Target 10

Phonak Target™ 10 のインストール

(画面デザイン・手順等は OS など使用環境により異なる場合があります)

インストール作業は必ずコンピュータの管理者権限を持つユーザーでログインして行ってください。

インストールの前にあらかじめウィルスおよびセキュリティ対策ソフトを停止してください。


Phonak Target 10 インストール DVD をドライブにセットします。自動再生ダイアログが表示されたら、【フォルダを開く】を選択し、Target 10 フォルダ内にある setup.exe を実行します。




自動再生が表示されない場合は、スタートボタンから【PC】または【コンピュータ】から DVD ドライブを選択し、Target 10 フォルダ内にある setup.exe を実行します。

setup.exe を実行するとインストールが開始されます。


Next > をクリックします。

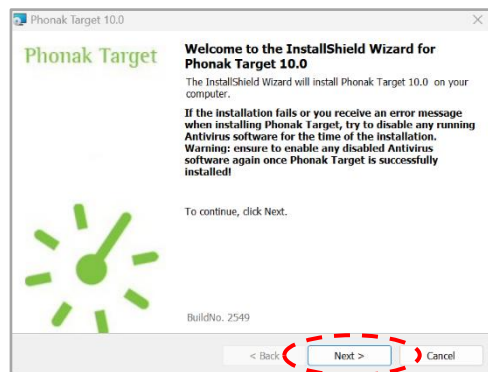


- インストールにあたり、次のような画面が表示された場合は、Phonak Target に必要なソフトのインストールが必要です。Install をクリックして進めてください。

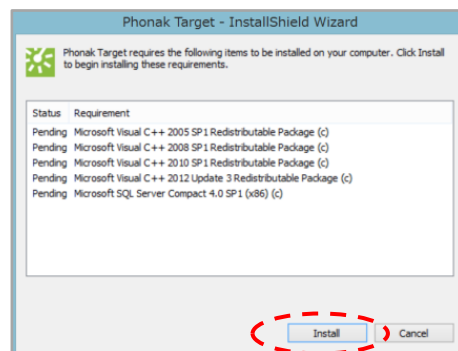

途中「License Agreement」が表示されますので「I accept the terms in the license agreement」を選び、Next > をクリックします。

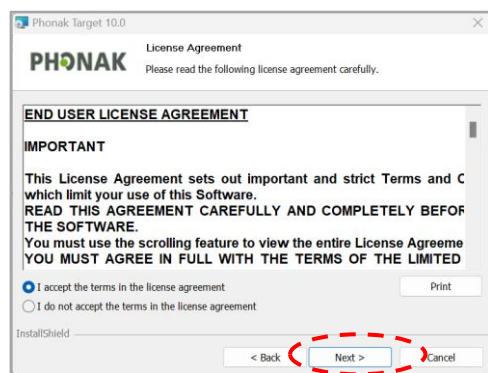


ソフトを使用する国および言語を選択します。画面のとおり「Japan」「Japanese」に変更して、Next > をクリックします。

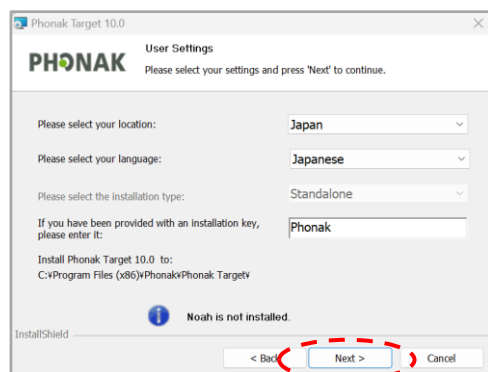


- Noah4.4 以降がすでにインストールされている場合は Noah 版をインストールすることができます。3 段目の installation type を「Noah」に変更してください。

インストールする内容が表示されま
す。修正が必要な場合は < Back を
をクリックし、修正したい画面まで戻
ることができます。この内容でよければ
Install をクリックします。
ファイルのコピーが始まり、数分でイ
ンストールは完了します。

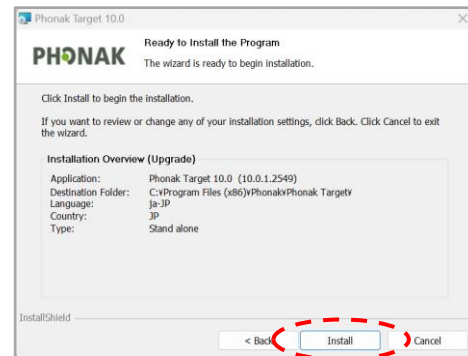

インストール終了後、【The InstallShield
Wizard has successfully installed Phonak
Target】と完了画面が表示されます。
この画面が表示されればインストール
は完了です。

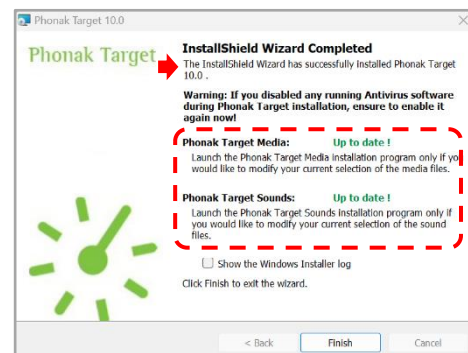

また、内はメディアファイルの
インストール状況が表示されます。

メッセージ	メディアファイル状況
Not installed	…未インストール
Out of date	…旧バージョン
Up to date	…インストール済

Finish をクリックするとメニュー画面に戻ります。

メディアファイルのインストール手順

Phonak Target 10 には追加のメディアファイルとして、Phonak Target Media と Phonak Target Sounds を用意しています。Phonak Target Media にはデータシートと、機能説明、取扱説明のムービーが含まれます。Phonak Target Sounds にはステレオおよび 5.1 チャンネルのサラウンドシステムに対応した、豊富なサウンドデモが含まれます。これらをインストールしなくても補聴器のフィッティングは可能ですので 必要に応じてインストールしてください。

< Phonak Target Media のインストール >

自動再生ダイアログが表示されたら、Phonak Target Media フォルダ内の setup.exe を実行してください。インストールが開始されます。

自動再生が表示されない場合は、DVD ドライブ内の Phonak Target Media フォルダにある setup.exe を実行してください。インストールが開始されます。

< Phonak Target Sounds 10.0 のインストール >

自動再生ダイアログが表示されたら、Phonak Target Sounds 5.0 フォルダ内の setup.exe を実行してください。

自動再生が表示されない場合は、DVD ドライブ内の Phonak Target Sounds 10.0 フォルダ内にある setup.exe を実行してください。インストールが開始されま
す。

インストールおよびフィッティングソフトに関する問い合わせ先：
フォナック 専門家向けサイト 販売店向け情報ポータルサイト

<https://www.phonakpro.com/jp/ja/home.html>

<https://phonakpro.biz/index.html>



フォナック補聴器 カスタマーサービス
TEL 0120-04-4079 • FAX 0120-23-4080