

포낙 로저 인 송신기

로저 인 송신기 설치 가이드

목차


로저 다이렉트가 내장된 한 쌍의 보청기와 페어링 방법.....	1
로저 인 송신기에 연결된 로저 수신기 갯수 확인	2
보청기에서 로저 수신기제거.....	3

로저 다이렉트가 내장된 한 쌍의 보청기와 페어링 방법


Phonak Target 6.1 이상 버전의 피팅소프트웨어가 있는지 확인하십시오.

설치 단계:


1. 로저 인 송신기의 전원을 켭니다.
2. 상태표시등이 녹색으로 깜박이기 시작할 때까지 설치 버튼을 2 초간 길게 누릅니다.

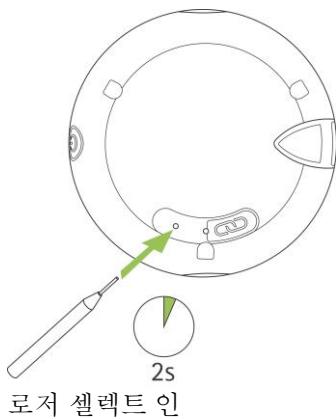

로저 셀렉트 인

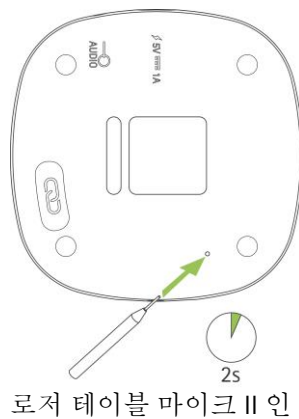


로저 테이블 마이크 II 인

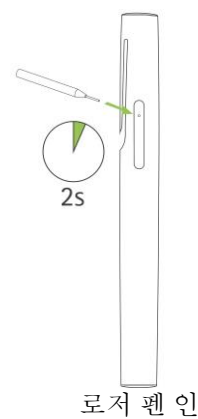

로저 펜 인

3. 로저 인 송신기를 탁자 위에 올려 놓습니다.
4. 한 개의 보청기를 켭니다(다른 보청기는 끈 상태 유지).

5. 보청기를 로저 인 송신기에 가까이 둡니다(10cm/4 인치 내).

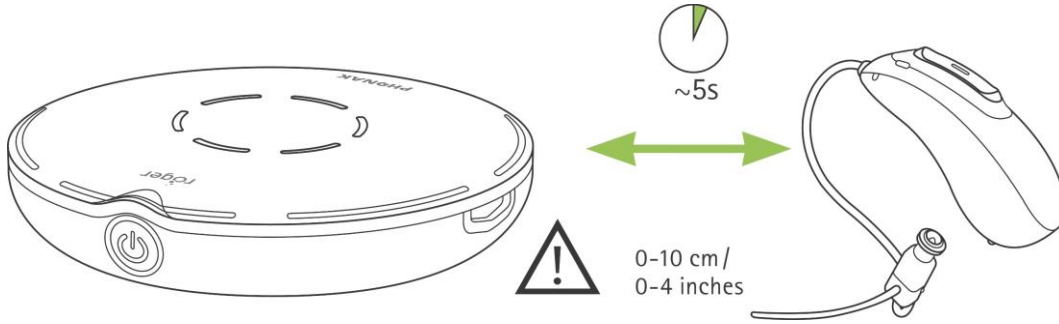

6. 로저 인 송신기의 상태표시등이 계속 켜져 있는 녹색으로 바뀔 때까지 약 5 초간 기다립니다.

7. 두 번째 보청기에 대해 2~6 단계를 반복합니다.


참고: 보청기는 로저 인 송신기에 자동으로 연결됩니다.

설치 절차 후 상태표시등이 빨간색으로 변하면 설치가 완료되지 않은 것입니다. 아래와 같은 이유가 있습니다.


- 로저 인 송신기와 보청기 사이의 거리가 너무 멎니다.
- 로저 인 송신기와 로저 수신기가 페어링 되지 않았습니다.
- 보청기에 로저가 이미 설치되어 있습니다.
- 해당 보청기에는 로저 다이렉트 기능이 없습니다.

로저 인 송신기에 연결된 로저 리시버 갯수 확인


로저 마이크를 켜 후 로저 인 마이크의 설치 버튼을 짧게 누릅니다.

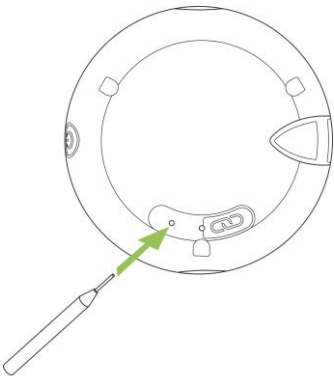

로저 셀렉트 인

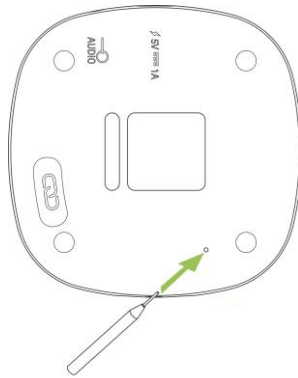

로저 테이블 마이크 II 인

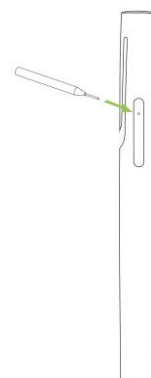

로저 펜 인


상태표시등 색상을 통해 사용 가능한 로저 리시버 갯수를 확인할 수 있습니다.

- ● 두 개의 로저 수신기 사용 가능
- ● 한 개의 로저 수신기 사용 가능
- ● 사용 가능한 로저 수신기 없음


보청기에서 로저 수신기 제거

제거 단계:


1. 로저 인 마이크론을 켭니다.
2. 상태표시등이 녹색으로 깜박이기 시작할 때까지 설치 버튼을 2 초간 길게 누릅니다.

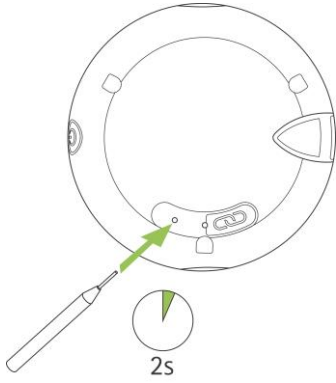

로저 셀렉트 인

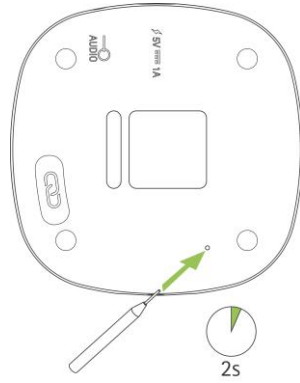


로저 테이블 마이크 II 인

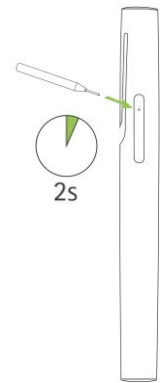

로저 펜 인

3. 로저 인 마이크론을 탁자 위에 놓습니다.
4. 한 개의 보청기를 켭니다(다른 보청기는 끈 상태 유지).
5. 보청기를 로저 인 마이크론에 가까이 둡니다(10cm/4 인치 내).

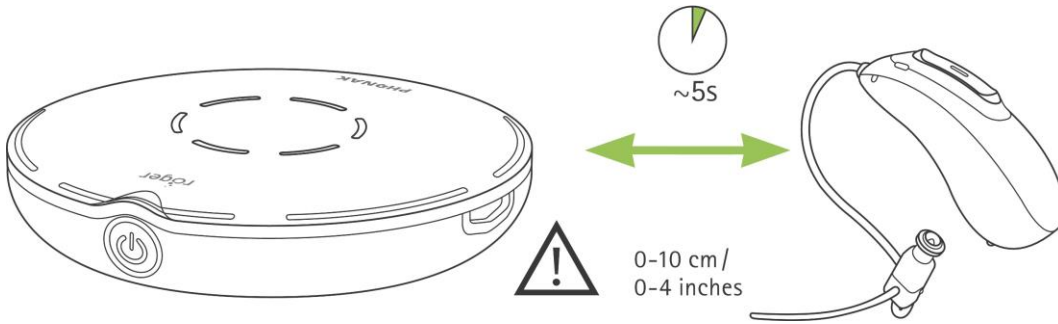

6. 로저 인 마이크론의 상태표시등이 계속 켜져 있는 녹색으로 바뀔 때까지 약 5 초간 기다립니다.
7. 필요한 경우 두 번째 보청기에 대해 2~6 단계를 반복합니다.

제거 절차 후 표시등이 빨간색으로 변하면 설치가 완료되지 않은 것입니다. 아래와 같은 이유가 있습니다.

- 로저 인 송신기와 보청기 사이의 거리가 너무 멉니다.
- 로저 인 송신기에 이미 두 개의 로저 수신기가 설치되어 있습니다.
- 보청기에 로저가 설치되어 있지 않습니다.
- 해당 보청기는 로저 다이렉트 기능이 없습니다.