

Phonak DECT

Draadloze telefoon

Gebruiksaanwijzing



PHONAK
life is on

Deze gebruiksaanwijzing is van toepassing voor

Phonak DECT CP1

Phonak DECT II

Compatibiliteit met hoortoestellen

Dit product maakt gebruik van een speciale draadloze koppeling naar Phonak-hoortoestellen. Vraag uw audicien naar de compatibiliteit van uw hoortoestellen.

Met de demonstratiemodus kan eenvoudig vastgesteld worden of deze compatibel is met uw hoortoestellen (→ Hoofdstuk 3.8).

Inhoud

1. Welkom	7
2. De telefoon leren kennen	8
2.1 Inhoud pakket	8
2.2 Werking van de telefoon	9
2.3 Beschrijving van de onderdelen	10
3. Aan de slag	15
3.1 De voeding installeren	15
3.2 Het basisstation aansluiten	16
3.3 De batterij plaatsen	17
3.4 De handset opladen	18
3.5 De taal van het display wijzigen	19
3.6 Datum en tijd instellen	20
3.7 Locatie instellen	21
3.8 De verbinding met het hoortoestel testen	22
3.9 Bestaande contacten kopiëren	24

4. Dagelijks gebruik	26
4.1 Een telefoongesprek plegen en beëindigen	26
4.2 De microfoon van de handset dempen	28
4.3 Bellen met Phonak-hoortoestellen	28
4.4 Het volume instellen	31
4.5 Beltonen instellen	32
4.6 De handset in- en uitschakelen	34
4.7 Een contact invoeren	35
4.8 Contacten opzoeken	38
4.9 Een zoekgeraakte handset terugvinden	39
4.10 De lijst met bellers gebruiken	41
4.11 Het inboxmenu gebruiken	42
4.12 Het antwoordapparaat 'voicemail' gebruiken	42
4.13 Extra functies tijdens het gebruik van de telefoon	44
5. Handsetinstellingen	45
5.1 De toetsvergrendeling activeren	46
5.2 Beltonen in- en uitschakelen	47

5.3 Overige functies van de contactenlijst	48
5.4 Overige instellingen van de handset	50
5.5 Wekkerfunctie	53
5.6 De riemclip bevestigen	56
5.7 Indicator voor signaalsterkte	57
5.8 Ecomodus	58
5.9 Weergave van batterijstatus	59
5.10 Meerdere handsets voor één basisstation	60
5.11 Een bestaand basisstation gebruiken	63
5.12 De batterij vervangen	64
6. Pincodes en instellingen resetten	65
6.1 Pincodes wijzigen	65
6.2 Uw instellingen resetten	65
6.3 De pincode van het systeem resetten	66
7. Problemen oplossen	67
8. Informatie over de veiligheid van het product	70

9. Service en garantie	72
9.1 Plaatselijke garantie	72
9.2 Wereldwijde garantie	72
9.3 Garantiebeperking	73
10. Nalevingsinformatie	74
11. Informatie en verklaring van symbolen	84
12. Belangrijke veiligheidsinformatie	87

1. Welkom

De draadloze telefoon Phonak DECT is een kwaliteitsproduct ontwikkeld door Phonak, een van 's werelds meest toonaangevende leveranciers van hooroplossingen.

Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig door, zodat u gebruik kunt maken van alle mogelijkheden die dit product u biedt.

Indien u vragen hebt, neem dan contact op met uw audicien of ga naar www.phonak.com/dect

Phonak – Life is on


www.phonak.com



2. De telefoon leren kennen

2.1 Inhoud pakket

Voeding met
adapters

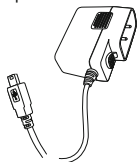

EU



VS/CAN




Telefoonkabel RJ11
met adapters




D



CH

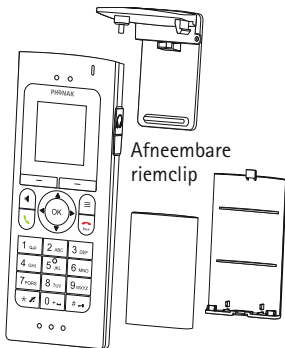

Handset Oplaadbare Batte-
batterij rijklepje

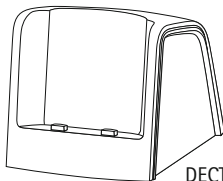

DECT-basisstation
en -oplader
("Basisstation")

2.2 Werking van de telefoon

U kunt deze telefoon net als elke andere draadloze telefoon gebruiken. Door de geïntegreerde draadloze zendtechnologie van Phonak is telefoneren met Phonak-hoortoestellen echter veel eenvoudiger geworden.



Het telefoonsignaal wordt draadloos in digitale kwaliteit naar beide hoortoestellen verzonden.

Als u de handset dicht bij uw hoofd houdt, schakelen de hoortoestellen automatisch over op het telefoonprogramma.


Uiteraard kunt u de telefoon ook zonder hoortoestellen gebruiken.

2. De telefoon leren kennen


2.3 Beschrijving van de onderdelen

Het basisstation

Het basisstation is aangesloten op de telefoonlijn en fungeert ook als oplader voor de handset.

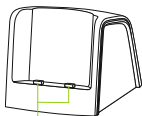

- 1 Contactpunten voor opladen

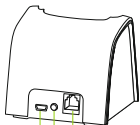


- 2 Ingang voor stroomvoorziening
3 Basis zoekt-- en koppelknop
4 Ingang voor analoge telefoonlijn

❗ De standaard pincode voor het basisstation is "0000".

❗ Het basisstation en de handset zijn vooraf gekoppeld.

De handset

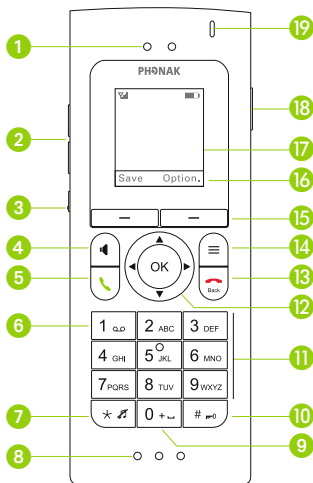


i Als u de taal van het display wilt wijzigen, volg dan de instructies uit hoofdstuk 3.5.

2. De telefoon leren kennen


- 1 Speaker
- 2 Volume omhoog/omlaag
- 3 Volumeversterkingstoets  
2 sec. indrukken = verbindingstest van hoortoestel (demonstratiemodus)
- 4 Handsfree aan/uit
- 5 Bellen/oproep herhalen
- 6 Knop  2 sec. indrukken = voicemailnummer bellen
- 7 Knop  2 sec. indrukken = alle beltonen aan/uit
- 8 Microfoonopeningen
- 9 Knop  2 sec. indrukken = internationaal kengetal "+" gebruiken
- 10 Knop  2 sec. indrukken = toetsenvergrendeling aan/uit
- 11 Cijfertoetsen
- 12 Navigatieknoppen
- 13 Ophangen/Terug (één menu omhoog)
Knop  2 sec. indrukken in stand-bymodus = handset aan/uit
- 14 Functietoets
- 15 Displaytoetsen
- 16 Contextafhankelijk menu (gebruik de displaytoetsen om functies op het display te selecteren)
- 17 Display
- 18 3,5 mm headset-aansluiting
- 19 Indicatorlampje

Pictogrammen op het display in stand-bymodus

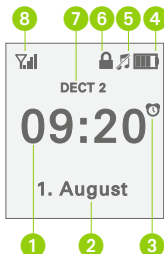

- 1 Tijd
- 2 Datum
- 3 Wekker aan
- 4 Batterij- en oplaadstatus
- 5 Beltoon uit
- 6 Toetsvergrendeling
- 7 Naam handset (dit pictogram is zichtbaar wanneer er meerdere handsets worden gebruikt in combinatie met hetzelfde basisstation)
- 8 Signaalsterkte vanaf basisstation

Pictogrammen op het display tijdens telefoongesprek

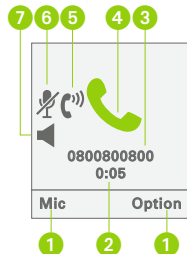

- 1 Contextafhankelijke functies
- 2 Gespreksduur
- 3 Telefoonnummer of naam
- 4 Indicator voor actief gesprek
- 5 Versterkingsmodus aan
- 6 Microfoon van handset gedempt
- 7 Handsfree aan


❗ Welke pictogrammen worden weergegeven op het display, hangt af van de instellingen.

2. De telefoon leren kennen

Menu

Druk op  om het menu te openen en gebruik de pijltoetsen om te navigeren.

Druk op  om terug te gaan.

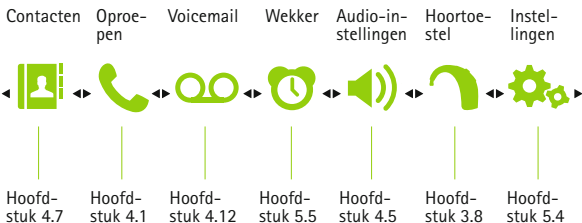

3. Aan de slag

3.1 De oplader installeren

1. Selecteer uw stroomadapter.



VS




EU



VK


2. Steek het ronde uiteinde van de adapter in de ronde hoek van de oplader.

3. Klik de onderkant van de adapter op zijn plaats. Zorg ervoor dat de adapter stevig vastzit.

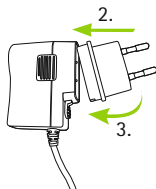

De stroomadapter verwijderen:

- a. Trek het lipje van de stroomadapter terug.
- b. Trek de adapter omhoog om deze te verwijderen.

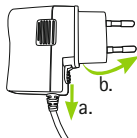


3. Aan de slag

3.2 Het basisstation aansluiten

- ❗ Plaats het basisstation op een stroeve, vlakke ondergrond.

1. Steek de mini-USB-stekker in het basisstation en de stroomadapter in het stopcontact.
2. Sluit de analoge telefoonstekker met de telefoonkabel aan op de telefoonlijningang van het basisstation.

Gebruik hiervoor, indien nodig, de juiste telefoonlijnadapter.

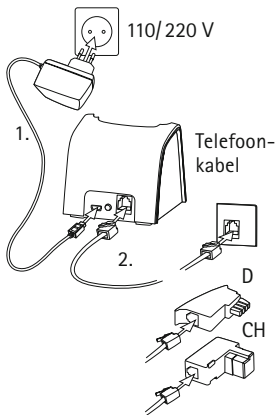


- ❗ De telefoon werkt alleen wanneer de voedingskabel in het basisstation en in het stopcontact is gestoken.

3.3 De batterij plaatsen

⚠ Gebruik uitsluitend de lithium-ion-batterij die door Phonak geleverd is, anders kan er mogelijk ernstig persoonlijk letsel en schade aan het toestel ontstaan.

1. Zorg ervoor dat de contactpunten van de batterij geplaatst zijn zoals getoond.
2. Plaats de zijde met contactpunten eerst.
3. Plaats de batterij nu volledig.
U hoort een opstartmelodietje zodra de telefoon automatisch inschakeld.
4. Plaats het batterijklepje vlak boven de batterij.
5. Klik dit vervolgens voorzichtig op zijn plaats.

i Om het batterijklepje te openen, tilt u het kleine veertje aan de onderkant eerst op en vervolgens schuift u het klepje van zijn plaats.

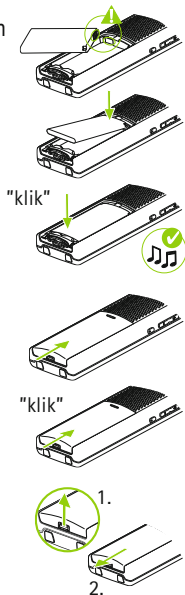


3. Aan de slag

3.4 De handset opladen

❗ De handset mag uitsluitend in het basisstation opgeladen worden.

U kunt de handset na elk gesprek in het basisstation plaatsen om de batterij op te laden.

Als er maar één streepje zichtbaar is in het batterijpictogram  (< 25%), dient u de handset zo spoedig mogelijk op te laden.

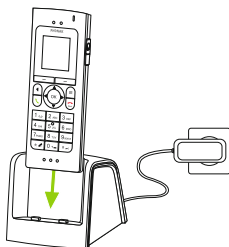

Eerste keer opladen

De weergave van de batterijstatus werkt alleen naar behoren na de eerste keer volledig opladen nadat de batterij volledig leeg is geweest.

- Plaats de handset in het basisstation en laat deze gedurende 8 uur opladen.
- Neem de handset vervolgens uit het basisstation en laad deze pas weer op als de batterij helemaal leeg is.

❗ De batterij kan warm worden tijdens het opladen.

3.5 De taal van het display wijzigen

Om de telefoon goed te laten werken, dient u de taal, het land, de tijd en de datum in te stellen.

Language	
English	✓
Deutsch	
Français	
Italiano	

Wanneer u de handset voor het eerst gebruikt, wordt u automatisch gevraagd welke taal u wilt instellen:

- Druk op ▼ om een taal uit te kiezen. Bevestig uw keuze door op OK te drukken.

❗ Druk op de toets Terug  als u een menuniveau terug wilt gaan of om de invoer te wissen.

De taal veranderen:

- Druk op de toets ► om het menu **Instellingen**



Druk op OK.

- Druk op de toets ▼ om het submenu **Taal** te openen.

Druk op OK.

- Druk op de toets ▼ om uw taal te selecteren.

Druk op OK.

3. Aan de slag

- ❗ Als u de taal voor het eerst hebt ingesteld, kunt u de telefoon testen met uw hoortoestel. Volg de instructies op het display (→ Hoofdstuk 3.8).

3.6 Datum en tijd instellen

- Druk op de toets ► om het menu **Instellingen** te openen. Druk op **OK**.
- Druk op de toets ▼ om het submenu **Datum/tijd** te openen. Druk op **OK**.



De datum/tijd instellen:

- Met de toets ▼ kiest u de **tijd** en **datum**. U kunt deze correct invoeren door de toetsen **0–9** te gebruiken (formaat uu:mm en dd.mm.jjjj).

- ❗ Met de toetsen ◀/▶ overschrijft u gegevens.

De tijd weergave instellen:

- Gebruik de toets ▼ om de **Tijd weergave** te selecteren en druk vervolgens op **OK**.
- Gebruik de toetsen ◀/▶ om de tijd weergave te selecteren.
- Indien gereed drukt u op de displaytoets **Opslaan**.

❗ De datum en tijd worden altijd opgeslagen in het basisstation. Na een stroomstoring moet u de datum en tijd opnieuw invoeren.

3.7 Locatie instellen

Let op: Om alle functies goed te laten werken, moet u het land invoeren waar de telefoon wordt gebruikt.

Het land instellen:

- Druk op de toets ► om het menu **Instellingen** te openen. Druk op OK.
- Druk op de toets ▼ om het submenu **Locatie** te openen. Druk op OK.
- Gebruik de toetsen ◀/▶ om uw land te selecteren. Druk op de displaytoets **Opslaan**.



❗ U kunt ook het **Landnummer**, **Nationaal kengetal** en het **Internat. kengetal** invoeren indien deze niet juist worden weergegeven.

3. Aan de slag

❶ Als uw land niet op de lijst voorkomt, kies dan een land met gelijksoortige telefoonomstandigheden of voor **ander land**.

❷ Wanneer u een land kiest dat de tijd weergave am/pm gebruikt, wordt deze automatisch gewijzigd. Indien u later de tijd weergave wilt wijzigen, kunt u hoofdstuk 3.6 raadplegen.

3.8 De verbinding met het hoortoestel testen

Houdt in de stand-bymodus de groene knop ingedrukt om de test te starten. Houd de telefoon tegen u oor en het tekstbericht wordt draadloos naar uw hoortoestellen verzonden.



U kunt de test ook opstarten door het menu te gebruiken:



- Druk op de toets ► om het menu **Hoortoestel** te openen. Druk op **OK**.
- Druk op de toets ▼ om het submenu **Controle verbinding** te openen. Druk op **OK**.

Zodra **Demo speelt af...** op het display verschijnt, brengt u de handset in de buurt van uw hoortoestellen (op max. 25 cm afstand van beide hoortoestellen).



❶ Houd de telefoon voor uw gezicht om te controleren of u het geluid via de draadloze verbinding hoort en niet via de microfoon van het hoortoestel.

❷ Als u van positie of de afstand verandert, wordt de verbinding mogelijk verbroken. Dat is heel normaal.

- Stel met de volumeknoppen het volume in op een aangenaam niveau.
- Druk op de displaytoets **Beëindigen** om de test te stoppen.

❸ De test stopt automatisch na 15 minuten.

De test is in het Engels, Duits, Frans of Spaans beschikbaar, afhankelijk van de taalinstellingen van de telefoon. Voor elke andere ingesteld taal wordt de test in het Engels afgespeeld.

3. Aan de slag

3.9 Bestaande contacten kopiëren

Als u reeds een DECT-compatibele draadloze telefoon heeft, kunt u eerder opgeslagen gegevens overdragen naar de Phonak DECT-telefoon.

Hiervoor moet eerst de bestaande handset gekoppeld worden aan het Phonak-basisstation. Lees de gebruiksaanwijzing van uw huidige handset en koppel deze aan het Phonak-basisstation (→Hoofdstuk 5.10).

Verplaats de contacten van uw huidige handset naar het Phonak-basisstation.

U kunt uw contacten op het Phonak-basisstation laten staan of deze naar de Phonak-handset kopiëren.

i Uw huidige telefoon moet de overdracht van contactgegevens ondersteunen. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van uw telefoon voor meer informatie.

Uw telefoon is nu gereed voor gebruik. Wat wilt u nu doen?

De taal van het display wijzigen	Hoofdstuk 3.5
Een telefoongesprek plegen en beëindigen	Hoofdstuk 4.1
Het volume instellen	Hoofdstuk 4.4
Beltonen instellen	Hoofdstuk 4.5
Een contact invoeren	Hoofdstuk 4.7
Het antwoordapparaat 'voicemail gebruiken'	Hoofdstuk 4.12
Meerdere handsets voor één basisstation	Hoofdstuk 5.10

4. Dagelijks gebruik

4.1 Een telefoongesprek plegen en beëindigen

Bellen

- Voer het telefoonnummer in dat u wilt bellen met behulp van de cijfertoetsen. U kunt een verkeerd nummer verbeteren met de displaytoets **Verwijderen**.
- Druk op de Beltoets  om te gaan bellen.



❶ Houd de Beltoets  ingedrukt om de lijn te controleren voordat u een nummer belt.

❷ Tijdens het telefoongesprek wordt op het display het gekozen nummer en de duur van het gesprek weergegeven. Als het nummer staat opgeslagen in uw contactenlijst, verschijnt de naam.

Een telefoongesprek beëindigen

Om het telefoongesprek te beëindigen, drukt u op de Ophangtoets .

Een telefoongesprek accepteren

Behalve aan de beltoon kunt u een binnenkomende oproep ook herkennen aan het knipperende indicatorlampje en aan de trilfunctie (indien ingeschakeld).

Druk op de Beltoets  om een binnenkomend telefoongesprek te beantwoorden.

 Wanneer de telefoon rinkelt, kunt u deze op stil zetten met de displaytoets **Stil**.

Automatisch beantwoorden van een oproep

Als u de handset van het basisstation oppakt, beantwoordt u automatisch een oproep. U kunt deze functie in- en uitschakelen:




- Druk op de toets  om het menu **Instellingen** te openen. Druk op .
- Druk op de toets  om het submenu **Basis** te openen. Druk op .
- Gebruik de toetsen / om automatisch opnemen **Aan** of **Uit** te zetten.
- Druk op de displaytoets **Opslaan** om de instellingen op te slaan.

4. Dagelijks gebruik

4.2 De microfoon van de handset dempen

U kunt de microfoon van de handset tijdens een gesprek uitschakelen met de displaytoets **Mic. stil**. De persoon tegen wie u spreekt, kan u dan niet meer horen.

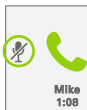

Om de microfoon weer in te schakelen, drukt u nogmaals op **Mic. stil**.

4.3 Bellen met Phonak-hoortoestellen

- ① Telefoongesprekken kunnen alleen draadloos worden verzonden met Phonak hoortoestellen.
- ① De hoortoestellen of de telefoon hoeven niet speciaal geconfigureerd te worden. Uw audicien kan echter wel het telefoonprogramma fijnafstellen.
- ① Als het u niet lukt om verbinding te maken tussen de telefoon en de hoortoestellen, dient u contact op te nemen met uw audicien.

Verbinding maken met uw hoortoestellen

Houd tijdens een telefoongesprek de handset in de buurt van uw hoortoestellen (op max. 25 cm afstand van beide hoortoestellen).

De hoortoestellen schakelen automatisch naar het telefoonprogramma. Afhankelijk van de instellingen van uw hoortoestellen, hoort u een geluidje.

❶ U moet zelf iemand opbellen wil de draadloze verbinding met het hoortoestel werken. Als de handset in de handsfree-modus staat of wordt gebruikt in combinatie met een headset, wordt de draadloze verbinding uitgeschakeld.

❷ Als uw hoortoestellen de draadloze technologie van Phonak niet ondersteunen, kunt u dit nog steeds gebruiken in combinatie met een luisterspoeltelefoonprogramma om de geluidskwaliteit te verbeteren.

4. Dagelijks gebruik

De handset goed vasthouden

De microfoonopeningen aan de onderkant van handset vangen uw stem op. Houd de handset dicht bij uw mond.



De handset verzend het telefoongesprek gelijktijdig draadloos naar uw hoortoestellen en de speaker van de handset. Mocht u de geluidskwaliteit als niet prettig ervaren, dan kunt u het bovenste gedeelte van de handset een klein stukje van uw oor af houden.


De verbinding met uw hoortoestellen verbreken

Als u de handset van uw hoortoestellen af beweegt, het gesprek beëindigt of overschakelt naar handsfree-modus, schakelen de hoortoestellen automatisch over naar het hoorprogramma dat u als laatste gebruikte.

- ❶ Het overschakelen kan 1 tot 3 seconden duren, afhankelijk van het model hoortoestel.

4.4 Het volume instellen

Met de volume omhoog/omlaag-toetsen **+/-** aan de zijkant past u het volume tijdens een telefoongesprek aan.

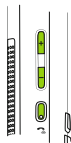


De volume-instelling verschijnt kort op het display en wordt automatisch opgeslagen.



- ❶ De volume-instelling beheert ook gelijktijdig het akoestisch en draadloze signaal.

De volumeversterkingstoets

Door op de zijkant op de volumeversterkingstoets te drukken tijdens een telefoongesprek, levert de handset tot wel 15 dB extra volume naast het normale volume. Er verschijnt dan een pictogram van een hoorn met streepjes op het display.

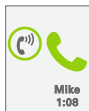

Stel het volume voor de volumeversterkingsmodus in met behulp van de toetsen volume omhoog/omlaag **+/-**.



- ❶ Deze modus is niet beschikbaar voor de handsfree-modus of wanneer er een headset wordt gebruikt.

4. Dagelijks gebruik

Als u nogmaals op de volumeversterkingstoets  drukt, schakelt de telefoon over op het normale volumebereik en het pictogram voor het versterken van het volume verdwijnt.

Een nieuw telefoongesprek start altijd in de normale volumemodus.

-  Vertel andere personen die gebruik maken van deze telefoon over deze instelling. Goedhorenden kunnen het volume te hard vinden.

4.5 Beltonen instellen

-  Beltonen worden niet draadloos naar uw hoortoestellen verzonden.

Kies uw eigen beltonen in het menu Audio instell.:

- Druk op de toets  om het menu **Audio instell.** te openen. Druk op .
- Druk op de toets  om het submenu **Beltonen** te openen. Druk op .
- Druk op de toets  om bij **Externe oproep** te komen. Druk op .



Kies uw instellingen uit:

■ **Beltoon**

Kies een beltoon uit de lijst van **1–12**, die u duidelijk zonder hoortoestellen kunt horen.

■ **Volume**

Stel het volume van de beltoon in **1–5**, zodat dit prettig voor u en uw omgeving is.

■ **Oplopend**

Kies voor **Aan** voor een beltoon die in volume toeneemt tijdens het rinkelen.

■ **Vertraging**

Stel de in hoeveel de beltoon vertraagd moet worden vanaf het moment dat de oproep binnenkomt.

Druk op de displaytoets **Opslaan** om de instellingen op te slaan.



Het volume van de beltoon kan worden ingesteld in de stand-bymodus met behulp van de toetsen volume omhoog/omlaag **+/-**. Hiermee verandert het volume voor interne oproepen vanaf andere handsets.




4. Dagelijks gebruik

4.6 De handset in- en uitschakelen

Stand-bymodus

Druk op de toets Terug  totdat het display in de stand-bymodus gaat. De handset gaat na 1 minuut automatisch in de stand-bymodus.

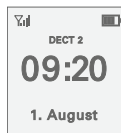

De handset uitschakelen

- Houd de toets Terug  ingedrukt (2 sec.) in de stand-bymode totdat het display het Phonak-logo toont.

De handset inschakelen

- Druk op de toets Ophangen/Terug  of plaats de handset in het basisstation.

 Het Phonak-logo verschijnt op het display en u hoort de opstartmelodie van Phonak.

4.7 Een contact invoeren

De telefoon kent 2 contactlijsten. Eén in het basisstation en de andere op de handset.



Handset

- Alle contacten die opgeslagen staan onder **Contacten** → **Handset**, zijn alleen zichtbaar op deze handset.
- U kunt maximaal 100 contactpersonen opslaan met elk 3 telefoonnummers.
- U kunt de beltoon en het volume afzonderlijk instellen voor elke contactpersoon.

Basisstation

- Alle contacten die opgeslagen staan onder **Contacten** → **Basis**, zijn zichtbaar voor alle handsets die zijn gekoppeld aan het basisstation.
- U kunt maximaal 200 contactpersonen opslaan met elk 3 telefoonnummers.

❶ We raden u aan om uw contactpersonen altijd in dezelfde contactenlijst op te slaan. Zo kunt u uw contacten op een later moment eenvoudiger terugvinden.

4. Dagelijks gebruik

❶ Aanbeveling: als u maar één handset in combinatie met het basisstation gebruikt, kies dan **Contacten handset**. Als u meerdere handsets gebruikt in combinatie met één basisstation (→ Hoofdstuk 5.10), kies dan **Contacten basis**.

❷ U kunt op een later moment contacten uitwisselen tussen de contactlijsten.

Een contact invoeren



- Druk op de toets ► om het menu **Contacten** te openen. Druk op OK.
- Gebruik de toets ▼ om te kiezen tussen **Contacten handset** of **Contacten basis**, druk daarna op OK.
- Druk op de toets ▼ om bij **+ nieuwe vermelding** te komen. Druk op OK.
- Voer de contactgegevens in met behulp van de nummers en cijfers **A-Z/0-9**.

❶ Als u de nummers op de handset opslaat, kunt u tevens de **Beltoon** en het **Volume** instellen van de beltoon voor deze contactpersoon ◀/▶ (de **Standaard** instelling betekent dat de algemene instellingen gebruikt worden → Hoofdstuk 4.5).

- Afhankelijk van het veld dat u bewerkt, dient u de contactpersoon of eventuele wijzigingen rechtstreeks op te slaan met de displaytoets **Opslaan** of gebruik **Optie** → **Opslaan**.

❶ Als u tekens invoert, kunt u met de toets  kiezen of u hoofdletters of kleine letters invoert. Met de toetsen **1** en **0** kunt u speciale tekens invoeren.

4. Dagelijks gebruik

4.8 Contacten opzoeken

Snelkeuze

Gebruik de cijfer-/lettertoetsen om rechtstreeks naar de eerste letter te gaan van de naam van uw contactpersoon in de contactenlijst. Druk hiervoor in stand-bymodus op de bijbehorende letter en houd de toets even ingedrukt.

Voorbeeld: Houd de toets **7** (P, Q, R, S) ingedrukt om naar de contactenlijst te gaan voor de letter P. Druk onmiddellijk nogmaals op de toets **7** om naar de letter Q, R of S te gaan.

 Stel uw standaardcontactenlijst in zoals beschreven staat in Hoofdstuk 5.3.

Openen via het menu Contactpersonen




- Druk op de toets **►** om het menu **Contacten** te openen. Druk op **OK**.
- Druk op de toets **▼** om de contactenlijst te selecteren (**Contacten handset**, **Contacten basis** of **Interne oproep**, druk vervolgens op **OK**.)
- Gebruik de pijltjestoetsen **▼/▲** om te zoeken naar de gewenste contactpersoon.

❗ U kunt ook direct op naam zoeken, bijvoorbeeld Mike, door op toets **6** (voor 'M') te drukken. Alle namen die beginnen met een 'M' zullen dan verschijnen. Druk nu snel 3 keer achter elkaar kort op de **4** (=G, H, I). Nu verschijnt er 'MI' in het scherm.

- Druk op **OK** wanneer u de naam gevonden hebt. Druk vervolgens op **▼** tot het nummer dat u wilt bellen gemarkeerd staat en druk vervolgens op **OK** om het nummer te bellen.

4.9 Een zoekgeraakte handset terugvinden

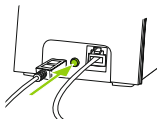

Als de handset is ingeschakeld en binnen bereik is van het basisstation, drukt u op de knop **Koppelen**. Deze bevindt zich op de achterkant van het basisstation.

Elke gekoppelde handset rinkelt dan op hetzelfde moment, zelfs als de beltoon uitgeschakeld is.

- Beëindig het rinkelen voor elke handset afzonderlijk met de toets Ophangen .
- Druk opnieuw op **Koppelen** om het rinkelen van alle handsets stop te zetten.

4. Dagelijks gebruik

4.10 De lijst met bellers gebruiken

U kunt de laatste 150 binnengekomen, uitgaande of gemiste oproepen zien in het menu **Oproepen** :

- Druk op de toets ► om het menu **Oproepen** te openen. Druk op .
- Gebruik de toets ▼ om **Gemiste, Ontvangen, Uitgaande** of **Alle oproepen** te selecteren. Druk op .
- Gebruik de toets ▼ om het gewenste nummer uit te kiezen.



 Druk op de toets Bellen  om rechtstreeks toegang te krijgen tot de lijst met alle oproepen.

 Voor nummers die in de contactenlijst staan opgeslagen, wordt de naam van de persoon, in plaats van het nummer, weergegeven.

- Druk op  om te gaan bellen.

 Om de lijst met bellers correct weer te kunnen geven, dient de nummerherkenning goed te werken. Uw netwerk provider kan u hier meer informatie over verstrekken.

U kunt contactpersonen bewerken met de displaytoetsen:

- **Verwijderen**: Verwijdert de huidige vermelding in de bellerslijst (de vermelding in de contactenlijst wordt niet verwijderd).
- **Optie** → **Opslaan**: Hiermee slaat u de huidige contactpersoon op in de contactenlijst.
- **Optie** → **Alle verwijderen**: Verwijdert alle vermeldingen in de bellerslijst (de vermeldingen in de contactenlijst worden niet verwijderd).

4.11 Het inboxmenu gebruiken



Als u een oproep gemist hebt, een bericht op uw antwoordapp. of andere meldingen hebt, verschijnt de menu-optie **Inbox** in het hoofdmenu en knippert het indicatorlampje.

Met de toets **OK** opent u de lijst met meldingen; volg dan de instructies op het display.

4.12 Antwoordapparaat 'Voicemail'

De voicemail instellen



Voicemail is het antwoordapparaat van het netwerk van uw provider.

- i** U kunt de voicemail alleen gebruiken wanneer u die dienst hebt aangevraagd bij uw netwerk provider.

Instellen:

- Druk op de toets ► om het menu **Instellingen** te openen. Druk vervolgens op **OK**.
- Gebruik de toets ▼ om het submenu **Voicemail** te openen. Druk vervolgens op **OK**.
- Vraag uw netwerk provider om het nummer van de voicemail en noteer dit in het veld **Nummer**.
- Druk op de displaytoets **Opslaan** om de instellingen op te slaan.



- i** Als het nummer later wijzigt, kunt u het overschrijven.



Dagelijks gebruik van de voicemail

Als er een bericht voor u klaarstaat, wordt er een melding met het aantal ontvangen berichten weergegeven.

- Houd de toets  ingedrukt (2 sec.) om het nummer van de voicemail te bellen.
- U kunt nu uw berichten beluisteren. Volg de voicemailinstructies op van uw netwerk provider.

① Wanneer u het display bekijkt of op de toetsen drukt, kan de verbinding met uw hoortoestellen tijdelijk worden verbroken. Schakel naar de handsfree-modus met de handsfree-toets .


① De netwerk provider beheert uw voicemail. Neem voor meer informatie contact op met uw netwerk provider.

4. Dagelijks gebruik

4.13 Extra functies tijdens het gebruik van de telefoon

Handsfree

U kunt de handsfree modus tijdens een telefoongesprek in- en uitschakelen. Druk hiervoor op de luidsprekertoets . Met de toetsen **+**/**-** past u het volume aan.

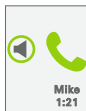

❶ Het gesprek wordt niet draadloos naar uw hoortoestellen verzonden wanneer de handsfree modus ingeschakeld is!

❷ Als u wilt dat er iemand meeluistert naar het gesprek, vertel dit dan aan de beller.

❸ De handsfree-modus wordt uitgeschakeld als u op de Volumeversterkingstoets drukt.



5. Handsetinstellingen

Gebruik van een headset

U kunt bellen met behulp van een hoofdtelefoon of een headset die aangesloten is op de 3,5 mm-aansluiting van uw handset.

Steek de stekker in de zijkant van uw handset.

Er verschijnt dan een pictogram van een headset op het display.

- ① Als u een hoofdtelefoon zonder microfoon gebruikt, wordt de microfoon van de handset gebruikt.
- ① Als u een headset met een microfoon gebruikt, moet deze compatibel met Apple zijn.
- ① Zolang de headset aangesloten is, wordt er geen draadloze verbinding gemaakt met uw hoortoestellen.

5. Handsetinstellingen

5.1 De toetsvergrendeling activeren

Met de toetsvergrendeling voorkomt u ongewenst of toevallig gebruik van de handset.

Vergrendelen: Houd de toets  ingedrukt (2 sec.) in de stand-bymode totdat het display **Ontgrendel toestel met #**.



Het vergrendelingssymbool  op het display geeft aan dat de handset vergrendeld is.

Ontgrendelen: Houd de toets  ingedrukt (2 sec.) in de stand-bymode totdat het display **Toestel ontgrendeld** weergeeft.




❗ U kunt nog steeds het alarmnummer bellen wanneer de toetsen vergrendeld zijn. Het alarmnummer kan per land verschillen. Vergeet niet om de locatie in te stellen (→ Hoofdstuk 3.7).

❗ U kunt nog steeds binnenkomende gesprekken beantwoorden wanneer de toetsen vergrendeld zijn.

5.2 Beltonen in-/uitschakelen

Beltoon uit: Houd de toets  ingedrukt (2 sec.) in de stand-bymode totdat het display **Beltoon uit** weergeeft.

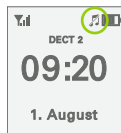

Beltoon aan: Houd de toets  ingedrukt (2 sec.) in de stand-bymode totdat het display **Beltoon aan** weergeeft.

Het beltoonpictogram  op het display geeft aan dat de beltonen uitgeschakeld zijn.

- ① Ook met de toetsen aan de zijkant **+/-** of via **Audio instel.** kunt u de beltonen dempen. Het beltoonpictogram  wordt in dit geval niet weergegeven.

5. Handsetinstellingen

5.3 Overige functies van de contactenlijst

De contactenlijst voor snelkeuze instellen

Gebruik **Instellingen** → **Contacten** → **Snelkeuze met** om te selecteren welke contactenlijst (handset, basisstation of intern) u wilt gebruiken voor Snelkeuze.

De sorteervolgorde van contactpersonen instellen

Gebruik **Instellingen** → **Contacten** → **Sorteervolgorde** om contacten te rangschikken op **Naam**, **voornaam** of **Voornaam, naam**.

Hoofdletters en kleine letters instellen

Wanneer u tekst typt, kunt u kiezen tussen hoofdletters en kleine letters. Druk tijdens het typen op de toets  om de gewenste modus te selecteren.

Abc	Alleen de eerste letter wordt met een hoofdletter geschreven
ABC	Alle letters worden met een hoofdletter geschreven
abc	Kleine letters

Als u een spatie wilt invoegen, druk dan op de toets **0+**.

Contacten bewerken

U kunt opgeslagen contacten bewerken, verwijderen, deze kopiëren van de handset naar het basisstation of andersom. Zoek hiervoor de contactpersoon op in de contactenlijst en kies welke actie u wilt uitvoeren:

- **Aanpassen** om deze contactpersoon te wijzigen of om een nieuw nummer toe te voegen.
- **Optie.** → **Verwijderen** om de contactpersoon te verwijderen.
- **Optie.** → **Kopiëren** om een contactpersoon van de handset naar het basisstation te kopiëren of andersom.
- **Optie.** → **Alle kopiëren** om alle contacten van de handset naar het basisstation te kopiëren of andersom.
- **Optie.** → **Alle verwijderen** om alle contacten van uw huidige contactenlijst te verwijderen.

❗ Als u op Ja drukt, bevestigt u dat alle contacten op uw huidige contactenlijst permanent verwijderd mogen worden! Zelfs Phonak kan deze contactpersonen dan niet meer terughalen.

5. Handsetinstellingen

5.4 Overige instellingen van de handset

Het display aanpassen

U kunt het display aanpassen via **Instellingen** →

Weergave:

- Kies de gewenste achtergrondkleur via **Achtergrond** → **Wit** of **Grijs**.
- **Verlichting** → **Op basis** en **Niet op basis**: Met deze functie kunt u instellen of het display na een minuut donker wordt of zachtjes licht blijft geven. U kunt dit afzonderlijk instellen wanneer de handset zich in of uit het basisstation bevindt.
- Kies voor **Nachtmodus** voor weinig verlichting zodat u hier 's nachts niet door gestoord wordt.

i Als de verlichting volledig wordt uitgeschakeld, gaat de batterij circa 10% langer mee.

De functietoets instellen



U kunt in **Instellingen** → **Functietoets** een specifieke functie toewijzen aan de functietoets met behulp van de toets ◀/▶. Hiermee wordt een van de volgende functies dan direct geopend:

- **Snelkeuzetoets**: sla een belangrijk nummer op en bel deze direct.
- **Intern**: als er meerdere handsets zijn gekoppeld aan het basisstation, kunt u deze rechtstreeks bellen.
- **Gedeactiveerd**: deze instelling betekent dat er geen functie is toegewezen aan de functietoets.
- **Lijnselectie**: deze functie is niet beschikbaar voor het Phonak DECT-basisstation.

5. Handsetinstellingen

Indicator-tonen in- en uitschakelen

Via **Audio instel.** → **Indicator-tonen** kunt u deze in- en uitschakelen:

- Met de toets ▼ kiest u de beltonen en u zet de indicatoren **Aan** of **Uit** met de toetsen ◀/▶.
- Druk op de displaytoets **Opslaan**.

Trilstand instellen

De handset trilt wanneer er verschillende dingen gebeuren. U kunt dit instellen via **Audio instel.** → **Trilfunctie**.

- Met de toets ▼ kiest u gebeurtenis en u zet u deze **Aan** of **Uit** met de toetsen ◀/▶. Voor sommige opties kunt u de sterkte van de trillingen selecteren.
- Druk op de displaytoets **Opslaan**.

5.5 Wekker

U kunt maximaal 4 alarmtijden instellen op uw handset.

Een wekker instellen

- Selecteer in het hoofdmenu **Wekker** en druk op . 
- Kies een van de 4 alarmen met de toets ▼ en druk vervolgens op .
- Gebruik de knoppen ◀/▶ om de **Modus** van de wekker in te stellen:
 - **Eenmalig**: Het alarm gaat één keer af wanneer de ingestelde tijd bereikt is.
 - **Terugkerend**: Het alarm gaat iedere keer af dat de ingestelde tijd bereikt is.
Als de wekker ingesteld is op **Terugkerend**, kunt u met de toetsen ▲/▼ de dag(en) waarop het alarm moet afgaan instellen (**maandag** t/m **zondag**).
- **Uit**: Het alarm is uitgeschakeld.

5. Handsetinstellingen

- **Tijd:** Met de cijfertoetsen kunt u de alarmtijd instellen. Wijzig uw invoer met behulp van de toetsen ◀/▶.
- **Naam:** Deze naam verschijnt in de alarmlijst en wordt weergegeven wanneer het alarm afgaat. Voeg een nieuwe naam toe met de letters op de toetsen. Druk op **Verwijderen** om een correctie te maken. Als u letters wilt toevoegen, gebruik dan de toetsen ◀/▶ en voor een spatie gebruikt u de toets **0**.
- **Beltoon:** Gebruik de toetsen ◀/▶ om een beltoon te selecteren.

Druk op de displaytoets **Opslaan** om de instellingen op te slaan.

❶ Stel andere alarmen op dezelfde manier in.

❶ Let op: de wekker werkt alleen als

- de tijd en datum correct zijn ingesteld;
- tevens moet de batterij van de handset nog voldoende geladen zijn (min. 25% .

Alarmpictogram op het display

Als er een alarm actief is verschijnt het pictogram . Het alarmpictogram in het hoofdmenu toont hoeveel alarmen er actief zijn.



In de lijst met alarmen worden actieve alarmen voorzien van een vinkje. Als u een alarm selecteert met de toets , wordt ook de alarmtijd weergegeven.

Mike Info	
09:10	
Mike Test	
	

Alarmen uitschakelen


- Selecteer het alarm dat u wilt uitschakelen door **Wekker** → **Wekker [1–4]** → **Modus** te gaan en deze op **Uit** te zetten met behulp van de toetsen /.
- Druk op de displaytoets **Opslaan** om de instelling op te slaan.

 Als alle alarmen uitgeschakeld zijn, verdwijnt het pictogram  op het display.

5. Handsetinstellingen

5.6 De riemclip bevestigen

Voor het bevestigen van de riemclip hebt u een kleine schroevendraaier met een kruiskop nodig om de bevestigingsschroeven vast te kunnen draaien.

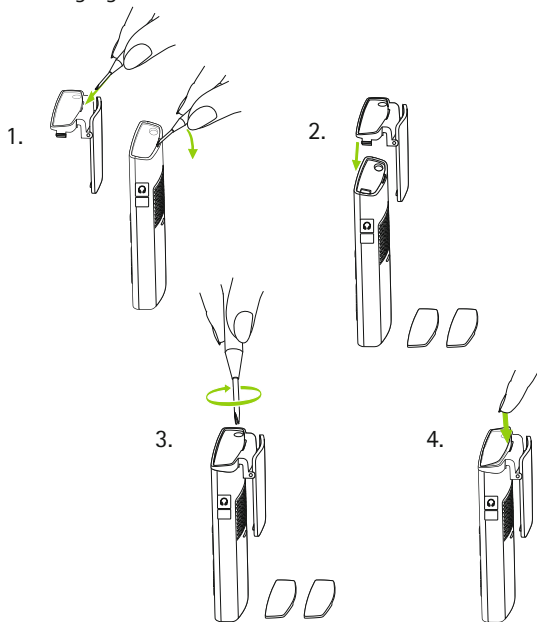

5.7 Indicator voor signaalsterkte

De streepjes naast het pictogram van de antenne geeft de signaalsterkte tussen het basisstation en de handset weer. De signaalsterkte hangt af van de afstand en eventuele obstakels tussen deze twee elementen. Over het algemeen bedraagt de maximale afstand tot het basisstation in huis 50 meter en in de buitenlucht 300 meter.

Sterk tot zwak signaal



Plek met een zwak ontvangstsignaal



knippert

Geen ontvangstsignaal, basisstation niet gevonden



(rood)

Ecomodus actief (→ Hoofdstuk 5.8)



❶ Als de signaalsterkte zwak is, dient u de afstand tussen de handset en het basisstation te verkleinen.

❶ Plaats het basisstation op een centrale plek (gelijk bereik voor alle handsets).

5. Handsetinstellingen

5.8 Ecomodus

❗ De Ecomodus kan alleen in Europa geactiveerd worden.

❗ Het menu Ecomodus is alleen beschikbaar wanneer de handset verbonden is met het basisstation.

In de Ecomodus wordt de verbinding tussen het basisstation en de handset uitgeschakeld wanneer er niet gebeld wordt.

De Ecomodus in- en uitschakelen

- Druk op de toets ► om het menu **Instellingen** te openen. Druk vervolgens op **OK**.
- Druk op de toets ▼ om bij **ECO mode** te komen. Druk op **OK**.
- Druk op de toets ► om de **Full ECO mode Aan** te zetten.
- Druk op de displaytoets **Opslaan**.
- In plaats van het pictogram voor bereik  wordt het pictogram voor Ecomodus  op het display weergegeven.



❗ De signaalsterkte wordt niet weergegeven als de handset in de Ecomodus staat. Controleer de verbinding met het basisstation door 2 seconden op de Beltoets  te drukken. Als het basisstation zich binnen het bereik bevindt, hoort u de kiestoon.

❶ Als de Ecomodus  ingeschakeld is, moet u ongeveer 2 seconden wachten voordat u kunt bellen.

❶ Het batterijverbruik in de stand-bymodus is ongeveer 50% groter dan het batterijverbruik in de Ecomodus.

❶ Alle telefoons die gekoppeld zijn aan het basisstation, moeten de Ecomodus ondersteunen.

5.9 Weergave van batterijstatus

Het batterijpictogram betekent:

	Batterij wordt opgeladen
	100%
	75%
	50%
	25%
	Leeg

❶ Wanneer de batterijstatus onder de 25%  komt, moet u de handset opladen.

5. Handsetinstellingen


5.10 Meerdere handsets voor één basisstation

Er kunnen maximaal 6 handsets gekoppeld worden aan het basisstation.

- ❶ De handset en het basisstation die samen in de verpakking zaten, zijn al gekoppeld. Dit hoeft u dus niet nog een keer te doen.

Een extra handset aanmelden

- Selecteer op de handset **Instellingen** → **Aan-/afmelden** → **Aanmelden**.
- Houd op de achterkant van het basisstation de knop **Koppelen** (2 sec.) ingedrukt.
- Wacht enkele seconden tot het op het display wordt getoond dat het koppelen gelukt is.

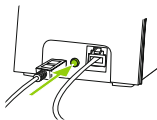

- ❶ De standaard pincode voor het basisstation is "0000".

- ❶ Het is mogelijk om andere DECT-handsets te koppelen aan het basisstation die compatibel zijn met GAP. Phonak garandeert echter dat alleen originele Phonak DECT CP1- en Phonak DECT II-handsets goed werken.

❶ GAP (Generic Access Protocol) is een technologie die garandeert dat draadloze handsets en een basisstation compatibel zijn met elkaar.

❶ U dient meer dan één draadloze telefoon te koppelen aan het basisstation voor de volgende functies!

De naam van de handset instellen

Zodra er meer dan één handset aan hetzelfde basisstation is gekoppeld, wordt de interne naam van de handset, bijv. DECT 1, weergegeven in stand-bymodus.

- U kunt de namen wijzigen via **Instellingen** → **Handset** → **Deze handset**.

❶ U kunt tevens aangeven of deze handset een lopend telefoongesprek kan overnemen of niet.

Interne oproepen plegen

- U kunt een andere handset die gekoppeld is aan dit basisstation gratis bellen via **Contacten** → **Interne oproep**.

Iemand in de wacht zetten tijdens het bellen

Tijdens een gesprek kunt u met de displaytoets **Optie** → **Interne oproep** een andere handset bellen (bijv. 'DECT 5') die aangesloten is op hetzelfde basisstation.

5. Handsetinstellingen

Als iemand de interne oproep beantwoordt op handset 'DECT 5', wordt de externe beller 'Mike' in de wacht gezet; hij kan het gesprek niet horen.



Wisselgesprek

Met de displaytoets **Optie** → **Wisselgesprek** kunt u net zo vaak als u wilt wisselen tussen 'Mike' en 'DECT 5'.



Een gesprek intern doorverbinden

Via **Optie** → **Verplaatsen** kunt u de 2 lijnen 'Mike' en 'DECT 5' met elkaar verbinden en de verbinding met uw eigen handset verbreken.

Conference calls (telefonisch overleg)

Als alle 3 de deelnemers met elkaar willen spreken, selecteer dan **Optie** → **Conferentie**. Alle deelnemers kunnen elkaar nu horen en met elkaar spreken.



Druk op de toets Ophangen  om het actieve gesprek te beëindigen.

5.11 Een bestaand basisstation gebruiken

Als u al beschikt over een GAP compatibel DECT-basisstation, kunt u de Phonak-handset hieraan koppelen.

Hiervoor dient u de koppelprocedure te volgen die beschreven staat in hoofdstuk 5.10, maar houd de koppelknop op uw bestaande basisstation wel ingedrukt. Voer de beveiligingscode voor dit basisstation, indien vereist (raadpleeg de instructiehandleiding van uw bestaande basisstation).

- ① Het Phonak-basisstation werkt nu als een oplader voor de handset. Het dient aangesloten te zijn op het stroomnet. U hebt de telefoonkabel niet meer nodig.

5.12 De batterij vervangen

Als de batterij aanzienlijk minder goed werkt na verloop van tijd, dient u de batterij te vervangen.

 Gebruik alleen de oorspronkelijke batterij (Li-Ion 3.7 V, type: CE-MB 206-5C-01, 1100 mAh).

Open het batterijklepje zoals beschreven staat in hoofdstuk 3.3 om de batterij te vervangen.

6. Pincodes en instellingen resetten

6.1 Pincodes wijzigen

De standaardpincode is '0000'. Indien u deze wilt wijzigen gaat u naar:

- **Instellingen** → **Beveiliging** → **Basis PIN**, voer de huidige pincode '0000' bevestig door op  te drukken.
- Voer uw eigen pincode in en bevestig door op  te drukken.
- Ga naar **Instellingen** → **Beveiliging** → **Handset PIN**, voer de correcte code in voor de handset en druk op  om te bevestigen.

 Als u de pincode vergeet, kunt u deze resetten zoals beschreven staat in hoofdstuk 6.3.

6.2 Uw instellingen resetten

U kunt alle instellingen voor het basisstation en de handset resetten via **Instellingen** → **Inst. terugzetten**.


 De pincode en het telefoonboek worden niet gereset.

6. Pincodes en uw instellingen resetten

- Voer de oorspronkelijk pincode '0000' in of de pincode die u zelf ingesteld hebt.

6.3 De pincode van het systeem resetten

Als u de pincode van het systeem vergeten bent, dient u het hele toestel te resetten.

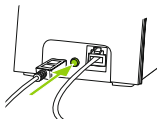

- Houd de knop **Koppelen** aan de achterkant van het basisstation ingedrukt en steek tegelijkertijd de stroomkabel opnieuw in het basisstation.
- Houd de knop **Koppelen** minimaal 5 seconden ingedrukt.

❗ Als u wilt dat uw telefoon weer goed werkt, dient u de instellingen opnieuw in te voeren, zoals beschreven staat in hoofdstuk 3.5 en verder.

❗ Zorg ervoor dat u de contactenlijst op de telefoon is verwijderd (→ Hoofdstuk 5.3) voordat u de telefoon aan iemand anders geeft.

7. Problemen oplossen

Oorzaken	Wat te doen?	Hoofdstuk
Het display geeft geen licht.		
■ Batterij niet geplaatst	■ Plaats batterij	3.3
■ Batterij is helemaal leeg	■ Plaats de handset in de oplader	3.4
■ Handset is niet ingeschakeld	■ Zet de handset aan	4.6
Het display is slechts zwak verlicht		
■ Batterij is bijna leeg	■ Plaats de handset in de oplader	3.4
■ Displayverlichting is uitgeschakeld	■ Pas het display aan	5.4
Indicatorlampje knippert constant groen		
■ Gemiste oproep ■ Belangrijke instelling ontbreekt	■ Kijk of u berichten hebt in het menu Inbox	4.11
Batterij gaat niet lang mee		
■ Eerste keer opladen niet uitgevoerd	■ Volledig opladen/ontladen	3.4
■ Batterij is erg oud	■ Vervang batterij	5.12

7. Problemen oplossen

<i>Oorzaken</i>	<i>Wat te doen?</i>	<i>Hoofdstuk</i>
Geluid wordt niet verzonden naar hoortoestellen		
■ Hoortoestellen zijn uitgeschakeld ■ Te ver van handset	■ Hoortoestellen aanzetten ■ Breng de handset dichterbij het hoortoestel	4.3
Het volume is te luid		
■ Versterkingsmodus staat aan ■ Beltonen zijn te luid	■ Druk nogmaals op de Volumeversterkingstoets ■ Stel het volume in	4.4 4.5
Geen geluid uit handset		
■ Headset aangesloten ■ Volume te zacht	■ Koppel de headset los ■ Verhoog het volume	4.4 4.4
Telefoon rinkelt niet		
■ Beltonen zijn uitgeschakeld ■ Beltonen zijn te zacht	■ Zet de beltonen aan ■ Verhoog het volume	5.2 4.5
Naam niet gevonden in contactenlijst		
■ Er zijn 2 contactenlijsten	■ Selecteer de correcte contactenlijst	4.8

<i>Oorzaken</i>	<i>Wat te doen?</i>	<i>Hoofdstuk</i>
Nummer van beller wordt niet getoond		
■ Dienst wordt niet ondersteund door netwerk provider	■ Vraag uw netwerk provider of deze nummerherkenning ondersteunt	4.12
Ik kan de voicemail niet vinden		
■ Voicemail is niet geactiveerd	■ Raadpleeg netwerk provider om voicemail te activeren	4.12
■ Het nummer van de voicemail is niet geprogrammeerd	■ Programmeer het nummer	4.12

U kunt andere vragen en antwoorden (FAQ's) vinden op onze website www.phonak.com/dect.

8. Informatie over de veiligheid van het product

- ❶ Bescherm de apparaataansluitingen, stekkers, de oplaadpoort en de voedingsadapter tegen vuil.
- ❶ Dompel het apparaat nooit onder in water! Bescherm het tegen extreme vochtigheid. Gebruik dit apparaat nooit in de douche, in bad of het zwembad, aangezien het apparaat gevoelige, elektronische onderdelen bevat.
- ❶ Bescherm het apparaat tegen hitte (laat deze nooit dicht bij het raam liggen). Gebruik nooit een magnetron of ander verwarmingsmateriaal om het apparaat te drogen.
- ❶ Laat het apparaat niet vallen! Het apparaat kan beschadigd raken wanneer het valt op een hard oppervlak.
- ❶ Maak het apparaat schoon met een vochtige doek. Gebruik nooit huishoudelijke schoonmaakmiddelen (waspoeder, zeep, enz.) of alcohol om het apparaat te reinigen.

① Speciale medische en tandheelkundige onderzoeken waarbij blootstelling aan straling noodzakelijk is, kunnen de juiste werking van het apparaat beïnvloeden. Houd het buiten de onderzoeksruimte tijdens voor te starten met een:

- Medisch of tandheelkundig onderzoek met röntgenstraling (inclusief CT-scan).
- Medisch onderzoek met MRI/NMRI-scans waarbij magnetische velden worden gegenereerd.

① Wanneer u het apparaat nabij computers, grotere elektronische installaties, sterke elektromagnetische velden of metalen constructies gebruikt, kan het werkingsbereik veel kleiner zijn. U dient zich mogelijk op minimaal 60 cm te bevinden van het interfererende apparaat om de goede werking te waarborgen.

① Als de hoortoestellen niet op het apparaat reageren vanwege ongewone veldstoringen, dient u het storingsveld te verlaten.

9. Service en garantievoorwaarden

9.1 Plaatselijke garantie

Informeer bij de audicien bij wie u uw Phonak DECT-telefoon hebt aangeschaft, naar de voorwaarden van de plaatselijke garantie.

9.2 Wereldwijde garantie

Phonak biedt u vanaf de verkoopdatum een beperkte, wereldwijde garantie van een jaar. Deze beperkte garantie geldt voor fabrieks- en materiaalfouten. De garantie is alleen geldig op vertoon van een aankoopbewijs.

De internationale garantie heeft geen invloed op eventuele wettelijke rechten waarop u aanspraak kunt maken op basis van nationale wetgeving op het gebied van de verkoop van consumentenartikelen.

9.3 Garantiebeperking

Er bestaat geen recht op garantie bij normale slijtage, onjuiste behandeling of onderhoud, chemische invloeden, binnengedrongen vocht of overbelasting. Bij schade die door derden of niet-geautoriseerde servicewerkplaatsen is veroorzaakt, vervalt de garantie. Deze garantie omvat geen servicewerkzaamheden die verricht worden door een audicien in zijn werkplaats.

Serienummer:

Erkende audicien
(stempel/handtekening):

Aankoopdatum:

10. Conformiteitsverklaring

Europa:

Conformiteitsverklaring

Phonak AG verklaart hierbij dat dit Phonak-product voldoet aan de essentiële vereisten uit de Richtlijn inzake radioapparatuur 2014/53/EU. De volledige tekst van de Conformiteitsverklaring is verkrijgbaar op www.phonak.com.

Australië/Nieuw-Zeeland:



R-NZ

Geeft aan of een apparaat voldoet aan het betreffende radiospectrumbeheer (RSM) en aan de wetgevingen van de Australische communicatie- en media-autoriteit (ACMA) voor de wettelijke verkoop in Nieuw-Zeeland en Australië.

Het nalevingsetiket R-NZ is voor radioproducten die worden geleverd voor de Nieuw-Zeelandse markt onder conformiteitsniveau A1.

VS en Canada:

1. Dit apparaat voldoet aan Deel 68 van de FCC-regels en de vereisten die zijn aangenomen door de ACTA.

Onderaan dit apparaat is een etiket geplaatst dat, naast informatie, een productherkenningscode bevat in het formaat US: KWCW4NANCT8171. Als hiernaar gevraagd wordt, dient u dit nummer aan het telecombedrijf te verstrekken.

2. Een stekker en een aansluiting die gebruikt worden om deze apparatuur aan te sluiten op het elektrische en telefonisch netwerk van het pand', moeten voldoen aan de geldende regels van de FCC Deel 68 en vereisten die zijn aangenomen door de ACTA. Bij dit product zijn een telefoonsnoer en een modulaire stekker die hieraan voldoen geleverd. Het apparaat is zo ontworpen dat het aangesloten kan worden op een compatibele, modulaire aansluiting die ook aan de vereisten voldoet. Zie de installatie-instructies voor nadere informatie.
3. Als deze Phonak DECT CP1 schade toebrengt aan het telefoonnetwerk, informeert het telecommunicatiebedrijf u van tevoren dat de dienst mogelijk tijdelijk onderbroken moet worden. Als een melding vooraf echter niet uitvoerbaar is, informeert het telecombedrijf de klant zo spoedig mogelijk. U wordt tevens geïnformeerd over uw recht om een klacht in te dienen bij de FCC als u dit noodzakelijk acht.

10. Conformiteitsverklaring

4. Het telecombedrijf kan wijzigingen doorvoeren in de voorzieningen, het materieel, de diensten of procedures die van invloed kunnen zijn op de werking van de apparatuur. Als dit gebeurt, maakt het telecombedrijf hier vooraf melding van, zodat u de nodige aanpassingen kunt treffen en u geen last hebt van onderbroken diensten.
5. Als u problemen hebt met de Phonak DECT-telefoon, reparaties wilt laten uitvoeren of informatie wilt over de garantie, kan service worden verleend via ons kantoor:
Phonak Inc.
4520 Weaver Parkway
Warrenville, IL 60555
Tel: 800-777-7333
Fax: 630-393-7400

Als de apparatuur schade toebrengt aan het telefoonnetwerk, kan het telecombedrijf u vragen om het apparaat niet aan te sluiten tot het probleem is verholpen.

6. Wijzig of repareer geen onderdelen van het apparaat tenzij anders aangegeven. Volg bij reparaties de instructies op die uiteengezet zijn onder de beperkte garantie.

-
7. Voor het aansluiten op een party line gelden nationale tarieven. Neem voor informatie contact op met de nationale commissie voor openbare voorzieningen, de commissie voor openbare diensten of de gemeenteraad.
8. Als uw huis uitgerust is met een speciaal gedrade alarminstallatie die aangesloten is op de telefoonlijn, dient u te controleren of de alarminstallatie niet uitgeschakeld wordt wanneer dit 1,9 GHz DECT-product voor PSTN wordt geïnstalleerd. Als u wilt weten waardoor de alarminstallatie uitgeschakeld kan worden, raadpleeg dan uw netwerkleverancier of een gecertificeerd installateur.
9. Als het telecombedrijf vraagt welke apparatuur is aangesloten op hun lijnen, meld dan de volgende zaken:
- a) Het REN-nummer (Ringer Equivalence Number) [00]
 - b) De benodigde USOC-aansluiting [RJ11C]
 - c) Facility Interface Codes ("FIC") [02LS2]
 - d) Service Order Codes ("SOC") [9.0Y]
 - e) Het FCC-registratienummer:
[KWCW4NANCT8170] voor DECT CP 1
[KWCW4NANCT8171] voor DECT II

10. Conformiteitsverklaring

10. Het REN-nummer wordt gebruikt om het aantal apparaten vast te stellen dat aangesloten kan worden op een telefoonlijn. Te veel REN-nummers op een telefoonlijn kan ertoe leiden dat de apparaten niet rinkelen bij een binnenkomende oproep. In de meeste, maar niet in alle regio's, is het maximale aantal REN-nummers vijf (5.0). Om zeker te zijn van het aantal apparaten dat aangesloten mag worden op een lijn, zoals bepaald door het totale aantal REN-nummers, neemt u contact op met uw plaatselijke netwerkleverancier. Het REN-nummer voor dit product maakt deel uit van de productherkenningscode met het formaat US:AAAEQ##TXXXX. De cijfers op de plek van ## is het maximale aantal REN-apparaten met een decimaalscheidingsteken. Voor dit product is het FCC-registratienummer [US: KWCW4NANCT8170 voor DECT CP1 en KWCW4NANCT8171 voor DECT II]. Dit geeft aan dat het aantal REN-apparaten NAN.
11. Dit product is compatibel met hoortoestellen.

Opmerking FCC:

Wijzigingen of aanpassingen die aan dit apparaat worden toegebracht zonder uitdrukkelijke toestemming van Phonak, kunnen de FCC-machtiging voor het bedienen van dit apparaat ongeldig maken.

Dit apparaat voldoet aan Deel 15 van de FCC-regels en aan RSS-210 van Industry Canada. De werking moet voldoen aan de volgende twee voorwaarden:

- 1) dit apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken bij andere apparaten, en
- 2) dit apparaat dient ontvangen interferentie te accepteren, ook interferentie die ongewenst functioneren kan veroorzaken.

BELANGRIJK:

FCC-verklaring met betrekking tot blootstelling aan straling:

Dit toestel voldoet aan de limieten van FCC inzake blootstelling aan straling, bepaald voor een ongeregelde omgeving. Er dient minimaal 20 cm ruimte te zitten tussen het basisstation en uw lichaam als u dit apparaat installeert en bedient.

Dit apparaat mag niet samen met een andere antenne of zender worden gebruikt of hierbij in de buurt worden geplaatst.

Let op

Dit apparaat is getest en voldoet aan de beperkingen voor een Klasse B digitaal apparaat, overeenkomstig Deel 15 van de FCC-regels.

Deze beperkingen zijn bedoeld om redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke interferentie in een installatie in een woonomgeving. Dit apparaat genereert en gebruikt radiofrequentie-energie en kan dit tevens uitzenden. Bij een onjuiste installatie en gebruik dat niet in overeenstemming is met de instructies kan dit leiden tot schadelijk interferentie van radioverbindingen.

Het is echter niet gegarandeerd dat geen interferentie in een bepaalde installatie zal optreden. Als dit apparaat schadelijke interferentie aan radio- of televisieontvangst veroorzaakt (dit kan worden vastgesteld door de apparatuur uit- en in te schakelen), wordt de gebruiker aangeraden de interferentie te corrigeren door middel van een van de volgende maatregelen:

- De ontvangstantenne draaien of verplaatsen.
- De afstand tussen het toestel en de speaker vergroten.
- Het toestel aansluiten op een stopcontact van een circuit waarop de speaker niet is aangesloten.
- Raadpleeg de dealer of een ervaren radio/tv-reparateur.

Informatie met betrekking tot de Specifieke Absorptie Ratio (SAR)

SAR-tests worden uitgevoerd met standaard bedieningsposities die door de FCC aanvaard zijn. De telefoon zendt dan op het hoogste gecertificeerde vermogensniveau uit op alle geteste frequentiebanden. Hoewel de SAR wordt vastgesteld op het hoogste gecertificeerde vermogensniveau, kan het daadwerkelijke SAR-niveau van de telefoon in werking fors onder de maximale waarde liggen. Over het algemeen geldt dat hoe dichter u zich bij een draadloze basisstationantenne bevindt, hoe lager het uitgangsvermogen is.

Voordat er een nieuw telefoonmodel openbaar verkocht mag worden, moet dit getest en gecertificeerd worden door de FCC, zodat vastgesteld is dat de telefoon niet de limiet van de FCC met betrekking tot de blootstelling aan straling overschrijdt. Elke telefoon wordt op plekken en op locaties getest (bijv. aan het oor en op het lichaam), zoals voorgeschreven door de FCC.

Dit apparaat is ook getest en voldoet aan de richtlijn van de FCC met betrekking tot blootstelling aan straling wanneer de telefoon op het lichaam gedragen wordt tijdens gebruik. Gebruik van andere accessoires voldoet mogelijk niet aan de conformiteitsrichtlijnen van de FCC met betrekking tot blootstelling aan straling.

10. Conformiteitsverklaring

Als bovenstaande beperkingen niet worden nageleefd, geldt dit als overtreding van de richtlijnen met betrekking tot blootstelling aan straling.

De privacy van de gesprekken wordt mogelijk niet gewaarborgd bij gebruik van deze telefoon!

Waarschuwing van IC

CS03:

Dit apparaat voldoet aan de geldende technische specificaties van Industry Canada.

RSS (Categorie I Apparatuur):

Dit apparaat voldoet aan de RSS-norm(en) van Industry Canada voor licentie vrije apparaten. De werking moet voldoen aan de volgende twee voorwaarden:

- 1) dit apparaat mag geen interferentie veroorzaken, en
- 2) dit apparaat dient interferentie te accepteren, ook interferentie die ongewenst functioneren van het apparaat kan veroorzaken.

Krachtens de regelgeving van Industry Canada mag deze radiozender alleen werken met een antenne van een type en met een maximale (of minder) versterking die goedgekeurd is voor de zender door Industry Canada. Om potentiële radio-interferentie te verminderen voor andere gebruikers, moet het type antenne en de versterkingsfactor zo gekozen worden, dat de EIRP niet hoger is dan noodzakelijk voor goede communicatie.

11. Informatie en verklaring van symbolen



Het CE-symbool is een bevestiging van Phonak AG dat dit Phonakproduct voldoet aan de eisen van Richtlijn inzake radioapparatuur 2014/53/EU.



Dit symbool geeft aan dat het belangrijk is dat de lezer aandacht besteedt aan de relevante waarschuwingsberichten in deze gebruiksaanwijzing.



Dit symbool geeft aan dat het belangrijk is dat de lezer de relevante informatie in deze gebruiksaanwijzing leest en toepast.



Belangrijke informatie voor de bediening en veiligheid van het product.

Bedieningsomstandigheden

Het product is, wanneer het wordt gebruikt waarvoor het bedoeld is, ontworpen voor een probleemloze werking zonder beperkingen, tenzij anders aangegeven in dezegebruiksaanwijzingen.



Droog houden.



Temperatuur bij transport en opslag:
-20° tot +60° Celsius
(-4° tot +140° Fahrenheit)
Gebruikstemperatuur:
0° tot 40° Celsius
(+32° tot +104° Fahrenheit).



Vochtigheid bij transport: tot 90%
(niet-condenserend).
Vochtigheid bij opslag: 0% tot 70%,
wanneer niet gebruikt.
Vochtigheid bij gebruik: <95% (niet-condenserend).

11. Informatie en verklaring van symbolen



Atmosfeerdruk: 200 hPa tot 1500 hPa.



Het symbool met de doorstreepte vuilnisbak wijst u erop dat dit apparaat niet weggegooid mag worden als normaal huisvuil. Deponeer oude of ongebruikte apparaten op stortplaatsen voor elektronisch afval of overhandig het apparaat aan uw audicien voor verwijdering. Een verantwoord afvalbeleid beschermt het milieu en de gezondheid.



Dit symbool geeft de fabrikant van het apparaat aan, zoals staat vastgesteld in Richtlijn 93/42/EEG.

12. Belangrijke veiligheidsinformatie


Lees de informatie op de volgende pagina's aandachtig door voordat u uw Phonak DECT-telefoon in gebruik neemt.

- ⚠ Deze apparaten mogen uitsluitend gerepareerd worden door een erkend servicecentrum. Wijzigingen aan de apparaten die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door Phonak, zijn niet toegestaan. Dergelijke wijzigingen kunnen deze apparaten, uw gehoor of de hoortoestellen beschadigen.
- ⚠ Als u een van de apparaten opent, kunt u deze beschadigen. Wanneer zich problemen voordoen die niet opgelost kunnen worden aan de hand van de instructies in deze gebruiksaanwijzing, neem dan contact op met uw audicien.
- ⚠ Gebruik het apparaat niet in explosieve omgevingen (mijnen of industriële gebieden met explosiegevaar, zuurstofrijke gebieden of gebieden waarin ontvlambare anesthetica worden behandeld) of waarin elektronische apparatuur is verboden.
- ⚠ De Amerikaanse/Canadese versie van de DECT mag NIET in Europa gebruikt worden, omdat deze interferentie kan veroorzaken met de Europese mobiele netwerken. Onwettig gebruik van dergelijke producten is verboden door de Europese telecommunicatieautoriteiten.

12. Belangrijke veiligheidsinformatie

-  De Europese versie van de DECT mag NIET worden gebruikt in de VS en in Canada, omdat deze interferentie kan veroorzaken met de Amerikaanse en Canadese mobiele netwerken. Het gebruik ervan wordt daarom als onwettig beschouwd door de Amerikaanse Federal Communications Commission en Industry Canada.
-  De handset bevat kleine onderdelen die verstikking kunnen veroorzaken als ze door kinderen worden ingeslikt. Houd deze buiten bereik van kinderen jonger dan 3 jaar, mensen met een verstandelijke beperking en huisdieren. Indien ingeslikt, dient u onmiddellijk een arts te raadplegen.
-  Het onderstaande is alleen van toepassing op personen met geïmplanteerde medische apparaten die actief zijn (bijv. pacemakers, defibrillators, etc.): Als u interferentie bemerkt, gebruik het apparaat dan niet en neem contact op met de fabrikant van het actieve implantaat (interferentie kan echter ook veroorzaakt worden door elektrische leidingen, elektrostatische ontlading, metaaldetectoren op vliegvelden, enz.).

-
- ⚠️ Neem contact op met uw plaatselijke afvalinzameling voor het weggooien van de batterij, en gooi elektrische componenten weg in overeenstemming met uw plaatselijke regelgeving.
 - ⚠️ Externe apparaten mogen alleen worden aangesloten als ze zijn getest in overeenstemming met IECXXXXX-normen.
 - ⚠️ Als u de snoertjes gebruikt voor een doel waarvoor ze niet zijn ontworpen (bijvoorbeeld als u de telefoonkabel rond de nek draagt), kan dit tot verwondingen leiden.
 - ⚠️ De mini-USB-poort mag alleen voor het beschreven doel worden gebruikt.
 - ⚠️ Waarschuwing: elektrische schok. Steek de voedingsadapter niet alleen in een stopcontact.

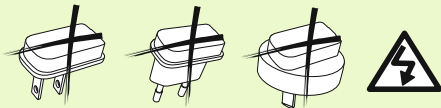

12. Belangrijke veiligheidsinformatie

-  Om veiligheidsredenen mag u alleen opladers gebruiken die door Phonak geleverd zijn, of gecertificeerde USB-opladers met een kwalificatie van 5 V DC, min. 1000 mA.
-  Laad het basisstation nooit op via een USB-poort van een pc of laptop. Hierdoor kan uw apparatuur beschadigd raken.
-  Sluit geen USB- of telefoonkabel aan op het basisstation die langer dan 3 meter is.
-  Plaats uitsluitend een oplaadbare batterij die voldoet aan de specificaties op het gegevensblad van de Phonak DECT. Als u de verkeerde batterijen plaatst, kan het apparaat beschadigd raken of verwondingen veroorzaken.
-  Houd de achterkant van de handset niet tegen uw oor wanneer deze rinkelt of wanneer de handsfree modus ingeschakeld is. Dit kan uw gehoor ernstige, permanente schade toebrengen.

-
- ⚠ De handset kan zoemende geluidjes maken bij analoge hoortoestellen. Neem contact op met uw audicien indien u problemen ervaart.
 - ⚠ Geef altijd ook de gebruiksaanwijzing mee als u uw Phonak DECT-telefoon aan iemand anders geeft.
 - ⚠ Gebruik het basisstation niet wanneer het defect is of laat het repareren door de Serviceafdeling, aangezien het andere radiodiensten kan verstoren.

Kennisgevingen

Bepaalde functies die in deze gebruiksaanwijzing worden beschreven, zijn niet beschikbaar in alle landen.

De telefoon werkt niet tijdens een stroomstoring. U kunt hiermee dan ook niet naar het alarmnummer bellen.



Phonak AG
Laubisrütistrasse 28
CH-8712 Stäfa
Zwitserland

www.phonak.com

