

Roger Focus II-312

Gebruikershandleiding



Roger Focus II-312



A Sonova brand

PHONAK
life is on

Deze gebruikershandleiding is van toepassing op:

Hoortoestel

CE
0459

Roger Focus II-312

2020



Details over uw hoortoestel

- ① Zorg ervoor dat u het juiste type batterij voor uw hoortoestel gebruikt (zink-lucht).
- ① Uw hoortoestel werkt binnen het frequentiebereik van 2,4 en 2,48 GHz.

Model

Roger Focus II-312

Batterijtype

312

Uw hoortoestel is ontwikkeld door Phonak, wereldleider op het gebied van hooroplossingen. Het hoofdkantoor bevindt zich in Zürich, Zwitserland.

Deze topproducten zijn het resultaat van decennia aan onderzoek en expertise en zijn ontwikkeld om u te helpen verbonden te blijven met de schoonheid van geluid! Wij danken u voor uw goede keuze en wensen u jarenlang luisterplezier.

Lees de gebruikershandleiding grondig door, zodat u zeker weet dat alles duidelijk is en zodat u uw hoortoestel optimaal kunt gebruiken. Neem contact op met uw audicien voor meer informatie over de functies en voordelen.

Phonak – life is on
www.Phonak.com

Inhoud

Uw hoortoestel

1. Snelgids 6
2. Beschrijving van het hoortoestel 8

Het hoortoestel gebruiken



3. Markeringen voor links en rechts op het hoortoestel 9
4. Aan/uit 10
5. Batterijen 11
6. Het hoortoestel plaatsen 16
7. Het hoortoestel verwijderen 17
8. Multifunctieknop met indicatorlampje 18
9. Verbindingsoverzicht 20

Extra informatie

10. Bedieningsomstandigheden 21
11. Onderhoud en verzorging 22
12. Het oorstukje vervangen 25
13. Service en garantievoorwaarden 28
14. Conformiteitsinformatie 30
15. Informatie en beschrijving van symbolen 36
16. Problemen oplossen 40
17. Belangrijke veiligheidsinformatie 42


1. Snelgids

Markeringen voor links en rechts op het hoortoestel

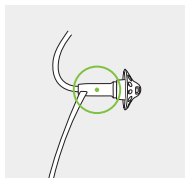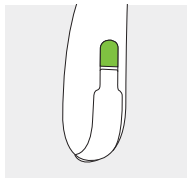


Blauwe markering voor het **linker hoortoestel**.
Rode markering voor het **rechter hoortoestel**.


Batterijen vervangen

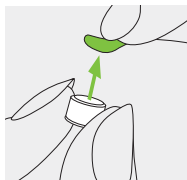

1.
Haal de sticker van de nieuwe batterij en wacht twee minuten.

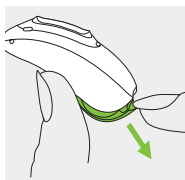


2.
Open de batterijlade. Raadpleeg hoofdstuk 5.2 voor de kindveilige batterijlade.

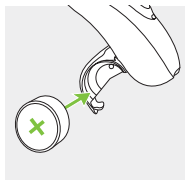


3.
Plaats de batterij in de batterijlade met het '+'-symbool naar boven gericht.

Aan/uit

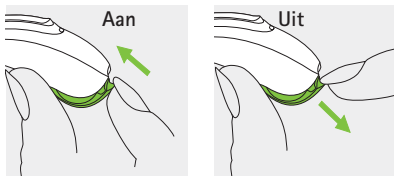

Raadpleeg hoofdstuk 5.2 voor instructies over de kindveilige batterijlade.

Multifunctieknop met indicatorlampje

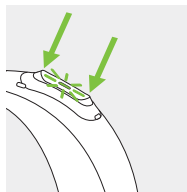


De knop heeft verschillende functies.
Hij wordt gebruikt als volumeregelaar en
als vergrendeling van de volumeregelaar.

2. Beschrijving van het hoortoestel



In de onderstaande afbeelding wordt het hoortoestel weergegeven dat in deze gebruikershandleiding wordt beschreven.

Roger Focus II-312

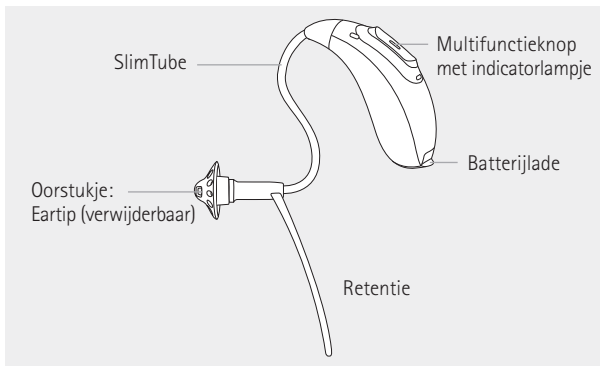

3. Markeringen voor links en rechts op het hoortoestel

Een rode of een blauwe markering geeft aan of het een rechter of linker hoortoestel is.

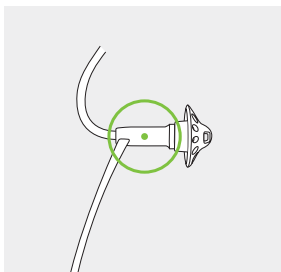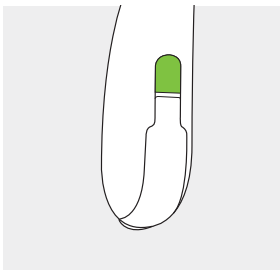


Blauwe markering voor het **linker** hoortoestel.
Rode markering voor het **rechter** hoortoestel.

4. Aan/uit

De batterijlade is ook de aan/uit-schakelaar. Raadpleeg hoofdstuk 5 om de kindveilige batterijlade te openen.


1.

Gesloten batterijlade =
hoortoestel is **aan**.

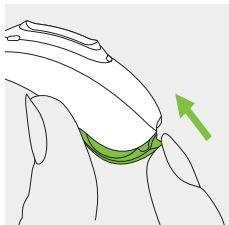

2.


Open batterijlade =
hoortoestel is **uit**.

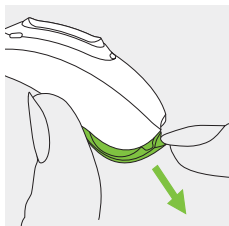


i U kunt bij het inschakelen van het hoortoestel een opstartmelodie horen.

5. Batterijen


5.1 Batterij invoeren (standaard batterijlade)

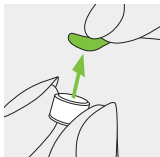

1.
Haal de sticker van de nieuwe batterij en wacht twee minuten.

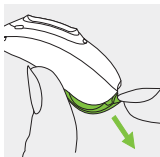

2.
Open de batterijlade.

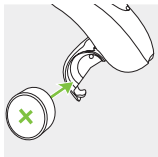

3.
Plaats de batterij in de batterijlade met het '+'-symbool naar boven gericht.

Indien de batterijlade kindveilig is, lees dan de belangrijke informatie hieronder en raadpleeg de specifieke instructies in hoofdstuk 5.2 voor het invoeren van de batterij.

- ⓘ Als het lastig is om de batterijlade te sluiten, dient u te controleren of de batterij juist is geplaatst en of het '+'-symbool naar boven wijst. Indien de batterij verkeerd geplaatst is, zal het hoortoestel niet werken en kan de batterijlade beschadigd raken.



Batterij bijna leeg: Wanneer de batterij bijna leeg is, krijgt u twee piepjes te horen. U heeft dan ongeveer 30 minuten de tijd om de batterij te vervangen. Wij raden aan om altijd een nieuwe batterij bij de hand te hebben.

Vervangende batterij

Dit hoortoestel werkt op een zink-luchtbatterij van maat 312.


| Model | Zink-lucht- batterijfor- maat | Kleurmarkering op verpakking | IEC- code | ANSI- code |
|--------------------|-------------------------------------|---------------------------------|--------------|---------------|
| Roger Focus II-312 | 312 | bruin | PR41 | 7002ZD |

ⓘ Zorg ervoor dat u het juiste type batterij voor uw hoortoestel gebruikt (zink-lucht). Lees ook hoofdstuk 16.2 voor meer informatie over productveiligheid.


5.2 Batterij invoeren bij een kindveilige batterijlade

Dit hoortoestel kan indien nodig worden uitgerust met een kindveilige batterijlade wegens veiligheidsredenen (kinderen jonger dan 36 maanden).

Het openen van de batterijlade

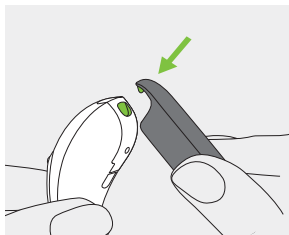


1. Plaats het uiteinde van de tool in het kleine gaatje aan de onderkant van het hoortoestel.

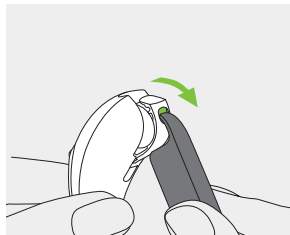


2. Gebruik de tool als hefboom om de batterijlade te openen door de lade met behulp van de tool in de richting van de groene pijl te trekken.

Plaatsen van de batterij

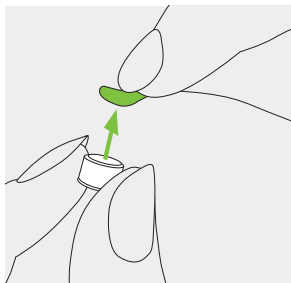


- 1.** Haal de sticker van de nieuwe batterij en wacht twee minuten.

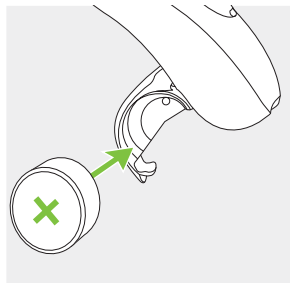

- 2.** Plaats de batterij in de batterijlade met het '+'-symbool naar boven gericht.

Het afsluiten van de batterijlade

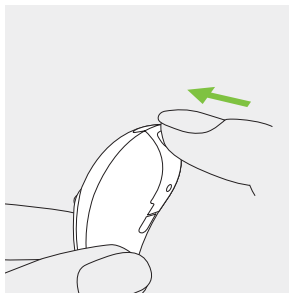


De batterij is alleen kindveilig als de batterijlade op de juiste wijze gesloten is. Controleer na het sluiten altijd of de batterijlade niet met de hand geopend kan worden.

6. Het hoortoestel plaatsen


1.

Plaats het hoortoestel achter uw oor.

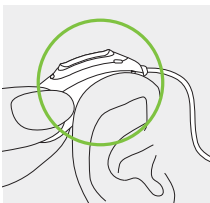


2.

Plaats het oorstukje in de gehoorgang.

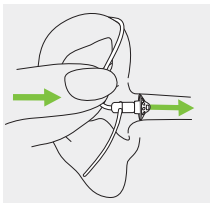


3.

Als er een retentie aan het oorstukje vastzit, plaatst u deze in uw oorschelp om het hoortoestel stevig te plaatsen.

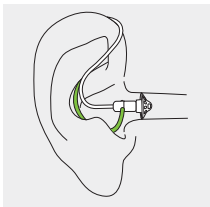

7. Het hoortoestel verwijderen

Trek aan de bocht van de SlimTube en verwijder het hoortoestel van achter het oor vandaan.

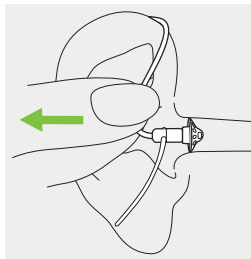


8. Multifunctieknop met indicatorlampje

De multifunctieknop heeft verschillende functies.

Hij wordt gebruikt als volumeregelaar en als vergrendeling van de volumeregelaar. Verhoog het volume door kort op het bovenste gedeelte van de knop te drukken. Verlaag het volume door kort op het onderste gedeelte van de knop te drukken.





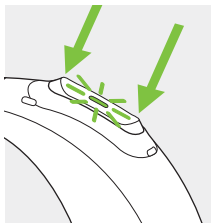


Om de knop te vergrendelen, houdt u het bovenste gedeelte van de knop 5 seconden ingedrukt.

Om de knop te ontgrendelen, houdt u het bovenste gedeelte van de knop 5 seconden ingedrukt.



Indicatorlampje

Ouders en verzorgers van baby's en jonge kinderen kunnen eenvoudig worden geïnformeerd over de status van het hoortoestel dankzij het indicatorlampje. Het indicatorlampje is geïntegreerd in de multifunctieknop en geeft de status van het hoortoestel weer wanneer dit is ingeschakeld.

| Status van het hoortoestel*** | Patroon van het indicatorlampje |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Multifunctieknop vergrendelen** | Tweemaal knipperen  |
| <input type="checkbox"/> Multifunctieknop ontgrendelen | Eenmaal knipperen  |
| <input type="checkbox"/> De batterij is bijna leeg* | Blijft knipperen  |
| <input type="checkbox"/> Wijziging van het volumeniveau (door middel van een afstandsbediening of door de multifunctieknop) | Eenmaal knipperen per volumewijziging  |
| <input type="checkbox"/> Gemiddeld volume | Ononderbroken groen  |
| <input type="checkbox"/> Roger microfoon maakt verbinding met het toestel | Eenmaal knipperen  |
| <input type="checkbox"/> Hoogste of laagste volume bereikt | Tweemaal knipperen  |


* Het signaal dat de batterij bijna leeg is, wordt ongeveer 30 minuten voordat de batterij vervangen moet worden, gestart. Het wordt aanbevolen om altijd een nieuwe batterij bij de hand te hebben.

** Er brandt geen lampje wanneer de volumeregelaar wordt vergrendeld.

*** Raadpleeg de beknopte handleiding die bij het hoortoestel wordt meegeleverd voor meer informatie over pieptonmeldingen en het gebruik van de Phonak-afstandsbediening.

9. Verbindingsoverzicht

In de onderstaande afbeelding worden de verbindingsopties voor uw hoortoestel weergegeven.

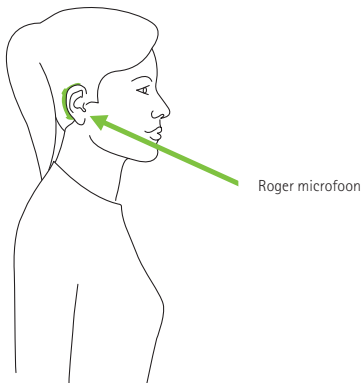

10. Bedieningsomstandigheden

Het product is, wanneer het wordt gebruikt waarvoor het bedoeld is, ontworpen voor een probleemloze werking zonder beperkingen, tenzij anders aangegeven in deze gebruiksaanwijzing.

Zorg ervoor dat u het hoortoestel gebruikt binnen het temperatuurbereik van:

+5° tot +40° Celsius; het bereik van de atmosferedruk: 500 hPa tot 1060 hPa en vochtigheid 0% tot 70% (niet-condenserend).

Roger Focus II-312 zijn geclassificeerd als IP68. Dit houdt in dat ze water- en stofbestendig zijn en gemaakt zijn voor gebruik in het dagelijks leven. Ze kunnen worden gedragen in de regen maar mogen niet volledig ondergedompeld worden in water of worden gebruikt tijdens het douchen, zwemmen of andere wateractiviteiten. Deze apparaten mogen nooit worden blootgesteld aan chloorwater, zeep, zout water of andere vloeistoffen met chemische inhoud

11. Onderhoud en verzorging

Een degelijke en regelmatige verzorging van uw hoortoestel draagt bij aan uitstekende prestaties en een lange levensduur ervan. Om een lange productlevensduur te garanderen, biedt Sonova AG een minimale onderhoudsperiode van vijf jaar na de uitfasering van het betreffende hoortoestel.

Gelieve de volgende specificaties te gebruiken als richtlijn. Zie hoofdstuk 16.2 voor meer informatie over productveiligheid.

Algemene informatie

Voor u haarlak of make-up gebruikt, dient u het hoortoestel uit uw oor te halen, aangezien deze producten het toestel kunnen beschadigen.

Laat de batterijlade open wanneer u het hoortoestel niet gebruikt, zodat aanwezig vocht kan verdampen. Zorg ervoor dat u het hoortoestel steeds volledig droogt na gebruik. Bewaar het hoortoestel op een veilige, droge en schone plaats.

Uw hoortoestel is bestand tegen water, zweet en stof onder de volgende voorwaarden:

- De batterijlade is volledig gesloten. Zorg ervoor dat er geen voorwerpen zoals een haar tussen de batterijlade zitten wanneer deze gesloten wordt.
- Na blootstelling aan water, zweet of stof moet u het hoortoestel schoonmaken en daarna drogen.
- Het hoortoestel wordt gebruikt en onderhouden zoals beschreven in deze gebruikershandleiding.

① Door uw hoortoestel in en om het water te gebruiken, kan de luchtstroom naar de batterijen beperkt worden waardoor het toestel niet meer werkt. Als uw hoortoestel het niet meer doet nadat het in contact is gekomen met water, raadpleeg dan de stappen voor probleemoplossing in hoofdstuk 15.

Dagelijks

Controleer het oorstukje en de SlimTube op oorsmeer en vochtafzettingen. Reinig de oppervlakken met een pluïsvrije doek of gebruik het borsteltje dat bij uw hardcase hoesje voor uw hoortoestel zit. Gebruik nooit reinigingsmiddelen zoals huishoudelijke wasmiddelen, zeep, enz. voor het reinigen van uw hoortoestel. Het wordt afgeraden om deze onderdelen af te spoelen met water, omdat het water in de SlimTube kan achterblijven. Vraag bij uw leverancier om advies wanneer u uw hoortoestel grondig dient te reinigen.

Wekelijks

reinig het oorstukje met een zachte, vochtige doek of met een speciale reinigingsdoek voor hoortoestellen. Raadpleeg uw audicien voor meer informatie over onderhoud en reiniging.

Maandelijks

Controleer de SlimTube op kleurveranderingen, verharding of scheurtjes. Indien dergelijke veranderingen waargenomen worden, dient de SlimTube vervangen te worden. Raadpleeg hiervoor uw audicien.

12. Het oorstukje vervangen


Uw hoortoestel is voorzien van een SlimTube en oorstukje.

Controleer het oorstukje en vervang of reinig het als het er vies uitziet of als het volume of de geluidskwaliteit van het hoortoestel achteruit gaat. Indien er een eartip wordt gebruikt, moet deze iedere 3 maanden worden vervangen.

11.1 Het oorstukje uit de SlimTube verwijderen


1.

Verwijder het oorstukje uit de SlimTube door de SlimTube in de ene hand te houden en het oorstukje in de andere.

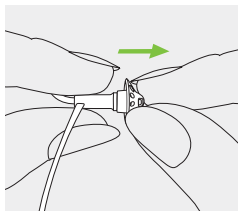


2.

Trek zachtjes aan het oorstukje om het te verwijderen.

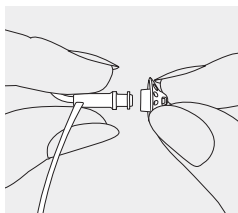

3.


Reinig de SlimTube met een pluisvrije doek.

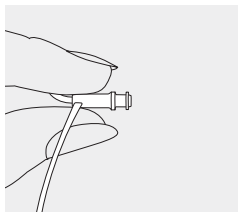

11.2 Het oorstukje op de SlimTube plaatsen


1.

Houd de SlimTube in de ene hand en het oorstukje in de andere.

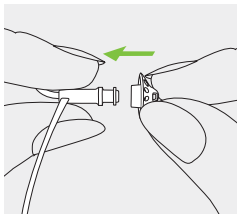


2.

Schuif het oorstukje over de geluidsuitgang.

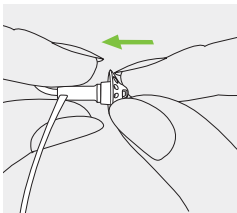

3.

De SlimTube en het oorstukje zouden perfect in elkaar moeten passen.

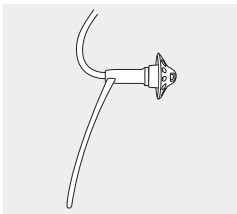

13. Service en garantievoorwaarden

Lokale garantie

Informeer bij uw leverancier bij wie u uw hoortoestel hebt aangeschaft naar de voorwaarden van de plaatselijke garantie.

Wereldwijde garantie

Sonova AG biedt u vanaf de verkoopdatum een beperkte, wereldwijde garantie van één jaar. Deze beperkte garantie dekt fabrieks- en materiaalfouten in het hoortoestel zelf, maar geen accessoires zoals batterijen, SlimTubes of oorstukjes. De garantie is alleen geldig op vertoon van een aankoopbewijs.

De internationale garantie heeft geen invloed op eventuele wettelijke rechten waarop u aanspraak kunt maken op basis van nationale wetten en wetgeving op het gebied van de verkoop van consumentenartikelen.

Garantiebeperking

Er bestaat geen recht op garantie bij oneigenlijk gebruik of onderhoud, chemische invloeden of overbelasting.

Bij schade die door derden of niet-geautoriseerde servicewerkplaatsen is veroorzaakt, vervalt de garantie. Deze garantie omvat geen servicewerkzaamheden die worden verricht door een audicien in zijn werkplaats.

Serienummer (linkerzijde):

Serienummer (rechterzijde):

Aankoopdatum:

Uw audicien (stempel/handtekening):

14. Conformiteitsinformatie

Europa:

Conformiteitsverklaring

Sonova AG verklaart hierbij dat dit product voldoet aan de vereisten van de Richtlijn Medische Hulpmiddelen 93/42/EEG evenals de Richtlijn inzake radioapparatuur 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is verkrijgbaar bij de fabrikant of de plaatselijke vertegenwoordiger van Phonak. Kijk voor de adressen op www.phonak.com/us/en/certificates (Phonak-vestigingen wereldwijd).

Australië/Nieuw-Zeeland:



R-NZ

Geeft aan of een apparaat voldoet aan het betreffende radiospectrumbeheer (RSM) en aan de wetgevingen van de Australische communicatie- en media-autoriteit (ACMA) voor de wettelijke verkoop in Nieuw-Zeeland en Australië. Het nalevingsetiket R-NZ is voor radioproducten die worden geleverd voor de Nieuw-Zeelandse markt onder conformiteitsniveau A1.

De modellen op pagina 2 zijn gecertificeerd onder:

Roger Focus II-312

VS

FCC ID: KWC-BST

Canada

IC: 2262A-BST

Kennisgeving 1:

Dit apparaat voldoet aan Deel 15 van de FCC-regels en aan RSS-210 van Industry Canada. De werking moet voldoen aan de volgende twee voorwaarden:

- 1) dit apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken bij andere apparaten, en
- 2) dit apparaat dient ontvangen interferentie te accepteren, ook interferentie die ongewenst functioneren kan veroorzaken.

Kennisgeving 2:

Wijzigingen of aanpassingen die aan dit apparaat worden toegebracht zonder uitdrukkelijke toestemming van Sonova AG, kunnen de FCC-machtiging voor het bedienen van dit apparaat ongeldig maken.

Kennisgeving 3:

Dit apparaat is getest en voldoet aan de beperkingen voor een Klasse B digitaal apparaat, overeenkomstig Deel 15 van de FCC-regels en ICES-003 van Industry Canada. Deze beperkingen zijn bedoeld om redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke interferentie in een installatie in een woonomgeving. Dit apparaat genereert en gebruikt radiofrequentie-energie en kan dit tevens uitzenden. Bij een onjuiste installatie en gebruik dat niet in overeenstemming is met de instructies kan dit leiden

tot schadelijke interferentie van radioverbindingen. Het is echter niet gegarandeerd dat er geen interferentie in een bepaalde installatie zal optreden. Als dit apparaat schadelijke interferentie aan radio- of televisieontvangst veroorzaakt (dit kan worden vastgesteld door de apparatuur uit- en in te schakelen), wordt de gebruiker aangeraden de interferentie te corrigeren door middel van een van de volgende maatregelen:

- De ontvangstantenne draaien of verplaatsen.
- De afstand tussen het toestel en de ontvanger vergroten.
- Het toestel aansluiten op een stopcontact van een circuit waarop de ontvanger niet is aangesloten.
- Raadpleeg de dealer of een ervaren radio/tv-reparateur voor hulp.

Kennisgeving 4:

Naleving van de Japanse radiowet en de Japanse telecommunicatiewet voor zakelijke doeleinden

Dit apparaat voldoet aan de Japanse radiowet (電波法) en de Japanse telecommunicatiewet (電気通信事業法). Dit apparaat mag niet worden gewijzigd (anders is het toegewezen identificatienummer niet meer geldig).



R 005-102108

I A19-0086005

Radio-informatie over uw hoortoestel

| | |
|------------------------|----------------------------|
| Antennetype | Gebogen resonantie-antenne |
| Bedrijfsfrequentie | 2,4 GHz – 2,48 GHz |
| Modulatie | GFSK, Pi/4 DPSK, GMSK |
| Uitgestraald vermogen | < 1 mW |
| Bluetooth® | |
| Bereik | Ca. 1 m |
| Bluetooth | 4.2 Dual-Mode |
| Ondersteunde profielen | LE (low energy) |

Naleving van emissie- en immuniteitsnormen

| | |
|---------------|------------------------|
| Emissienormen | EN 60601-1-2:2015 |
| | IEC 60601-1-2:2014 |
| | EN 55011:2009+A1 |
| | CISPR11:2009/AMD1:2010 |
| | CISPR22:1997 |
| | CISPR32:2012 |
| | ISO 7637-2:2011 |
| | CISPR25:2016 |
| | EN 55025:2017 |

| | |
|------------------|-----------------------------|
| Immunitätsnormen | EN 60601-1-2:2015 |
| | IEC 60601-1-2:2014 |
| | EN 61000-4-2:2009 |
| | IEC 61000-4-2:2008 |
| | EN 61000-4-3:2006+A1+A2 |
| | IEC 61000-4-3:2006+A1+A2 |
| | EN 61000-4-4:2012 |
| | IEC 61000-4-4:2012 |
| | EN 61000-4-5:2014 |
| | IEC 61000-4-5:2014 |
| | EN 61000-4-6:2014 |
| | IEC 61000-4-6:2013 |
| | EN 61000-4-8:2010 |
| | IEC 61000-4-8:2009 |
| | EN 61000-4-11:2004 |
| | IEC 61000-4-11:2004 |
| | IEC 60601-1 (§ 4.10.2):2005 |
| ISO 7637-2:2011 | |

15. Informatie en beschrijving van symbolen



Met het CE-symbool bevestigt Sonova AG dat dit product, met inbegrip van de accessoires, voldoet aan de vereisten van de Richtlijn Medische Hulpmiddelen 93/42/EEG en aan de Richtlijn inzake radioapparatuur 2014/53/EU. De nummers na het CE-symbool komen overeen met de code van de gecertificeerde instellingen die geraadpleegd zijn voor de bovengenoemde richtlijnen.



Dit symbool geeft aan dat de producten beschreven in deze gebruikersinstructies voldoen aan de vereisten voor een toegepast gedeelte van Type B van EN 60601-1. Het oppervlak van het hoortoestel is gespecificeerd als een toepassingsonderdeel van type B.



Toont de fabrikant van het medische instrument, zoals gedefinieerd in de EU richtlijn 93/42/EEG.



Dit symbool geeft aan dat het belangrijk is dat de lezer de relevante informatie in deze gebruikershandleidingen leest en toepast.



Dit symbool geeft aan dat het belangrijk is dat de lezer aandacht besteedt aan de relevante waarschuwingsberichten in deze gebruikershandleiding.



Belangrijke informatie voor de bediening en veiligheid van het product.



Droog houden tijdens transport.



Het woordmerk en het logo Bluetooth® zijn geregistreerde handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc.; deze merken worden door Sonova AG onder licentie gebruikt. Overige handelsmerken en handelsnamen behoren toe aan de betreffende eigenaars.



Japans symbool voor gecertificeerde radioapparatuur.

SN

Geeft het serienummer van de fabrikant aan zodat een specifiek medisch hulpmiddel kan worden geïdentificeerd.

REF

Geeft het catalogusnummer van de fabrikant aan zodat het medische hulpmiddel kan worden geïdentificeerd.



Temperatuur tijdens transport en opslag:
-20° tot +60° Celsius.



Vochtigheid tijdens transport en opslag: 0% tot 70%, wanneer niet gebruikt. Zie de instructies in hoofdstuk 16.2 over het drogen van het hoortoestel na gebruik.



Atmosfeerdruk: 500 hPA tot 1060 hPA.



Het symbool met de doorstreepte vuilnisbak wijst u erop dat dit hoortoestel niet weggegooid mag worden als normaal huisvuil. Gelieve een oud of ongebruikt hoortoestel in te leveren bij een stortplaats voor elektronisch afval, of het hoortoestel te overhandigen aan uw leverancier voor verwijdering. Een verantwoorde verwijdering beschermt het milieu en de gezondheid.

16. Problemen oplossen

Probleem

Hoortoestel werkt niet

Hoortoestel is te luid

Hoortoestel staat niet hard
genoeg of vervormt

Hoortoestel laat twee piepjes
klinken

Hoortoestel schakelt in en uit
(met tussenpozen)

Indicatorlampje knippert niet

Oorzaken

Lege batterij

Oorstukje verstopt

Batterij is niet juist geplaatst

Hoortoestel is uitgeschakeld

Volume is te luid

Batterij is bijna leeg

Oorstukje verstopt

Volume is te zacht

Batterij leeg signaal

Vocht op batterij of hoortoestel

Lege batterij

Batterij is niet juist geplaatst

i Indien het probleem blijft aanhouden, dient u voor verdere hulp contact op te nemen met uw audicien.

Wat te doen?

Vervang de batterij (hoofdstuk 5)

Oorstukje reinigen (hoofdstuk 10)

Plaats de batterij op de juiste wijze (hoofdstuk 5)

Schakel het hoortoestel in door de batterijlade volledig dicht te doen (hoofdstuk 5)

Verlaag het volume (hoofdstuk 8)

Vervang de batterij (hoofdstuk 5)

Oorstukje reinigen (hoofdstuk 10)

Verhoog het volume (hoofdstuk 8)

Vervang binnen 30 minuten de batterij (hoofdstuk 5)

Neem de batterij en het hoortoestel met een droge doek af





Vervang de batterij (hoofdstuk 5)


Plaats de batterij op de juiste wijze (hoofdstuk 5)


17. Belangrijke veiligheidsinformatie


Lees de informatie op de volgende pagina's aandachtig door voor u het hoortoestel in gebruik neemt.




17.1 Waarschuwingen

-  Uw hoortoestel werkt binnen het frequentiebereik van 2,4 en 2,48 GHz. Voordat u vertrekt met het vliegtuig, dient u bij de luchtvaartmaatschappij te controleren of het hoortoestel uitgeschakeld moet worden (zie hoofdstuk 1).
-  Het doel van het product is om geluiden te verwerken en naar de oren te zenden om hiermee luister- en communicatieproblemen en -beperkingen te overbruggen.
-  Wijzigingen aan het hoortoestel die niet uitdrukkelijk goedgekeurd zijn door Sonova AG zijn niet toegestaan. Deze wijzigingen kunnen uw gehoor of het hoortoestel beschadigen.
-  Gebruik het hoortoestel niet in explosieve omgevingen (mijnen of industriële gebieden met explosiegevaar, zuurstofrijke gebieden of gebieden waarin ontvlambare anesthetica worden gebruikt) of waarin elektronische apparatuur verboden is. Het toestel is niet ATEX-gecertificeerd.


-  Hoortoestelbatterijen zijn giftig als ze worden ingeslikt! Houd ze buiten het bereik van kinderen, mensen met een verstandelijke beperking en huisdieren. Indien batterijen worden ingeslikt, dient u onmiddellijk een arts te raadplegen!


-  Kindveilige (vergrendelde) oplossingen voor de batterijlade moet bij kinderen jonger dan 36 maanden bevestigd worden om inslikken van de batterij te voorkomen. Als één van de beveiligde mechanismen beschadigd raakt doordat er te veel kracht op is gezet of doordat er een ongeschikt hulpmiddel is gebruikt, dient u het toestel naar een audicien te brengen voor reparatie of vervanging.

-  Dit apparaat is niet geschikt voor kinderen jonger dan 36 maanden. Indien dit apparaat wordt gebruikt door kinderen en personen met een verstandelijke beperking, dienen zij te allen tijde onder toezicht te worden gehouden om hun veiligheid te garanderen. Het hoortoestel is een klein apparaat en bevat kleine onderdelen. Houd kinderen en personen met een verstandelijke beperking altijd onder toezicht wanneer dit hoortoestel wordt gebruikt. Indien het toestel wordt ingeslikt, neemt u onmiddellijk contact op met een huisarts of ziekenhuis, aangezien het hoortoestel of onderdelen hiervan verstikkingsgevaar veroorzaken!

-  Indien u pijn voelt in of achter uw oor, indien het oor ontstoken raakt, of als er huidirritatie en meer opeenhoping van oorsmeer plaatsvindt, dient u uw audicien of arts te raadplegen.
-  In zeer uitzonderlijke gevallen kan de eartip achterblijven in de gehoorgang wanneer u de SlimTube uit het oor haalt. In het onwaarschijnlijke geval dat de eartip achterblijft in de gehoorgang, wordt u verzocht een arts te raadplegen om het onderdeel veilig te laten verwijderen. Om te voorkomen dat de eartip tegen het trommelvlies wordt gedrukt, mag u de SlimTube nooit opnieuw proberen in te voeren in de gehoorgang.
-  Het onderstaande is alleen van toepassing op personen met geïmplanteerde medische apparaten die actief zijn (bijv. pacemakers, defibrillator, etc.):
- Houd het hoortoestel op minstens 15 cm afstand van het actieve implantaatsysteem. Als u enige interferentie ondervindt, dient u het hoortoestel niet langer te gebruiken en contact op te nemen met de fabrikant van het actieve implantaatsysteem. Interferentie kan ook veroorzaakt worden door elektrische leidingen, elektrostatische ontlading, metaaldetectorpoorten op de luchthaven, etc.

- Houd de magneten (bijv. batterij hulpstuk, EasyPhone-magneet, etc.) op minstens 15 cm afstand van het actieve implantaatsysteem.
- Bij gebruik van Phonak draadloze accessoires, raadpleegt u het hoofdstuk 'Belangrijke veiligheidsvoorschriften' van uw draadloze accessoire-gebruikershandleiding.



 Patiënten bij wie een magnetische, extern programmeerbare CSF-shuntklep is geïmplanterd, kunnen een onbedoelde wijziging in hun klepinstelling ervaren wanneer zij worden blootgesteld aan sterke magnetische velden. De speaker (luidspreker) van hoortoestellen, de Lyric SoundLync, de Lyric programmeerpen en de MiniControl bevatten statische magneten. Houd een afstand van minimaal 5 cm aan tussen de magneten en de locatie van de geïmplanterde shuntklep.

 Het gebruik van accessoires, transducers en kabels anders dan degene die door de fabrikant van deze apparatuur zijn gespecificeerd of meegeleverd, kan leiden tot verhoogde elektromagnetische emissies of verlaagde elektromagnetische immuniteit van deze apparatuur en leiden tot onjuiste werking.

- ⚠ Draagbare RF-communicatieapparatuur (inclusief randapparatuur zoals antennekabels en externe antennes) moet op meer dan 30 cm van elk onderdeel van het hoortoestel worden gebruikt, inclusief de door de fabrikant gespecificeerde kabels. Indien dit niet in acht wordt genomen, kan dit leiden tot verslechtering van de prestaties van deze apparatuur.

- ⚠ Het gebruik van deze apparatuur naast of in combinatie met andere apparatuur moet worden vermeden, aangezien het kan leiden tot onjuiste werking. Indien een dergelijk gebruik noodzakelijk is, dienen deze apparatuur en andere apparatuur te worden geobserveerd om er zeker van te zijn dat ze naar behoren functioneren.

- ⚠ Dit hoortoestel mag niet uitgerust worden met eartips wanneer deze gebruikt wordt door cliënten met een geperforeerd trommelvlies, ontstoken gehoorgang of wanneer de holttes van het middenoor op een andere manier blootliggen. In dat geval raden we aan gebruik te maken van een aangepast standaardoorstukje. In het onwaarschijnlijke geval dat een onderdeel van dit product achterblijft in de gehoorgang, wordt u verzocht een medisch specialist te raadplegen om het onderdeel veilig te laten verwijderen.

-  Voorkom harde stoten tegen het oor wanneer u een hoortoestel met een op maat gemaakt oorstukje draagt. De stabiliteit van de op maat gemaakte oorstukjes is ontwikkeld voor normaal gebruik. Een harde stoot tegen het oor (bijvoorbeeld tijdens het sporten) kan ertoe leiden dat het op maat gemaakte oorstukje defect raakt. Dit kan een perforatie van de gehoorgang of het trommelvlies veroorzaken.
-  Na mechanische belasting of schokken van het op maat gemaakte oorstukje dient u ervoor te zorgen dat het intact is voordat u het hoortoestel in het oor plaatst.

17.2 Informatie over de veiligheid van het product

- ① Dit hoortoestel is vochbestendig maar niet waterdicht. Het is bestand tegen normale activiteiten en incidentele onvoorziene blootstelling aan extreme omstandigheden. Dompel uw hoortoestel nooit onder in water! Dit hoortoestel is niet specifiek ontworpen om meerdere malen voor langere periodes onder water gedompeld te worden, bijvoorbeeld tijdens activiteiten als zwemmen of een bad nemen. Verwijder uw hoortoestel altijd voordat u deze activiteiten gaat ondernemen, aangezien het gevoelige elektronische onderdelen bevat.
- ① Bescherm uw hoortoestel tegen hitte (laat het nooit bij het raam of in de auto liggen). Gebruik nooit een magnetron of ander verwarmingstoestel om uw hoortoestel te drogen. Vraag uw audicien naar geschikte droogmethoden.
- ① De eartip moet elke drie maanden vervangen worden, of eerder als hij stijf of poreus wordt. Dit voorkomt dat de eartip losraakt van de SlimTube bij het inbrengen in of verwijderen uit het oor.

- ① Laat de batterijlade open wanneer u het hoortoestel niet gebruikt, zodat aanwezig vocht kan verdampen. Zorg ervoor dat u het hoortoestel steeds volledig droogt na gebruik. Bewaar het hoortoestel op een veilige, droge en schone plaats.
- ① Laat uw hoortoestel niet vallen! Het apparaat kan beschadigd raken wanneer het valt op een hard oppervlak.
- ① Gebruik altijd een nieuwe batterij wanneer u een lege batterij vervangt. Als een batterij lekt, vervang deze dan onmiddellijk door een nieuwe om huidirritatie te voorkomen. U kunt lege batterijen inleveren bij uw audicien.
- ① Als u uw hoortoestel gedurende langere tijd niet gebruikt, bewaart u deze in een opbergdoosje met droogcapsule of op een goedgeventileerde locatie. Hierdoor kan vocht uit uw hoortoestel verdampen en wordt een potentiële impact op de prestaties voorkomen.
- ① De batterijen die in dit hoortoestel gebruikt worden, mogen de 1,5 volt niet overschrijden. Gebruik geen zilver-zink- of oplaadbare Li-ion-batterijen (lithium-ion). Deze kunnen ernstige schade aan uw hoortoestel veroorzaken. In de tabel in hoofdstuk 5 kunt u precies zien welk type batterij geschikt is voor uw type hoortoestel.

- ① Verwijder de batterij indien u het hoortoestel langere tijd niet gebruikt.

- ① Speciale medische en tandheekkundige onderzoeken waarbij blootstelling aan straling noodzakelijk is, kunnen de juiste werking van uw hoortoestel beïnvloeden. Verwijder de hoortoestellen voorafgaand aan het onderzoek en bewaar deze buiten de onderzoeksruimte:
 - Medisch of tandheekkundig onderzoek met röntgenstraling (inclusief CT-scan).
 - Medische onderzoeken met MRI/NMRI-scans waarbij magnetische velden worden gegenereerd.
Het is niet noodzakelijk het hoortoestel voor het passeren van een detectiepoort (luchthaven etc.) te verwijderen.
Als hierbij al röntgenstraling wordt gebruikt, is dit een zeer lage dosis en zal deze geen invloed hebben op de werking van het hoortoestel.

- ① Gebruik uw hoortoestel niet in gebieden waar elektronische apparatuur verboden is.









Fabrikant:

Sonova AG

Laubisrütistrasse 28

CH-8712 Stäfa

Zwitzerland

www.phonak.com

sonova
HEAR THE WORLD



0459

029-3333-07N/2.00/2021-05/NLG © 2020 Sonova AG All rights reserved

