

# Roger NeckLoop voor spraak-naar-tekst

## Installatie-instructies

Roger NeckLoop kan worden verbonden met een computer, tablet of smartphone om live geautomatiseerde ondertiteling te genereren via spraak-naar-tekst-software van derden.


### Vorbereiding

1. Zorg ervoor dat uw Roger NeckLoop en uw Roger microfoon opgeladen zijn.
2. Zorg ervoor dat er een applicatie van derden voor spraak-naar-tekst, live-transcriberen of -dicteren is geïnstalleerd op uw computer, smartphone of tablet.

### Verbinden met een computer


*U hebt het volgende nodig:* De meegeleverde USB-C- naar USB-A-kabel.

1. Sluit de USB-kabel aan op de Roger NeckLoop en uw computer:

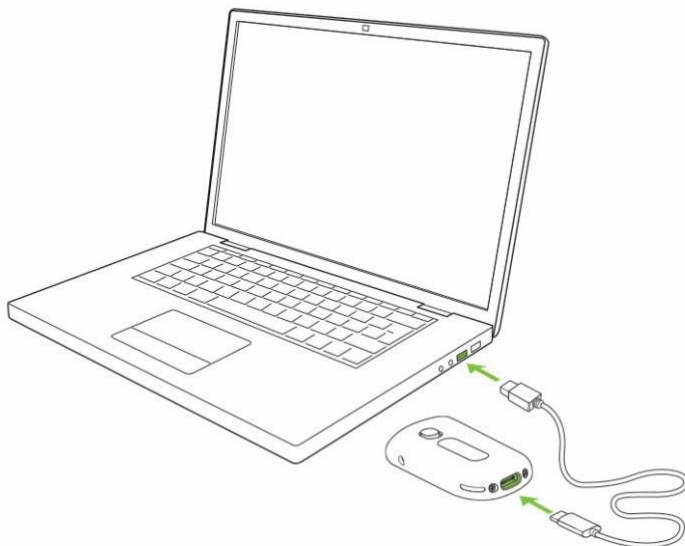

2. Zet de Roger NeckLoop aan.

3. Zorg ervoor dat de Roger NeckLoop is geselecteerd als de input op uw computer (geluidsinstellingen):

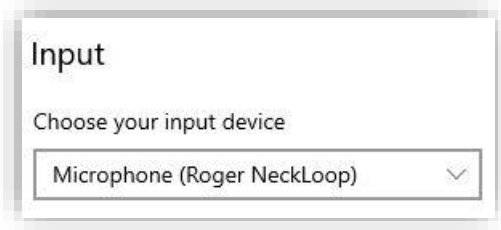

4. Start de spraak-naar-tekst-software (applicatie van derden) op uw computer. U kunt ook de functie 'Dicteren' gebruiken in Microsoft Word:




5. Praat in de Roger microfoon en de spraak-naar-tekst-software of Microsoft Word zal de gesproken woorden transcriberen naar tekst.

### Verbinden met een smartphone of tablet met USB-C-aansluiting

*U hebt het volgende nodig:* De meegeleverde USB-C- naar USB-A-kabel en een *On-the-Go-adapter (OTG)*, **OF** een *USB-C- naar USB-C-kabel*.

1. Verbind de Roger NeckLoop met uw smartphone of tablet met een OTG-adapter en de meegeleverde USB-C- naar USB-A-kabel **OF** gebruik een USB-C- naar USB-C-kabel.
2. Zet de Roger NeckLoop aan.
3. Start de spraak-naar-tekst-app (bv. Google Transcribe) op uw smartphone of tablet.
4. Indien nodig selecteert u de Roger NeckLoop als input.
5. Praat in de Roger microfoon en de spraak-naar-tekst-app zal de gesproken woorden transcriberen naar tekst.

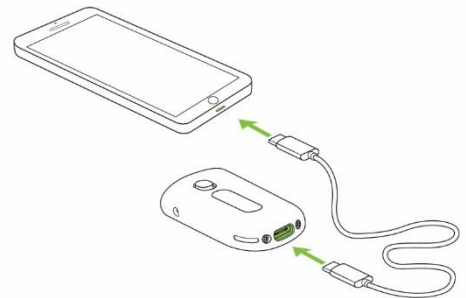

### Verbinden met een smartphone of tablet met Lightning-aansluiting

*U hebt het volgende nodig:* De meegeleverde USB-C- naar USB-A-kabel en een *Lightning naar USB-3-camera-adapter*. De oplader van uw telefoon.

1. Sluit de adapter aan op uw smartphone.
2. Sluit de oplader van uw telefoon aan op de adapter.
3. Sluit de Roger NeckLoop aan op de adapter met de meegeleverde USB-C- naar USB-A-kabel.
4. Zet de Roger NeckLoop aan.
5. Start de spraak-naar-tekst-app op uw smartphone of tablet.
6. Indien nodig selecteert u de Roger NeckLoop als input.
7. Praat in de Roger microfoon en de spraak-naar-tekst-app zal de gesproken woorden transcriberen naar tekst.

