

Roger On™

Gebruiksaanwijzing



roger

Inhoud

1. Welkom	5
2. Uw Roger On leren kennen	6
2.1 Apparaatbeschrijving	11
2.2 Dockingstation	12
2.3 Accessoires	13
2.4 Scherm	14
2.5 Technische gegevens	15
3. Uw Roger microfoon opladen	16
4. Uw Roger On gebruiken	19
4.1 Uw Roger On inschakelen	19
4.2 Algemeen gebruik	20
4.3 Gebruik op een tafel	21
4.4 Gebruik in veel lawaai	23
4.5 Luisteren naar een spreker op afstand	25
5. De microfoonmodus vergrendelen	27
6. Dempfen	29
7. Naar de tv of een ander stationair audioapparaat luisteren	30
7.1 Het dockingstation voorbereiden	30
7.2 Naar de tv luisteren met het dockingstation	32

8. Naar een audioapparaat luisteren	34
8.1 Audio streamen via de oplaadkabel	34
9. Roger On gebruiken tijdens online gesprekken	36
10. Stereomodus	38
11. myRogerMic app	39
12. Netwerkfuncties	40
12.1 Verbinding maken met een hoortoestel of Roger ontvanger	40
12.2 Een andere microfoon verbinden	43
12.3 Roger apparaten loskoppelen	45
13. Gebruik in een grote groep	46
13.1 Meerdere microfoons gebruiken	47
14. Resetten	48
15. Leveringsstand	49
16. Onderhoud en verzorging	50
17. Problemen oplossen	52
18. Conformiteitsinformatie	56
19. Informatie en verklaring van symbolen	60
20. Belangrijke veiligheidsinformatie	63
21. Service en garantie	70

Deze gebruiksaanwijzing geldt voor:

Roger On 3

CE-markering toegepast 2024



1. Welkom

Uw Roger On is ontwikkeld door Phonak, wereldleider op het gebied van hooroplossingen. Het hoofdkantoor bevindt zich in Zürich, Zwitserland.

Dit topproduct is het resultaat van decennia aan onderzoek en expertise en is ontwikkeld om u te helpen verbonden te blijven met al het moois van geluid! Wij danken u voor uw goede keuze en wensen u jarenlang luisterplezier.

Lees de gebruiksaanwijzing grondig door, zodat u zeker weet dat alles duidelijk is en u uw Roger On optimaal kunt gebruiken. Neem voor meer informatie over functies, voordelen, configuratie, gebruik en onderhoud of reparatie van uw Roger On en accessoires contact op met uw audicien of de fabrikant.


Neem voor informatie over de reparatie van de Roger On of accessoires contact op met de audicien.

Phonak – life is on
www.phonak.com

2. Uw Roger On leren kennen

Roger On vangt de spraak van een spreker op en zendt deze draadloos naar uw oren. U kunt uw Roger On hoofdzakelijk op vijf manieren gebruiken:

Op een tafel: plaats Roger On in het midden van de tafel en hoor mensen die eromheen zitten.


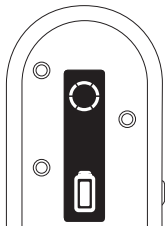


Restaurant




Vergadering

Interview: houd Roger On in de richting van de persoon die u wilt horen.

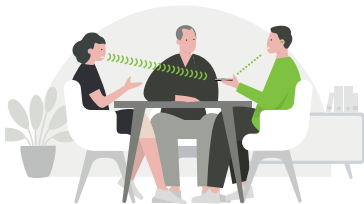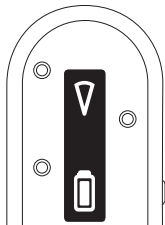


Chatten

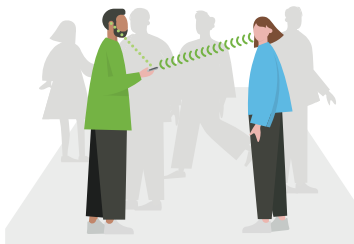

Elkaar aankijkend



Brede richtmodus: Plaats Roger On voor een kleine groep om ze allemaal te horen.

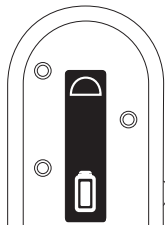

Plenaire discussie

① De myRogerMic-app is vereist om de brede richtmodus in te schakelen.

Presentator: klem of hang Roger On in de buurt van de mond van een spreker op afstand om diegene beter te horen.

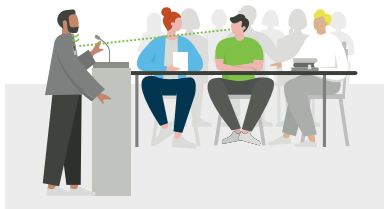
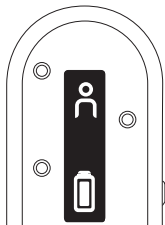


Spraak/college





Fitnessles

Tv/multimedia: stream het geluid van uw tv of een ander audioapparaat rechtstreeks naar uw oren.

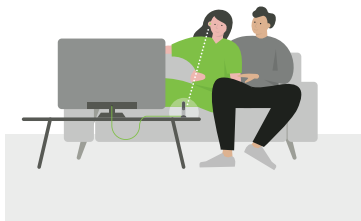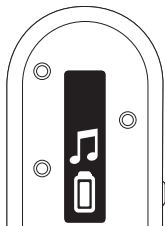


Tv kijken

Online gesprekken: gebruik Roger On als een microfoon tijdens online gesprekken.

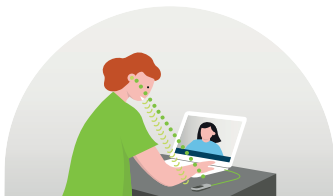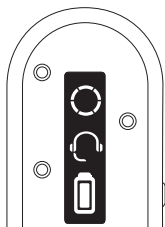

Een gesprek voeren

2.1 Apparaatbeschrijving

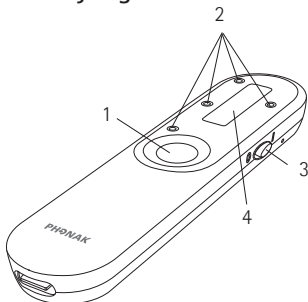

1 Functiekноп

2 4 microfoons

3 AAN/UIT-schuifkноп


4 Scherm

5 Verbindingskноп


6 Clip

7 Interne accu

8 USB C-aansluiting

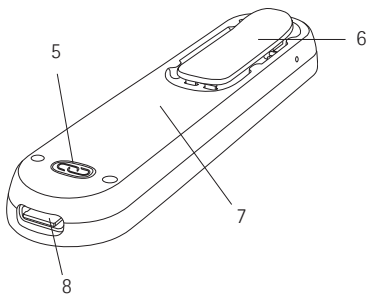


2.2 Dockingstation

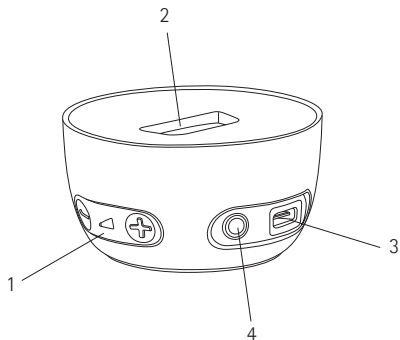


- 1 Volumeregelaar audio-input
- 2 Aansluiting voor Roger On
- 3 USB C-aansluiting
- 4 3,5 mm analoge en optische digitale (Toslink) audio-input


2.3 Accessoires

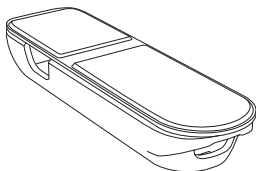


Bewaardoosje

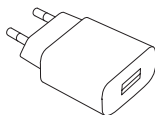


Voedingsadapter

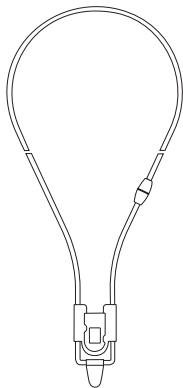

Draagkoord

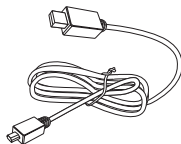


Oplaadkabel

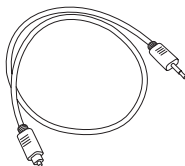

Tv-kabel

2.4 Scherm

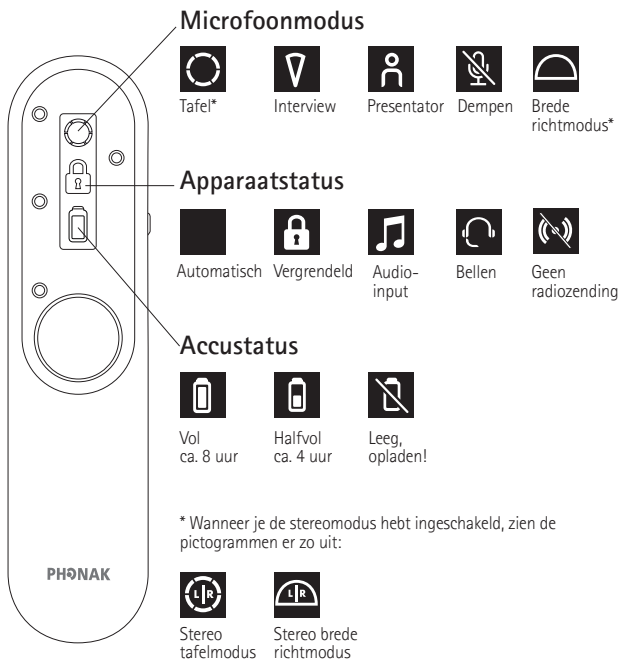


* Wanneer je de stereomodus hebt ingeschakeld, zien de pictogrammen er zo uit:

Voor meer informatie over de stereomodus, raadpleeg hoofdstuk 10.

2.5 Technische gegevens

Bereik:

U kunt uw Roger On tot op 25 meter afstand van u plaatsen. Let op: objecten zoals muren kunnen deze afstand verkorten. Wanneer u uw Roger On kunt zien (d.w.z. binnen gezichtsveld), hebt u de grootste kans om optimaal bereik te hebben.

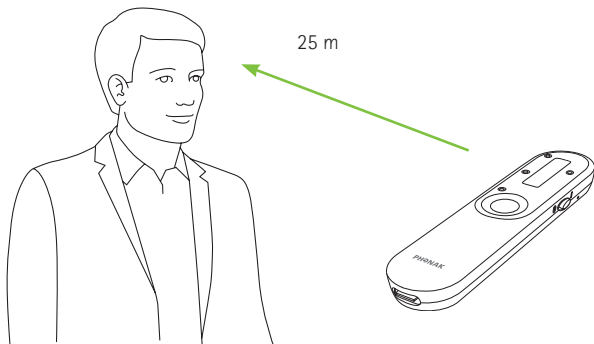

Levensduur van de accu:


Met een volledig opgeladen accu kunt u gewoonlijk 8 uur lang streamen.

3. Uw Roger microfoon opladen

U kunt uw Roger microfoon op drie manieren opladen:


A) Met de voedingsadapter

1. Steek het kleinere uiteinde (USB C) van de oplaadkabel in uw Roger microfoon.
2. Steek het grotere uiteinde (USB A) van de kabel in de voedingsadapter.
3. Steek de voedingsadapter in een stopcontact.

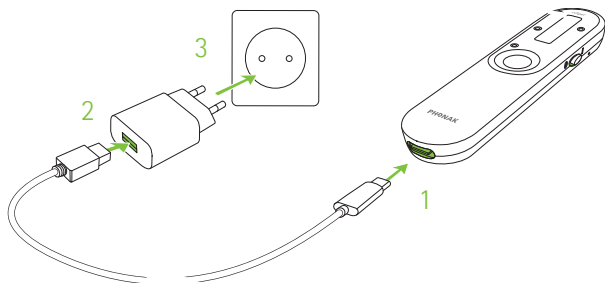

B) Met een computer of tablet


1. Steek het kleinere uiteinde (USB C) van de oplaadkabel in uw Roger On.
2. Steek het grotere uiteinde (USB A) van de kabel in de USB-poort van uw computer en zet uw computer aan.

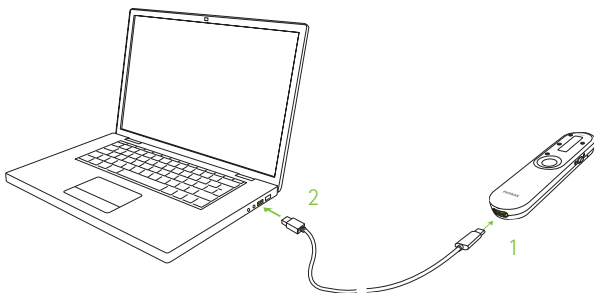

C) Via het dockingstation

Plaats de Roger On in het dockingstation.

❗ Raadpleeg hoofdstuk 7.1 voor het opstellen van het dockingstation.

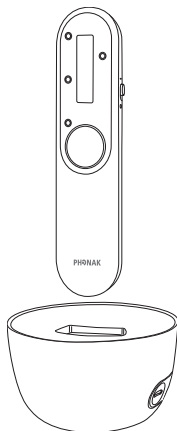

Oplaadstatus



Tijdens het opladen, zal het batterijpictogram bewegen.



Wanneer de accu volledig is opgeladen, stopt het batterijpictogram met bewegen en wordt een volledig opgeladen batterij weergegeven. Na 15 minuten wordt de display uitgeschakeld.


Met de meegeleverde oplader is Roger On:

- 80% opgeladen na 1 uur
- 100% opgeladen na 3 uur

4. Uw Roger On gebruiken

4.1 Uw Roger On inschakelen

Zet de aan/uit-schakelaar in de stand Aan. Na een korte opstart-animatie is uw Roger On klaar voor gebruik.

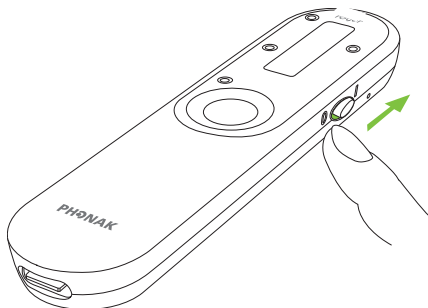

- ❗ Als u het pictogram met een doorgestreepte schakeling op de display ziet, moet u uw Roger On eerst aan uw hoortoestel(len) of Roger ontvanger koppelen, zoals beschreven in hoofdstuk 12.



4.2 Algemeen gebruik

De Roger On is een veelzijdig, intelligent product. Hij detecteert automatisch in welke situatie u zich bevindt en past zijn microfooninstellingen automatisch aan.

① Voor het beste spraakverstaan dient u uw Roger microfoon zo dicht mogelijk bij uw gesprekspartner(s) te plaatsen.


① Pas de lengte van het draagkoord aan, zodat de Roger On zich binnen 20 cm afstand van de mond van de spreker bevindt.

4.3 Gebruik op een tafel

Plaats uw Roger On in het midden van de tafel om naar een groep mensen te kunnen luisteren.



De microfoon vangt de stem van iedereen om de tafel op, zoals aangegeven door de cirkel op de display.

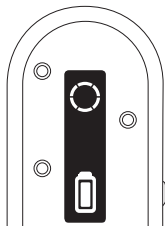


De app gebruiken om de bundel te sturen

Met de myRogerMic app kunt u de richting van de bundel sturen, zodat deze zich op een of meerdere specifieke sprekers richt. Raadpleeg hoofdstuk 11 voor meer informatie over hoe u de app downloadt.

De standaardfunctie van het doosje gebruiken

Wanneer u zich op één persoon voor u wilt concentreren, kunt u de Roger On in het doosje plaatsen en omhoog kantelen met de standaardfunctie.

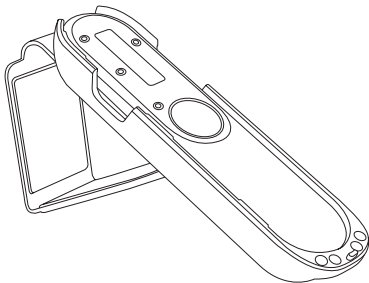


Wanneer u de standaard gebruikt, wordt de microfoon automatisch in de interviewmodus gezet.

4.4 Gebruik in veel lawaai

Houd de Roger On in uw hand en richt hem op de persoon die u wilt horen.




De microfoon activeert automatisch een smalle bundel en vangt de stem van de persoon naar wie u wijst, op. Dit wordt op de display aangegeven met een driehoekje.

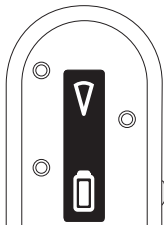


- ① Zorg ervoor dat uw Roger On recht naar de mond van de spreker wijst.

- ① Wanneer u de Roger On in uw hand houdt, probeer de microfoonopeningen dan niet te bedekken.

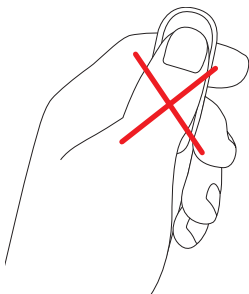


4.5 Luisteren naar een spreker op afstand

Klem Roger On op de kraag van een spreker op afstand om diegene beter te horen.


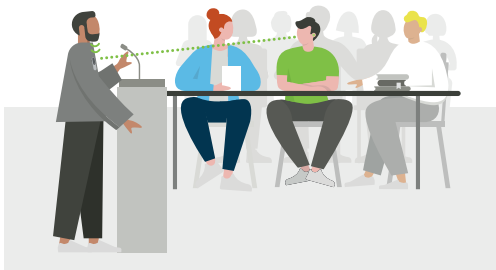


De microfoon vangt alleen de stem op van de persoon die de microfoon draagt, zoals aangegeven door het poppetje op de display.

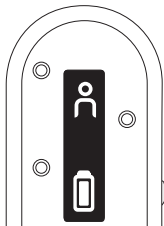


- i** U kunt de Roger On ook aan het draagkoord bevestigen en rond de hals van een spreker op afstand hangen:

1. Open de clip
2. Schuif het koord op de clip en sluit deze

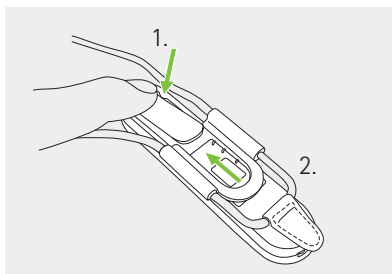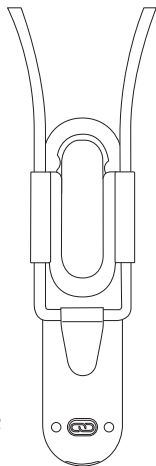


5. De microfoonmodus vergrendelen

Als u de Roger On in een specifieke microfoonmodus wilt houden, onafhankelijk van hoe deze is geplaatst, druk dan herhaaldelijk op de functieknop tot u de microfoonmodus hebt bereikt waarin u de microfoon wilt vergrendelen.

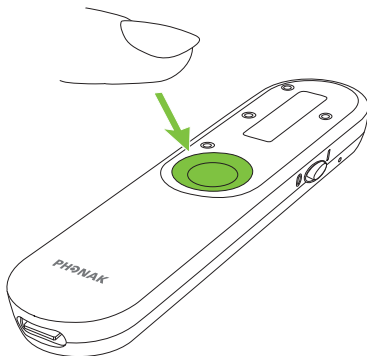

De vergrendelmodi worden in de volgende volgorde weergegeven:

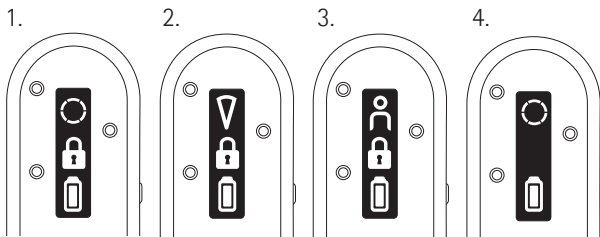


1. Tafelmodus
2. Interviewmodus
3. Presentatormodus
4. Wanneer er geen vergrendelpictogram wordt weergegeven, geeft dit aan dat de Roger On in de automatische modus staat


Het vergrendelpictogram geeft aan dat de microfoonmodus vergrendeld is.

6. Dempen

Om de Roger On te dempen, houdt u de functieknop gedurende twee seconden ingedrukt:

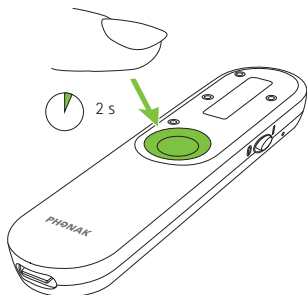


De gedempte microfoon wordt aangeduid door een doorgestreept microfoon- en radio-icoon op het display. Dit betekent dat je microfoon geen radiosignaal verzendt en dat je hoortoestel mogelijk terugkeert naar het automatische programma. Om het dempen van de microfoon weer op te heffen, houdt u de functieknop gedurende twee seconden ingedrukt:

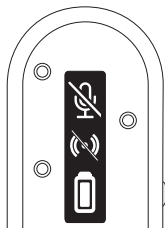


7. Naar de tv of een ander stationair audioapparaat luisteren

7.1 Het dockingstation voorbereiden

1. Steek het kleinere uiteinde van de USB-kabel in de aansluiting van het dockingstation.
2. Steek het grotere uiteinde van de USB-kabel in de voedingsadapter.
3. Steek de voedingsadapter in een stopcontact.

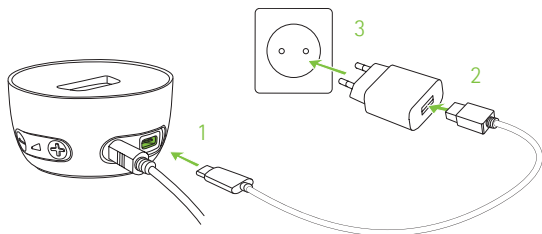

4. Steek het andere uiteinde van de optische (Toslink-) kabel in de optische aansluiting van uw tv of een ander audioapparaat.

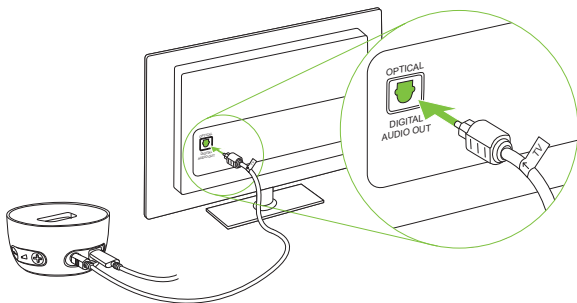


❶ Bescherm uw ogen tegen het optische licht van de optische Toslink-kabel wanneer deze op het apparaat of de tv wordt aangesloten.


❶ Als uw tv of een ander audio-apparaat geen optische audio-output heeft, kunt u ook een analoge audiokabel gebruiken voor verbinding tussen de tv en het dockingstation. Vraag uw audicien naar een dergelijke analoge audiokabel.

7.2 Naar de tv luisteren met het dockingstation

1. Plaats uw Roger microfoon in het dockingstation.
2. Zet uw tv aan (of een ander audioapparaat). Uw Roger microfoon zendt het audiosignaal automatisch naar uw oren.

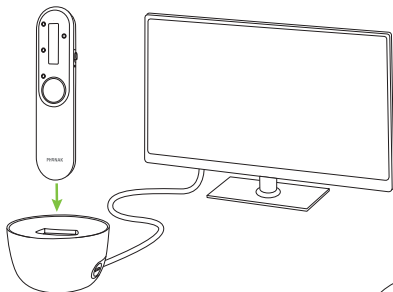


Dit wordt op de display aangegeven met een muziknootje.

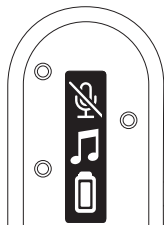

3. Pas het volume naar eigen wens aan met de +/- knoppen op het dockingstation.

① Uw Roger microfoon wordt automatisch gedempt wanneer deze het tv-signaal verzendt. U kunt de microfoon activeren door het apparaat aan te zetten en de functieknop in te drukken. Nu hoort u het tv-signaal en geluid via de microfoon tegelijkertijd.

Als u het audiosignaal niet meer wilt ontvangen, zet u simpelweg de tv (of een ander audioapparaat) uit of haalt u uw Roger microfoon uit het dockingstation.

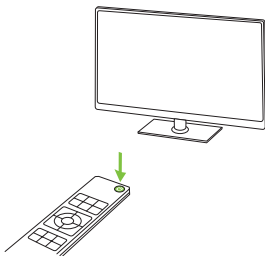


8. Naar een audioapparaat luisteren

8.1 Audio streamen via de oplaadkabel

Voor de beste geluidskwaliteit en gebruiksgemak raden we aan om de laadkabel te gebruiken om audio van een audioapparaat (bijv. computer, tablet of smartphone) naar je hoortoestellen te streamen.

1. Steek het kleinere uiteinde (USB C) van de oplaadkabel in uw Roger On.
2. Steek het grotere uiteinde (USB A) van de kabel in de USB-poort van je audioapparaat en zet het aan.
3. Speel de muziek af of start de muziek-app op uw audio-apparaat.

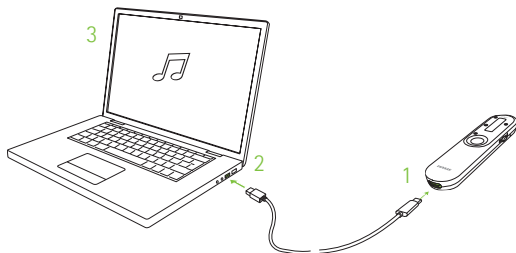


① Uw Roger microfoon wordt automatisch ingeschakeld wanneer er audio wordt gestreamd.

① Let op: uw Roger microfoon gebruikt uw audio-apparaat als voedingsbron.

Om de overdracht van het audiosignaal te beëindigen, stop of demp het geluid op je audioapparaat of trek de kabel eruit.


9. Roger On gebruiken tijdens online gesprekken

1. Steek het kleinere uiteinde (USB C) van de oplaadkabel in uw Roger On.
2. Steek het grotere uiteinde (USB A) van de kabel in de USB-poort van uw computer en zet uw computer aan.
3. Start het online gesprek op uw computer.
4. U hoort nu de online deelnemer(s) in uw oren en u kunt in uw Roger microfoon praten.

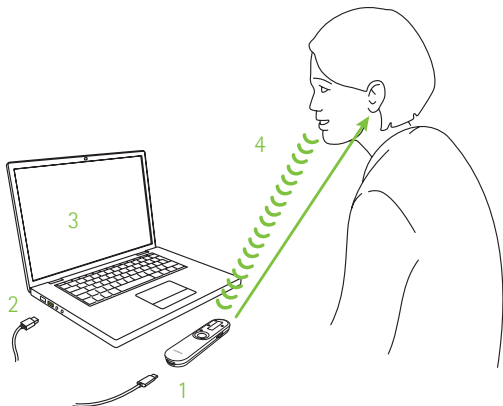

Tijdens het gesprek kunt u uw Roger On op tafel plaatsen, deze in uw richting laten wijzen, of deze op uw borst dragen. Voor de beste geluidskwaliteit raden we aan Roger On op uw borst te dragen.

Roger On toont een koptelefoon-pictogram om aan te geven dat deze wordt gebruikt in een online gesprek:

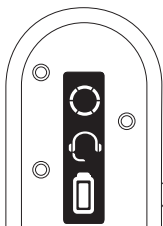

10. Stereomodus

Als je een set hoortoestellen van Phonak, Unitron of Hansaton met RogerDirect™ hebt of als je een Naída CI M hebt, kun je profiteren van stereobeluistering!

Stereomodus kan worden gebruikt in de tafel- en brede richtmodus en stelt je in staat om te horen uit welke richting een spreker praat.




Stereo tafelmodus



Stereo brede richtmodus

Wanneer je de stereomodus in de app hebt ingeschakeld, zorg ervoor dat de USB zijde op Roger On naar jou gericht is wanneer je het apparaat op een tafel plaatst.

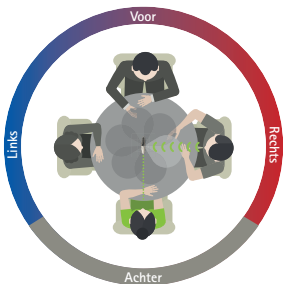

i De myRogerMic-app is vereist om de stereomodus en de brede richtmodus in te schakelen.

11. myRogerMic app



Met de myRogerMic app kunt u uw Roger On op afstand bedienen via uw smartphone.

Hiermee kunt u:

- De richting van de bundel sturen
- De microfoonmodus wijzigen
- Schakel de stereomodus in
- Schakel de brede richtmodus in
- Dempen/demping opheffen
- De huidige apparaatstatus bekijken, zoals het accuniveau en de huidige microfoonmodus

Uw smartphone moet Bluetooth® LE ondersteunen om verbinding te kunnen maken met Roger On. U kunt de myRogerMic app downloaden via Google Play en de App Store.



Lees voor meer informatie over de app de gebruiksaanwijzing van de myRogerMic app, die u kunt downloaden via www.phonak.com

Bluetooth® is een geregistreerd handelsmerk van Bluetooth SIG, Inc.; en dit merk wordt door Sonova onder licentie gebruikt.

Het Apple App Store-logo is een handelsmerk van Apple Inc.


Het Google Play-logo is een handelsmerk van Google LLC.

12. Netwerkfuncties


12.1 Verbinding maken met een hoortoestel of Roger ontvanger

Om Roger On te verbinden met een hoortoestel waarop Roger is geïnstalleerd of met een Roger ontvanger, volgt u deze stappen:


1. Zet uw Roger On en hoortoestel aan.
2. Druk op de verbindingsknop op de achterkant van uw Roger On.

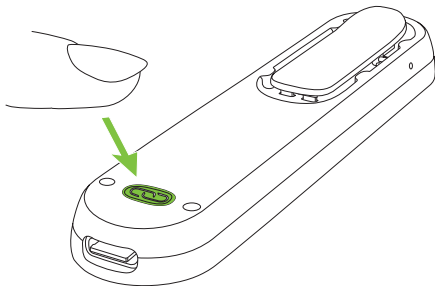


3. Houd uw Roger On dichtbij (maximaal 10 cm afstand) het hoortoestel of de Roger ontvanger:

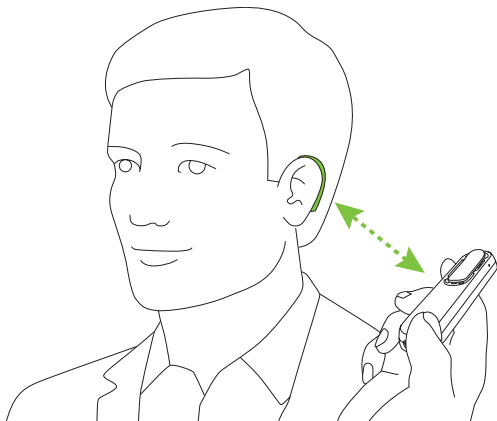


4. Controleer de status in de display van Roger On:

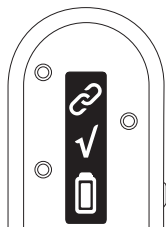

Verbinden
geslaagd

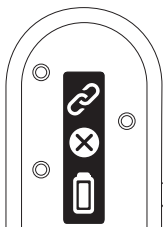

Ontvanger niet
compatibel

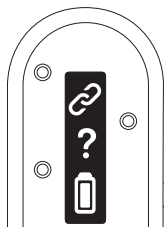


Geen ontvanger gevonden,
plaats dichterbij

- ❶ U hoeft een ontvanger slechts eenmaal te verbinden. Het hoortoestel of de Roger ontvanger blijft verbonden met uw microfoon, zelfs nadat uw hoortoestel of de Roger ontvanger opnieuw is opgestart.


12.2 Een andere microfoon verbinden

Om een andere compatibele Roger microfoon met uw Roger On te verbinden, volgt u de stappen hieronder. Raadpleeg hoofdstuk 13 voor meer informatie over hoe u meerdere microfoons in een netwerk gebruikt.


1. Zet beide Roger microfoons aan.
2. Houd uw Roger On dichtbij (maximaal 10 cm afstand) de andere Roger microfoon.

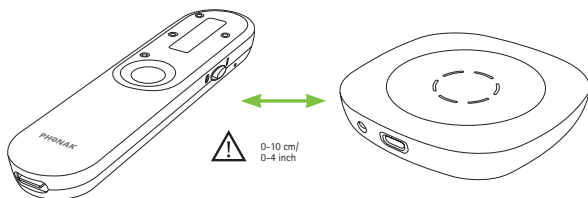


3. Druk op de verbindingknop op uw Roger On.

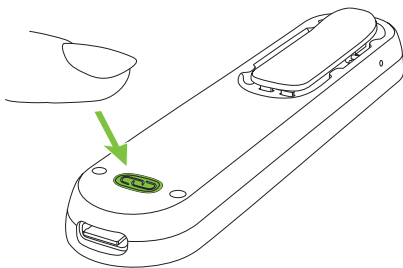


4. Controleer de status in de display van Roger On:

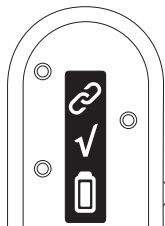

Verbinden
geslaagd

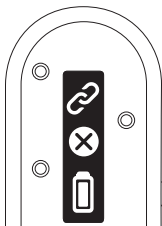


Apparaat niet
compatibel

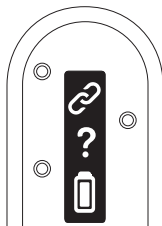


Geen apparaat gevonden,
plaats dichterbij

- ❗ U hoeft een andere microfoon slechts eenmaal te verbinden. De andere microfoon blijft verbonden met uw Roger on, zelfs nadat de microfoons opnieuw zijn opgestart.

12.3 Roger apparaten loskoppelen

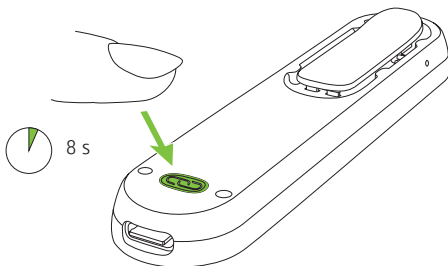


Om uw Roger On los te koppelen van aangesloten ontvangers of andere Roger microfoons, houdt u de verbindingsknop  8 seconden ingedrukt tot u deze informatie op de display ziet:

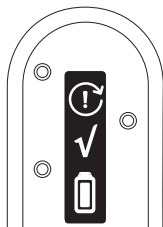

13. Gebruik in een grote groep


De Roger On kan in combinatie met andere Roger microfoons worden gebruikt, zoals de Roger Table Mic. Raadpleeg hoofdstuk 12.2 voor meer informatie over hoe u een andere microfoon verbindt.

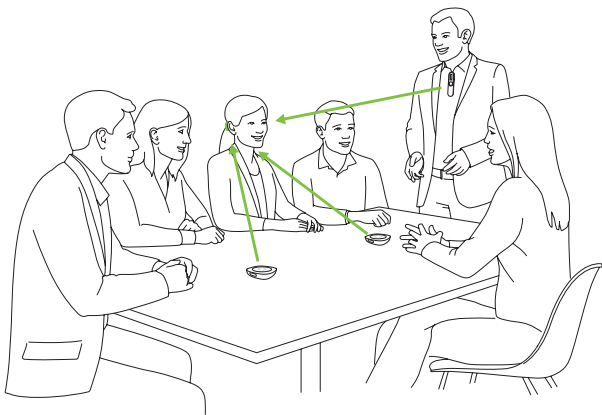


Door meerdere microfoons te gebruiken, kunt u een grotere groep of meerdere sprekers op afstand beter horen.

13.1 Meerdere microfoons gebruiken


Wanneer u de Roger On in combinatie met andere microfoons gebruikt, dient de spreker het apparaat op de borstkas te dragen. Wanneer u Roger On op de tafel plaatst of wanneer u deze in uw hand houdt, wordt de microfoon automatisch gedempt. Door de demping van Roger On op te heffen door de middenknop ingedrukt te houden (2 seconden), worden andere microfoons die met de Roger On verbonden zijn, geblokkeerd. Door Roger On te dempen, worden andere microfoons opnieuw geactiveerd.

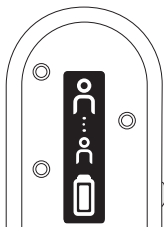

Roger On is met minimaal één andere Roger microfoon verbonden

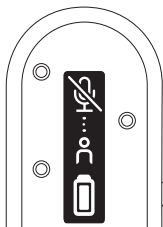

Roger On wordt automatisch gedempt wanneer deze op de tafel wordt geplaatst of in de hand wordt gehouden

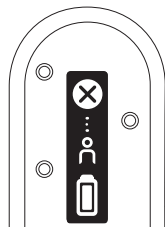


Roger On wordt geblokkeerd door een andere Roger microfoon in het netwerk

14. Resetten

Indien uw Roger On niet meer reageert op opdrachten, kunt u het apparaat resetten door de middenknop en de verbindingsknop  tegelijkertijd 10 seconden ingedrukt te houden.

15. Leveringsstand

In het geval dat u de Roger On voor reparatie moet retourneren, wordt het aanbevolen om deze in de verzendmodus te zetten. U doet dit door de verbindingsknop ingedrukt te houden en het apparaat uit te schakelen. De verzendmodus wordt bevestigd door de volgende informatie op de display:

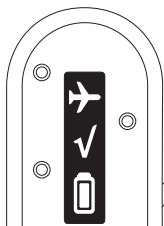

16. Onderhoud en verzorging

Een degelijke en regelmatige verzorging van uw Roger microfoon en accessoires draagt bij aan uitstekende prestaties en een lange levensduur. Om een lange productlevensduur te garanderen, biedt Sonova Communications AG een minimale onderhoudsperiode van vijf jaar na de uitfasering van de betreffende Roger microfoon.

- ① Zorg er altijd voor dat de Roger microfoon, het dockingstation en de oplaadkabels droog en schoon zijn voordat u ze gebruikt.

Algemene informatie

Uw Roger microfoon is bestand tegen spatwater en stof. Na blootstelling aan water, zweet of stof moet u de Roger microfoon schoonmaken en daarna drogen.

Reinigingsinstructies

Reinig de oppervlakken met een pluisvrije doek. Gebruik nooit reinigingsmiddelen zoals huishoudelijke wasmiddelen, zeep, enz. voor het reinigen van uw Roger microfoon. Het wordt niet aangeraden het hoortoestel met water af te spoelen. Vraag bij uw audicien om advies wanneer u de Roger microfoon grondig dient te reinigen.

Voor het dockingstation dient u ervoor te zorgen dat de oplaadingang en -aansluitingen schoon zijn.

Verwijder stof of vuil uit de oplaadingang. Gebruik nooit huishoudelijke schoonmaakmiddelen, zeep etc. om het dockingstation te reinigen.

17. Problemen oplossen

Probleem

Ik kan mijn Roger microfoon niet inschakelen.

Ik hoor geen geluid uit mijn Roger microfoon.

Ik kan de spreker horen, maar ik kan niet verstaan wat hij/zij zegt.

Oorzaken

De accu is leeg.

Uw Roger microfoon is gedempt.

Uw Roger microfoon is vergrendeld.

Uw Roger ontvangers zijn niet verbonden met uw Roger microfoon.

Uw Roger ontvanger werkt niet.

De hoortoestellen zijn niet ingesteld op het juiste programma.

De microfoon bevindt zich te ver van de spreker.

De microfoonopeningen zijn bedekt door vingers.

De microfoonopeningen zijn bedekt door vuil.

De Roger microfoonmodus is vergrendeld.

Oplossingen

Laad uw Roger microfoon minimaal twee uur op.

Hef de demping van uw Roger microfoon op door de middenknop 2 seconden ingedrukt te houden.

Schakel over op de automatische microfoonmodus of zorg dat u de microfoon in de toepasselijke modus vergrendelt.

Houd de Roger microfoon dicht bij de Roger ontvanger of het met Roger compatibele hoortoestel en druk op de verbindingsknop.

Controleer of u de Roger ontvanger hebt bevestigd aan uw hoortoestel en of deze is ingeschakeld.

Controleer of uw hoortoestellen zijn ingesteld op het juiste programma (Roger/FM/DAI/EXT).

Plaats uw Roger microfoon dicht bij de mond van de spreker.

Houd de microfoon zodanig vast dat de microfoonopeningen niet worden bedekt.

Reinig de microfoonopeningen.

Schakel over op de automatische microfoonmodus of zorg dat u de microfoon in de toepasselijke modus vergrendelt.

Probleem

Ik blijf het audiosignaal verliezen.

Ik hoor te veel achtergrondlawaai.

Ik vind het niet prettig om mijn eigen stem te horen via mijn Roger microfoon.

Het volume van mijn multimedia-apparaat staat te zacht.

Ik kan mijn multimedia-apparaat niet horen.

Mijn Roger microfoon werkt niet meer en reageert niet wanneer ik op een knop druk.

Tijdens een online gesprek kan de persoon aan de andere kant mij niet horen.

Oorzaken

De afstand tussen u en uw Roger microfoon is te groot.

Er bevinden zich obstakels tussen u en uw Roger microfoon.

Uw Roger microfoon vangt achtergrondlawaai op.

Uw stem wordt opgevangen door uw Roger microfoon.

Onjuiste volume-instellingen.

Het audioapparaat is gedempt.

Uw Roger microfoon is uitgeschakeld.

De audiokabel is niet correct aangesloten.

Softwareprobleem.

De Roger microfoon is niet op de goede manier geplaatst. U hebt uw microfoon gedempt in de applicatie op uw computer.

Oplossingen

Ga dichterbij uw Roger microfoon zitten/staan.

Houd uw Roger microfoon in uw gezichtsveld of ga dichterbij uw Roger microfoon zitten/staan.

Schakel over op de interviewmodus en wijs uw Roger microfoon in de richting van de spreker.

In de myRogerMic app, deactiveert u de bundel die in uw richting wijst.

Het volume op het dockingstation van de Roger microfoon of van uw audioapparaat verhogen.

Hef de demping van het audioapparaat op.

Zet uw Roger microfoon aan.

Sluit de audiokabel correct aan.

Reset uw Roger microfoon door de functiekноп en de verbindingsknop tegelijkertijd 10 seconden ingedrukt te houden. Neem contact op met uw audicien om te kijken of er een software-update beschikbaar is.

Om te zorgen dat u tijdens een online gesprek zo goed mogelijk te verstaan bent, bevestigt u de Roger microfoon op uw bovenkleding. U kunt de Roger microfoon ook plat op de tafel plaatsen, of zorgen dat deze in uw richting wijst.

Stop met het dempen van uw microfoon in de applicatie op uw computer.

18. Conformiteitsinformatie

Europa:

Conformiteitsverklaring

Sonova Communications AG verklaart hierbij dat dit product voldoet aan de richtlijn inzake Radio-apparatuur 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-Conformiteitsverklaring is verkrijgbaar bij de fabrikant of de plaatselijke vertegenwoordiger van Phonak. Kijk voor de adressen op <https://www.phonak.com/com/en/certificates.html> (Phonak-vestigingen wereldwijd).

Bedrijfsfrequentie: 2400 - 2483,5 MHz

Vermogensniveau: < 100 mW

Australië/Nieuw-Zeeland:



R-NZ

Geeft aan of een apparaat voldoet aan het betreffende radiospectrumbeheer (RSM) en aan de wetgevingen van de Australische communicatie- en media-autoriteit (ACMA) voor de wettelijke verkoop in Nieuw-Zeeland en Australië. Het nalevingsetiket R-NZ is voor radioproducten die worden geleverd voor de Nieuw-Zeelandse markt onder conformiteitsniveau A1.

FCC ID: KWCTX33
IC: 2262A-TX33

Kennisgeving 1:



Dit apparaat voldoet aan Deel 15 van de FCC-regels en aan RSS-247 van Industry Canada. De werking moet voldoen aan de volgende twee voorwaarden:

- 1) dit apparaat mag geen interferentie veroorzaken, en
- 2) dit apparaat dient interferentie te accepteren, ook interferentie die ongewenst functioneren van het apparaat kan veroorzaken.

Kennisgeving 2:

Wijzigingen of aanpassingen die aan dit apparaat worden toegebracht zonder uitdrukkelijke toestemming van Sonova Communications AG, kunnen de FCC-machtiging voor het bedienen van dit apparaat ongeldig maken.

Kennisgeving 3:

Het apparaat is getest en voldoet aan de beperkingen voor een digitaal apparaat Klasse B, overeenkomstig Deel 15 van de FCC-regels en ICES-003 van Industry Canada.

Deze beperkingen zijn bedoeld om redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke interferentie in een installatie in een woonomgeving. Dit apparaat genereert en gebruikt radiofrequentie-energie en kan dit tevens uitzenden. Bij een onjuiste installatie en gebruik dat niet in overeenstemming is met de instructies kan dit leiden tot schadelijke interferentie van radioverbindingen. Het is echter niet gegarandeerd dat er geen interferentie in een bepaalde installatie zal optreden. Als het apparaat schadelijke interferentie aan radio- of televisieontvangst veroorzaakt (dit kan worden vastgesteld door het apparaat uit en in te schakelen), wordt de gebruiker aangeraden de interferentie te corrigeren door middel van een van de volgende maatregelen:

- De ontvangstantenne draaien of verplaatsen.
- De afstand tussen het toestel en de ontvanger vergroten.
- Het apparaat aansluiten op een stopcontact van een circuit waarop de ontvanger niet is aangesloten.
- Raadpleeg de dealer of een ervaren radio/tv-reparateur voor hulp.

Kennisgeving 4:



Naleving van de Japanse radiowet. Naleving van bedrijfswet. Dit apparaat is goedgekeurd volgens de Japanse radiowet (電波法). Dit apparaat mag niet worden gewijzigd (anders is het toegewezen identificatienummer niet meer geldig).

Kennisgeving 5:

Verklaring van FCC/Industry Canada inzake blootstelling aan radiofrequente straling.

Dit toestel voldoet aan de limieten van FCC inzake blootstelling aan radiofrequente straling, bepaald voor een ongeregelde omgeving. Deze zender mag niet samen met een andere antenne of zender worden gebruikt of hierbij in de buurt worden geplaatst.

19. Informatie en verklaring van symbolen



Het CE-symbool is een bevestiging door Sonova Communications AG dat dit product voldoet aan de Richtlijn 2014/53/EU betreffende radioapparatuur.



Dit symbool geeft aan dat het belangrijk is dat de lezer de relevante informatie in deze gebruiksaanwijzing leest en toepast.



Dit symbool geeft de fabrikant van het apparaat aan.



Dit symbool geeft aan dat het belangrijk is dat de lezer aandacht besteedt aan de relevante waarschuwingsberichten in deze gebruiksaanwijzing.



Belangrijke informatie voor de bediening en veiligheid van het product.

Bedieningsomstandigheden

Het apparaat is, wanneer het wordt gebruikt waarvoor het is bedoeld, ontworpen voor een probleemloze werking zonder beperkingen, tenzij anders aangegeven in deze gebruiksaanwijzing.



Temperatuur bij transport en opslag:
-20° tot +60° Celsius.
Gebruikstemperatuur: 0° to +40° Celsius.



Droog houden.



Vochtigheid tijdens transport en opslag:
< 90% (niet-condenserend).
Vochtigheid bij gebruik: < 90%
(niet-condenserend).



Atmosfeerdruk: 500 hPA tot 1060 hPA.



Geeft het serienummer van de fabrikant aan
zodat een specifiek hulpmiddel kan worden
geïdentificeerd.



Geeft de productiedatum aan.



De verpakking en gebruiksaanwijzing kunnen gerecycled worden.



Dit symbool op het product of de verpakking ervan betekent dat het niet weggegooid mag worden als normaal huisvuil. Het is uw verantwoordelijkheid om uw afgedankte apparaten gescheiden van het gemeentelijk afval te verwijderen. Door uw oude apparaat op de juiste manier te verwijderen, worden mogelijke negatieve gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid voorkomen. Dit product heeft een geïntegreerde, niet-vervangbare accu. Probeer het product niet te openen of de batterij te verwijderen, aangezien dit tot letsel kan leiden en het product kan beschadigen. Neem contact op met uw plaatselijke afvalinzameling voor het weggooien van de accu.



Dolby, Dolby Audio en het symbool met twee D's zijn handelsmerken van Dolby Laboratories.



Het onbeperkte icoon geeft aan dat dit product een onbeperkt aantal Roger-ontvangers bevat voor hoortoestellen met RogerDirect.

20. Belangrijke veiligheidsinformatie

Lees de informatie op de volgende pagina's aandachtig door voor u uw apparaat in gebruik neemt.

20.1 Waarschuwingen

- ⚠ Dit apparaat is niet geschikt voor kinderen jonger dan 36 maanden. Indien dit apparaat wordt gebruikt door kinderen en personen met een verstandelijke beperking, dienen zij te allen tijde onder toezicht te worden gehouden om hun veiligheid te garanderen. Het hoortoestel is een klein apparaat en bevat kleine onderdelen. Houd ze buiten het bereik van kinderen, mensen met een verstandelijke beperking en huisdieren. Indien het toestel wordt ingeslikt, neemt u onmiddellijk contact op met een huisarts of ziekenhuis.
- ⚠ Het apparaat kan magnetische velden genereren. Indien u ervaart dat de Roger On een geïmplanteerd apparaat (bijv. pacemakers, defibrillatoren, enz.) beïnvloedt, dient u het gebruik van de Roger On te staken en contact op te nemen met uw arts en/of de fabrikant van het geïmplanteerde apparaat voor advies.
- ⚠ Gebruik alleen hoortoestellen die speciaal voor u geprogrammeerd zijn door uw audicien.

- ⚠ Het gebruik van dit product kan achtergrondlawaai verminderen. Let op dat waarschuwingssignalen of -geluiden, bijv. van auto's, geheel of gedeeltelijk onderdrukt worden.
- ⚠ Verwijder elektrische componenten overeenkomstig plaatselijke voorschriften.
- ⚠ Wijzigingen aan de apparaten die niet uitdrukkelijk goedgekeurd zijn door Sonova Communications AG, zijn niet toegestaan.
- ⚠ Gebruik alleen accessoires die zijn goedgekeurd door Sonova Communications AG.
- ⚠ De oplader die door Sonova Communications AG wordt verstrekt, kan worden gebruikt om de Roger On op te laden tot op een maximale hoogte van 5000 m. Om veiligheidsredenen mag u alleen opladers gebruiken die door Sonova Communications AG geleverd zijn, of IEC 62368 gecertificeerde opladers met een kwalificatie van 5 V DC, min. 500 mA, max. 2000 mA en tot een hoogte van 2000 m.

- ⚠ Gebruik het apparaat niet in explosieve omgevingen (mijnen of industriële gebieden met explosiegevaar, zuurstofrijke gebieden of gebieden waarin ontvlambare anesthetica worden gebruikt) of waarin elektronische apparatuur is verboden.
- ⚠ Als u een machine bedient, moet u oppassen dat er geen onderdelen van uw Roger apparaat door de machine worden gegrepen.
- ⚠ Laad het apparaat niet op terwijl u het op uw lichaam draagt.
- ⚠ Bedek het apparaat niet tijdens het opladen, bijvoorbeeld met een doek enz.
- ⚠ Het apparaat werkt binnen het frequentiebereik van 2,4 en 2,48 GHz. Voordat u vertrekt met het vliegtuig, dient u bij de luchtvaartmaatschappij te controleren of het apparaat uitgeschakeld moet worden.
- ⚠ Alleen bevoegd personeel is toegestaan om het product en accessoires te openen wegens risico op schokken.

20.2 Veiligheidsinformatie product

- ❶ Bescherm apparaatconnectors, stekkers en de adapter tegen stof en vuil.
- ❶ Pas geen bovenmatige kracht toe wanneer u verschillende kabeltjes in uw apparaat steekt.
- ❶ Bescherm het apparaat tegen overmatig vocht (in de badkamer of in het zwembad) en warmtebronnen (radiator, bovenzijde tv)
Behoed het apparaat voor zware schokken en trillingen.
- ❶ Reinig het apparaat met een vochtige doek. Gebruik nooit huishoudelijke schoonmaakmiddelen (waspoeder, zeep etc.) of alcohol om de apparaten te reinigen. Gebruik nooit een magnetron of ander verwarmingstoestel om het apparaat te drogen.
- ❶ Röntgenstraling, CT-scans of MRI-scans kunnen de juiste werking van het apparaat nadelig beïnvloeden of zelfs tenietdoen.
- ❶ Zorg er altijd voor dat het apparaat en dockingstation droog en schoon zijn.

- ① Bewaar het apparaat op een droge plaats indien u het gedurende langere tijd niet gebruikt.
- ① Het gebruik van deze apparatuur naast of in combinatie met andere apparatuur moet worden vermeden, aangezien het kan leiden tot onjuiste werking. Indien een dergelijk gebruik noodzakelijk is, dienen deze apparatuur en andere apparatuur te worden geobserveerd om er zeker van te zijn dat ze naar behoren functioneren.
- ① Houd de oplaadaccessoires buiten bereik van een inductiekookplaat. Geleidende onderdelen in de oplaadaccessoires kunnen de inductie-energie absorberen, wat leidt tot thermische vernietiging.
- ① Het apparaat is bestand tegen spatwater, maar niet waterdicht.
- ① Het apparaat bevat een lithium-ion-accu. Het apparaat mag niet in de ingecheckte bagage worden geplaatst, maar wel worden meegenomen in de handbagage.

- ① Wanneer het apparaat via luchtpost wordt verzonden, moet aan alle regels en bepalingen voor de veilige verzending van lithium-ion-accu's worden voldaan. Accu's waarvan vermoed wordt dat ze defect zijn, mogen niet per luchtpost worden verzonden.
- ① De USB-poort van de oplader mag alleen voor het beschreven doel worden gebruikt.
- ① Neem contact op met uw erkende servicecentrum en stop met het gebruiken van uw apparaat wanneer het gevallen of beschadigd is, oververhit is geraakt, de kabel of de stekker beschadigd is of wanneer het in een vloeistof is gevallen.

20.3 Andere belangrijke informatie

- ① Bescherm uw ogen tegen het optische licht van de optische Toslink-kabel wanneer deze op het apparaat of de tv wordt aangesloten.
- ① Krachtige elektronische apparatuur, grote elektronische installaties en metalen constructies kunnen het bereik drastisch beperken.
- ① Het toestel verzamelt en bewaart interne technische gegevens. Deze gegevens kunnen worden uitgelezen door een audicien om het apparaat te controleren en om u te helpen het apparaat correct te gebruiken.
- ① Het digitale signaal dat wordt verzonden vanaf het apparaat naar een verbonden ontvanger kan niet worden opgevangen door andere apparaten die zich niet binnen het netwerk van de microfoon bevinden.

21. Service en garantie

21.1 Plaatselijke garantie

Informeer bij de audicien bij wie u uw apparaten hebt aangeschaft naar de voorwaarden van de plaatselijke garantie.

21.2 Wereldwijde garantie

Phonak biedt u vanaf de verkoopdatum een beperkte, wereldwijde garantie van een jaar. Deze beperkte garantie geldt voor fabrieks- en materiaalfouten. De garantie is alleen geldig op vertoon van een aankoopbewijs.

De internationale garantie heeft geen invloed op eventuele wettelijke rechten waarop u aanspraak kunt maken op basis van de lokale garantie of de toepasselijke nationale wetgeving op het gebied van de verkoop van consumentenartikelen.

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
21.3 Garantiebeperking

Er bestaat geen recht op garantie bij normale slijtage, onjuiste behandeling of onderhoud, chemische invloeden, binnengedrongen vocht of overbelasting. Bij schade die door derden of niet-geautoriseerde servicewerkplaatsen is veroorzaakt, vervalt de garantie. Deze garantie omvat geen servicewerkzaamheden die worden verricht door een audicien in zijn/haar werkplaats.

Serienummer: _____

Aankoopdatum: _____

Uw audicien
(stempel/handtekening):



This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

[illegible]

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and extend across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

This image shows a single page of white paper with horizontal grey ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page, providing a template for handwriting practice or general writing. There are no margins, text, or other markings on the page.



Fabrikant:

Sonova Communications AG
Herrenschwandweg 4
CH-3280 Murten
Zwitserland
www.phonak.com

sonova
HEAR THE WORLD

