

Phonak

Roger™ iN microfoons

Installatiehandleiding Roger iN microfoon


Inhoud

Installing Roger receivers into a pair of hearing devices with RogerDirect™	1
Checking number of Roger receivers in a Roger iN microphone	2
Uninstalling Roger receiver from a hearing device	3


Roger ontvangers in een setje hoortoestellen installeren met RogerDirect™

Installatiestappen:


1. Zet de Roger iN microfoon aan
2. Houd de installatieknop gedurende twee seconden ingedrukt tot het indicatorlampje groen begint te knipperen of het hoortoestelpictogram op het scherm van de Roger On iN wordt weergegeven.

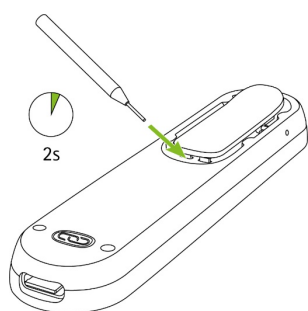


Roger On™ iN

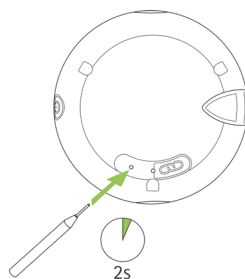

Roger Select™ iN

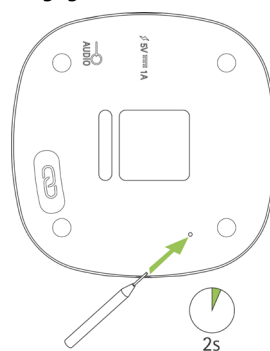


Roger Table Mic II iN

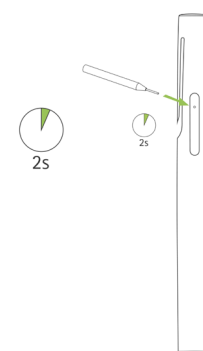

Roger Pen™ iN

3. Zet de Roger iN microfoon op tafel

4. Zet één hoortoestel aan en **laat alle andere hoortoestellen uitgeschakeld.**
5. Plaats het hoortoestel dicht bij de Roger iN microfoon (binnen 10 cm/4 inch afstand)

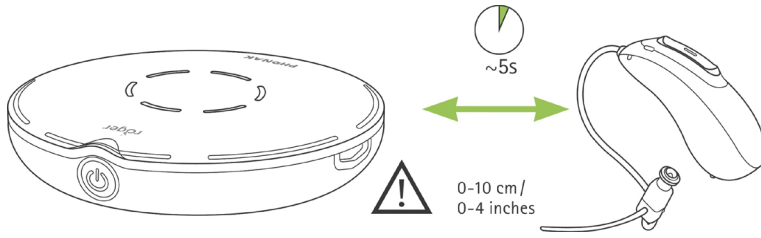

6. Wacht ongeveer 5 seconden tot het indicatorlampje op de Roger iN microfoon groen begint te branden of er een vinkje wordt weergegeven op het scherm van de Roger On iN.
7. Herhaal stap 2 t/m 6 met het andere hoortoestel.

Opmerking: De hoortoestellen worden automatisch verbonden met de Roger iN microfoon.

Indien het indicatorlampje rood wordt na de installatieprocedure, is de installatie mislukt. Dit kan een van de volgende redenen hebben:

- De afstand tussen de Roger iN microfoon en het hoortoestel was te groot
- Er zijn geen Roger ontvangers geïnstalleerd op de Roger iN microfoon
- Roger is al geïnstalleerd op het hoortoestel
- Het hoortoestel beschikt niet over RogerDirect.

Het aantal beschikbare Roger ontvangers in een Roger iN microfoon controleren

Nadat de Roger microfoon is ingeschakeld, drukt u kort op de installatieknop op de Roger iN microfoon:

Roger On iN geeft nu het aantal beschikbare Roger ontvangers op het scherm weer.


Voor Roger Select iN, Roger Pen iN en Roger Table Mic II iN geeft de feedback van het indicatorlampje aan hoeveel Roger ontvangers geïnstalleerd zijn:

- ● Twee Roger ontvangers geïnstalleerd
- ● Eén Roger ontvanger geïnstalleerd
- ● Geen Roger ontvanger geïnstalleerd


Roger ontvanger de-installeren van een hoortoestel

Stappen van de de-installatie:


1. Zet de Roger iN microfoon aan
2. Houd de installatieknop gedurende twee seconden ingedrukt tot het indicatorlampje groen begint te knipperen of het hoortoestelpictogram op het scherm van de Roger On iN wordt weergegeven.

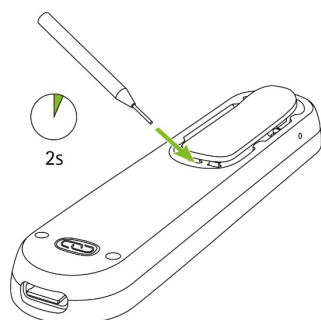


Roger On™ iN

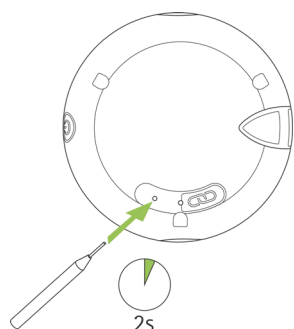

Roger Select™ iN

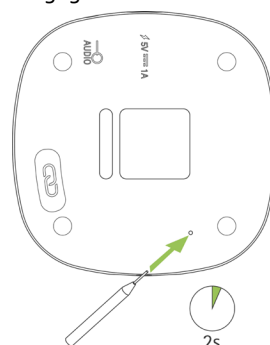


Roger Table Mic II iN

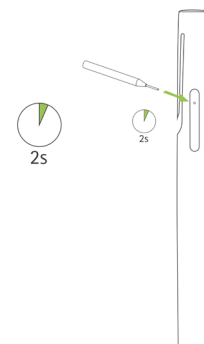

Roger Pen™ iN

3. Zet de Roger iN microfoon op tafel
4. Zet één hoortoestel aan en **laat alle andere hoortoestellen uitgeschakeld**.
5. Plaats het hoortoestel dicht bij de Roger iN microfoon (binnen 10 cm/4 inch afstand)

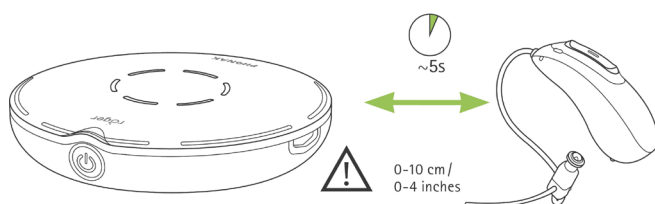

6. Wacht ongeveer 5 seconden tot het indicatorlampje op de Roger iN microfoon groen begint te branden of er een vinkje wordt weergegeven op het scherm van de Roger On iN.
7. Herhaal stap 2 t/m 6 met het andere hoortoestel, indien nodig.

Als het indicatorlampje rood wordt of op de display van de Roger On iN een kruis of vraagteken wordt weergegeven na de de-installatieprocedure, dan is de de-installatie mislukt. Dit kan een van de volgende redenen hebben:

- De afstand tussen de Roger iN microfoon en het hoortoestel was te groot
- Op de Roger iN microfoon zijn al twee Roger ontvangers geïnstalleerd
- Roger is nog niet geïnstalleerd op het hoortoestel
- Het hoortoestel beschikt niet over RogerDirect.