



Reiniging en verzorging EasyGuard™




Reinig dagelijks met een pluisvrije doek. Verwijder oorsmeer dat is opgehoopt bij het uiteinde.

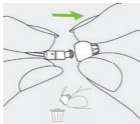

Vervang EasyGuard™ elke drie maanden of wanneer deze stijf of poreus wordt.

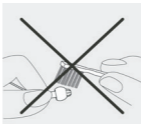

Gebruik geen scherpe voorwerpen of borstel voor de reiniging, want deze kunnen EasyGuard™ beschadigen.

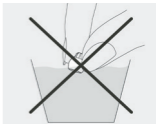

Plaats EasyGuard™ niet in water. Water dat in het oorstukje blijft zitten kan de speaker beschadigen.



phonak.com/support-easyguard