

# Roger NeckLoop for tale-til-tekst

## Installasjonsinstruksjoner

Roger NeckLoop kan kobles til en datamaskin, et nettbrett eller en smarttelefon for å generere automatiserte tekster i sanntid ved hjelp av tredjeparts tale-til-tekst-programvare.


### Forberedelser

1. Sørg for at Roger NeckLoop og Roger-mikrofonen er ladet.
2. Sørg for at du har installert tredjepartsprogramvare for tale-til-tekst, transkribering eller diktering på datamaskinen, smarttelefonen eller nettbrettet.

### Tilkobling til datamaskin


*Dette trenger du:* Den medfølgende USB-C til USB-A-kabelen.

1. Koble USB-kabelen til Roger NeckLoop og til datamaskinen:

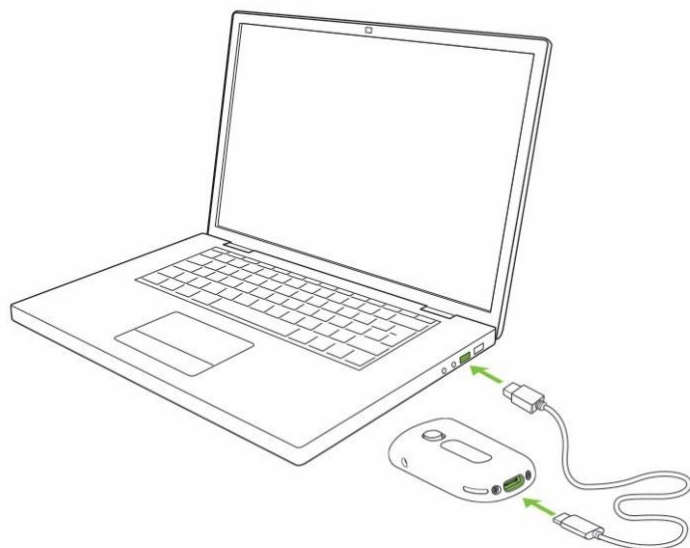

2. Slå på Roger NeckLoop.

3. Kontroller at Roger NeckLoop er valgt som inngangskilde (lydinnstillinger) på datamaskinen:

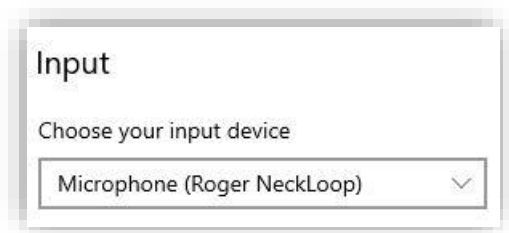

4. Start tale-til-tekst-programvaren (tredjepartsapplikasjon) på datamaskinen. Det er også mulig å starte funksjonen Dikter i Microsoft Word:




5. Snakk inn i Roger-mikrofonen. Tale-til-tekst-programvaren eller MS Word vil skrive det som sies.

### Tilkobling til smarttelefon eller nettbrett med USB-C-kontakt

*Dette trenger du:* Den medfølgende USB-C til USB-A-kabelen og en *OTG-adapter (On-the-Go-adapter) ELLER en USB-C til USB-C-kabel.*

1. Koble Roger NeckLoop til smarttelefonen eller nettbrettet med en OTG-adapter og den medfølgende USB-kabelen, **ELLER** bruk en USB-C til USB-C-kabel.
2. Slå på Roger NeckLoop.
3. Start tale-til-tekst-appen (f.eks. Google Transcribe) på smarttelefonen eller nettbrettet.
4. Velg Roger NeckLoop som inngangskilde om nødvendig.
5. Snakk inn i Roger-mikrofonen. Tale-til-tekst-appen vil omforme tale til tekst.

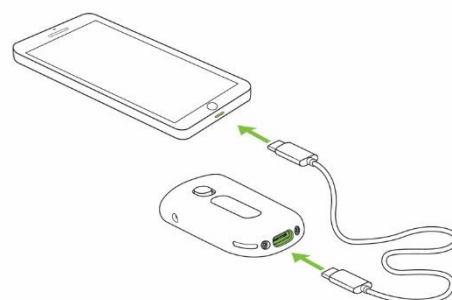

### Tilkobling til smarttelefon eller nettbrett med lynkontakt

*Dette trenger du:* Den medfølgende USB-C til USB-A-kabelen og en *lyn til USB 3-kameraadapter. Telefonladeren.*

1. Koble adapteren til smarttelefonen.
2. Koble telefonladeren til adapteren.
3. Koble Roger NeckLoop til adapteren med den medfølgende USB-C til USB-A-kabelen.
4. Slå på Roger NeckLoop.
5. Start tale-til-tekst-appen på smarttelefonen eller nettbrettet.
6. Velg Roger NeckLoop som inngangskilde om nødvendig.
7. Snakk inn i Roger-mikrofonen. Tale-til-tekst-appen vil omforme tale til tekst.

