

Phonak


Referansehefte

Bruke RogerDirect™ i et Phonak-høreapparat

Viktig: Det anbefales å holde en avstand på minimum 3 m / 9,8 fot mellom hver Roger Installer under installering/avinstallering og å holde alle andre høreapparater i nærheten av Roger Installer avslått. Det anbefales at Roger-enheter i nærheten av Roger Installer holdes avslått under en installasjon.

Installere Roger™- mottaker i et Phonak-høreapparat fra Roger X

- Koble Roger X til Roger Installer (3).
- Slå på Roger Installer (1) (indikatorlyset (2) lyser kontinuerlig grønt).
- Indikatorlyset (4) lyser kontinuerlig grønt (Roger X er klar for installasjon).
- Slå på høreapparatet og plasser det på høreapparatlogoen.
- Vent til indikatorlyset (5) blinker grønt (installasjonen er i gang).
Når indikatorlyset lyser kontinuerlig grønt, er installasjonen fullført.
- Slå av Roger Installer. Ta ut og lagre Roger X. Høreapparatet er klart for bruk med RogerDirect.

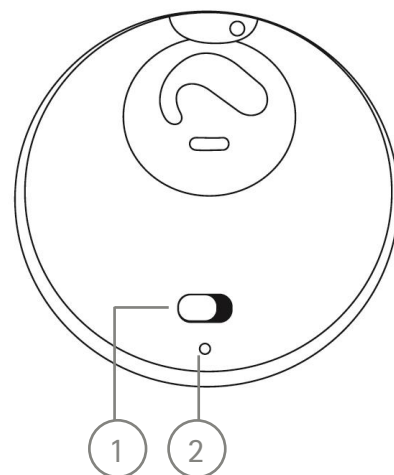

Avinstallere Roger™- mottaker fra et Phonak-høreapparat til Roger X

- Koble Roger X til Roger Installer (3).
- Slå på Roger Installer (1) (indikatorlyset (2) lyser kontinuerlig grønt).
- Indikatorlyset (4) forblir slukket i flere sekunder (Roger X kan avinstalleres).
- Slå på høreapparatet og plasser det på høreapparatlogoen.
- Vent til indikatorlyset (5) lyser kontinuerlig grønt (bekrefter at Roger er installert i dette høreapparatet).
- Når avinstalleringen starter, vil indikatorlyset (5) blinke grønt til prosessen er fullført.
- Indikatorlyset (4) lyser kontinuerlig grønt når avinstalleringen er fullført (Roger er nå installert i Roger X).
- Slå av Roger Installer. Fjern Roger X. Høreapparatet kan ikke lenger brukes med Roger.

