







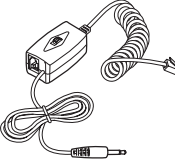
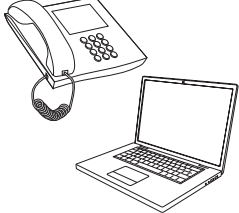



roger

# Enkelt å ringe med Roger™

Veiledning
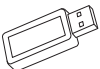
# Alle mikrofonalternativene på ett sted

Telefonalternativ	Roger On™ (iN)	Roger Table Mic II (iN)	Roger Select™	Roger Select™ iN	Ekstra deler
  Bærbar enhet / PC/bærbar datamaskin for telefonsamtaler over Internett (trådløs via Bluetooth®)					 Valgfritt: Bluetooth USB-adapter
 PC/bærbar datamaskin for telefonsamtaler over Internett (via kabel)					 Valgfritt: Ekstern hodetelefonmikrofon
 Hustelefon (via kabel)					 Adapter for telefonopptak
 Telefonavdeling (via Bluetooth)					 Hub for kommunikasjon via hodetelefon og Bluetooth USB-adapter

Du finner flere telefonalternativer fra Phonak hvis du går til [www.phonak.com/phone-solutions](http://www.phonak.com/phone-solutions)

Bluetooth®-begrepet og -logoene er registrerte varemerker som eies av Bluetooth SIG, Inc., og all bruk av disse varemerkene av Sonova AG er lisensiert.


# Bærbar enhet / PC / bærbar datamaskin for telefonsamtaler over Internett

(VoIP, f.eks. Zoom, MS Teams) trådløst via Bluetooth

## Nødvendig enhet




Roger Select

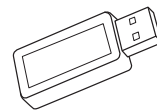

Valgfritt: Bluetooth USB-adapter  
(Phonak-delenummer: 076-0856)


## Bruke Bluetooth

Koble ganske enkelt Roger Select sammen med den Bluetooth-aktiverte bærbare enheten / PC-en / bærbare datamaskinen. Du trenger ikke å holde telefonen til øret for å ringe. Og det beste av alt er at du hører den som ringer, i begge ørene.

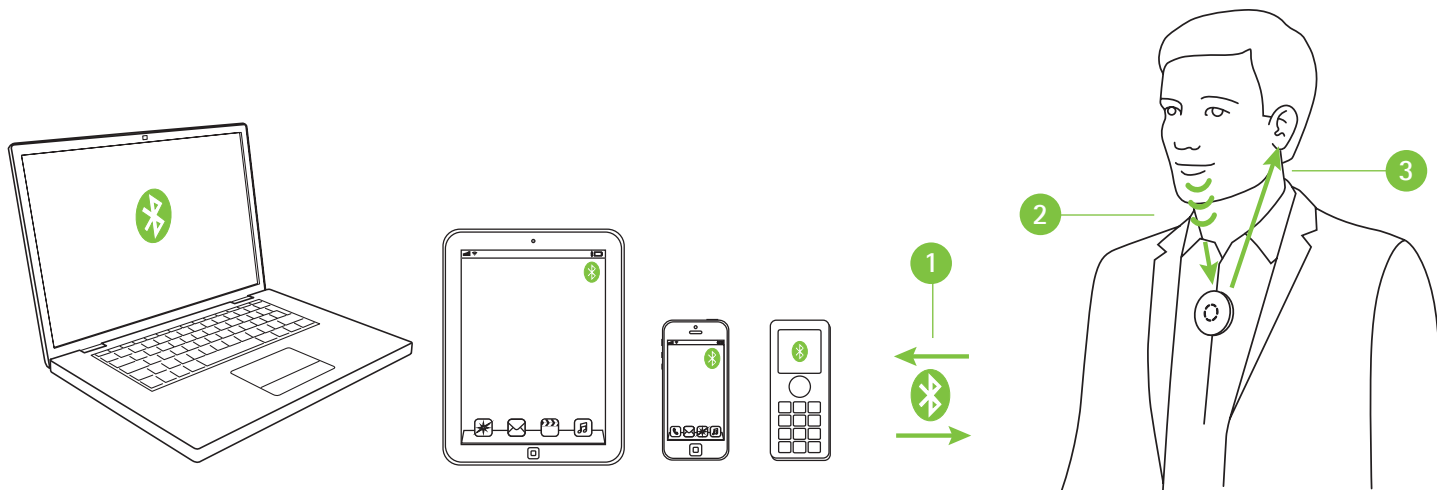

- 1 Sammenkoble den bærbare enheten / PC-en / bærbare datamaskinen med Roger Select
- 2 Under telefonsamtalen snakker du ganske enkelt inn i Roger Select
- 3 Hør stemmen til den som ringer i begge ørene

Hvis PC-en / den bærbare datamaskinen din ikke har Bluetooth integrert, setter du Bluetooth USB-adapteren inn i et ledig USB-spor på PC-en / den bærbare datamaskinen og sammenkobler Bluetooth USB-adapteren med Roger Select.

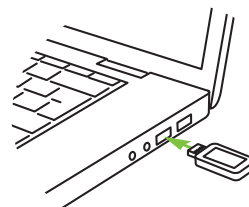

Merk: Denne løsningen fungerer ikke med høreapparater med RogerDirect™.

# PC/bærbar datamaskin for telefonsamtaler over Internett

(VoIP, f.eks. Zoom, MS Teams) via lydkabel

## Nødvendige enheter (alternativer)



Roger Select  
Roger Select iN



Roger Table Mic II  
Roger Table Mic II iN



Roger On  
Roger On iN




Valgfritt: Ekstern  
hodetelefonmikrofon

## Bruke de integrerte mikrofonene fra en PC / bærbar datamaskin

Dette alternativet er enkelt å stille inn og sender stemmen til den som ringer direkte til begge ørene.

- 1 Koble hodetelefonuttaket til PC-en / den bærbare datamaskinen til dokkingstasjonens lydinngang eller direkte til Roger-mikrofonens lydinngang
- 2 Snakk inn i den integrerte mikrofonen på PC-en / den bærbare datamaskinen under samtalen
- 3 Hør stemmen til den som ringer i begge ørene

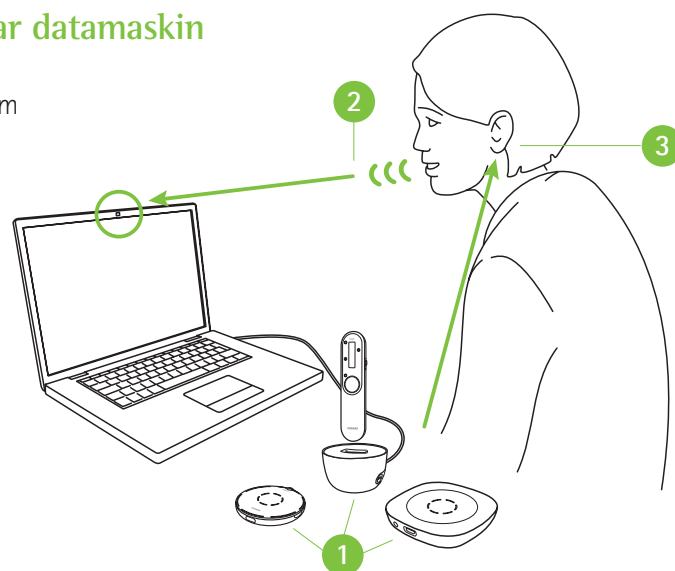


## Bruke ekstern hodetelefonmikrofon

Ved å bruke en hodetelefonmikrofon får du bedre lyd kvalitet på din egen stemme.

Merk: Det kan være at du må justere lydinnstillingene til PC-en eller VoIP-programvaren for å definere 3,5 mm-kontakten som lydutgang og USB-mikrofonen som mikrofoninngang.

- 1 Koble hodetelefonuttaket til PC-en / den bærbare datamaskinen til dokkingstasjonens lydinngang eller direkte til Roger-mikrofonens lydinngang
- 2 Koble hodetelefonmikrofonen til mikrofoninngangen på PC-en / den bærbare datamaskinen – eller du kan koble hodetelefonene til en USB-port hvis det er USB-hodetelefoner
- 3 Snakk inn i den eksterne mikrofonen under samtalen
- 4 Hør stemmen til den som ringer i begge ørene

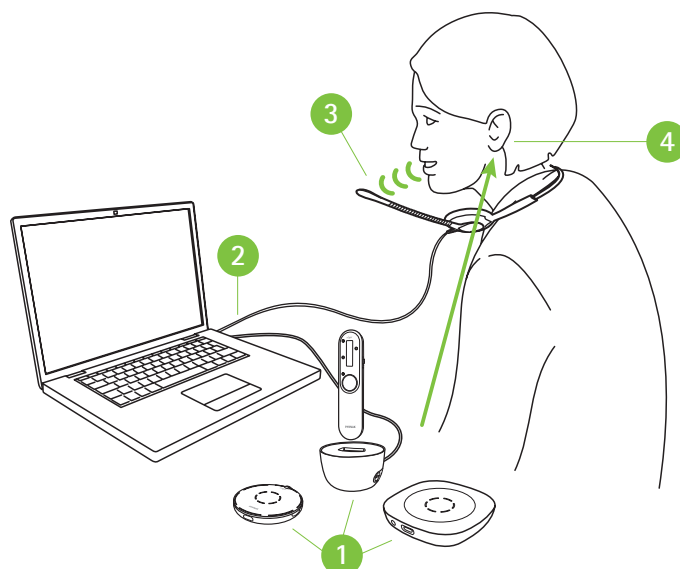

# PC/bærbar datamaskin for telefonsamtaler over Internett

(VoIP, f.eks. Zoom, MS Teams) via USB-kabel


## Nødvendig enhet



Roger On  
Roger On iN

## Bruke USB-kabel

- 1 Koble USB-ladekabelen mellom PC-en / den bærbare datamaskinen og Roger On
- 2 Under telefonsamtalen snakker du inn i den integrerte mikrofonen på PC-en / den bærbare datamaskinen, eller bruker en ekstern mikrofon som vist på forrige side
- 3 Hør stemmen til den som ringer i begge ørene

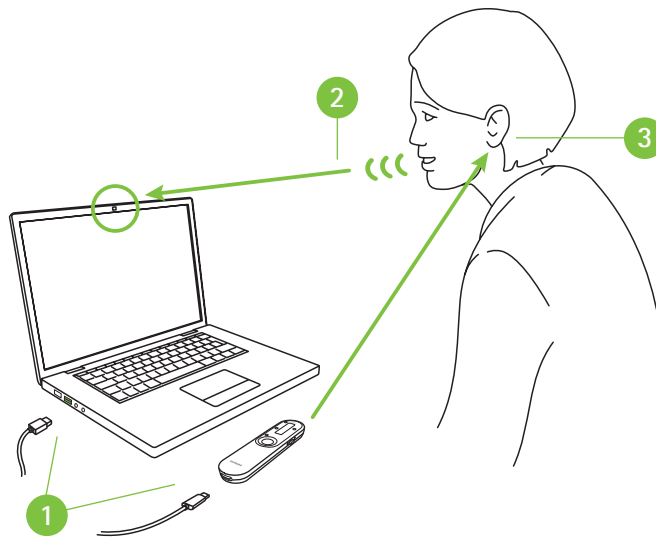

# Fasttelefoner

via kabel

## Nødvendige enheter (alternativer)




Roger Select  
Roger Select iN



Roger Table Mic II  
Roger Table Mic II iN




Roger On  
Roger On iN

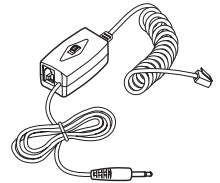

Adapter for telefonopptak  
(f.eks. telefonsett 055-4064)

## Bruke adapter for telefonopptak

For å svare på telefonen tar du opp røret og holder det mot munnen, fordi du må fortsatt snakke inn i telefonrøret. Stemmen fra den som ringer, sendes imidlertid direkte til begge ørene.

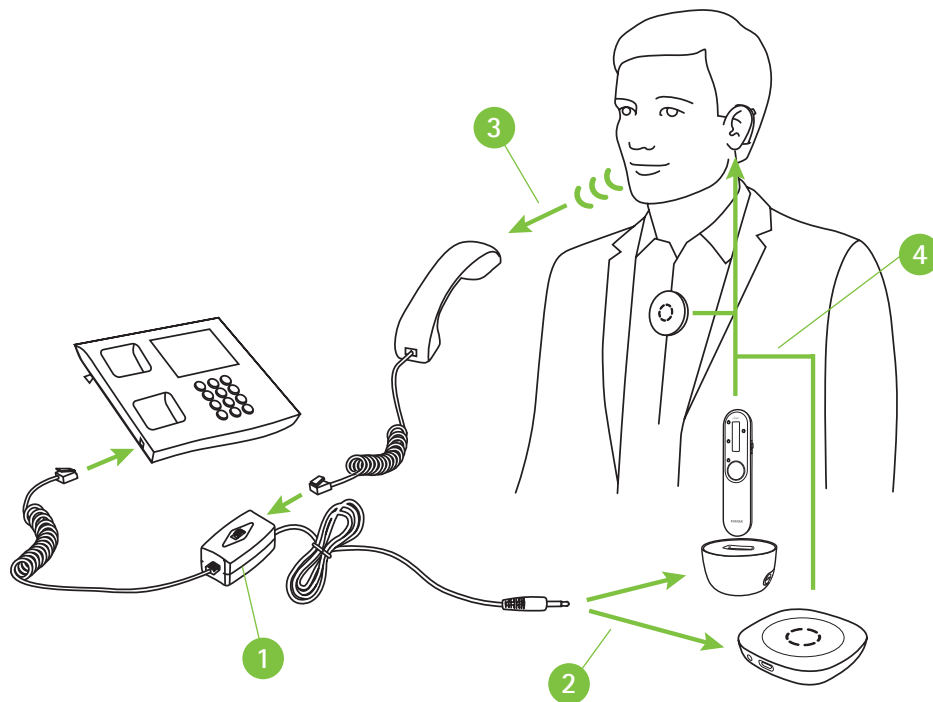

- 1 Monter adapteren for telefonopptak mellom telefonen og røret
- 2 Koble lydutgangen til adapteren for telefonopptak til dokkingstasjonens lydinngang eller direkte til Roger-mikrofonens lydinngang
- 3 Snakk inn i telefonrøret under samtalen
- 4 Hør stemmen til den som ringer i begge ørene



# Telefonavdeling

(PC / bærbar datamaskin og fasttelefon) trådløst via Bluetooth

## Nødvendig enhet




Roger Select

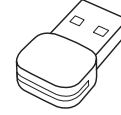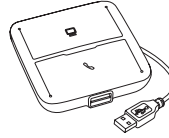

Hub for kommunikasjon via hodetelefon (f.eks. Poly MDA200),  
Bluetooth USB-adapter (f.eks. Poly PLT-BT300)

## Bruke Bluetooth

Dette er den mest avanserte løsningen for travle kontorsamtaler. Telefoner kan overføres mellom PC og kontortelefon. I begge tilfeller overføres telefonen til Roger Select, som ideelt bæres rundt halsen, slik at du kan ha begge hendene fri under telefonsamtalen.

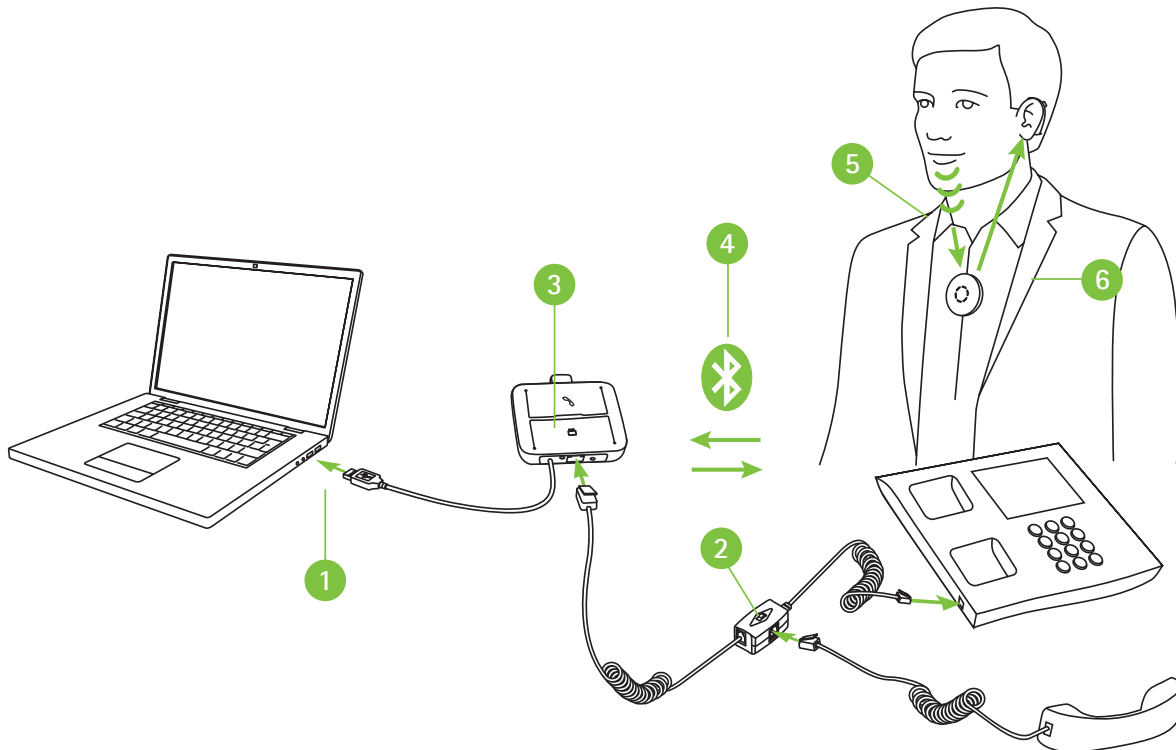

- 1 Koble hub for kommunikasjon via hodetelefon til PC-en / den bærbare datamaskinen
- 2 Monter adapteren på hub for kommunikasjon via hodetelefon mellom telefonen og røret
- 3 Sett Bluetooth USB-adapteren inn i hub for kommunikasjon via hodetelefon
- 4 Sammenkoble Bluetooth USB-adapteren med Roger Select
- 5 Under telefonsamtalen snakker du inn i Roger Select
- 6 Hør stemmen til den som ringer i begge ørene

Merk: Denne løsningen fungerer ikke med høreapparater med RogerDirect™.

# life is on

Vi i Phonak mener at god hørsel er viktig for å ha det godt og kunne leve livet fullt ut. I mer enn 70 år har vi jobbet for å skape en verden hvor "life is on" for alle. Våre innovative hørselsløsninger er designet for at mennesker i alle aldre, og med alle typer hørselstap, skal kunne utvikle sterke relasjoner og ha et positivt liv.

[www.phonakpro.com/roger](http://www.phonakpro.com/roger)