

Paradise åpner et nytt kapittel



Phonak ActiveVent™ Receiver

Ingenting er som lyden av Paradise

Velkommen til
neste kapittel
av Paradise



Sosial-er



Fysisk

Med introduksjonen av Phonak Audéo™ Paradise utviklet vi høreapparater som ga brukere en enestående hørselsopplevelse¹. Det første kapittelet startet for tolv måneder siden, og siden da har det skjedd betydelige endringer i hverdagslivet vårt. Å bruke munnbind er for mange det "nye normale". For mange høreapparatbrukere gjør dette det ekstra vanskelig, siden de ikke kan se munnen til den som snakker.

Phonak Paradise høreapparater med AutoSense OS™4.0 kan enkelt tilpasse seg en rekke lyttesituasjoner, slik at brukerne kan høre tross ulike miljøer. Brukerne trenger ikke selv å justere høreapparatene sine, og med dette blir de enklere å bruke.

Dette kan ha en direkte innvirkning på velværet til høreapparatbrukere. Ved å gjøre det mulig for flere brukere med hørselstap å kommunisere på en enklere måte, kan de fortsette sin sosiale kontakt og trives både mentalt og følelsesmessig.

Phonak er stolte av å presentere det neste kapittelet for Paradise. Paradise innlemmer sin karakteristiske klare, naturlige lyd og leverer en enestående hørselsopplevelse¹ i enda flere situasjoner.



Vi presenterer ActiveVent™ Receiver

Verdens første intelligente receiver til høreapparat

Paradise er kjent for sin enestående¹ lyd kvalitet⁴ med strålende taleforståelse^{3,4,5} og personlig tilpasset støydemping. Nå åpner vi et nytt kapittel med introduksjonen av ActiveVent Receiver.


Den helt nye ActiveVent™ Receiver er verdens første intelligente receiver til høreapparat, og kan balansere klar tale i støy og lyttekomfort² for ytterligere å styrke den enestående¹ lyd kvaliteten⁴ til Phonak Paradise for brukere med lett til moderat hørselstap.

Denne innovative receiver teknologien har en mekanisk skiftende ventil som styres sømløst av AutoSense OS 4.0. Den kombinerer hørselsytelsen til en lukket løsning med komforten til en åpen løsning på en intelligent måte². Dette gir en kompromissløs hørselsløsning for brukerne, slik at de kan glede seg over å være bevisst på omgivelsene og med en naturlig lyd av egen stemme, samtidig som de opplever økt taleforståelse i støy⁶.




Hvordan fungerer ActiveVent Receiver?

ActiveVent er en receiver som har innebygd ventilering i kombinasjon med en liten skive som flyttes mellom to stillinger: åpen og lukket. Alt blir styrt på en intelligent måte av AutoSense OS 4.0. Et klikk signaliserer til brukeren at skiven har endret stilling.

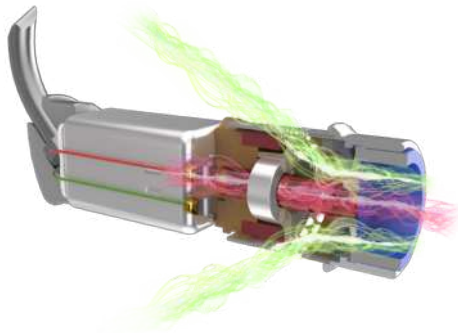

Når skiven er i åpen stilling, kan direkte lyd passere gjennom receiverens innebygde ventilering og dermed gi komforten med en åpen løsning, naturlig lyd av egen stemme og bevissthet på lydene i omgivelsene².

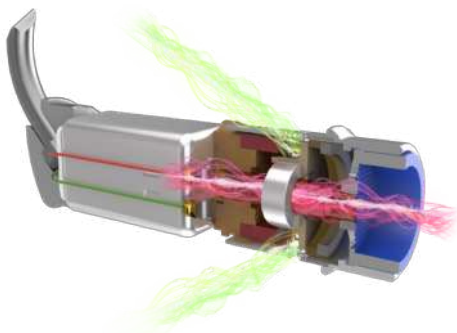

I utfordrende lyttesituasjoner med tale i høy støy, eller ved streaming av medier, flytter skiven seg til lukket stilling og blokkerer ut lyd fra omgivelsene som går direkte inn i øret, og øker dermed fokuset på tale forfra eller streaminglyd.

Tilkoblingsmuligheter for ActiveVent

1. Universal SlimTip AV

Du kan enkelt demonstrere ActiveVent Receiver for brukere takket være den nye Universal SlimTip AV. Universelle SlimTips ble utviklet basert på innsamlede data fra tusenvis av øreskanninger som gjorde det mulig for utviklere å lage fire former som gir god tilpasning. Universelle SlimTips er en ideell midlertidig løsning for demonstrasjoner og prøveperioder mens brukeren venter på sin tilpassede SlimTip Titanium AV.

2. Tilpasset SlimTip Titanium AV

For å oppnå optimal akustisk ytelse ble ActiveVent Receiver utviklet for langsiktig bruk med SlimTip Titanium, noe som gir et fullstendig tilpasset skall i et holdbart, komfortabelt materiale.

Høydepunkter

- Intelligent balansert klar tale i støy samt lyttekomfort²
- Gir utmerket lyd kvalitet på streaming^{6,7}
- Intelligent styrt av AutoSense OS 4.0
- Kompatibel med alle Audéo Paradise oppladbare høreapparater⁸

Hensyn ved ActiveVent-tilpasning

- For optimal ytelse skal receivere skiftes ut hver sjetten måned. Dette gjøres enkelt på klinikken
- Personer med minimalt med ørevoks og god fingerferdighet er ideelle kandidater
- Regelmessig rengjøring og skifte av voksfilter er nødvendig
- Passer ikke for personer med alvorlig tinnitus og hyperacusis



Fordeler med ActiveVent Performance + for brukerne

ActiveVent Receiver er kompatibel med alle Audéo Paradise oppladbare høreapparater og gir ulike fordeler i henhold til funksjonsnivået til høreapparatet. ActiveVent Performance + er samlingen av fordeler som brukerne kan forvente at ActiveVent Receiver åpner i deres høreapparater.


Intelligent balansert klar tale i støy samt lyttekomfort²

ActiveVent Receiver er ideelle for brukere som har en aktiv livsstil og bruker mye tid i omgivelser med støy, slik som restauranter, sosiale sammenkomster eller offentlige steder med mye ekstern støy. Disse stedene kan gjøre det enda mer utfordrende å høre. Med ActiveVent Receiver lukker AutoSense OS 4.0 automatisk ventileringen når støynivået stiger, slik at høreapparatbrukeren kan dra nytte av den forbedrede ytelsen til en lukket løsning (tilgjengelig i funksjonsnivået Premium). Når støynivået faller, åpner ventileringen seg slik at brukeren får en komfortabel, åpen løsning. Med ActiveVent Receiver kan brukere også gå inn i manuelle programmer med lukket ventilering. (Tilgjengelig i funksjonsnivåene Premium, Advanced og Standard).

Overlegen lyd kvalitet på streaming^{6,7}

Brukere kan nå også få overlegen lyd kvalitet på streaming takket være den lukkede ventileringen. Det virkelig spesielle elementet på disse receiverne er at hvis brukeren ønsker å bytte fra streaming til å prate i en samtale, settes streamingen på pause med et enkelt dobbeltrykk, og ActiveVent Receiver åpner seg for å gi en enkel overgang (tilgjengelig i alle funksjonsnivåer).

Fordeler

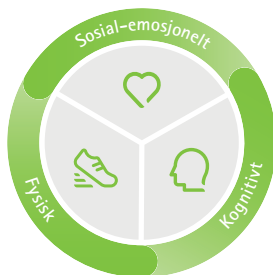

- ActiveVent Receiver gir i gjennomsnitt 10 % bedre taleforståelse i støy samtidig som den gir naturlig lyd i ulike lyttesituasjoner⁶
- Universal SlimTip gjør det enkelt å øyeblikkelig prøve og demonstrere ActiveVent Receiver
- ActiveVent Receiver hjelper brukere med å holde kontakten i både støy og stille omgivelser og sørger for at de kan være sosiale med familie og venner og opprettholde gode relasjoner



Ingenting er som lyden av Paradise


Med introduksjonen av Paradise befestet Phonak sin stilling som en av de fremste i bransjen når det gjelder utmerket hørsel. Basert på grunnlaget av bransjeledende maskinvare, har Paradise nå enda flere funksjoner som hjelper brukerne med å gjenopplage lyd i enda flere situasjoner, samtidig som det forbedrer det generelle velværet. Det drives av den dokumenterte ytelsen til PRISM™-brikken, og disse funksjonene arbeider sømløst sammen for å gi en enestående hørselsopplevelse¹.

Enestående lyd kvalitet

- **Ny ActiveVent Receiver**
 - Ny ActiveVent Performance +
- **Motion sensor**
- **APD 2.0**
- **AutoSense OS™ 4.0**
 - Speech Enhancer
 - Dynamic Noise Cancellation
 - Motion Sensor Hearing



▶ Pålitelig oppladbar litiu



Skreddersydde digitale løsninger

- Oppdatert myPhonak-app
 - Personlig tilpasset Tap Control-følsomhet
 - AudiogramDirect (via Remote Support)
 - Fjernkontroll
- Ny Target 7.1.9

Universell tilkobling

- Kan kobles til smarttelefoner, TV og mer
- RogerDirect™
- Direkte tilkobling til iOS og Android
- Flere Bluetooth®-tilkoblinger
- Tap Control for enkel tilgang til Bluetooth-funksjoner

life is on

Vi i Phonak mener at god hørsel er viktig for å ha det godt og kunne leve livet fullt ut. I mer enn 70 år har vi jobbet for å skape en verden hvor "life is on" for alle. Våre innovative hørselsløsninger er designet for at mennesker i alle aldre, og med alle typer hørselstap, skal kunne utvikle sterke relasjoner og ha et positivt liv.

www.phonakpro.com

