

Phonak Virto™ 1.




Produktinformasjon

Phonak Virto Infinio er den omfattende ITE-porteføljen for lett til svært stort hørselstap. Virto I-høreapparater er løsningen for de brukerne/kundene som foretrekker en diskret, skreddersydd løsning.

Virto I-R, som drives av den innovative teknologien i Phonak Infinio-plattformen, er det første oppladbare, tilpassede høreapparatet fra Phonak.



Produktbeskrivelse

	 Virto I-R 190/170/150/130	 Virto I-10 NW O 190/170/150/130	 Virto I-Titanium 190/170
Effektnivå			
M	•	•	•
P	•	•	•
SP	•	•	•
UP ¹	•		
Utstyrskonfigurasjon/alternativer/teknologi			
Batteristørrelse	Innebygd, oppladbart	10	10
Ladetider ²	0 % til 100	3 t	
	0 % til 80 %	1,5 t	
	30 min tilpasning	15 min.	
Bluetooth®	•		
Skallmateriale	Akrylisk	Akrylisk	Titanium ³
IP-rangering	IP68 ⁴	IP68 ⁴	IP68 ⁴
Mikrofonteknologi	Retningsbestemt	Omni	Omni
Telespole		Valgfritt	Valgfritt
Trykknapp (program/volum)	•	Valgfritt	Valgfritt
Volumkontroll (hjul)		Valgfritt	
EasyPhone (for akustisk telefon)		•	Valgfritt
MiniControl (for endring av program eller volum)		•	•

Farger

Faceplate-farger



26
Pink



14⁵
Tan



22
Cocoa



28⁵
Brown



06
Black

Titanskallfarge



Titanium
Gray

Akrylskallfarger



26
Pink



14
Tan



22
Cocoa



28
Brown



06
Black



R
Red Transparent



B
Blue Transparent



21
Transparent

¹ Kun tilgjengelig i bestemte land

² Faktisk ladetid avhenger av gjenværende batterilevetid, men vil ikke overskride 3 timer.

³ Tilgjengelig i to ulike overflateruheter: standard eller forbedret grep (ERS)

⁴ IP68 indikerer at høreapparatet er vannavstøtende og støvtett. Det tålte å være nedsenket i ferskvann på 1 meters dybde i 60 minutter og ligge 8 timer i et støvkammer i henhold til standarden IEC60529.

⁵ Kun Virto I-R og Virto I-10 NW O

Funksjonsnivåer

AutoSense OS™ 7.0 ¹	Premium I90	Advanced I70	Standard I50	Essential I30
Tale i høy støy ²	•			
Musikk	•	•		
Tale i bil	•	•	•	
Komfort i støy	•	•	•	
Tale i støy	•	•	•	•
Stille situasjoner	•	•	•	•
Medier, tale + mikrofon ²	•	•	•	•
Medier, musikk + mikrofon ²	•	•	•	•
Tilleggsprogrammer				
Maks. tilleggsprogrammer	4	4	4	4
Tale i høy støy ²	•	•		
Tale i 360° ²	•	•		
Tale i bil	•	•	•	
Tale i støy	•	•	•	•
Stille situasjoner	•	•	•	•
Komfort i støy	•	•	•	•
Musikk	•	•	•	•
Akustisk telefon	•	•	•	•
Tilpasset program	•	•	•	•
Telefon via telespole ± mikrofon ³	•	•	•	•
Offentlig telespole ± mikrofon ³	•	•	•	•
Streamingprogrammer				
RogerDirect™ + mikrofon ²	•	•	•	•
PartnerMic + mikrofon ²	•	•	•	•
Telefonsamtale + mikrofon ²	•	•	•	•

Funksjoner	Premium I90	Advanced I70	Standard I50	Essential I30
SpeechSensor ²	•			
Speech Enhancer	•			
StereoZoom 2.0 ²	•	•		
Dynamic Noise Cancellation ²	•	•		
Motion Sensor Hearing ²	•	•	•	
Roger-kompatibilitet	•	•	•	•
Deaktiver hands-free samtaler ^{2,4}	•	•	•	•
Tap Control ²				
- Siri/Google Assistant	•	•		
- Sett streaming på pause / gjenoppta streaming	•	•		
- Ta i mot / avslutte telefonsamtale	•	•		
SoundRelax	•	•	•	
DuoPhone ²	•	•	•	
EasyPhone ³	•	•	•	•
UltraZoom ²	•	•	•	•
Roger retningsinnstilling ²	•	•	•	•
WindBlock	•	•	•	•
Brukerbasert fininnstilling	•	•	•	•
Tinnitusbalanse	•	•	•	•
Auto Acclimatization	•	•	•	•
Environmental balance	•	•	•	•
SoundRecover ²	•	•	•	•
WhistleBlock	•	•	•	•
NoiseBlock	•	•	•	•
QuickSync ²	•	•	•	•
AOV	•	•	•	•
Fininnstilling av kanaler	20	20	16	12

1 Phonak Virto I-10 NW O og Virto I-Titanium leveres med AutoSense OS 6.0

2 Kun tilgjengelig for Phonak Virto I-R

3 Kun tilgjengelig for Phonak Virto I-10 NW O og Virto I-Titanium

4 For hørsikkerhetsmiljøer, for eksempel SCIF

Tilpasning

	Virto I-R	Virto I-10 NW O / Virto I-Titanium
Phonak Target	11.0 eller nyere	10.0 eller nyere
Noahlink Wireless, Noahlink Wireless 2	•	
Noahlink		•
HI-PRO, HI-PRO2		•

Phonak Virto I-R ladeløsning

Phonak Charger Virto I

Phonak Virto I-R har alle Infinio-funksjonene du er glad i, i tillegg til fordelene med oppladbarhet. Med vårt egenutviklede snap- and charge-system blir ladingen enkel og intuitiv. Slipp høreapparatet inn i laderen, og det vil feste seg magnetisk til ladepunktet. Med Snap and Charge er Virto R sikret strøm til en hel dags bruk, og brukerne/kundene kan nyte en hel dag med hørsel, inkludert strømming.



Phonak Virto I-R trådløs teknologi

Direktesamtaler / streaming av lyd

Bluetooth® Classic Audio

Trådløst kommunikasjonsportefølje

	Virto I-R I90/I70/I50/I30	Virto I-10 NW O I90/I70/I50/I30	Virto I-Titanium I90/I70
Trådløst tilbehør			
TV Connector	•		
Phonak PartnerMic™	•		
Phonak RemoteControl	•		
Roger			
RogerDirect	•		
Roger NeckLoop		• ¹	• ¹
Apper			
myPhonak	•		

¹ Tilgjengelig hvis telespole er installert

life is on

Siden 1947 har Phonak jobbet for å skape en verden hvor "life is on" for alle. Allerede da selskapet ble grunnlagt, var vi drevet av en urokkelig overbevisning: Vi mener at god hørsel er ensbetydende med velvære og dermed avgjørende for å leve livet fullt ut. Hørsel er faktisk direkte knyttet til sosialt, følelsesmessig, kognitivt og fysisk velvære. Både nå og i fremtiden jobber vi for å tilby den bredeste porteføljen av innovative hørselsløsninger. Og sammen med audiografene våre fortsetter vi å fokusere på det som betyr mest: å forbedre taleoppfattelsen, forandre folks liv og ha en positiv innvirkning på samfunnet som helhet.

phonak.com



027-0710-10M4.00|2025-03|NLG © 2024 - 2025 Sonova AG. All rights reserved.