

# Phonak Audeo™ L ●

## Produktinformasjon

Phonak Audeo L er den omfattende RIC-porteføljen for lett til svært stort hørselstap. Phonak Audeo L har tre ulike design, fem funksjonsnivåer og fem receiveere, inkludert ActiveVent™ Receiver.

Phonak Audeo L-høreapparater drives av den innovative teknologien i Phonak Lumity-plattformen og er løsningen for brukere som foretrekker fleksible og diskre RIC-kasser



# Produktbeskrivelse



**Audeo L-R**  
Audeo L-R Trial  
L90/L70/L50/L30/L20

**Audeo L-RT**  
Audeo L-RT Trial  
L90/L70/L50/L30

**Audeo L-RL**  
Audeo L-RL Trial  
L90/L70/L50/L30

Flerfunksjonsknapp		•	•	•
Telespole			•	
Bluetooth®		•	•	•
Vannavstøtende belegg		•	•	•
IP-rangering		IP68 <sup>1</sup>	IP68 <sup>1</sup>	IP68 <sup>1</sup>
Mål	L x B x D	27,7 x 12 x 8,1 mm	30,3 x 12,6 x 8,1 mm	29,5 x 12,9 x 9 mm
	Vekt	2,2 g	2,6 g	2,8 g
Ladetider <sup>2</sup>	0 % til 100 %	3 t	3 t	3 t
	0 % til 80 %	1,5 t	1,5 t	2,0 t
	30 min tilpasning	15 min	15 min	20 min
<b>S Receiver</b>				
Maks. utgangseffekt (dB SPL)	2 cc coupler	111	111	111
Maks. forsterkning (dB)	2 cc coupler	47	47	47
Frekvensområde (Hz)		<100 - >8000	<100 - >8000	<100 - >8000
<b>M Receiver</b>				
Maksimal utgangseffekt (dB SPL)	2 cc coupler	114	114	114
Maks. forsterkning (dB)	2 cc coupler	51	51	51
Frekvensområde (Hz)		<100 - >8000	<100 - >8000	<100 - >8000
<b>MAV Receiver</b>				
Maksimal utgangseffekt (dB SPL)	2 cc coupler	119	119	119
Maks. forsterkning (dB)	2 cc coupler	50	50	50
Frekvensområde (Hz)		<100 - >8000	<100 - >8000	<100 - >8000
<b>P Receiver</b>				
Maksimal utgangseffekt (dB SPL)	2 cc coupler	122	122	122
Maks. forsterkning (dB)	2 cc coupler	59	59	59
Frekvensområde (Hz)		<100 - 6300	<100 - 6300	<100 - 6300
<b>UP Receiver</b>				
Maks. utgangseffekt (dB SPL)	2 cc coupler	132	132	132
Maks. forsterkning (dB)	2 cc coupler	71	71	71
Frekvensområde (Hz)		<100 - 6100	<100 - 6100	<100 - 6100

## Kassefarger



**P1**  
Sand Beige



**H0**  
Beige



**P3**  
Sandalwood



**P4**  
Chestnut



**P5**  
Champagne



**P6**  
Silver Gray



**P7**  
Graphite Gray



**P8**  
Velvet Black

<sup>1</sup> IP68 indikerer at høreapparatet er vann- og støvavstøtende. Det tålte å være nedsenket i ferskvann på 1 meters dybde i 60 minutter og ligge 8 timer i et støvkammer i henhold til standarden IEC60529.  
<sup>2</sup> Faktisk ladetid avhenger av gjennværende batterilevetid, men vil ikke overskride 3 timer.



# Funksjonsnivåer

	Premium	Advanced	Standard	Essential	Low Essential
<b>AutoSense OS™ 5.0</b>					
Komfort i ekko	•				
Tale i bil	•				
Tale i høy støy	•				
Musikk	•	•			
Komfort i støy	•	•	•		
Tale i støy	•	•	•	•	•
Stille situasjoner	•	•	•	•	•
Media tale + M	•	•	•	•	•
Media musikk + M	•	•	•	•	
<b>Tilleggsprogrammer</b>					
Maks. tilleggsprogrammer	4	4	4	4	4
Komfort i ekko	•				
Tale i høy støy	•	•			
Tale i 360°	•	•			
Tale i støy	•	•	•	•	•
Stille situasjoner	•	•	•	•	•
Komfort i støy	•	•	•	•	
Musikk	•	•	•	•	
Akustisk telefon	•	•	•	•	•
Tilpasset program	•	•	•	•	•
<b>Streamingprogrammer</b>					
RogerDirect + M	•	•	•	•	
PartnerMic + M	•	•	•	•	
Telefonsamtale + M	•	•	•	•	•

	Premium	Advanced	Standard	Essential	Low Essential
<b>Funksjoner</b>					
SpeechSensor	•				
Speech Enhancer	•				
StereoZoom 2.0	•	•			
Dynamic Noise Cancellation	•	•			
Motion Sensor Hearing	•	•	•		
RogerDirect™	•	•	•	•	
Roger and Directional-streaming	•	•	•	•	
UltraZoom	•	•	•	•	•
EchoBlock	•				
Tap Control					
- Siri / Google Assistant	•	•			
- Sette streaming på pause / gjenoppta streaming	•	•			
- Godta/avslutte samtale	•	•			
SoundRelax	•	•			
DuoPhone	•	•	•		
Real Ear Sound	•	•	•		
Hjelpesfunksjoner	•	•	•	•	
WindBlock	•	•	•	•	
Brukerbasert fininnstilling	•	•	•	•	
Tinnituskontroll	•	•	•	•	
Auto Acclimatization	•	•	•	•	
Environmental balance	•	•	•	•	
SoundRecover2	•	•	•	•	•
WhistleBlock	•	•	•	•	•
NoiseBlock	•	•	•	•	•
QuickSync	•	•	•	•	•
AOV	•	•	•	•	•
Fininnstillingskanal	20	20	16	12	8

## Tilpasning

	Audéo L-R Audéo L-R Trial	Audéo L-RT Audéo L-RT Trial	Audéo L-RL Audéo L-RL Trial
Phonak Target	8.0 eller nyere	8.0 eller nyere	8.0 eller nyere
Noahlink Wireless	•	•	•



# Akustisk sammenkobling

## Lengde

Tilgjengelig for venstre og høyre i fire ulike lengder (0, 1, 2, 3)

## Dome

Cap dome

Open dome Tilgjengelig i tre størrelser (S, M, L)

Vented dome Tilgjengelige i tre størrelser (S, M, L)

Power dome Tilgjengelig i tre størrelser (S, M, L)

## SlimTip\*

Akryl

Silikon

Titanium AV

Universal AV Tilgjengelig i fire fasonger (A, B, C, D)

## cShell


Akryl

Titanium

## Tilpasningsområder

\*Tilgjengelig med ekstra kanallengde

	S Receiver	M Receiver	MAV Receiver	P Receiver	UP Receiver
Tilgjengelig for venstre og høyre i fire ulike lengder (0, 1, 2, 3)	•	•	•	•	•
Cap dome	•	•		•	
Open dome Tilgjengelig i tre størrelser (S, M, L)	•	•		•	
Vented dome Tilgjengelige i tre størrelser (S, M, L)	•	•		•	
Power dome Tilgjengelig i tre størrelser (S, M, L)	•	•		•	
Akryl	•	•		•	
Silikon	•	•		•	
Titanium AV			•		
Universal AV Tilgjengelig i fire fasonger (A, B, C, D)			•		
Akryl	•	•		•	•
Titanium	•	•		•	•

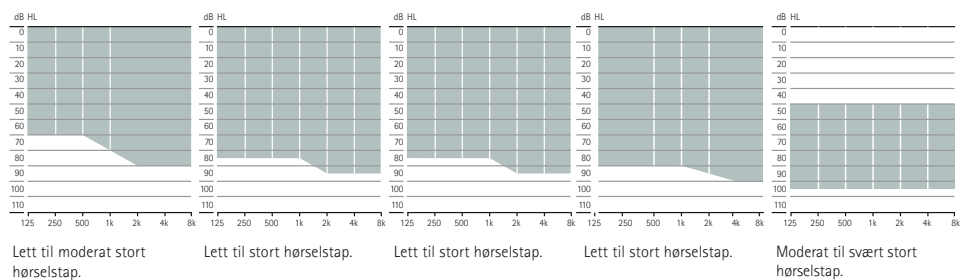

## SmartSpeech™-teknologi

SmartSpeech-teknologi representerer Phonaks sterke ønske om å designe funksjoner som forbedrer taleforståelse og reduserer lytteinnsatsen i ulike lyttemiljøer<sup>1</sup>. Slike funksjoner inkluderer Speech Enhancer, Dynamic Noise Cancellation og Motion Sensor Hearing. Med Phonak Audéo™ Lumity innfører vi to nye funksjoner: StereoZoom 2.0 og SpeechSensor i tillegg til de eksisterende fordelene med ActiveVent™ Receiver og RogerDirect™-teknologi.

## Phonak Audéo L Trial™

Phonak Audéo L Trial-høreapparater kan raskt stilles inn til ønsket funksjonsnivå som passer det du er anbefalt. Alle nivåer av teknologi i ett Phonak Audéo L Trial-høreapparat gir deg mange muligheter for å levere hørselsløsningen ved første avtale, eller overlappet under reparasjoner.

<sup>1</sup> Appleton, J. (2020) AutoSense OS 4.0 - significantly less listening effort and preferred for speech intelligibility. Phonak Field Study News hentet fra [www.phonakpro.com/evidence](http://www.phonakpro.com/evidence), besøkt februar 2022.

Latzel, M. & Hobi, S. (2022) Receiver with mechanical vent provides benefit of open and closed acoustics for better speech understanding in noise and naturalness of own voice perception. Phonak Field Study News under arbeid. Forventet i midten av 2022.

Thibodeau L. M. (2020) Benefits in Speech Recognition in Noise with Remote Wireless Microphones in Group Settings. Journal of the American Academy of Audiology, 31(6), 404–411.

## Lademuligheter for Phonak Audéo L



### Phonak Charger Ease

Phonak Charger Ease er en kompakt lader med magneter i ladesporene som gjør det enkelt å sette inn og ta ut Audéo L-R og RT. Den bruker en standard USB-C-ladeport som lyser når strøm er tilkoblet.



### Phonak Charger Case Go og Phonak Life Charger

Det finnes to alternativer for Audéo L-RL. Phonak Charger Case Go har et innebygd batteri som kan lade to høreapparater opptil tre ganger. Begge laderne bruker en standard USB-C-ladeport, og LED-lampen på baksiden lyser når strøm er tilkoblet.

## Phonak Audéo L Bluetooth®-versjoner

Direktesamtaler / streaming av lyd

Trådløs Bluetooth® 4.2-teknologi og de fleste eldre Bluetooth-telefoner

Bluetooth®-begrepet og -logoene er registrerte varemerker som tilhører Bluetooth SIG, Inc., og all bruk av disse varemerkene av Sonova AG er lisensiert.

## Trådløs kommunikasjonsportefølje

	Audéo L-R Audéo L-R Trial L90/L70/L50/L30	Audéo L-RT Audéo L-RT Trial L90/L70/L50/L30	Audéo L-RL Audéo L-RL Trial L90/L70/L50/L30	Audéo L-R Audéo L-R Trial L20
<b>Trådløst tilbehør</b>				
TV Connector	•	•	•	•
Phonak PartnerMic	•	•	•	
Phonak RemoteControl	•	•	•	
<b>Roger</b>				
RogerDirect™	•	•	•	
<b>Apper</b>				
myPhonak	•	•	•	•

Du finner mer informasjon på [www.phonakpro.com/audeolumity](http://www.phonakpro.com/audeolumity)

Du finner mer informasjon om Roger-mikrofonene på [www.phonakpro.com/roger](http://www.phonakpro.com/roger)

Du finner mer informasjon om eSolutions på [www.phonakpro.com/smartapps](http://www.phonakpro.com/smartapps)



## life is on

Phonak har siden 1947 vært dedikert til å opprettholde livskvalitet gjennom nye akustiske verdener. Allerede da bedriften ble stiftet, var vi drevet av en klar overbevisning: Vi tror at god hørsel er lik god livskvalitet og dermed er avgjørende for å kunne leve livet fullt ut. Faktisk er hørselssansen direkte knyttet til sosialt, emosjonelt, kognitivt og fysisk velvære. I dag, som i fremtiden, er vi glade for å kunne tilby en bred portefølje av innovative hørselsløsninger. Og sammen med audiografene våre fortsetter vi å fokusere på det som betyr mest: å forbedre taleforståelsen, forandre folks liv og ha en positiv innvirkning på samfunnet som helhet.

[www.phonak.com](http://www.phonak.com)



027-0667-10(V3.00/2022-08/NLG) © 2022 Sonova AG All rights reserved