

Twój mikrofon Roger On™ przewodnik powitalny.

To jest materiał przeznaczony dla profesjonalisty

Gratulujemy rozpoczęcia okresu próbnego z mikrofonem Roger On!

Roger™ to Twoje trzecie ucho, które daje Ci pewność, że nie przeoczysz pięknych momentów życia. Pozwala Ci śledzić rozmowy, pozostawać blisko przyjaciół i rodziny oraz cieszyć się aktywnym życiem społecznym.

Czy chcesz usłyszeć, co Cię omijało?

Ten przewodnik przeprowadzi Cię przez wszystko, co musisz wiedzieć, aby w pełni wykorzystać mikrofon Roger On.

Rozpoczynanie użytkowania mikrofonu Roger On

1 Konfiguracja systemu RogerDirect™

Jest to jednorazowy krok w celu połączenia systemu Roger z Twoimi aparatami słuchowymi. Twój protetyk słuchu mógł już go wykonać podczas Twojej ostatniej wizyty w gabinecie.

Jeśli nie, zobacz instrukcje krok po kroku w Przewodniku konfiguracji RogerDirect dołączonym do opakowania lub obejrzyj film instruktażowy na kanale marki Phonak na YouTube.



Zeskanuj, aby obejrzeć film instruktażowy.

2 Zapoznaj się z mikrofonem Roger On

Gdy odpakujesz swój nowy mikrofon, poświęć chwilę, aby przeczytać Szybki przewodnik konfiguracji dołączony do opakowania. Przedstawia on, co jest w środku, wyjaśnia ikony pojawiające się na ekranie i podaje przykłady codziennego użytkowania.

3 Ładowanie przed użyciem

Pełne naładowanie zajmuje 2 godziny. Całkowicie naładowany akumulator zapewnia do 8 godzin ciągłego użytkowania.

4 Pobieranie aplikacji myRogerMic

Aplikacja umożliwia łatwe dopasowanie ustawień systemu Roger. Jest to opcjonalny, ale wspaniały sposób na wzmocnienie Twojego doświadczenia.



Sklep Google
Play



Sklep App
Store

I to wszystko – jesteś w pełnej gotowości, aby wziąć z sobą urządzenie Roger, dokądkolwiek idziesz.



Przetestuj mikrofon Roger On

Mając przy sobie urządzenie Roger, dysponujesz potężnym i wszechstronnym rozwiązaniem słuchowym. Wypróbuj je w różnych okolicznościach i zanotuj, czy przyniosło korzyści (Tak/Nie). Gdy skończy się okres próbny, zalecamy udostępnienie rezultatów protetykowi słuchu, aby w pełni wykorzystać Twoje doświadczenie.

Na spotkaniach towarzyskich	Zalecane użycie	Tak	Nie
W kawiarni / hałaśliwej restauracji, jedząc obiad z przyjaciółmi i rodziną	Umieść mikrofon Roger On na środku stołu. Możesz wybrać kierunek mikrofonu	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Na wydarzeniach towarzyskich z głośną muzyką i głośno rozmawiającymi ludźmi	Trzymaj go w ręce i skieruj go w kierunku mówiącej osoby	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
W centrum handlowym / sklepie spożywczym	Trzymaj go w ręce i skieruj go w kierunku mówiącej osoby	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sporty i inne aktywności			
Na siłowni lub treningu na zewnątrz	Daj mikrofon Roger On swojemu trenerowi / koledze lub koleżance z drużyny i poproś o przypięcie mikrofonu na jego/jej koszulce. Alternatywnie może go także zawiesić na szyi, wykorzystując linkę.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Pieszne wędrowki lub jazda na rowerze	Daj go swojemu towarzyszowi wędrowki / jazdy na rowerze, aby przypiął go sobie do koszulki, gdy jesteście w ruchu.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
W domu			
Rozmowa z partnerem lub znajomym, gdy nie jesteście bezpośrednio przy sobie (np. gdy jesteście w różnych pomieszczeniach)	Daj mikrofon Roger On swojemu partnerowi/znajomemu, aby przypiął go sobie do koszulki.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Oglądanie TV	Wykorzystaj stację dokującą, aby połączyć mikrofon Roger On z TV.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Podczas podróży			
Porozmawiaj ze swoim towarzyszem podróży, jadąc samochodem lub transportem publicznym.	Daj mikrofon Roger On swojemu towarzyszowi podróży, aby przypiął go do swojej koszulki.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Wydarzenia biznesowe			
Wykłady i prezentacje	Daj mikrofon Roger On osobie prezentującej i usiądź wygodnie pośród widowni.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Panel dyskusyjny	Umieść go na scenie, a najlepiej na stole, w miejscu odbywania się panelu dyskusyjnego. Otwórz aplikację mobilną i wybierz Szeroki tryb wywiadu. Możesz teraz usiąść wygodnie pośród widowni i słuchać dyskusji	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
W pracy			
Warsztaty zespołowe	Umieść mikrofon Roger On na środku stołu podczas dyskusji w grupie. Daj go instruktorowi, aby przypiął go do swojej koszulki.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Spotkania na stojąco i rozmowy na korytarzu	Trzymaj go w ręce i skieruj go w kierunku mówiącej osoby	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kameralne spotkania	Umieść go na środku stołu w sali zebrań	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Rozmowy online	Możesz także używać mikrofonu Roger On jako zestawu słuchawkowego. Najpierw użyj przewodu, aby połączyć go z laptopem. Następnie przypnij go do swojej koszulki. Zbierz on Twój głos i wyśle go do komputera	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

