


Aplikacja myPhonak

Instrukcja użytkowania – aplikacja myPhonak 6

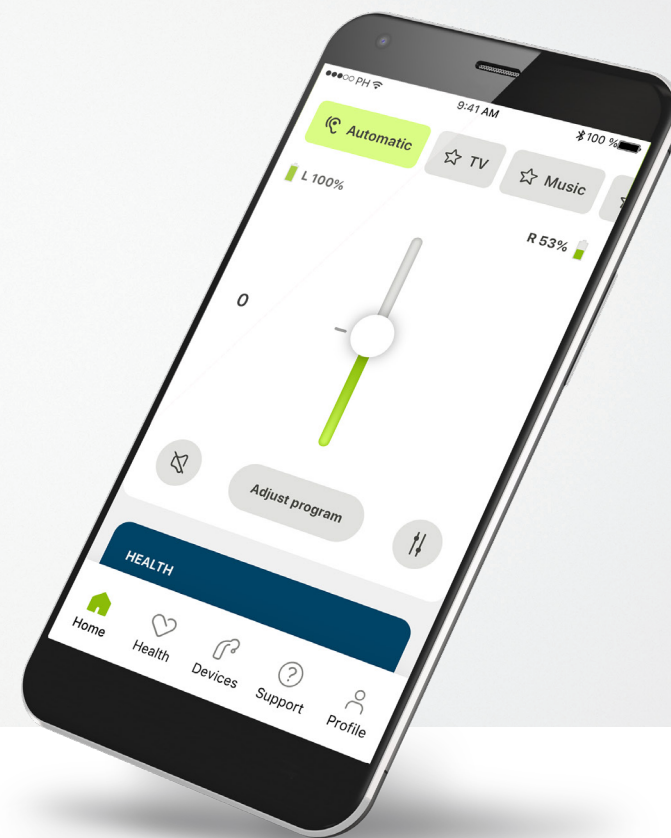

A Sonova brand

PHONAK
life is on

Wprowadzenie

Aplikacja myPhonak została zaprojektowana przez firmę Sonova, jednego ze światowych liderów w dziedzinie rozwiązań słuchowych, z siedzibą w Zurychu w Szwajcarii. Aby wykorzystać wszystkie możliwości oferowane przez aplikację, należy dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję użytkownika.



W niniejszej instrukcji użytkownika opisano funkcje aplikacji myPhonak oraz sposób korzystania z tych funkcji przez użytkownika. Przed rozpoczęciem korzystania z aplikacji należy dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję użytkownika.

Do obsługi aplikacji nie są potrzebne dodatkowe szkolenia.



Informacje dotyczące kompatybilności:

Do korzystania z aplikacji myPhonak wymagane są aparaty słuchowe Phonak obsługujące łączność Bluetooth®. Aplikacja myPhonak może być używana w telefonach z funkcją Bluetooth® Low Energy (LE) z systemem iOS® w wersji 14 lub nowszej. Aplikacja myPhonak może być używana na certyfikowanych urządzeniach z systemem Android™ 7.0 lub nowszym i usługami Google Mobile Services (GMS) oraz obsługujących łączność Bluetooth® 4.2.

Spis treści

Szybki przegląd	3
Instalowanie aplikacji myPhonak	5
Konfigurowanie konta w myPhonak	6
Rozwiązywanie problemów z konfiguracją konta	7
Parowanie z aparatami słuchowymi Phonak	8
Rozwiązywanie problemów z parowaniem	9
Home – widok Zdalnego Sterowania	10
Home – ustawienia zaawansowane Zdalnego Sterowania	12
Ustawienia zaawansowane Zdalnego Sterowania – rozwiązywanie problemów	14
Zdrowie	16
Urządzenia	20
Wsparcie i sesja Zdalnego Wsparcia	21
Rozpoczynanie sesji Zdalnego Wsparcia	22
Rozwiązywanie problemów podczas sesji Zdalnego Wsparcia	23
Profil i prywatność danych	24
Ważne informacje o bezpieczeństwie	25
Informacje dotyczące zgodności	29
Wyjaśnienie symboli	29

Znak słowny Bluetooth® oraz logo są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Bluetooth SIG, Inc., a ich użycie przez firmę Sonova AG jest poparte odpowiednią licencją.


iPhone® jest znakiem towarowym firmy Apple Inc., zastrzeżonym w USA i innych krajach.

Android to znak towarowy firmy Google LLC

iOS® jest zastrzeżonym znakiem towarowym lub znakiem towarowym firmy Cisco Systems, Inc. i/lub jej podmiotów zależnych w Stanach Zjednoczonych i niektórych innych krajach.

Szybki przegląd

Zdalne Sterowanie

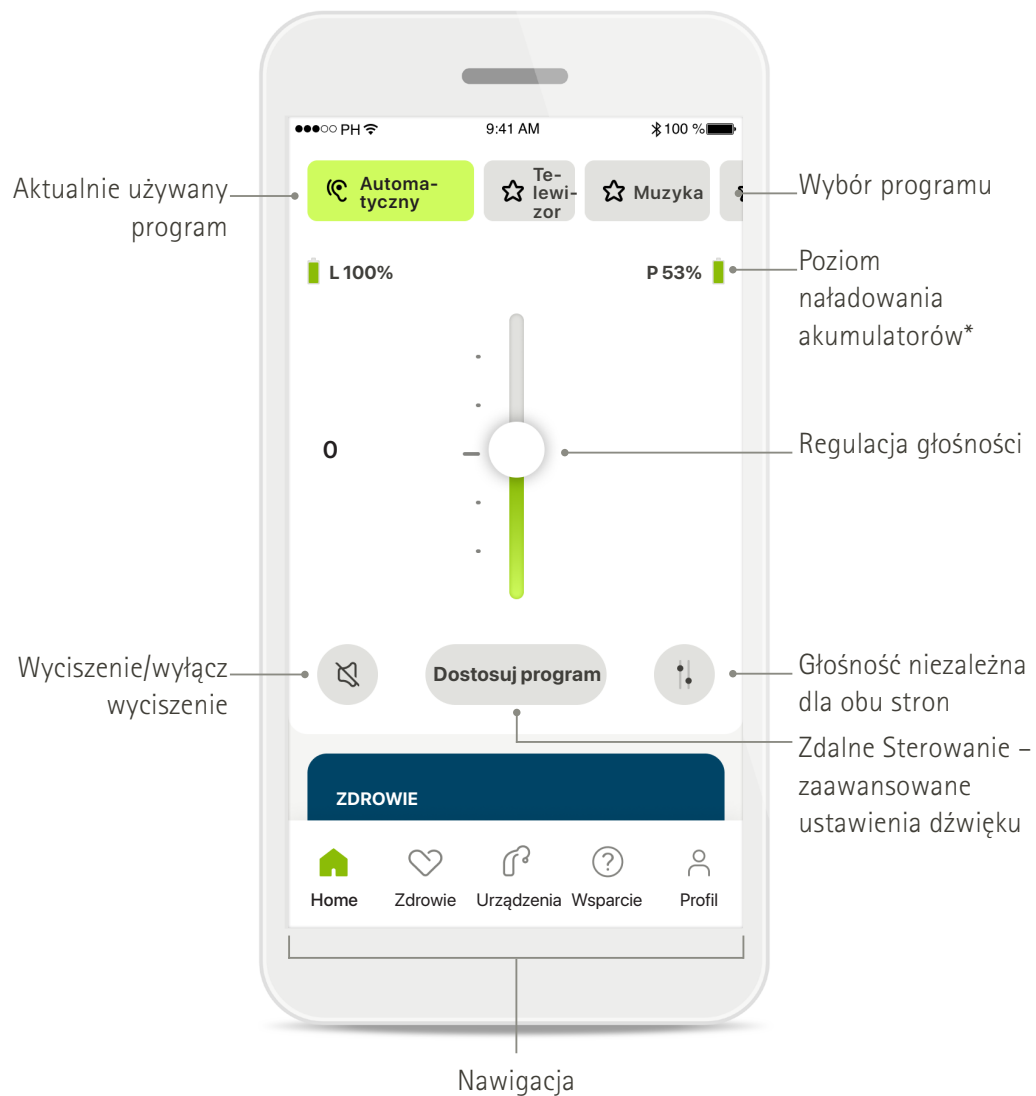


Zdalne Wsparcie



*Dotyczy tylko ładowalnych aparatów słuchowych

Szybki przegląd

Home

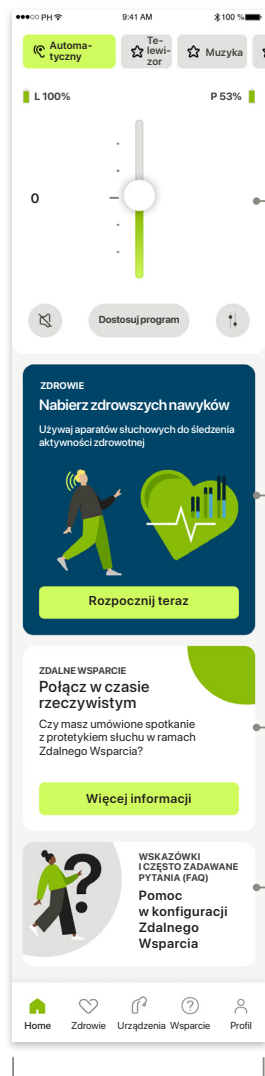

Zdalne Sterowanie


Szybki dostęp do funkcji dotyczącej zdrowia

Szybki dostęp do informacji o Zdalnym Wsparciu

FAQ - Często zadawane pytania

Nawigacja


Zdrowie

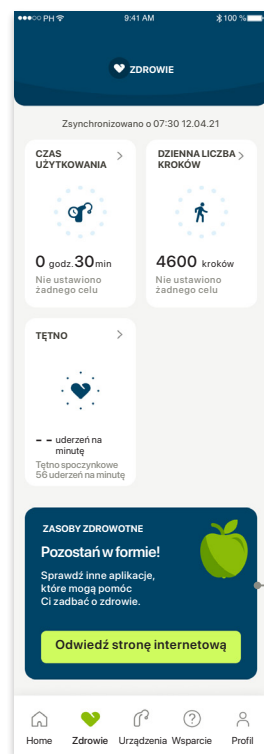

Karty sekcji Zdrowie

Rekomendacje dot. innych aplikacji zdrowotnych

Zaawansowane ustawienia Zdalnego Sterowania z zaawansowanymi ustawieniami dźwięku

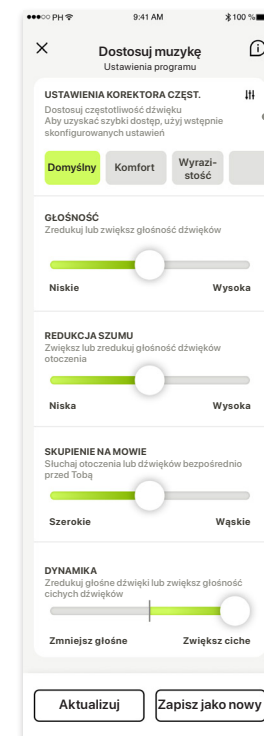

Dodatkowe informacje

Zaawansowane ustawienia korektora częstotliwości

Wybór szybkich ustawień wstępnych


Regulacja głośności

Ustawienia dźwięku dla hałasu i mowy


Dostosowywanie cichych/głośniejszych dźwięków

Instalowanie aplikacji myPhonak


- Połącz swój smartfon z internetem za pomocą sieci Wi-Fi lub z wykorzystaniem danych sieci komórkowej
- Włącz funkcję łączności Bluetooth® w smartfonie

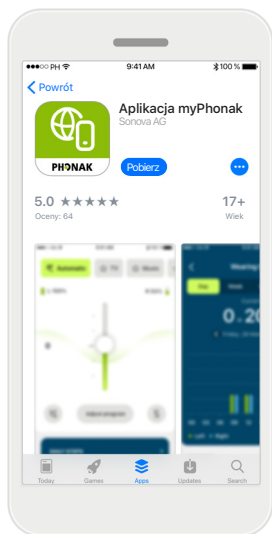


Pobierz aplikację myPhonak
Pobierz aplikację ze sklepu. Po zakończeniu instalacji otwórz aplikację.

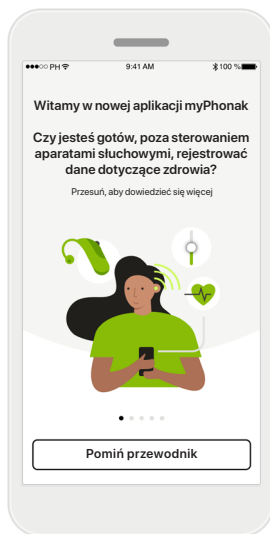


Otwórz aplikację
Po pierwszym otwarciu aplikacji użytkownik może wyświetlić skróconą prezentację. Jeśli nie chcesz tego robić, kliknij przycisk **Pomiń przewodnik**.

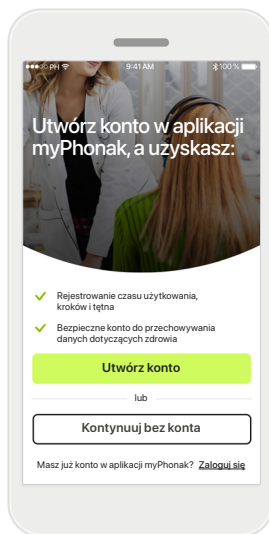

Utwórz konto
Opcjonalnie możesz utworzyć konto w myPhonak. Jest to obowiązkowe, jeśli chcesz uzyskać dostęp do funkcji dotyczących zdrowia.

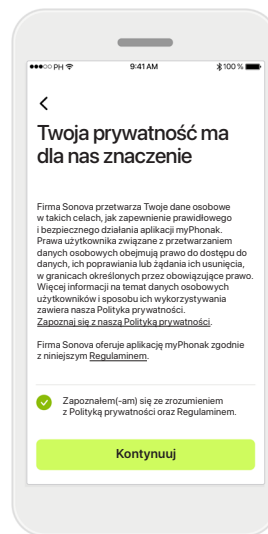


Polityka prywatności
Aby móc korzystać z aplikacji, zaznacz to pole po zapoznaniu się z Polityką prywatności oraz Regulaminem. Następnie kliknij przycisk **Kontynuuj**.

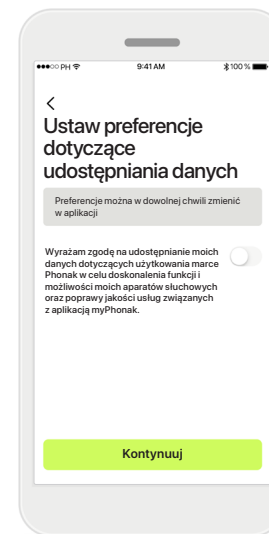


Ulepszanie produktu
Możesz dobrowolnie udostępnić dane o użytkowaniu aplikacji, które ułatwią nam ulepszenie produktów. Twoje dane będą traktowane w sposób opisany w Polityce prywatności i nie będzie można ustalić ich źródła.

Konfigurowanie konta w myPhonak

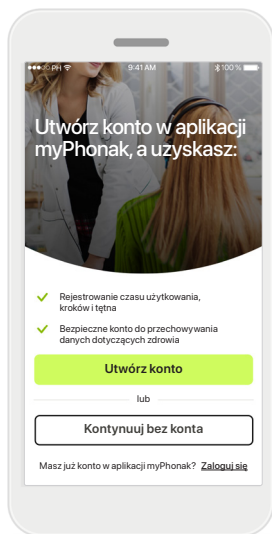


Utwórz konto

Opcjonalnie możesz utworzyć konto w myPhonak. Jest to obowiązkowe, jeśli chcesz uzyskać dostęp do funkcji dotyczących zdrowia. Jeśli masz już konto, kliknij przycisk **Zaloguj się**.

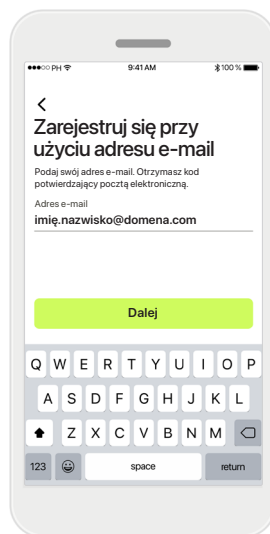


Zarejestruj się przy użyciu adresu e-mail

Aby się zarejestrować, użyj swojego adresu e-mail.

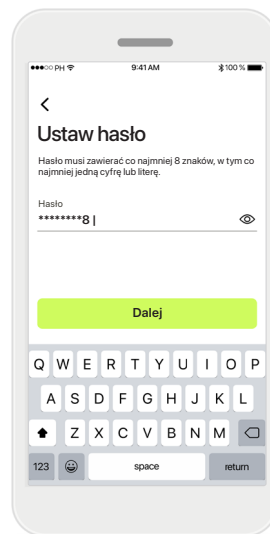

Ustaw hasło

Postępuj zgodnie z instrukcjami, aby skonfigurować bezpieczne hasło. Hasło musi zawierać co najmniej 8 znaków. Dotknij przycisku **Dalej**, aby przejść do następnego kroku.

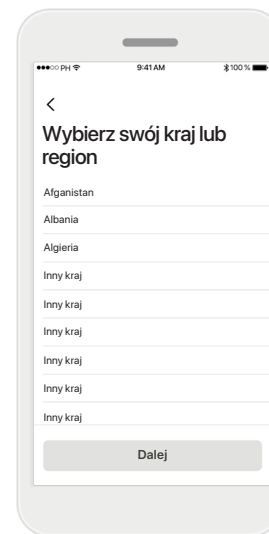

Wybierz kraj

Informacje o koncie użytkownika są bezpiecznie przechowywane zgodnie z przepisami obowiązującymi w danym kraju.




Weryfikacyjna wiadomość e-mail

Po wprowadzeniu adresu e-mail na podany adres otrzymasz kod weryfikacyjny. Po otrzymaniu kodu dotknij przycisku **Wprowadź kod potwierdzający**.

Rozwiązywanie problemów z konfiguracją konta

Adres e-mail jest już używany: jeśli użyto tego samego adresu e-mail do utworzenia konta Phonak w przeszłości, otrzymasz od nas wiadomość e-mail z powiadomieniem i instrukcjami. Jeśli chcesz utworzyć nowe konto, użyj innego adresu e-mail. W przeciwnym razie możesz po prostu zalogować się przy użyciu tego samego adresu e-mail.

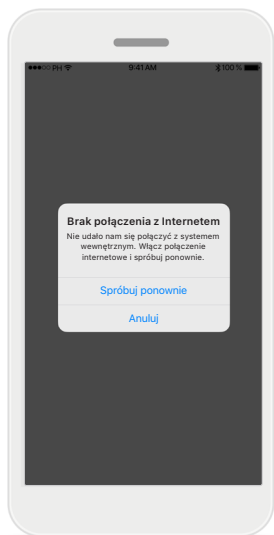

Połączenie z internetem

Aby utworzyć konto, musisz mieć połączenie z internetem. Upewnij się, że smartfon ma połączenie i spróbuj ponownie.



Resetuj hasło

Jeśli nie pamiętasz już swojego hasła lub chcesz je zresetować, wprowadź adres e-mail i dotknij przycisku **Wyślij**.




Resetuj hasło

Otrzymasz wiadomość e-mail z łączem umożliwiającym zresetowanie hasła. Postępuj zgodnie z instrukcjami, a następnie wróć do aplikacji, aby **zalogować się** przy użyciu nowego hasła.



Kod potwierdzający wygasł

Kod potwierdzający wymagany do weryfikacji adresu e-mail wygasa po siedmiu dniach. Jeśli kod wygaśnie, otrzymasz nowy kod pocztą elektroniczną. Wpisz nowy kod, aby dokończyć tworzenie Twojego konta

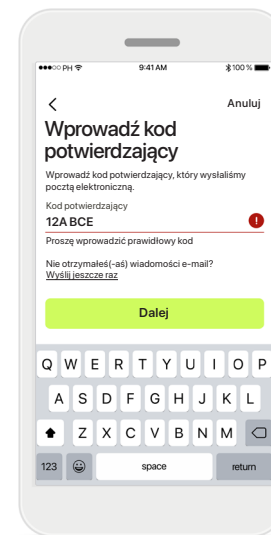


Nieprawidłowy kod potwierdzający

Jeśli wpiszesz nieprawidłowy kod, możesz kliknąć przycisk „Wyślij jeszcze raz”, aby otrzymać nowy kod pocztą elektroniczną. Wpisz nowy kod i dotknij przycisku **Dalej**, aby kontynuować tworzenie konta.


Parowanie z aparatami słuchowymi Phonak

Aby połączyć aparaty słuchowe obsługujące technologię Bluetooth® z aplikacją myPhonak, postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami.

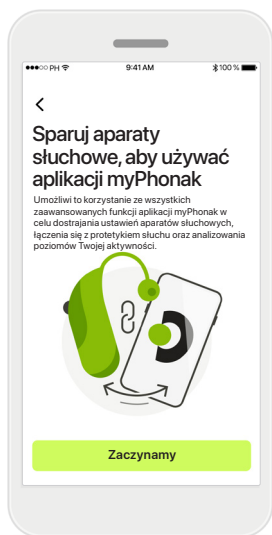


Instrukcje dotyczące parowania

Dotknij przycisku **Zaczynamy** i postępuj zgodnie z instrukcjami dotyczącymi aparatów słuchowych.

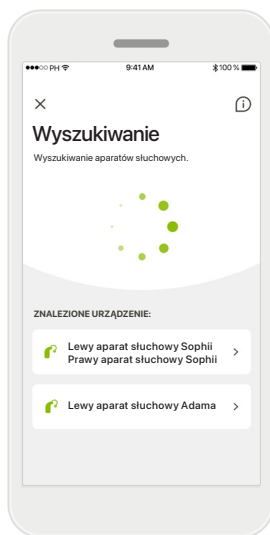


Wyszukiwanie

Aplikacja wyszukuje kompatybilne aparaty słuchowe i wyświetli ich nazwy po wykryciu. To może potrwać kilka sekund. Gdy pojawią się urządzenia, dotknij tego, które chcesz podłączyć.

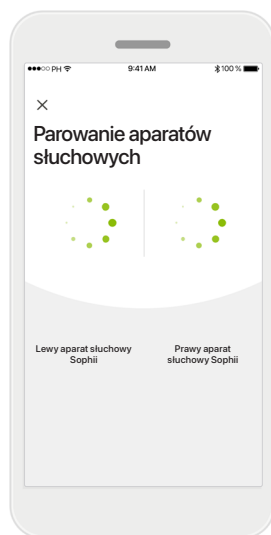

Parowanie aparatów słuchowych

Aplikacja połączy się z każdym aparatem słuchowym oddzielnie.

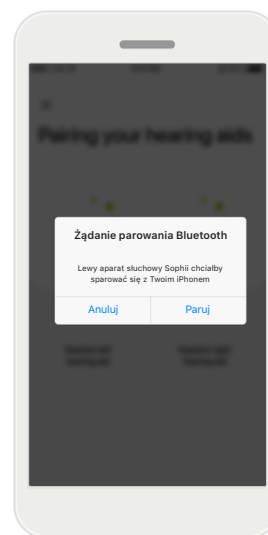

Potwierdzenie w przypadku każdego urządzenia

W urządzeniach firmy Apple potwierdź, dotykając przycisku **Paruj** w oknie podręcznym dla każdego z urządzeń.




Dodatkowe funkcje

Po pomyślnym sparowaniu aparatów słuchowych można je także sparować do odbierania połączeń telefonicznych i słuchania muzyki przesyłanej strumieniowo. Dotknij przycisku **Kontynuuj**, jeśli chcesz pominąć to dodatkowe parowanie.

Rozwiązywanie problemów z parowaniem

Błędy, które mogą wystąpić w czasie konfiguracji.


Aby uzyskać więcej informacji na temat rozwiązywania problemów, przejdź do strony wsparcia Phonak pod adresem <https://www.phonak.com/myphonakapp>.

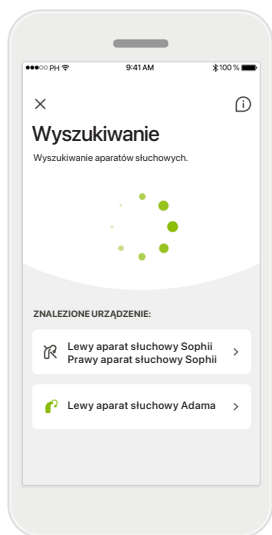

Niekompatybilne urządzenia


Aplikacja nie może połączyć się z aparatami słuchowymi, ponieważ nie są one kompatybilne.

Dalsze informacje można uzyskać od protetyka słuchu.

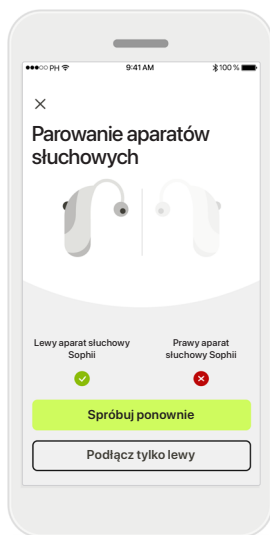


Błąd połączenia aparatu słuchowego

Jeżeli parowanie jednego z aparatów słuchowych nie powiedzie się, możesz dotknąć przycisku **Spróbuj ponownie**, aby ponownie rozpocząć proces parowania.

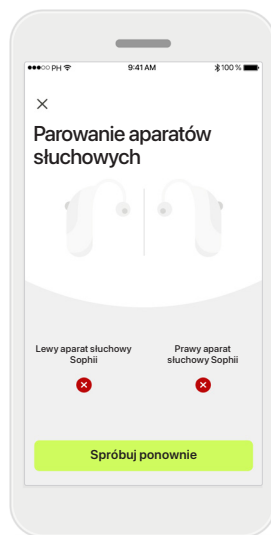

Brak połączenia z oboma aparatami słuchowymi

Dotknij przycisku **Spróbuj ponownie**, aby ponownie rozpocząć proces parowania i postępuj zgodnie z instrukcjami.

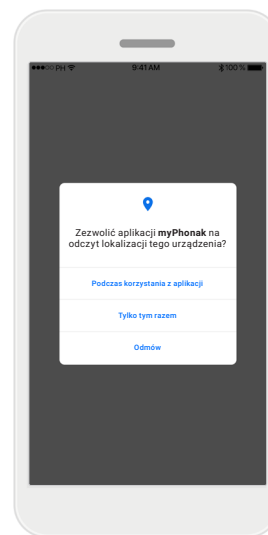


Lokalizacja

Na urządzeniach z systemem Android należy włączyć usługi lokalizacji w celu pierwszego sparowania z urządzeniem Bluetooth®. Po wykonaniu początkowej konfiguracji można wyłączyć usługi lokalizacji.


Home – widok Zdalnego Sterowania

Funkcje dostępne dla wszystkich aparatów słuchowych.

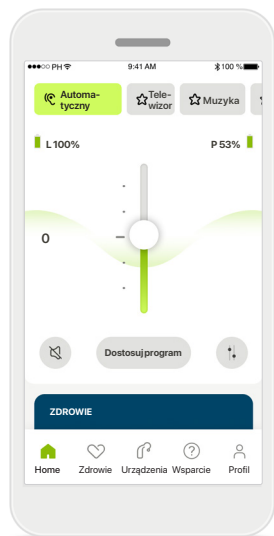


Dostosowywanie głośności aparatu słuchowego

Przeciagnij suwak w górę lub w dół, aby zwiększyć lub zmniejszyć głośność. Jeśli nosisz dwa aparaty słuchowe, za pomocą tego suwaka możesz sterować obydwojema urządzeniami jednocześnie.

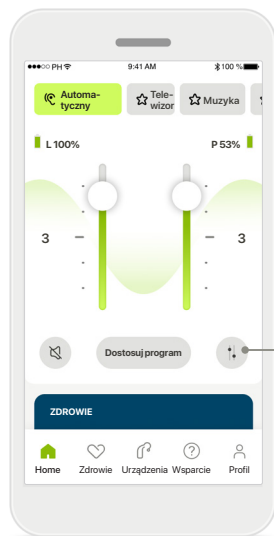


Rozdzielanie suwaka głośności

Naciśnij ikonę **Rozdziel**, aby niezależnie dostosować głośność każdego aparatu słuchowego.

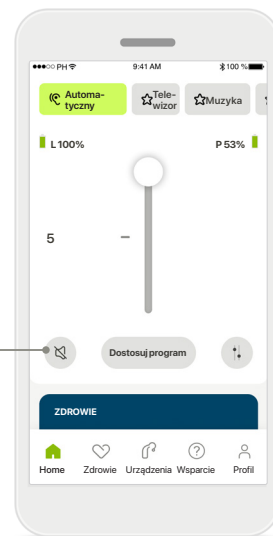

Wyciszenie

Dotknij przycisku **Wyciszenie**, aby wyciszyć aparat lub aparaty słuchowe.

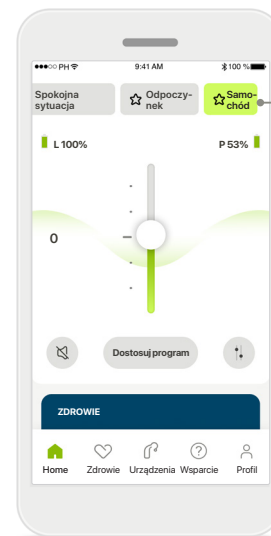






Wybór programu

Dostęp do programów

Uzyskaj dostęp do programów bezpośrednio z ekranu głównego aplikacji. Przesuń karuzelę wyboru programu, a następnie dotknij programu, który odpowiada Twoim potrzebom. Opcje do wyboru:

- Program automatyczny
- Programy utworzone przez Twojego protetyka słuchu
- Programy utworzone przez Ciebie

Home– widok Zdalnego Sterowania*

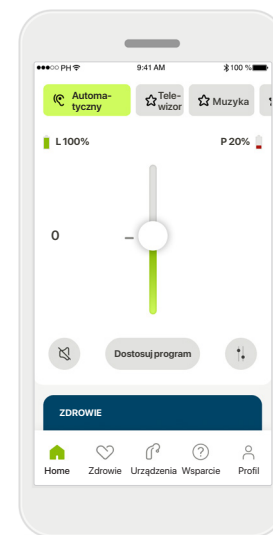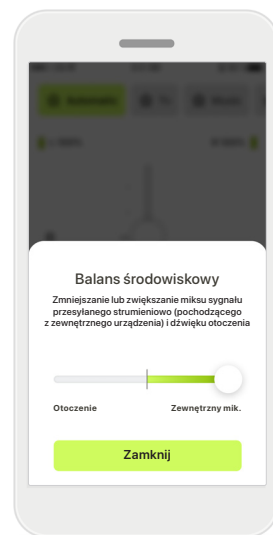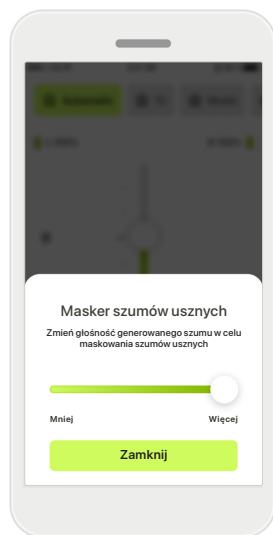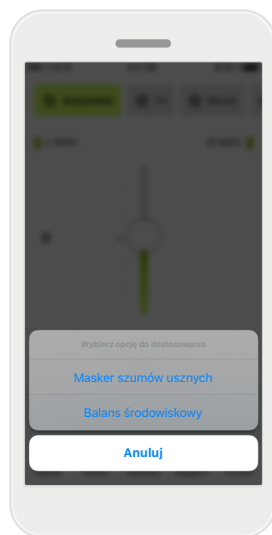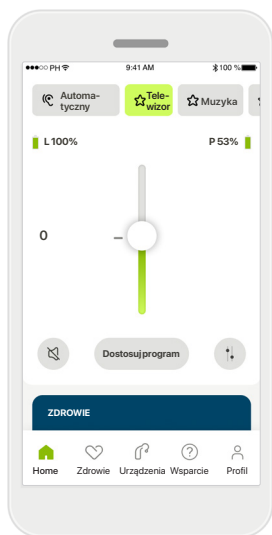

Więcej ustawień

W zależności od tego, jak zostały zaprogramowane aparaty słuchowe i od używanych akcesoriów bezprzewodowych, można dostosować więcej ustawień, takich jak masker szumów usznych czy balans środowiskowy, jeśli korzystasz z przesyłania strumieniowego.

Przykład

Na przykład jeśli Twoje aparaty słuchowe obsługują funkcję Maskera szumów usznych i masz włączony program przesyłania strumieniowego, możesz dostosować obie funkcje na specjalnych ekranach.

Masker szumów usznych

Osoby cierpiące na szumy uszne poinstruowane przez swojego protetyka słuchu w zakresie korzystania z funkcji Tinnitus Balance mogą tutaj ustawić głośność dźwięku maskującego.

Balans środowiskowy


W przypadku korzystania z zewnętrznego urządzenia do strumieniowego przesyłania dźwięku (np. TV Connector) można dostosować ustawienia w taki sposób, aby wybrać, które dźwięki będą bardziej słyszane – przesyłane strumieniowo czy te z otoczenia.

Poziom naładowania akumulatorów

W przypadku aparatów słuchowych zasilanych akumulatorami można sprawdzić aktualny stan ich naładowania. Jeśli poziom naładowania akumulatora spadnie poniżej 20%, ikona zmieni kolor na czerwony. Postaraj się wkrótce go naładować.


*Szczegółowe informacje na temat funkcji i kompatybilności z aparatami słuchowymi można uzyskać u protetyka słuchu.

Home – ustawienia zaawansowane Zdalnego Sterowania

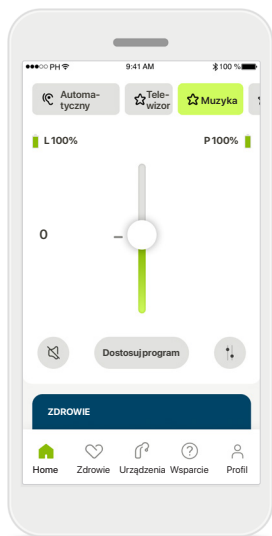


Dostosuj program

Dotykając przycisku **Dostosuj program**, można zmodyfikować wybrany program przy użyciu zaawansowanych ustawień dźwięku.

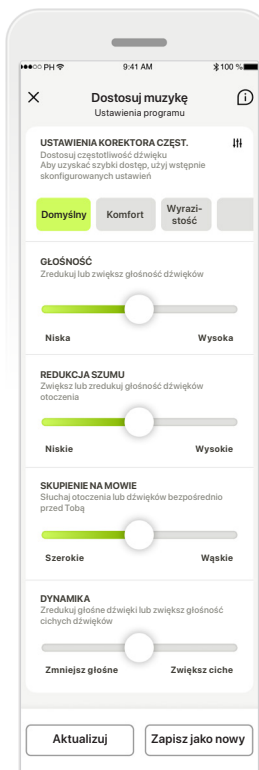


Ustawienia programu

Wybrany program można dostosowywać na różne sposoby. Za pomocą suwaków można regulować poszczególne ustawienia: korektora częst., głośności, redukcji szumu, skupienia na mowie i kontroli dynamiki.

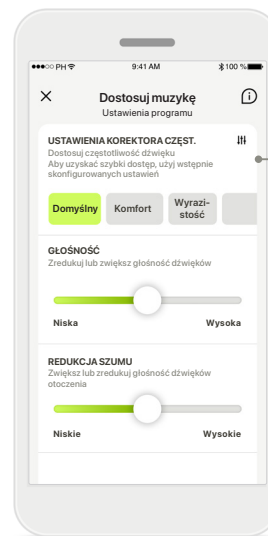

Ustawienia korektora częst.

Ustawienia korektora częst. umożliwiają szybką regulację wysokości dźwięku w zależności od warunków akustycznych, w których się znajdujesz. Dotknij ikony korektora częstotliwości, aby wprowadzić bardziej zaawansowane ustawienia.

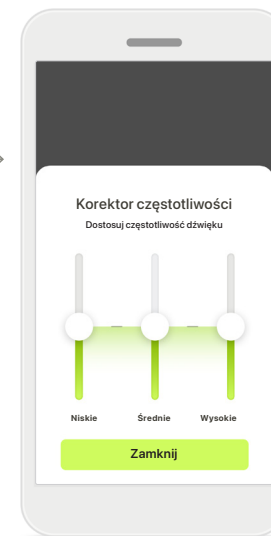


Dostosowywanie wysokości dźwięku

Za pomocą suwaków można modyfikować wysokość (częstotliwość) dźwięku. Dotknij przycisku **Zamknij**, aby powrócić do ustawień.


Home – ustawienia zaawansowane Zdalnego Sterowania – tworzenie nowego lub aktualizowanie istniejącego programu*




Spersonalizowane regulacje
Po dostosowaniu istniejącego programu można go zaktualizować, dotykając przycisku **Aktualizuj** lub zapisać jako nowy program, dotykając przycisku **Zapisz jako nowy**.

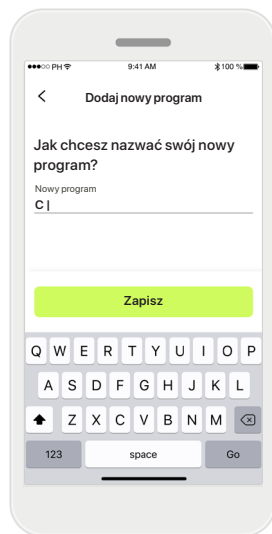

Nadawanie nazw spersonalizowanym regulacjom
Spersonalizowane regulacje można zapisać jako nowy program i nadać im wybraną nazwę.

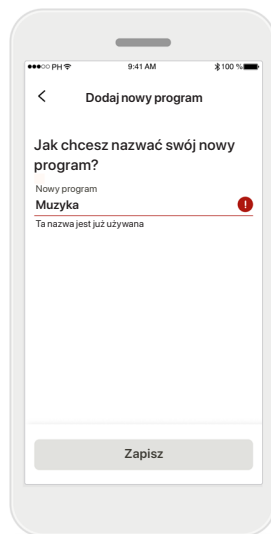



Nieprawidłowa nazwa programu
Nie można ponownie użyć tej samej nazwy ani pozostawić jej pustej. Prawidłowe nazwy nie mogą zawierać więcej niż 22 znaki i zawierać wyłącznie spacji.

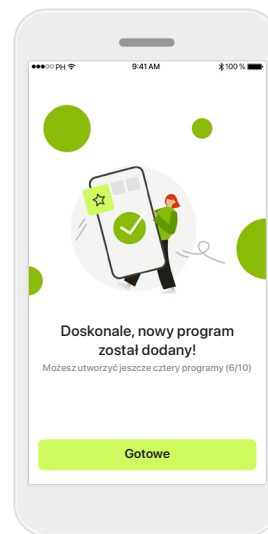

Zapisanie programu
Po pomyślnym zapisaniu nowego programu zostanie on dodany do listy programów, a użytkownik zostanie poinformowany o liczbie wolnych miejsc na liście. Dotknij przycisku **Gotowe**, aby powrócić do strony głównej Zdalnego Sterowania.

*Dostępne wyłącznie w wybranych aparatach słuchowych



Ustawienia zaawansowane Zdalnego Sterowania – rozwiązywanie problemów

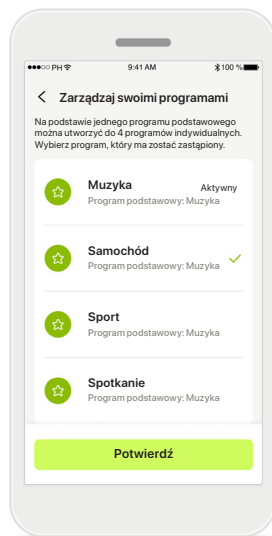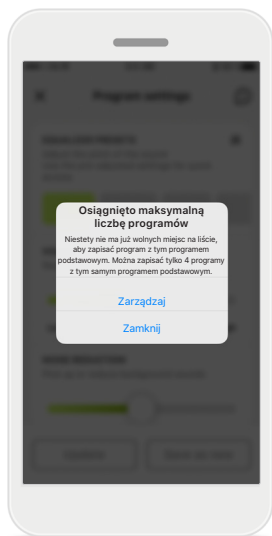

Osiągnięto maksymalną liczbę programów – maksymalna liczba dla tego samego programu podstawowego

Na podstawie tego samego programu podstawowego można utworzyć maksymalnie cztery programy.

Jeśli osiągniesz maksymalną liczbę, możesz zastąpić istniejący program nowym, dotykając przycisku **Zarządzaj**.

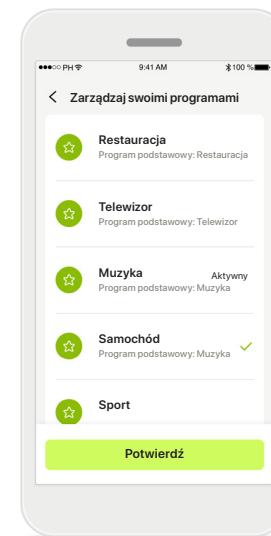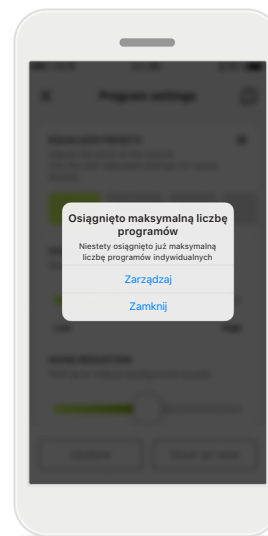


Osiągnięto maksymalną liczbę programów – maksymalna liczba programów

Na liście programów można zapisać maksymalnie dziesięć programów indywidualnych.

Jeśli osiągniesz maksymalną liczbę, możesz zastąpić istniejący program nowym, dotykając przycisku **Zarządzaj**.


Zdrowie – konfigurowanie

Niektóre z opisanych tu funkcji sekcji Zdrowie są dostępne tylko w niektórych aparatach słuchowych. Więcej informacji można znaleźć na stronie phonak.pl.

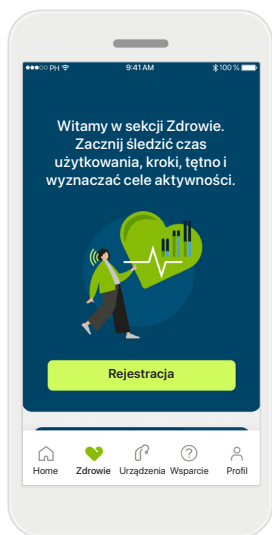


Rejestracja

Aby uzyskać dostęp do funkcji dotyczących zdrowia, należy utworzyć konto w myPhonak.

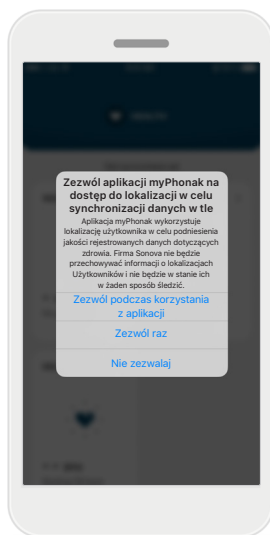

Włączenie usług lokalizacji






Włączenie w telefonie iPhone usług lokalizacji poprawia jakość rejestrowania danych dotyczących zdrowia, ponieważ umożliwia częstą synchronizację danych. Po odmowie dostępu użytkownik nie będzie mógł rejestrować danych dotyczących swojego zdrowia.

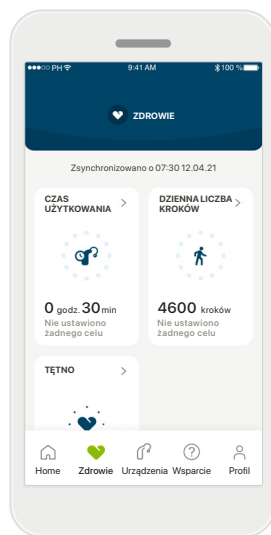

Przejdź do sekcji Zdrowie

Po zakończeniu konfiguracji można przejść do pulpitu Zdrowia (ekran główny Zdrowie).

Zdrowie

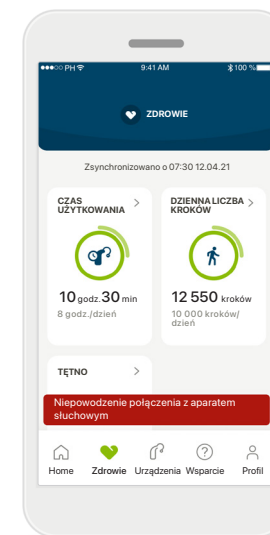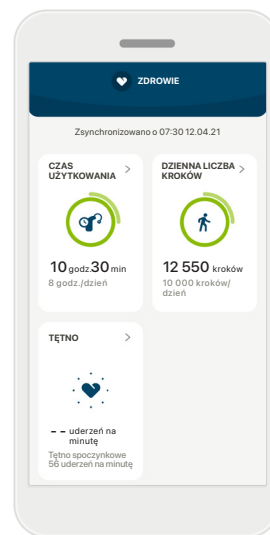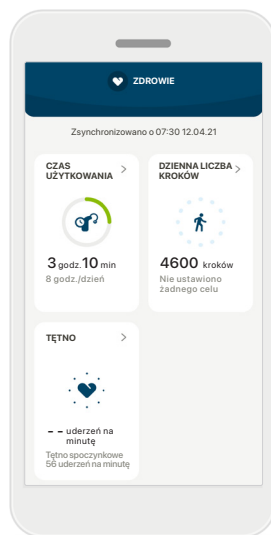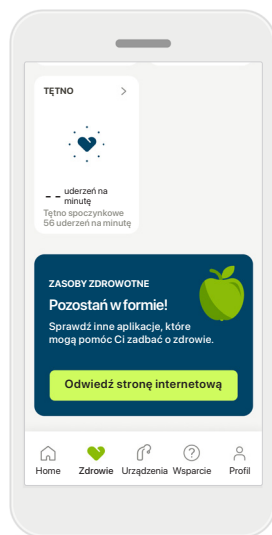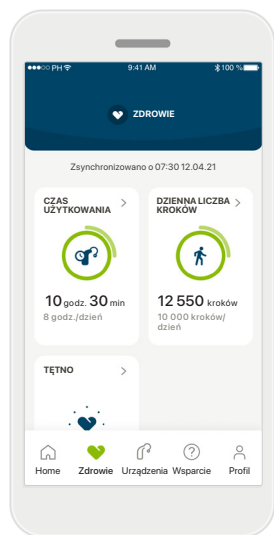

Zawartość pulpitu Zdrowia

Funkcje pulpitu Zdrowia:

- Dostęp do funkcji zdrowotnych obsługiwanych przez aparaty słuchowe i kontrolowanie zmian ich wartości na żywo*
- Wyświetlanie postępów w realizacji celów, jeśli zostały skonfigurowane
- Wyświetlanie wskazówek dotyczących zdrowia (zalecenia dotyczące innych aplikacji zdrowotnych)

* Aby uzyskać dostęp do liczby kroków na żywo w sekcji Zdrowie, użytkownicy kompatybilnych aparatów słuchowych Paradise Audéo R i Audéo RT muszą zaktualizować oprogramowanie sprzętowe do najnowszej wersji. Użytkownicy aparatu Naida P-PR mają dostęp do bieżącego czasu użytkowania i godzinnych aktualizacji wykresów liczby kroków.

Przykłady postępów w realizacji celów

Jeśli wyznaczono cele, będzie można zobaczyć swoje postępy w zielonym kółku wokół ikony każdej funkcji.





Jeśli przekroczono maksymalną wartość celu, wokół ikony pojawi się drugie kółko.

Połączenie z aparatami słuchowymi

Pamiętaj, że musisz mieć połączenie z aparatami słuchowymi, aby móc na żywo obserwować zmiany wartości funkcji zdrowotnych. Częsta synchronizacja aplikacji z aparatami słuchowymi pozwala uzyskać dokładniejsze dane dotyczące czasów. Jeśli połączenie nie powiedzie się lub nie będzie można zsynchronizować danych, użytkownik zostanie o tym powiadomiony i przejdzie do strony z FAQ - często zadawanymi pytaniami, aby dowiedzieć się, co należy zrobić.

Informacje podawane w tej sekcji służą wyłącznie do celów edukacyjnych i informacyjnych. Informacje przedstawione w sekcji Zdrowie nie powinny być wykorzystywane jako substytut profesjonalnej porady lekarskiej ani jej zastępować. W razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia lub przed rozpoczęciem programu ćwiczeń należy zawsze skonsultować się z lekarzem lub innym pracownikiem ochrony zdrowia.

Szczegółowe widoki funkcji zdrowotnych – czas użytkowania, kroki, poziomy aktywności*, przebyty dystans – chód lub bieg**

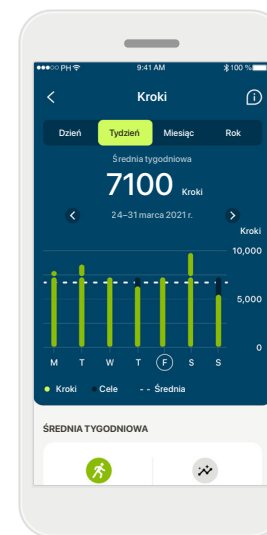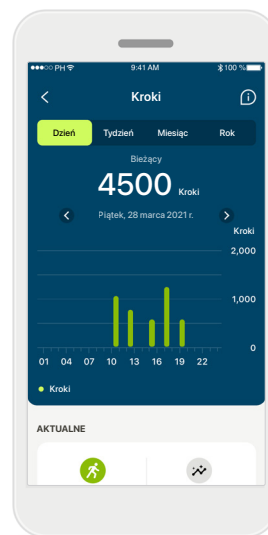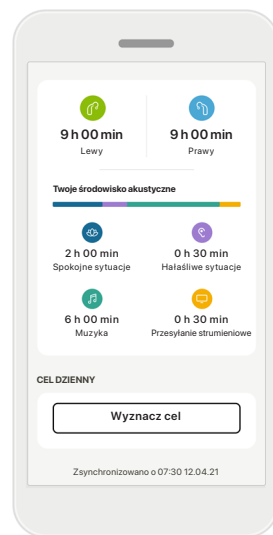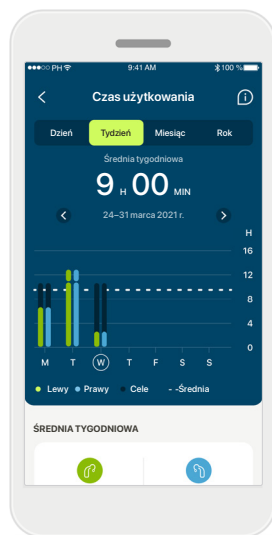

Czas użytkowania

Klikając kartę czasu użytkowania na pulpicie można przejść do wykresu dziennego czasu użytkowania. Przejdź do widoku tygodniowego, miesięcznego lub rocznego, dotykając odpowiedniej karty, która zmieni kolor na zielony.

Jeśli masz dwa aparaty słuchowe, na wykresach wyświetlane są wartości dla lewego i prawego aparatu. Poniżej przedstawiono wartości bieżące (dla widoku dziennego) lub średnie (dla widoku innego niż dzienny), a także zestawienie czasu użytkowania w różnych środowiskach akustycznych.

Kroki, poziomy aktywności i dystans

Klikając kartę Kroki na pulpicie, przejdziesz do wykresu liczby codziennych kroków. Przejdź do widoku tygodniowego, miesięcznego lub rocznego, dotykając odpowiedniej karty, która zmieni kolor na zielony.


Poniżej wyświetlane są wartości bieżące (dla widoku dziennego) lub średnie (dla widoku innego niż dzienny), a także przybliżony przebyty dystans – chód lub bieg**.

Poziomy aktywności wskazują czas, w którym nie wykonano żadnej aktywności: niski (wykryto pewien ruch), średni (wykryto chód) lub wysoki (wykryto bieg).

*Dotyczy wszystkich aparatów słuchowych Phonak Audéo™ Paradise z możliwością ładowania, Phonak Audéo Fit i Phonak Audéo Lumity.

**Dotyczy aparatów słuchowych Phonak Audéo Fit i Phonak Audéo Lumity

Szczegółowe widoki funkcji zdrowotnych – tętno*

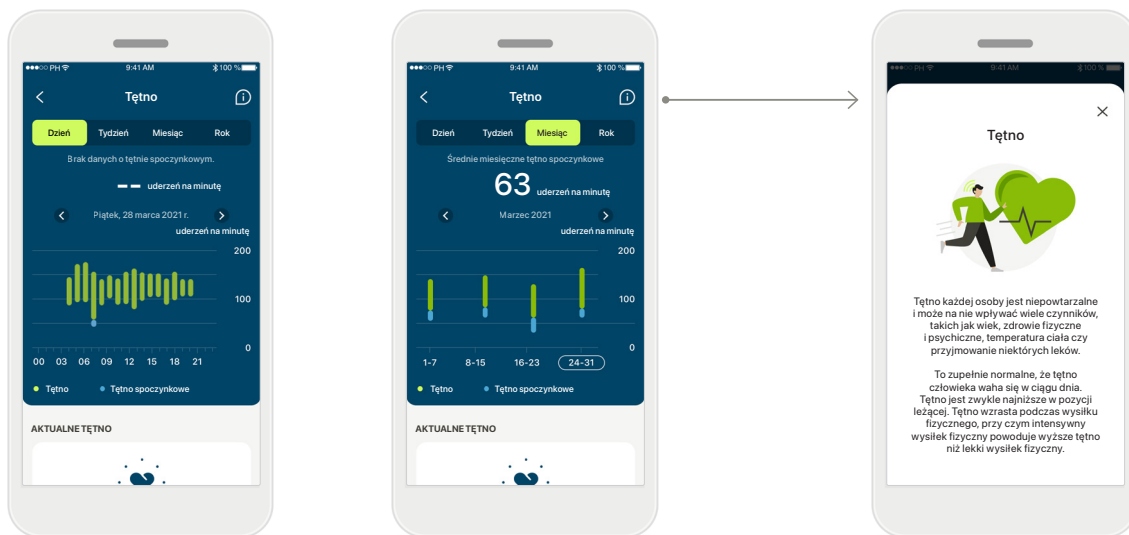

Rejestrowanie tętna

Wszystkie widoki przedstawiają aktualne tętno. Widok dzienny zawiera najniższe tętno spoczynkowe oraz zakresy tętna na godzinę. Widok tygodniowy zawiera najniższe dzienne tętno spoczynkowe, aktualne tętno oraz zakresy dziennego tętna.

Dostępne są widoki tygodniowe, miesięczne i roczne:


- Widok dzienny – rozdzielczość godzinowa (okresowe i bieżące zakresy tętna na godzinę, jedno najniższe tętno spoczynkowe na dzień),
- Widoki tygodniowe / miesięczne / roczne – rozdzielczość dzienna / tygodniowa / miesięczna zakresów tętna i zakresów najniższego tętna spoczynkowego

Więcej informacji

Kliknij ikonę (i) w prawym górnym rogu ekranu, aby uzyskać więcej informacji i danych dotyczących tętna i tego, dlaczego ważne jest rejestrowanie tętna spoczynkowego.

*Dotyczy tylko aparatów słuchowych Phonak Audéo Fit™

Zdrowie – inne funkcje*

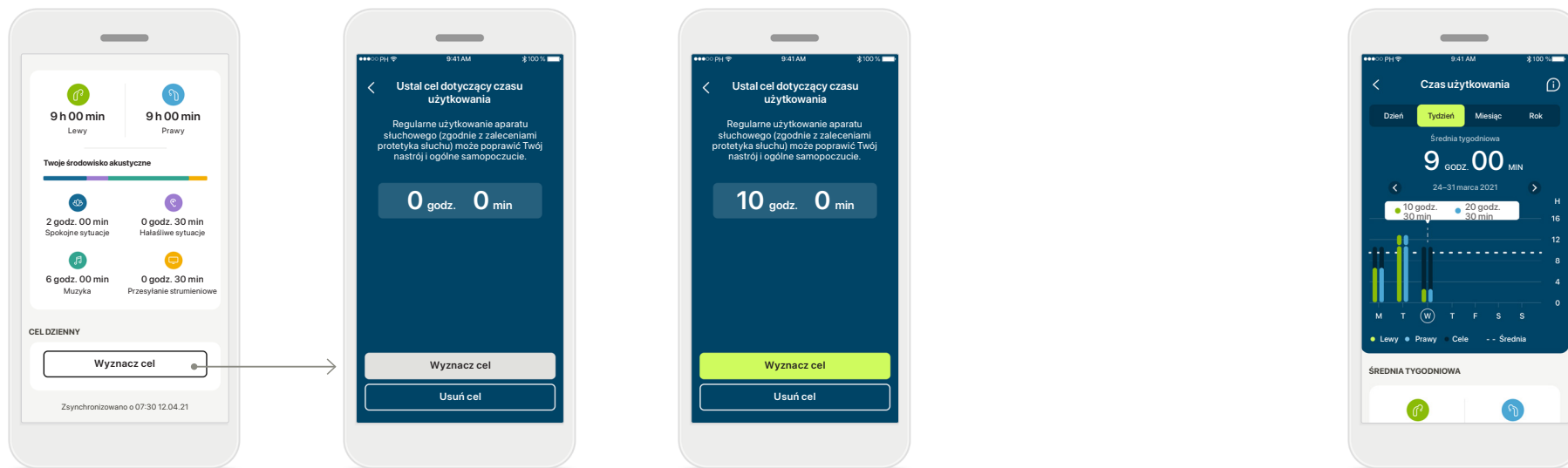

Wyznaczanie, zmienianie i usuwanie celów*

Wyznaczanie celów w przypadku kroków i czasu użytkowania jest opcjonalne. Można je skonfigurować podczas konfigurowania sekcji Zdrowie, na pulpicie zdrowia lub w szczegółowych widokach tych funkcji.


Dotknij przycisku Wyznacz cel lub Zmień cel, aby przejść przez kolejne ekrany, jak pokazano na powyższym przykładzie. Wprowadź prawidłową liczbę w polu czasu użytkowania lub liczby kroków i dotknij przycisku Wyznacz cel, aby zapisać zmiany. Dotknij przycisku Usuń cel, aby usunąć cel.

Etykiety

Kliknij słupki wykresu, aby zobaczyć dokładne wartości wyświetlane na białym banerze (etykiecie).


*Dotyczy aparatów słuchowych Phonak Audéo™ Paradise z możliwością ładowania, Phonak Audéo Fit i Phonak Audéo Lumity

Urządzenia

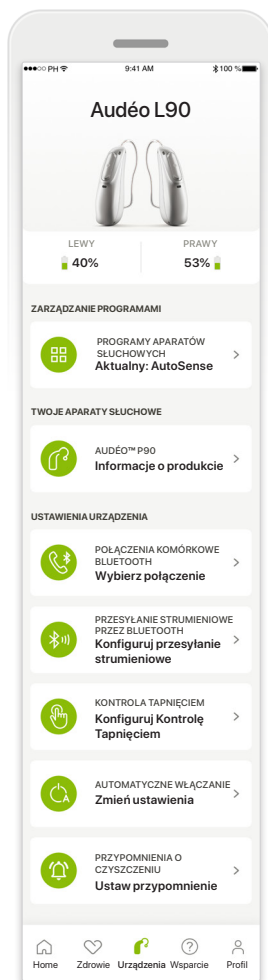


Ekran główny Urządzenia

W sekcji Urządzenia można uzyskać dostęp do wszystkich funkcji związanych z aparatami słuchowymi, np. do zarządzania programami i ustawień. W przypadku modeli ładowalnych można również sprawdzić stan akumulatorów.

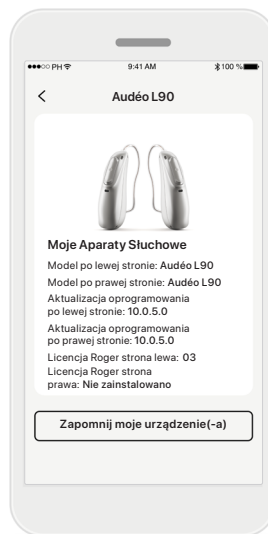


Zapomnij urządzenia

Aby usunąć swoje urządzenia, przejdź na kartę Twoje aparaty słuchowe. Po kliknięciu przycisku Zapomnij moje urządzenia zostanie wyświetlone okno dialogowe, w którym należy potwierdzić ich usunięcie. Pamiętaj, że aby korzystać z tej aplikacji, konieczne będzie ponowne sparowanie aparatów słuchowych.

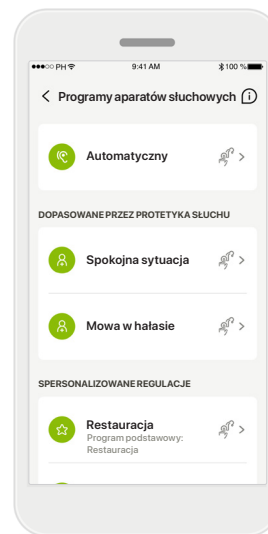

Zarządzanie programami


Dotknięcie opcji Programy aparatów słuchowych spowoduje wyświetlenie wszystkich dostępnych programów. Dotknij jednej z nazw, aby edytować ją lub usunąć. Istnieją trzy rodzaje programów: automatyczne, utworzone przez protetyka słuchu oraz programy indywidualne. Jeśli obok nazwy programu znajduje się ikona, oznacza to, że jest on dostępny na przełączniku programów w aparatach słuchowych.

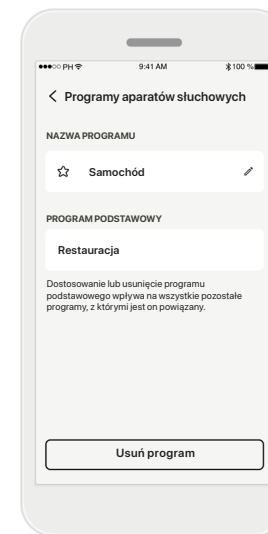

Programy aparatów słuchowych

Można edytować nazwę programu i usunąć sam program. Można również zobaczyć, z którym programem podstawowym jest powiązany dany program. Dotknij przycisku **Usuń program**, aby usunąć program. Zostanie wyświetlone okno dialogowe, w którym należy potwierdzić usunięcie.

Wsparcie i sesja Zdalnego Wsparcia

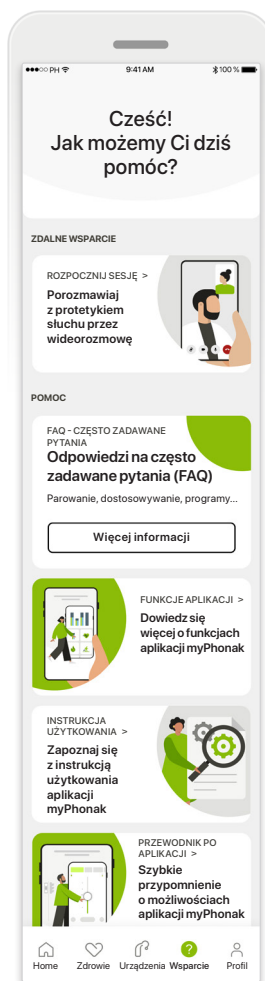

Sekcja Wsparcia


Z poziomu ekranu Wsparcia można uzyskać dostęp do często zadawanych pytań*, instrukcji użytkowania, witryny internetowej z filmami instruktażowymi, ustawień prawnych i opcji podzielenia się z nami swoją opinią. Ekran Zdalne Wsparcie można także otworzyć, dotykając przycisku **Rozpocznij sesję**.



Zdalne Wsparcie


Po dotknięciu przycisku **Rozpocznij sesję** na ekranie Wsparcie będzie można odbyć sesję Zdalnego Wsparcia z protetykiem słuchu. Sesję zdalną z protetykiem słuchu należy wcześniej zaplanować.

Aby kontynuować, dotknij przycisku **Rozpocznij Zdalne wsparcie**.

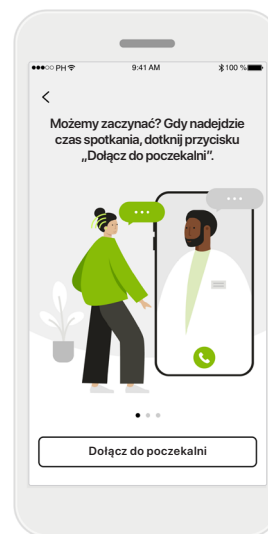

Rozpocznij sesję

Po rozpoczęciu sesji należy wcisnąć przycisk **Dołącz do poczekalni**. Twój protetyk słuchu będzie mógł wówczas się z Tobą połączyć.

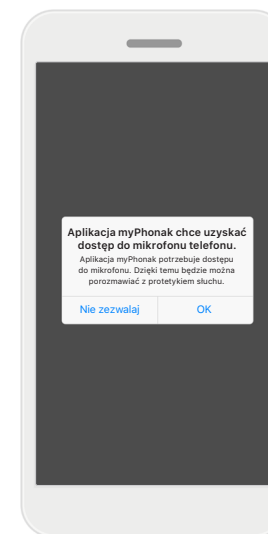

Dostęp do mikrofonu i kamery

Dotknij przycisku OK, aby zezwolić aplikacji myPhonak na dostęp do mikrofonu i kamery.


*Łącze do często zadawanych pytań: <https://product-support.phonak.com/>

Rozpoczynanie sesji Zdalnego Wsparcia




Odbierz połączenie wideo

Aplikacja połączy Cię z protetykiem słuchu. Poczekaj, aż protetyk słuchu dołączy do rozmowy.

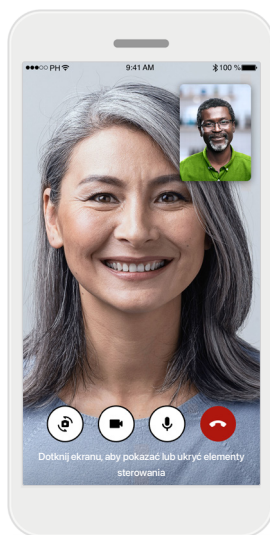


Połączenie w toku

Po kilku sekundach obraz wideo zostanie skonfigurowany, a następnie zobaczysz i usłyszysz protetyka słuchu. Za pomocą elementów sterowania można wyciszyć/wyłączyć wyciszenie, wyłączyć wideo, przełączyć kamerę i zakończyć połączenie.

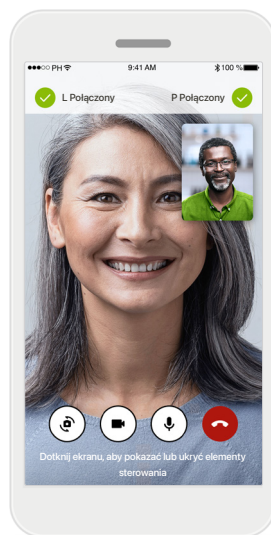

Połączone aparaty słuchowe


Jeśli protetyk słuchu będzie potrzebował nawiązać połączenie z Twoimi aparatami słuchowymi, może to zrobić zdalnie, korzystając z Twojego smartfona. Protetyk słuchu poinformuje Cię, kiedy będzie łączył się z Twoimi aparatami słuchowymi.

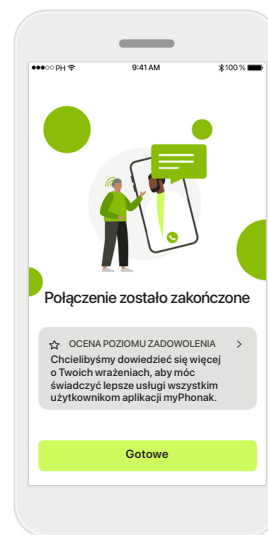

Zakończenie rozmowy


Po zakończeniu połączenia użytkownik będzie mógł ocenić poziom zadowolenia. Dotknij łącza, aby przesłać opinię. Dotknij przycisku **Gotowe**, aby powrócić do strony powitalnej.

Rozwiązywanie problemów podczas sesji Zdalnego Wsparcia

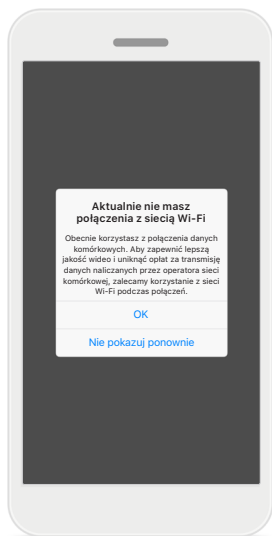


Połączenie Wi-Fi

Sesja Zdalnego Wsparcia odbywa się za pośrednictwem Internetu. Aby uzyskać lepszą jakość, zalecamy korzystanie z sieci Wi-Fi.

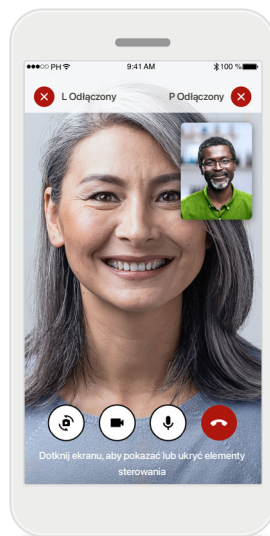


Utrata połączenia z aparatami słuchowymi

W górnej części ekranu będzie widoczne połączenie z aparatami słuchowymi. Jeśli aparaty słuchowe zostaną rozłączone, symbol zmieni kolor na czerwony. Następnie protetyk słuchu będzie musiał ponownie nawiązać połączenie z aparatami słuchowymi.

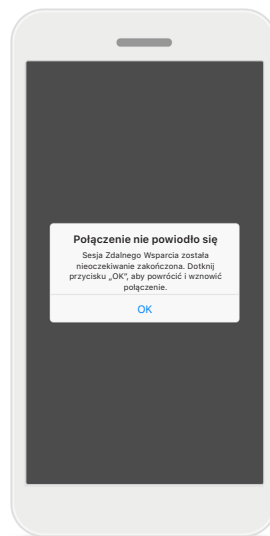

Połączenie nie powiodło się


Jeśli połączenie nie powiedzie się, dotknij przycisku **OK**, aby powrócić do ekranu głównego, na którym można wznowić połączenie.

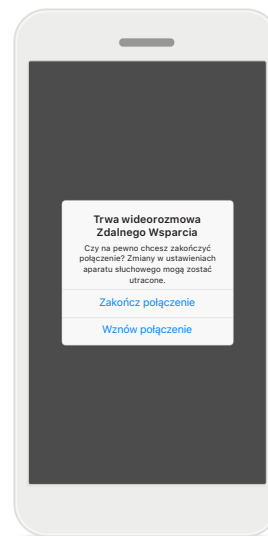

Kończenie połączenia w trakcie sesji

Jeśli zakończysz połączenie w trakcie sesji, zostanie wyświetlony ten komunikat.


Profil i prywatność danych

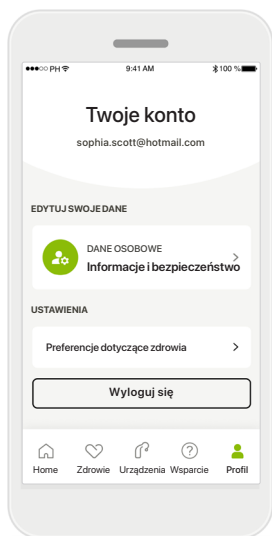

Sekcja Profil


Na ekranie Profil można edytować informacje o swoim profilu oraz dostosować preferencje dotyczące zdrowia.

Jeśli chcesz się wylogować z aplikacji, dotknij przycisku **Wyloguj się**.

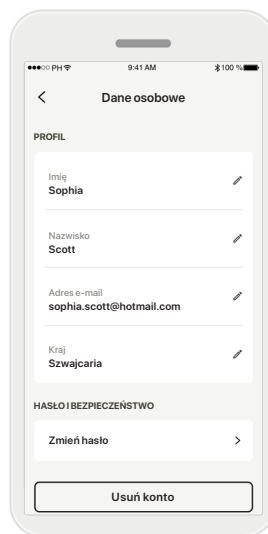

Dane osobowe

W sekcji Dane osobowe można edytować swoje dane osobowe i zmienić informacje dotyczące bezpieczeństwa. Jeśli chcesz usunąć swoje konto, dotknij przycisku **Usuń konto**. Aby potwierdzić tę czynność, należy wprowadzić hasło.

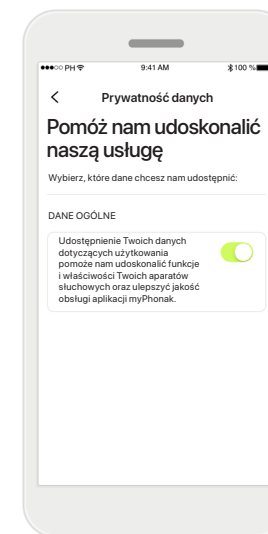

Prywatność danych

Wybierz kolejno opcje Wsparcie > Prywatność danych i w dowolnej chwili wybierz, które dane chcesz udostępnić marce Phonak.

Szczegółowe informacje na temat przetwarzanych przez nas danych znajdują się w Polityce prywatności. Jest ona dostępna w dowolnym momencie w sekcji Wsparcie > Dokumentacja prawna.

Ważne informacje o bezpieczeństwie

Przed rozpoczęciem korzystania z aplikacji należy zapoznać się z informacjami o bezpieczeństwie zamieszczonymi na kolejnych stronach.

Przeznaczenie:

Aplikacja jest samodzielnym oprogramowaniem przeznaczonym dla użytkowników aparatów słuchowych, służącym do wybierania, konfigurowania i zapisywania ustawień aparatu słuchowego, w ograniczonym zakresie dozwolonym przez oprogramowanie dopasowujące. Aplikacja ta umożliwi również użytkownikom aparatów słuchowych łączenie się i komunikowanie z protetykami słuchu w celu zdalnej regulacji aparatów słuchowych.

Docelowa grupa pacjentów:

To rozwiązanie jest przeznaczone dla pacjentów z jednostronnym i obustronnym ubytkiem słuchu w stopniu od lekkiego do głębokiego, w wieku od 17 lat. Masker szumów usznych jest przeznaczony dla pacjentów z przewlekłym szumem w uszach w wieku od 18. roku życia.

Użytkownik docelowy:

Osoba z ubytkiem słuchu korzystająca z kompatybilnego urządzenia.

Wskazania:

Należy pamiętać, że zalecenia dotyczące stosowania nie wynikają z zastosowania samej aplikacji lecz z kompatybilnych aparatów słuchowych. Ogólne wskazania kliniczne do stosowania aparatów słuchowych i Maskera szumów usznych są następujące:

- Ubytek słuchu
 - > Jedno- lub obustronny
 - > Przewodzeniowy, czuciowo-nerwowy lub mieszany

> Lekki do głębokiego

- Obecność przewlekłych szumów usznych (dotyczy tylko urządzeń wyposażonych w funkcję Tinnitus balance)

Przeciwwskazania:

Należy pamiętać, że przeciwwskazania dotyczące stosowania nie wynikają z zastosowania samej aplikacji, lecz z kompatybilnych aparatów słuchowych.

Ogólne przeciwwskazania kliniczne do stosowania aparatów słuchowych i Maskera szumów usznych są następujące:

- Ubytek słuchu nie mieści się w zakresie dopasowania aparatu słuchowego (tj. wzmocnienie, odpowiedź częstotliwościowa)
- Silne szumy uszne
- Zniekształcenie ucha (np. zamknięty przewód słuchowy, brak małżowiny usznej)
- Ubytek słuchu pozaślimakowy, np. brak/niesprawność nerwu słuchowego)

Głównymi kryteriami skierowania pacjenta do lekarza lub innego specjalisty w celu uzyskania opinii i/lub leczenia są:

- Widoczne wrodzone lub pourazowe zniekształcenie ucha;
- Aktywny wysięk z ucha w ciągu ostatnich 90 dni;
- Nagły lub szybko postępujący ubytek słuchu w jednym lub obojgu uszach w ciągu ostatnich 90 dni;
- Ostre lub przewlekłe zawroty głowy;
- Audiometryczna rezerwa ślimakowa równa lub większa niż 15 dB dla 500 Hz, 1000 Hz i 2000 Hz;

- Widoczne oznaki nagromadzenia się znacznej ilości woskowiny lub obecności ciała obcego w przewodzie słuchowym;
- Ból lub dyskomfort w uchu;
- Nieprawidłowy wygląd błony bębenkowej i przewodu słuchowego, na przykład:
 - > Zapalenie przewodu słuchowego
 - > Perforacja błony bębenkowej
 - > Inne nieprawidłowości, które zdaniem protetyka słuchu mają znaczenie medyczne

Protetyk słuchu może zdecydować, że skierowanie nie jest konieczne bądź nie leży w najlepszym interesie pacjenta, jeżeli jedno z poniższych ma zastosowanie:

- Gdy istnieją wystarczające dowody na to, że dana dolegliwość została w pełni zbadana przez lekarza specjalistę i podjęto wszelkie możliwe leczenie;
- Stan nie pogorszył się ani nie zmienił znacząco od czasu poprzedniego badania i/lub leczenia
- Jeżeli pacjent podjął świadomą i przemyślaną decyzję o odrzuceniu zalecenia zasięgnięcia opinii lekarskiej, można przystąpić do zalecania odpowiednich systemów wspomagających słyszenie, z zastrzeżeniem poniższego:
 - > Zalecenie nie będzie miało żadnego negatywnego wpływu na zdrowie ani ogólne samopoczucie pacjenta;
 - > Dokumentacja potwierdza, że wzięto pod uwagę wszystkie niezbędne względy dotyczące najlepszego zabezpieczenia interesów pacjenta.

Jeśli jest to wymagane przez prawo, pacjent podpisał oświadczenie potwierdzające, że nie przyjął porady dotyczącej skierowania i że jest to jego świadoma decyzja.

Ważne informacje o bezpieczeństwie

Przed rozpoczęciem korzystania z aplikacji należy zapoznać się z informacjami o bezpieczeństwie zamieszczonymi na kolejnych stronach.

Korzyści kliniczne:

Aplikacja przynosi korzyści użytkownikom, ponieważ umożliwia dostosowanie ustawień aparatu słuchowego do indywidualnych potrzeb i ich zapisanie, w zakresie dozwolonym podczas wstępnego dopasowania.

Aplikacja zapewnia użytkownikom wygodny sposób komunikowania się i łączenia z protetykami słuchu w celu zdalnej regulacji aparatów słuchowych.

Działania niepożądane:

Należy pamiętać, że działania niepożądane nie wynikają ze stosowania samej aplikacji lecz z kompatybilnych aparatów słuchowych.

Fizjologiczne działania niepożądane stosowania aparatów słuchowych, takie jak szумы uszne, zawroty głowy, gromadzenie się woskowiny, zbyt duży ucisk, pocenie się lub wilgoć, pęcherze, swędzenie i/lub wysypka, zatkanie lub przepełnienie oraz ich następstwa, takie jak ból głowy i/lub ból ucha, mogą zostać wyeliminowane lub zredukowane przez protetyka słuchu.

Tradycyjne aparaty słuchowe mogą potencjalnie narażać pacjentów na wyższe poziomy ekspozycji na dźwięk, co może prowadzić do przesunięć progowych w zakresie częstotliwości, których dotyczy uraz akustyczny.

Ograniczenia dotyczące użytkowania:

Korzystanie z aplikacji jest ograniczone do możliwości kompatybilnego urządzenia lub urządzeń.

Wszelkie poważne incydenty, które miały miejsce w związku z aplikacją, należy zgłaszać przedstawicielowi producenta i właściwemu organowi państwa w miejscu zamieszkania. Poważny incydent to każdy incydent, który bezpośrednio lub pośrednio doprowadził, mógł lub może prowadzić do dowolnego z poniższych zdarzeń:

- a. śmierć pacjenta, użytkownika lub innej osoby;
- b. czasowe lub trwałe poważne pogorszenie stanu zdrowia pacjenta, użytkownika lub innej osoby;
- c. poważne zagrożenie dla zdrowia publicznego.

Aby zgłosić nieoczekiwane działanie lub zdarzenie, skontaktuj się z producentem lub przedstawicielem.

Ważne informacje o bezpieczeństwie

Przed rozpoczęciem korzystania z aplikacji należy zapoznać się z informacjami o bezpieczeństwie zamieszczonymi na kolejnych stronach.

Instrukcja użytkownika wszystkich wersji aplikacji we wszystkich językach w formie elektronicznej jest dostępna na stronie internetowej. Aby uzyskać dostęp do instrukcji użytkownika, wykonaj następujące czynności:

- Przejdź do strony <https://www.phonak.com/com/en/about-us/countries.html> i wybierz odpowiedni kraj.
- Przejdź do strony „Support” (w wersji angielskiej) lub jej odpowiednika w wybranym języku.
- Przejdź do strony „User Guides” (w wersji angielskiej) lub jej odpowiednika w wybranym języku.
- Przejdź do strony „Apps” (w wersji angielskiej) lub jej odpowiednika w wybranym języku.
- Wybierz opcję „myPhonak app”

Dostęp do aktualnej wersji instrukcji użytkownika aplikacji myPhonak można też uzyskać bezpośrednio z poziomu aplikacji, przechodząc do sekcji Wsparcie, a następnie dotykając karty o nazwie „Instrukcja użytkownika”. Instrukcja użytkownika zostanie otwarta w oknie zewnętrznej przeglądarki.

Uwaga dotycząca bezpieczeństwa

Dane pacjenta są danymi poufnymi, a ich ochrona jest ważna:

- Upewnij się, że na smartfonie zainstalowano najnowsze aktualizacje zabezpieczeń systemu operacyjnego. Włącz automatyczne aktualizacje.
- Upewnij się, że zainstalowana wersja aplikacji jest aktualna.
- Ze swoimi aparatami słuchowymi używaj tylko oryginalnych aplikacji firmy Sonova z oficjalnych sklepów.
- Instaluj tylko renomowane aplikacje z oficjalnych sklepów.
- Upewnij się, że używasz silnych haseł i przechowujesz dane uwierzytelniające w bezpiecznym miejscu.
- Blokuj telefon za pomocą kodu PIN i/lub danych biometrycznych (np. odcisku palca lub twarzy) oraz ustaw automatyczne blokowanie telefonu po kilku minutach bezczynności.
- Upewnij się, że zainstalowane aplikacje mają tylko te uprawnienia, które są im potrzebne.
- Unikaj parowania aparatów słuchowych przez Bluetooth w miejscach publicznych. Wynika to z ryzyka niepożądanego ingerencji osób trzecich. Zalecamy wykonanie tego parowania przez Bluetooth w domu.
- NIE używaj telefonu z usuniętą blokadą uprawnień programisty (jailbreak/root).

Upewnij się, że dane są przez cały czas bezpieczne. Pamiętaj, że nie jest to kompletna lista zalecanych czynności.

- Podczas przesyłania danych niezabezpieczonymi kanałami przesyłaj zanonimizowane dane lub szyfruj je.
- Chronić kopie zapasowe danych smartfona nie tylko przed utratą danych, ale także przed kradzieżą.
- Usuń wszystkie dane ze smartfona, który nie jest już przez Ciebie używany lub zostanie zutyliczowany.

Dbanie o oprogramowanie

Stale monitorujemy informacje zwrotne z rynku. Jeśli wystąpią jakiegokolwiek problemy z najnowszą wersją aplikacji, należy skontaktować się z lokalnym przedstawicielem producenta i/lub zgłosić uwagi w sklepie Appstore lub Google Play.

Ważne informacje o bezpieczeństwie

Przed rozpoczęciem korzystania z aplikacji należy zapoznać się z informacjami o bezpieczeństwie zamieszczonymi na kolejnych stronach.



Zmiana ustawień, np. zmniejszenie głośności lub zwiększenie siły redukcji szumu, może prowadzić do zagrożeń, takich jak brak słyszalności nadjeżdżających uczestników ruchu drogowego.



W celu pozyskania bezpłatnej papierowej kopii instrukcji użytkownika skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem firmy Sonova. Egzemplarz zostanie przesłany w ciągu 7 dni.



Jeżeli aparaty słuchowe nie działają z urządzeniem z powodu zakłóceń, należy odsunąć się od źródła zakłóceń.



Jeżeli aparaty słuchowe nie działają, należy sprawdzić, czy są włączone i czy akumulatory nie są rozładowane.



Aktywuj łączność Bluetooth. W celu połączenia aparatów słuchowych należy włączyć łączność Bluetooth.

Informacje dotyczące zgodności

Europa: Deklaracja zgodności

Firma Sonova AG niniejszym potwierdza, że ten produkt spełnia wymogi dyrektywy (UE) 2017/745 w sprawie wyrobów medycznych.

Wyjaśnienie symboli



Symbol ten wskazuje, że użytkownik powinien zapoznać się z odpowiednimi informacjami w niniejszej instrukcji użytkownika i przestrzegać ich.



Ten symbol wskazuje, że użytkownik powinien zwrócić uwagę na ważne ostrzeżenia zawarte w niniejszej instrukcji użytkownika.



Informacje istotne z punktu widzenia bezpiecznego użytkownika produktu.




Umieszczając na produkcie symbol CE, firma Sonova AG potwierdza, że niniejszy produkt spełnia wymogi dyrektywy (UE) 2017/745 w sprawie wyrobów medycznych. Numery występujące po symbolu CE są numerami jednostek notyfikowanych wspomnianej wyżej dyrektywy.



Oznacza autoryzowanego przedstawiciela na terenie Wspólnoty Europejskiej.



Wskazuje, że urządzenie jest wyrobem medycznym.

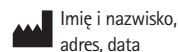

Połączony symbol „producenta wyrobów medycznych” i „daty produkcji” według dyrektywy UE 2017/745.



Informacja o dostępności instrukcji użytkownika w formie elektronicznej. Instrukcję można uzyskać na stronie www.phonak.com/myphonakapp.



Sonova AG · Laubisrütistrasse 28
CH-8712 Stäfa · Szwajcaria



Sonova Deutschland GmbH
Max-Eyth-Str. 20
70736 Fellbach-Oeffingen · Niemcy

Importer do UE

Sonova Polska Sp. z o.o.
plac Bankowy 1
00-139 Warszawa, Polska

Sponsor australijski:

Sonova Australia Pty Ltd
12 Inglewood Place,
Norwest NSW 2153 · Australia