


EasyGuard™ Czyszczenie i pielęgnacja.



Czyść codziennie niestrzępiącą się ściereczką. Usuń woskowinę nagromadzoną na końcówce.

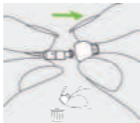

Wymieniaj EasyGuard™ co 3 miesiące lub gdy stanie się sztywny lub kruchy.



Do czyszczenia nie używaj ostrych przedmiotów ani szczotek, gdyż mogą one uszkodzić EasyGuard™.



Nie wkładaj EasyGuard™ do wody. Woda, która dostanie się do części usznej, może uszkodzić zewnętrzną słuchawkę.



phonak.com/support-easyguard