

# O guia de boas-vindas do seu Roger On™.

## Parabéns por começar seu teste do Roger On!

O Roger™ é o recurso a mais que garante que você não perca os lindos momentos da vida. Ele permite que você acompanhe conversas, fique perto de amigos e familiares e desfrute de uma vida social ativa.

### Pronto para ouvir o que você está perdendo?

Este guia explicará todas as informações que você precisa saber para aproveitar ao máximo seu microfone Roger On.

## Começando com seu Roger On

### 1 Configure o RogerDirect™

Esta é uma etapa única para conectar o Roger aos seus aparelhos auditivos. Seu fonoaudiólogo pode já ter feito isso durante sua última consulta na clínica.

Se não, consulte as instruções do passo a passo no Guia de configuração do RogerDirect incluso na caixa ou assista ao vídeo tutorial no canal da Phonak no YouTube.



Digitalize o código para assistir ao vídeo tutorial.

### 2 Familiarize-se com o Roger On

Ao desembalar seu novo microfone, reserve um momento para ler o Guia de configuração rápida fornecido na caixa. Ele aborda os componentes, explica os ícones que aparecem na tela e dá exemplos de uso diário.

### 3 Carregue antes de usar

Leva 2 horas para carregar completamente. Uma bateria cheia pode fornecer até 8 horas de uso contínuo.

### 4 Baixe o aplicativo myRogerMic

O aplicativo permite que você ajuste as configurações do Roger com facilidade. É opcional, mas é uma ótima maneira de melhorar sua experiência.



Google Play



App Store

Pronto – você está pronto para levar o Roger para onde quer que vá.



# Coloque Roger On à prova

Com o Roger ao seu lado, você está equipado com uma solução auditiva poderosa e versátil. Experimente em diferentes cenários e anote se ele ajudou (Sim/Não). Quando seu período de teste terminar, recomendamos compartilhar suas descobertas com seu fonoaudiólogo para aproveitar ao máximo sua experiência.

Em reuniões sociais	Uso recomendado	Sim	Não
Em um café/restaurante barulhento, jantando com amigos e familiares	Coloque o Roger On no centro da mesa. Você pode selecionar a direção do microfone	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Em um evento social, com música alta e pessoas conversando	Segure-o na mão e aponte-o para a pessoa que está falando	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
No shopping/mercado	Segure-o na mão e aponte-o para a pessoa que está falando	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Esportes e outras atividades físicas			
Na academia ou treino ao ar livre	Entregue o Roger On ao seu treinador/companheiro de equipe e peça para ele prendê-lo na camisa. Alternativamente, eles podem pendurá-lo no pescoço usando o cordão	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Caminhada ou ciclismo	Entregue a um colega de caminhada/ciclismo para prender na camiseta enquanto vocês estiverem em movimento	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Em casa			
Conversa com seu companheiro ou com um amigo quando vocês não estão frente a frente (por exemplo, em um cômodo diferente)	Entregue o Roger On para seu companheiro/amigo prender na camiseta	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Assistindo TV	Use o carregador de mesa para conectar o Roger On à sua TV	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Em viagens			
Converse com seu parceiro de viagem enquanto estiver no carro ou no transporte público	Entregue o Roger On para seu parceiro de viagem prender na camiseta	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Eventos profissionais			
Palestras e apresentações	Entregue Roger On ao apresentador e sente-se confortavelmente entre o público	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Debate	Coloque-o no palco, de preferência sobre uma mesa, onde o debate acontece. Abra o aplicativo móvel e escolha o Modo apontar mais amplo. Agora você pode sentar-se confortavelmente entre o público e ouvir o debate	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
No trabalho			
Workshops em equipe	Coloque o Roger On no meio da mesa quando estiver tendo uma reunião em equipe. Entregue ao instrutor para prendê-lo na camiseta	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Reuniões em pé e conversas nos corredores	Segure-o na mão e aponte-o para a pessoa que está falando	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Pequenas reuniões	Coloque-o no meio da mesa da sala de reunião	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Chamadas online	Você também pode usar o Roger On como fone de ouvido. Primeiro, use o cabo para conectá-lo ao seu computador. Depois prenda-o na sua camiseta. Ele irá captar sua voz e enviá-la para o computador	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

