

Roger NeckLoop för tal-till-text

Installationsinstruktioner

Roger NeckLoop går att ansluta till din dator, surfplatta eller smartphone för att skapa automatiska undertexter i realtid via tal-till-text-programvara från tredje part.


Förberedelser

1. Kontrollera att både Roger NeckLoop och Roger-mikrofonen är laddade.
2. Kontrollera att det finns en tal-till-text-programvara, transkriberingsfunktion i realtid eller dikteringsprogram från tredje part installerat på den dator, smartphone eller surfplatta som ska användas.

Anslutning till dator


Du behöver: Den medföljande USB-C-till-USB-A-kabeln.

1. Anslut USB-kabeln till Roger NeckLoop och din dator:

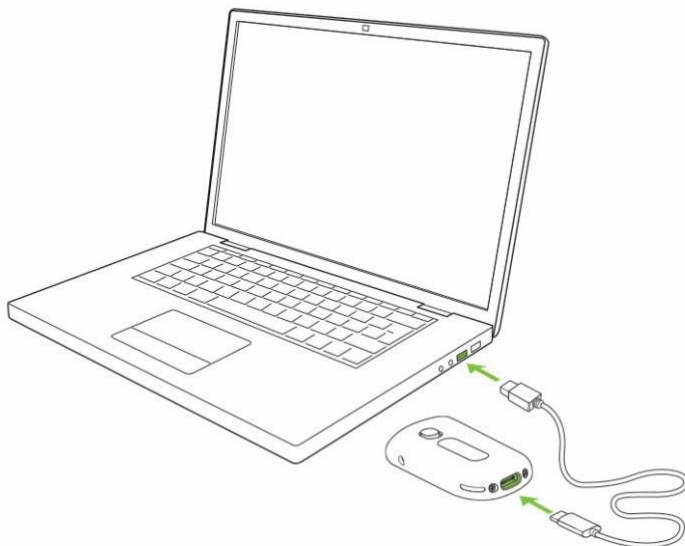

2. Slå på Roger NeckLoop.

3. Kontrollera att Roger NeckLoop är vald som input-källa (ljudinställningar) på datorn:

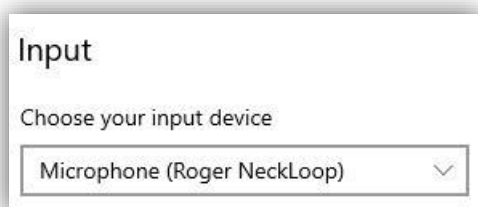

4. Kör tal-till-text-programvaran (tredjepartsprogram) på datorn. Du kan även använda dikteringsfunktionen i Microsoft Word:




5. Tala direkt in i Roger-mikrofonen för att transkribera talet till text via tal-till-text-programvaran eller MS Word.

Anslutning till smartphone eller surfplatta med USB-C-uttag

Du behöver: Den medföljande USB-C-till-USB-A-kabeln och en OTG-adapter (On-the-Go) **ELLER** en USB-C-till-USB-C-kabel.

1. Anslut Roger NeckLoop till din smartphone eller surfplatta med en OTG-adapter och den medföljande USB-kabeln **ELLER** använd en USB-C-till-USB-C-kabel.
2. Slå på Roger NeckLoop.
3. Kör tal-till-text-programvaran (t.ex. Google Transkribering) på din smartphone eller surfplatta.
4. Om det behövs, välj Roger NeckLoop som input-källa.
5. Tala direkt in i Roger-mikrofonen för att transkribera talet till text via tal-till-text-appen.

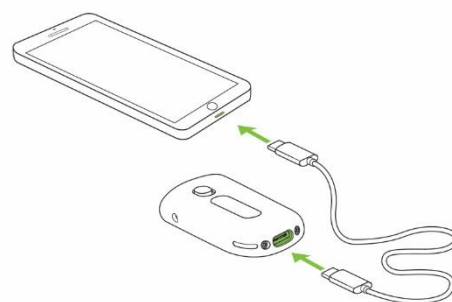

Anslutning till smartphone eller surfplatta med Lightning-uttag

Du behöver: Den medföljande USB-C-till-USB-A-kabeln och en Lightning-till-USB 3-kameraadapter. Laddaren till din telefon.

1. Anslut adaptorn till din smartphone.
2. Anslut telefonladdaren till adaptorn.
3. Anslut Roger NeckLoop till adapter med den medföljande USB-C-till-USB-A-kabeln.
4. Slå på Roger NeckLoop.
5. Kör tal-till-text-appen på din smartphone eller surfplatta.
6. Om det behövs, välj Roger NeckLoop som input-källa.
7. Tala direkt in i Roger-mikrofonen för att transkribera talet till text via tal-till-text-appen.

