

# Phonak


## Lathund

### Använda RogerDirect™ i en hörapparat från Phonak

**Viktigt:** Roger Installer-enheterna bör hållas på minst 3 meters avstånd från varandra under installation/avinstallation och alla andra hörapparater i närheten av Roger Installer bör vara avstängda. Vi rekommenderar även att eventuella Roger-enheter i närheten av Roger Installer är avstängda under installation.

#### Installera Roger™- mottagare i en Phonak hörapparat, från Roger X

- Koppla in Roger X i Roger Installer (3).
- Slå på Roger Installer (1) (indikatorljuset (2) lyser med fast grönt sken)
- Indikatorljuset (4) lyser med fast grönt sken (Roger X är redo för installation).
- Slå på hörapparaten och lägg den på hörapparatssymbolen.
- Vänta tills indikatorljuset (5) blinkar grönt (installation pågår). När indikatorljuset lyser med fast grönt sken har installationen slutförts.
- Stäng av Roger Installer. Ta bort och lägg undan Roger X. Hörapparaten kan nu användas med RogerDirect.

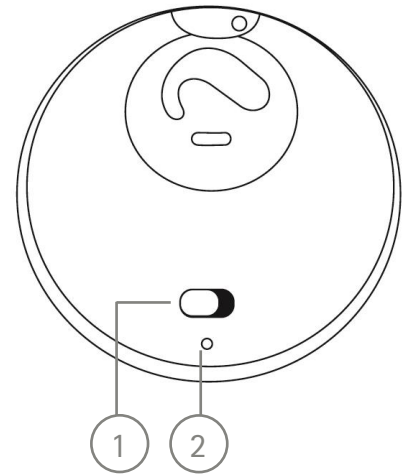

#### Avinstallera Roger-mottagare från en Phonak hörapparat till Roger X

- Koppla in Roger X i Roger Installer (3).
- Slå på Roger Installer (1) (indikatorljuset (2) lyser med fast grönt sken)
- Indikatorljuset (4) förblir inaktivt i flera sekunder (Roger-mottagaren kan nu avinstalleras från hörapparaten).
- Slå på hörapparaten och lägg den på hörapparatssymbolen.
- Vänta tills indikatorljuset (5) lyser med fast grönt sken (bekräftar att en mottagare finns installerad på den här hörapparaten).
- När avinstallationen påbörjas blinkar indikatorljuset (5) grönt tills processen har slutförts.
- Indikatorljuset (4) lyser med grönt sken när avinstallationen har slutförts (mottagaren har nu återinstallerats i Roger X).
- Stäng av Roger Installer. Ta bort Roger X. Hörapparaten kan nu inte användas med Roger.

