

Phonak

Roger™ iN-mikrofoner

Installationsguide för Roger iN-mikrofon

Innehåll


Installera Roger-mottagare i ett par hörapparater med RogerDirect™	1
Kontrollera antalet Roger-mottagare i en Roger iN-mikrofon	2
Avinstallera Roger-mottagare från en hörapparat	3

Installera Roger-mottagare i ett par hörapparater med RogerDirect™


Se till att hörapparaten innehåller den senaste FW som finns tillgänglig i Phonak Target 6.1 eller högre.

Installationssteg:


1. Slå på Roger iN-mikrofonen
2. Håll installationsknappen intryckt i två sekunder tills indikatorljuset börjar blinka i grönt:

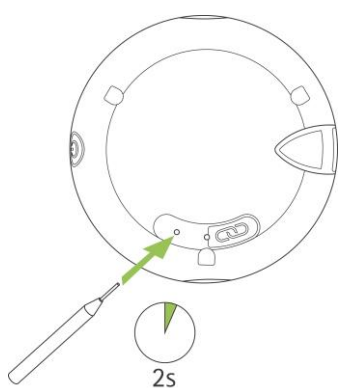

Roger Select™ iN

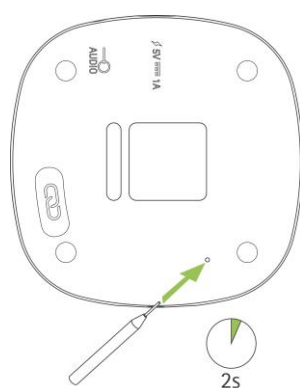


Roger Table Mic II iN

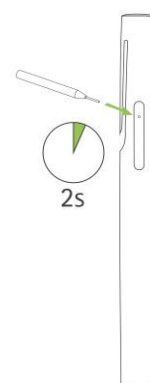

Roger Pen™ iN

3. Placera Roger iN-mikrofonen på bordet
4. Slå på en hörapparat (se till så att den andra hörapparaten är avstängd)

5. Placera hörapparaten nära Roger iN-mikrofonen (inom 10 cm)

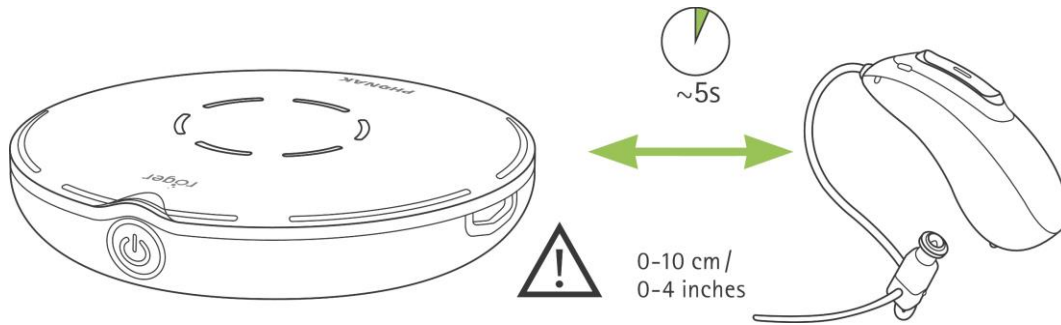

6. Vänta i ungefär 5 sekunder tills indikatorljuset på Roger iN-mikrofonen lyser med ett fast grönt sken.

7. Upprepa steg 2 till 6 för den andra hörapparaten.


Obs! Hörapparaterna kommer automatiskt att vara anslutna till Roger iN-mikrofonen.

Om indikatorljuset blir rött efter installationsproceduren har installationen misslyckats. Detta kan bero på följande orsaker:


- Avståndet mellan Roger iN-mikrofonen och hörapparaten är för stort
- Det finns inga Roger-mottagare installerade i Roger iN-mikrofonen
- Hörapparaten har redan Roger installerat
- Hörapparaten är inte kompatibel med RogerDirect.

Kontrollera antalet Roger-mottagare i en Roger iN-mikrofon


När du har slagit på Roger-mikrofonen, tryck kort på installationsknappen på Roger iN-mikrofonen:

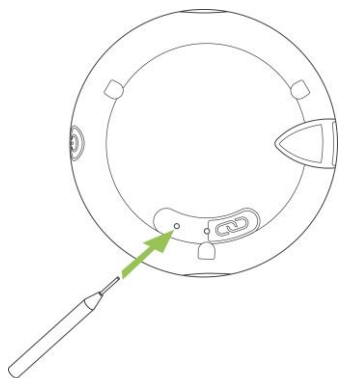

Roger Select iN

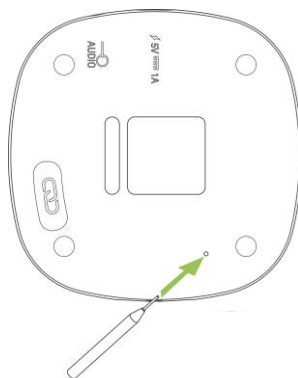

Roger Table Mic II iN

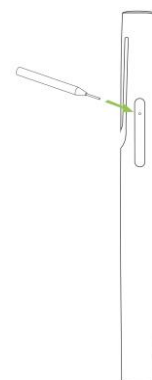

Roger Pen iN


Indikatorljuset kommer att visa antalet tillgängliga Roger-mottagare:

- ● Två tillgängliga Roger-mottagare
- ● En tillgänglig Roger-mottagare
- ● Ingen tillgänglig Roger-mottagare


Avinstallera Roger-mottagare från en hörapparat

Avinstallationssteg:


1. Slå på Roger iN-mikrofonen
2. Håll installationsknappen intryckt i två sekunder tills indikatorljuset börjar blinka i grönt

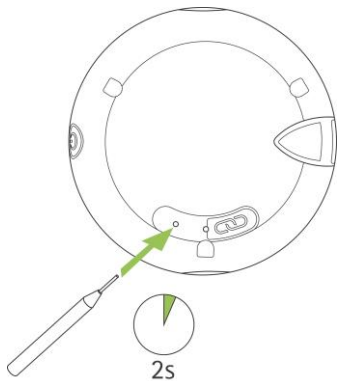

Roger Select iN

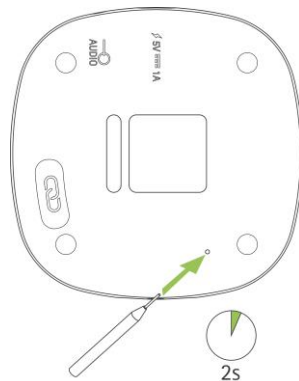


Roger Table Mic II iN

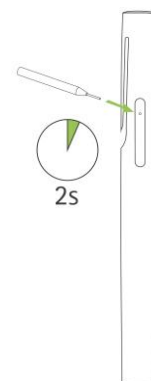

Roger Pen iN

3. Placera Roger iN-mikrofonen på bordet
4. Slå på en hörapparat (låt den andra hörapparaten vara avstängd)
5. Placera hörapparaten nära Roger iN-mikrofonen (inom 10 cm)

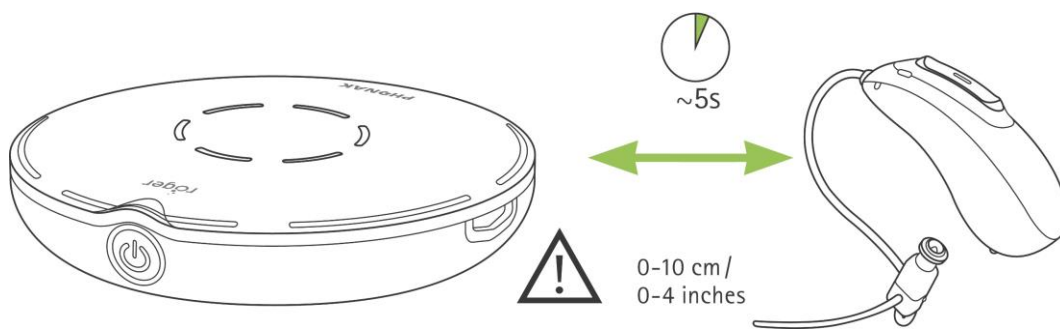

6. Vänta i ungefär 5 sekunder tills indikatorljuset på Roger iN-mikrofonen lyser med ett fast grönt sken.
7. Upprepa steg 2 till 6 för den andra hörapparaten om så behövs.

Om indikatorljuset blir rött efter installationsproceduren har avinstallationen misslyckats. Detta kan bero på följande orsaker:

- Avståndet mellan Roger iN-mikrofonen och hörapparaten är för stort
- Roger iN-mikrofonen har redan två Roger-mottagare installerade
- Hörapparaten har inte Roger installerat
- Hörapparaten är inte kompatibel med RogerDirect.