


Operating range
Betriebsreichweite
Plage de fonctionnement
Rango de funcionamiento

Roger microphone
 Roger Mikrofon
 Microphone Roger
 Micrófono Roger




⚠
 Out of range! If distance greater than 20 meters/65 feet
 Ausser Reichweite! Wenn der Abstand größer als 20 Meter ist
 Hors de portée! Si distance supérieure à 20 mètres
 ¡Fuera de alcance! Si la distancia es mayor que 20 metros

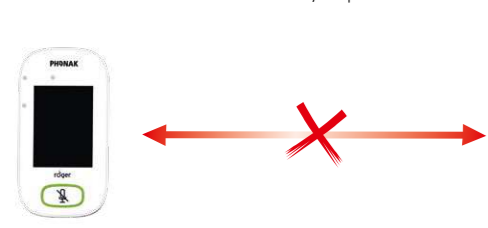

Audio connection
Audio-Anschluss
Connexion audio
Conexión de audio

Roger DigiMaster

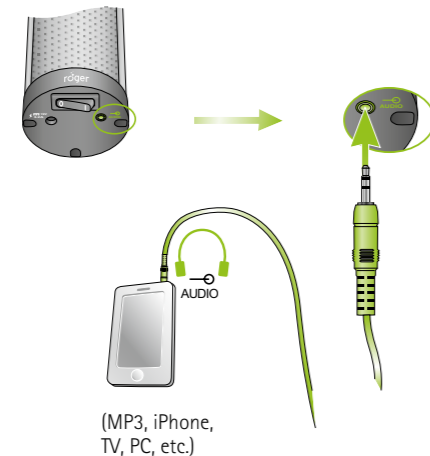


Network compatibility
Netzwerk-Kompatibilität
Compatibilité avec le réseau
Compatibilidad con las redes



Network compatibility
Netzwerk-Kompatibilität
Compatibilité avec le réseau
Compatibilidad con las redes



Indicator light (LED status)
Optische Anzeige (LED-Status)
Témoin lumineux (LED status)
Indicador de luminoso (LED status)

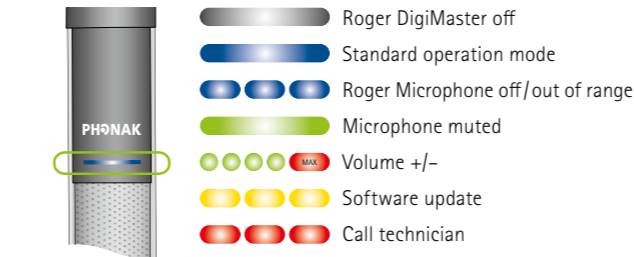

Operating conditions
Betriebsbedingungen
Conditions de fonctionnement
Condiciones de funcionamiento

+0° to +40° Celsius / +32° to +104° Fahrenheit
 <95% (non condensing) relative humidity/relative Luftfeuchtigkeit/
 humidité relative/ humedad relativa.

Phonak Communications AG
 Länggasse 17
 CH-3280 Murten
 Switzerland

EU Representative:
 Phonak GmbH
 D-70736 Fellbach-Oeffingen
 Germany

www.phonak.com/roger



A Sonova brand



029-3163/V2.00/2019-01/na © 2019 Soova AG All rights reserved

Roger DigiMaster



User Guide/Gebrauchsanweisung
Mode d'emploi/Instrucciones de uso



Start

Components and functions Komponenten und Funktionen Composants et fonctions Componentes y funciones


Roger DigiMaster

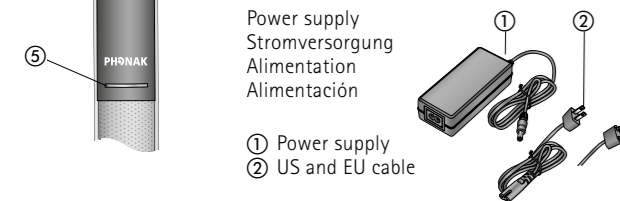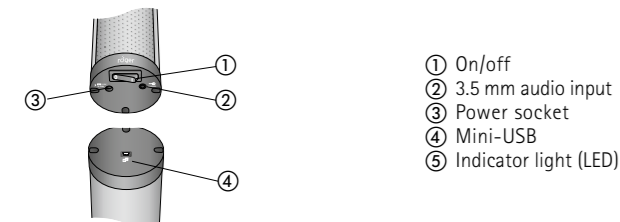


Package contents may vary slightly depending on your country
Packungsinhalt kann je nach Land variieren
Le contenu peut varier selon les pays
El contenido puede variar en función del país

Components and functions Komponenten und Funktionen Composants et fonctions Componentes y funciones


Option:
DigiMaster Floor stand + bag

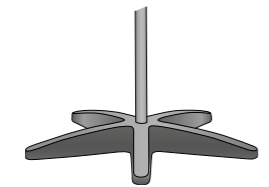

Option:
Wall mount kit

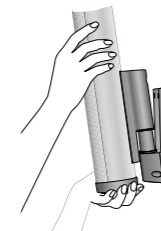


Option:
UK and AU cable

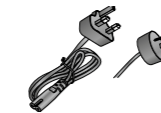


1

Mains Stromversorgung Alimentation Alimentación

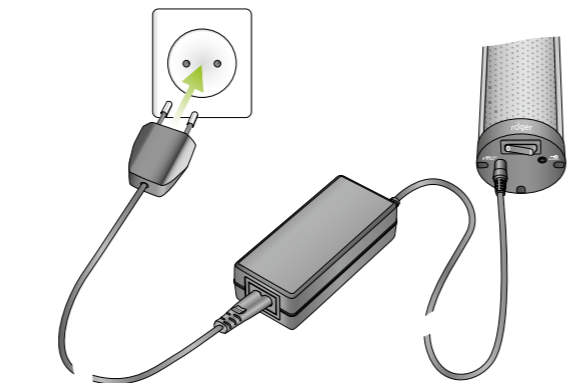

2

Switching Roger DigiMaster on Roger DigiMaster einschalten Enclencher Roger DigiMaster Encender el Roger DigiMaster

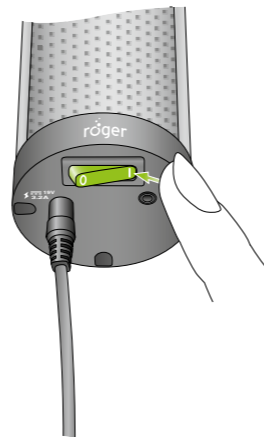


3

Connecting Roger DigiMaster Roger DigiMaster verbinden Conncter Roger DigiMaster Conexión de Roger DigiMaster




⚠ Connect Roger DigiMaster before first use (Connect).
Verbinden Sie Roger DigiMaster vor der ersten Inbetriebnahme (Connect).
Conncter Roger DigiMaster avant la première utilisation (Connect).
Conecte Roger DigiMaster antes del primer uso (Connect).

Connecting Roger DigiMaster Roger DigiMaster verbinden Conncter Roger DigiMaster Conexión de Roger DigiMaster

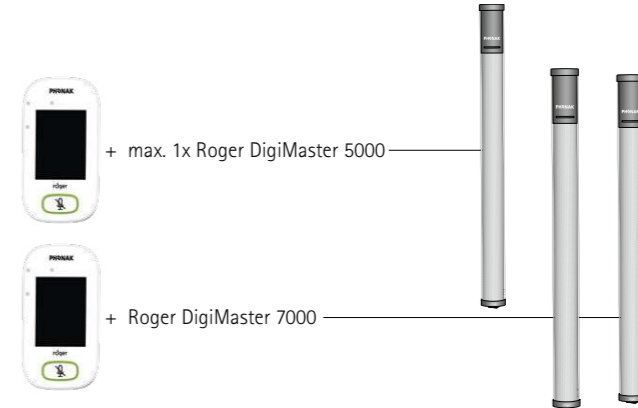

4

How to use Roger DigiMaster Roger DigiMaster benutzen Comment utiliser Roger DigiMaster Cómo utilizar Roger DigiMaster

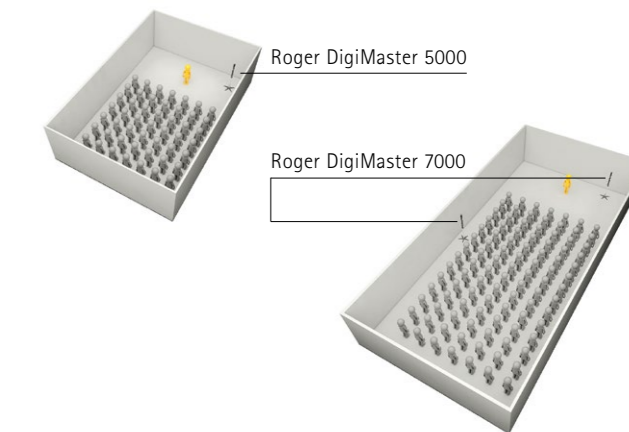

⚠ Same loudspeaker position whether using floor stand or wall mount.
Gleiche Lautsprecherposition mit Stativ oder Wandmontage.
Même position des haut-parleurs avec le pied ou la fixation murale.
Misma posición del altavoz sobre el soporte de pie o instalado en la pared.