


myPhonak

Руководство пользователя myPhonak 6

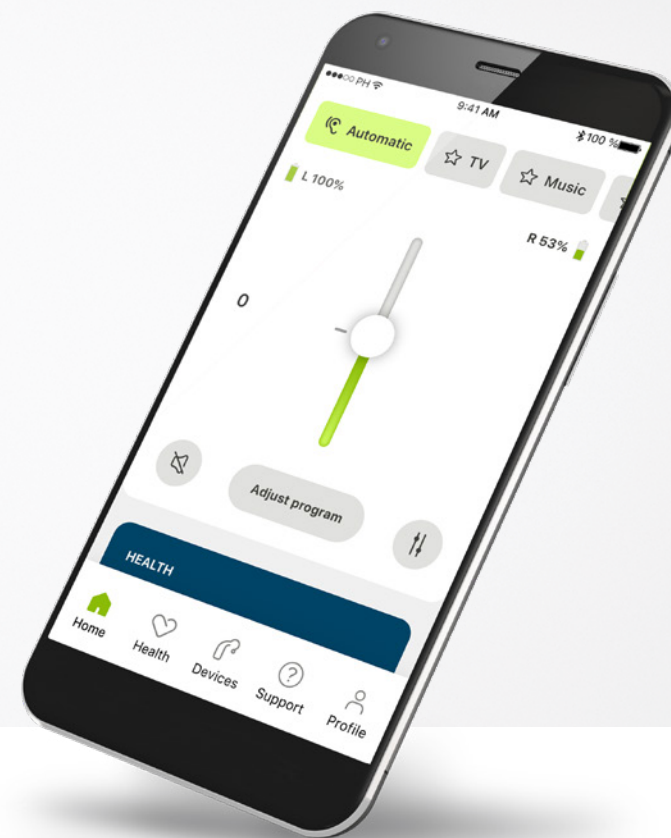

A Sonova brand

PHONAK
life is on

С чего начать

myPhonak — это приложение, разработанное компанией Sonova, мировым лидером по созданию решений для коррекции слуха, штаб-квартира которой находится в Цюрихе, Швейцария. Внимательно ознакомьтесь с этой инструкцией, чтобы научиться эффективно использовать все функции приложения.



В данном руководстве пользователя описаны функции myPhonak и порядок управления ими пользователем. Перед началом использования приложения ознакомьтесь с данным руководством пользователя.

Для работы с приложением дополнительное обучение не требуется.



Информация о совместимости

С приложением myPhonak можно использовать только слуховые аппараты Phonak с поддержкой беспроводной технологии Bluetooth®.

Приложение myPhonak можно использовать на телефонах, поддерживающих Bluetooth® с низким энергопотреблением (LE), на которых установлена iOS® версии 14 или более новой. Приложение myPhonak можно использовать на устройствах Android™, имеющих сертификат Google Mobile Services (GMS) и поддерживающих Bluetooth® 4.2 и ОС Android 7.0 и более новых версий.

Текстовый символ и логотипы Bluetooth® являются зарегистрированными товарными знаками и принадлежат компании Bluetooth SIG, Inc. Любое использование этих знаков компанией Sonova AG осуществляется на основании лицензии.

iPhone® является товарным знаком компании Apple Inc., зарегистрированным в США и других странах.

Android является товарным знаком компании Google LLC.

iOS® является зарегистрированным товарным знаком или товарным знаком компании Cisco Systems, Inc. и/или ее дочерних компаний в США и некоторых других странах.


Содержание

Краткий обзор	3
Установка myPhonak	5
Настройка учетной записи myPhonak	6
Поиск и устранение неисправностей, связанных с настройкой учетной записи	7
Сопряжение со слуховыми аппаратами Phonak	8
Поиск и устранение неисправностей, связанных с сопряжением	9
Главная – окно «Дистанционное управление»	10
Главная – Расширенные настройки дистанционного управления	12
Расширенные настройки дистанционного управления – Поиск и устранение неисправностей	14
Здоровье	16
СА	20
Помощь и сеанс дистанционной поддержки	21
Запуск сеанса удаленной поддержки	22
Поиск и устранение неисправностей во время сеанса дистанционной поддержки	23
Профиль и конфиденциальность данных	24
Важная информация о безопасности	25
Информация о соответствии	29
Используемые символы	29

Краткий обзор

Дистанционное управление


Дистанционная поддержка

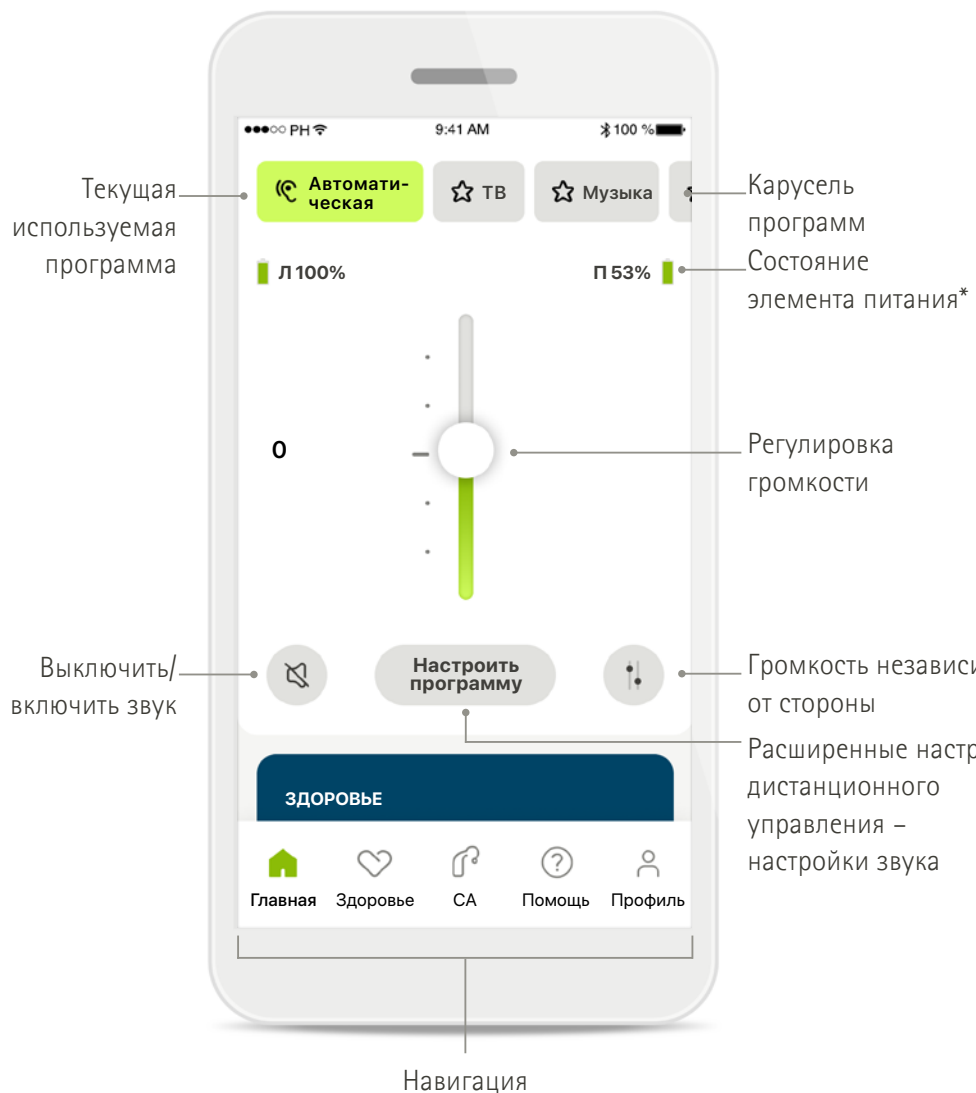

* Только для перезаряжаемых слуховых аппаратов

Краткий обзор

Главная

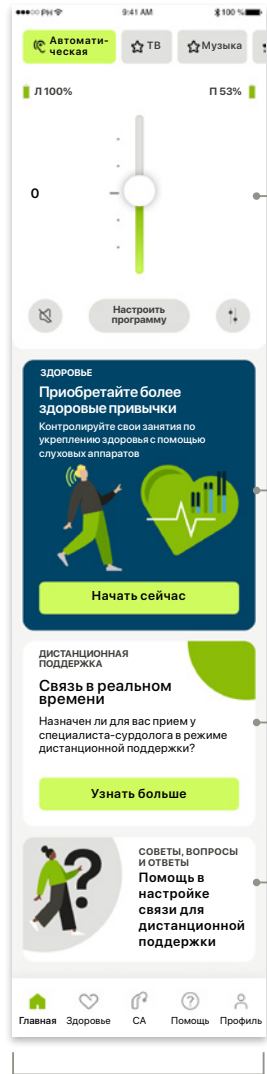

Дистанционное управление


Быстрый доступ к функции контроля здоровья

Быстрый доступ к информации о дистанционной поддержке

Вопросы и ответы

Навигация


Здоровье

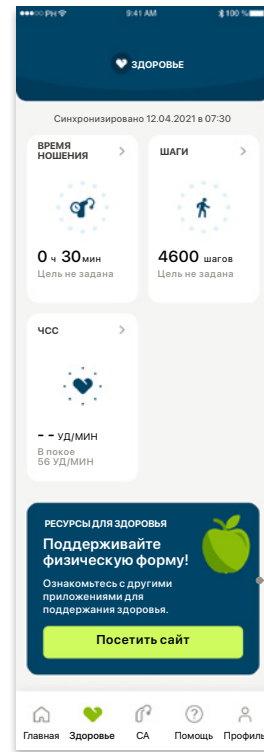

Карточки здоровья

Рекомендации других приложений для поддержания здоровья

Расширенные настройки дистанционного управления, в том числе расширенные настройки звука

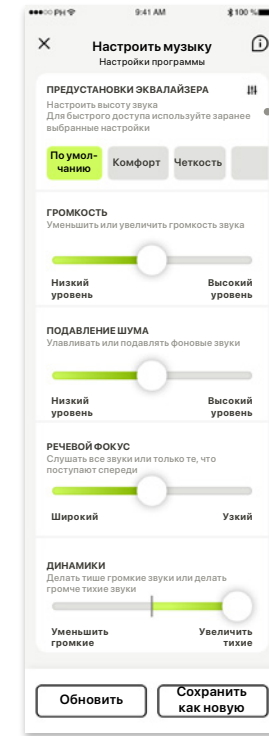

Дополнительная информация

Расширенные настройки эквалайзера

Быстрый выбор предустановки


Регулировка громкости

Средства регулировки звука шума и речи

Регулировка тихих/громких звуков


Установка myPhonak

- Подключите свой смартфон к Интернету по Wi-Fi или сети для мобильной передачи данных
- Включите на смартфоне функцию Bluetooth®

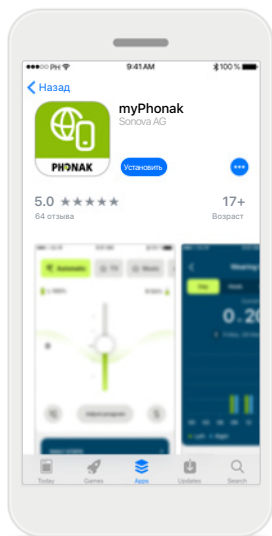


Скачайте myPhonak

Скачайте приложение из магазина. После установки откройте приложение.

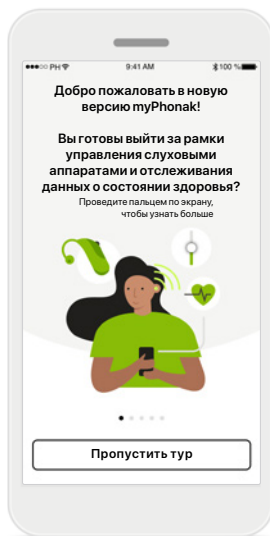


Откройте приложение

При первом запуске приложения вам будет предложен обзор его возможностей. Если вы не хотите смотреть обзор, нажмите **Пропустить тур**.

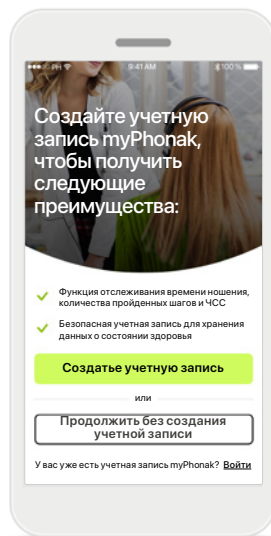


Создайте учетную запись

Вы можете создать учетную запись myPhonak. Она необходима для получения доступа к функциям контроля здоровья.

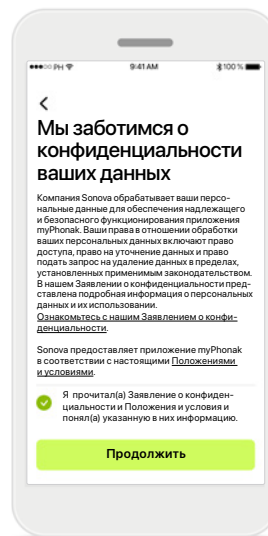

Политика конфиденциальности


Для того чтобы пользоваться приложением, необходимо ознакомиться с Заявлением о конфиденциальности и Положениями и условиями и в подтверждение этого поставить флажок в соответствующем поле. Затем нажмите **Продолжить**.

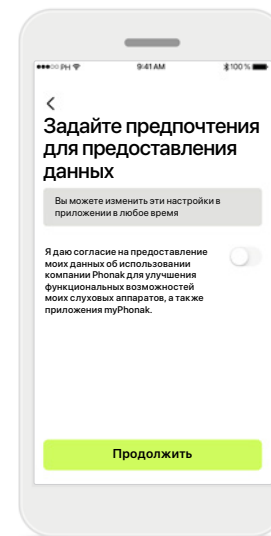


Совершенствование продукции

Вы можете дополнительно предоставлять нам данные об использовании приложения, что поможет нам узнать больше и совершенствовать нашу продукцию. Обработка ваших данных будет осуществляться в соответствии с Заявлением о конфиденциальности. С их помощью вас нельзя будет идентифицировать.


Настройка учетной записи myPhonak

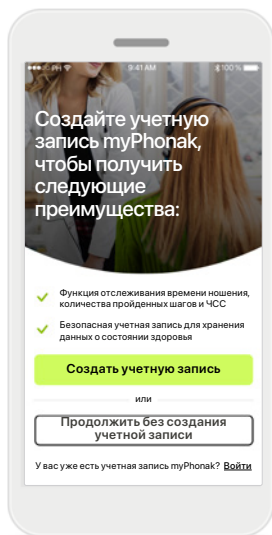


Создайте учетную запись
Вы можете создать учетную запись myPhonak. Она необходима для получения доступа к функциям контроля здоровья. Если у вас уже есть учетная запись, нажмите **Войти**.

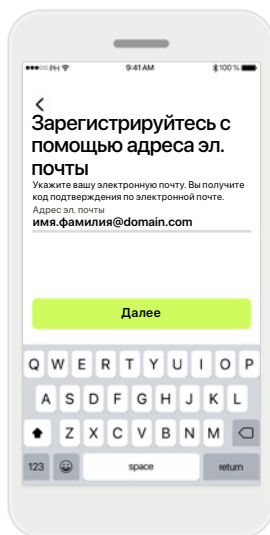


Зарегистрируйтесь с помощью адреса эл. почты
Чтобы зарегистрироваться, укажите ваш адрес электронной почты.

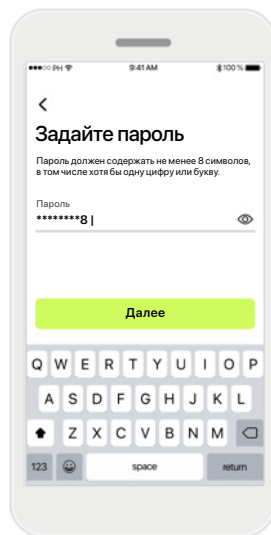

Задайте пароль
Следуйте инструкциям для создания надежного пароля. Пароль должен содержать не менее 8 символов. Нажмите **Далее**, чтобы перейти к следующему шагу.

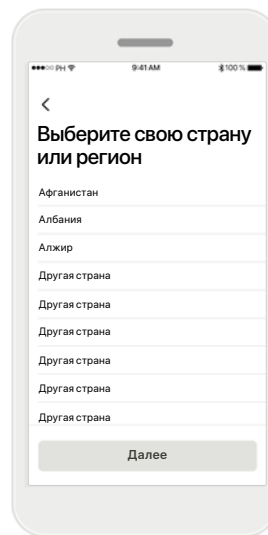


Выберите свою страну
Данные вашей учетной записи безопасно хранятся в соответствии с нормами, действующими в вашей стране.

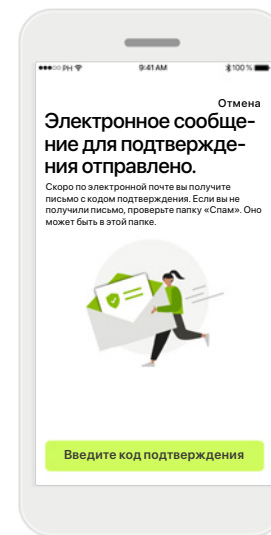

Письмо для подтверждения
После того как вы укажете ваш адрес электронной почты, вам придет на него письмо с кодом подтверждения. После получения кода подтверждения нажмите **Ввести код подтверждения**.

Поиск и устранение неисправностей, связанных с настройкой учетной записи

Этот адрес электронной почты уже используется: если вы ранее использовали этот адрес электронной почты для создания учетной записи Phonak, вы получите от нас сообщение по электронной почте с уведомлением и дальнейшими инструкциями. Если вы хотите создать новую учетную запись, используйте другой адрес электронной почты. В противном случае войдите в приложение, используя тот же адрес электронной почты.

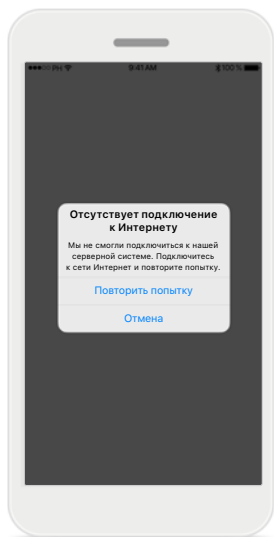


Интернет-соединение

Для создания учетной записи требуется подключение к сети Интернет. Убедитесь, что ваш смартфон подключен к сети, и повторите попытку.




Сброс пароля

Если вы не помните пароль или хотите сбросить его, просто укажите ваш адрес электронной почты и нажмите **Отправить**.

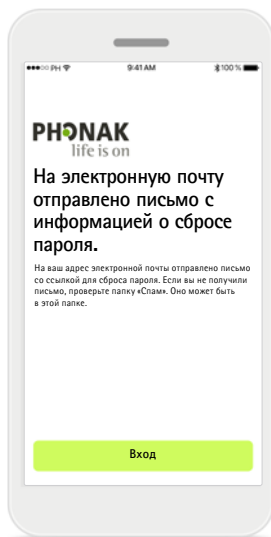


Сброс пароля

Вы получите письмо со ссылкой для сброса пароля. Следуйте инструкциям. По завершении снова запустите приложение и выполните **Вход** с помощью нового пароля

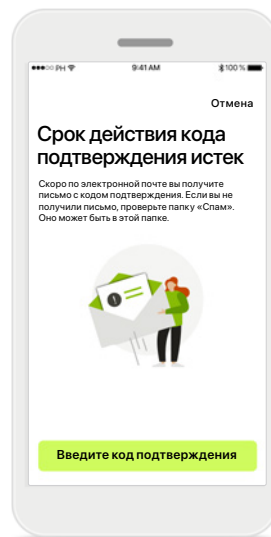

Истек срок действия кода подтверждения

Срок действия кода подтверждения, необходимого для подтверждения вашего адреса электронной почты, истекает через семь дней. По окончании этого срока вы получите новый код по электронной почте. Введите новый код для завершения создания учетной записи.

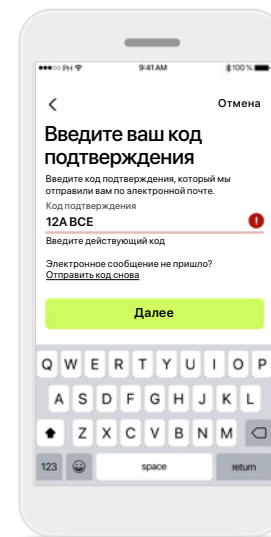


Неверный код подтверждения

Если вы ввели неверный код, нажмите «Отправить код снова». Вам на электронную почту придет письмо с новым кодом. Введите новый код и нажмите **Далее**, чтобы продолжить создание учетной записи.


Сопряжение со слуховыми аппаратами Phonak

Для подключения слуховых аппаратов, поддерживающих технологию Bluetooth®, и приложения myPhonak следуйте представленной ниже инструкции.

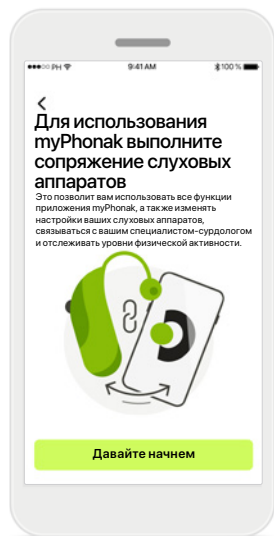

Инструкции по сопряжению

Нажмите **Давайте начнем** и следуйте инструкциям для ваших слуховых аппаратов.

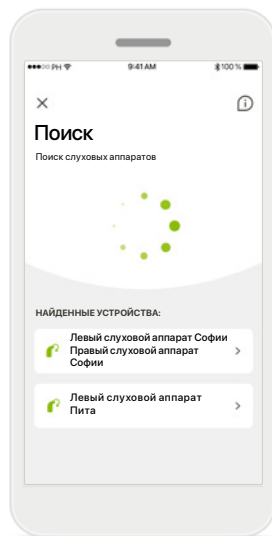


Поиск

Приложение выполняет поиск совместимых слуховых аппаратов, и, когда таковые будут обнаружены, они отобразятся на дисплее. Это может занять несколько секунд. Когда устройства отобразятся на дисплее, нажмите на то из них, которое нужно подключить.




Выполнение сопряжения слуховых аппаратов

Приложение установит соединение с каждым слуховым аппаратом отдельно.

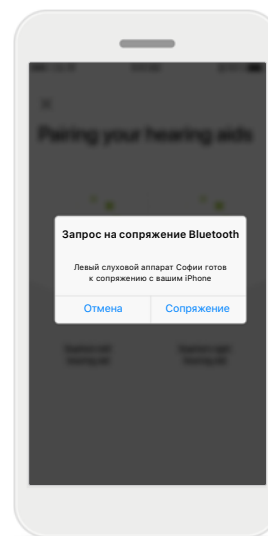

Подтвердите для каждого устройства

На устройствах Apple подтвердите сопряжение нажатием кнопки **Сопряжение** во всплывающем окне отдельно для каждого устройства.

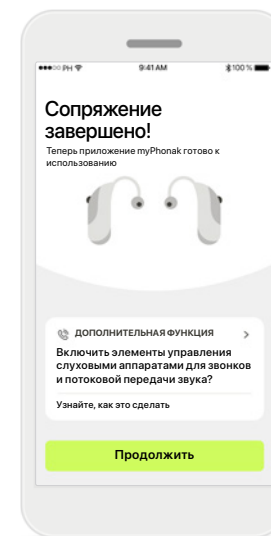


Дополнительные функции

После успешного сопряжения слуховых аппаратов вы можете выполнить дополнительное сопряжение для приема телефонных звонков и потоковой передачи музыки. Нажмите **Продолжить**, если вы хотите пропустить дополнительное сопряжение.

Поиск и устранение неисправностей, связанных с сопряжением


Возможные ошибки в ходе процедуры настройки.

С подробной информацией о поиске и устранении неисправностей можно ознакомиться на странице поддержки Phonak: <https://www.phonak.com/myphonakapp>

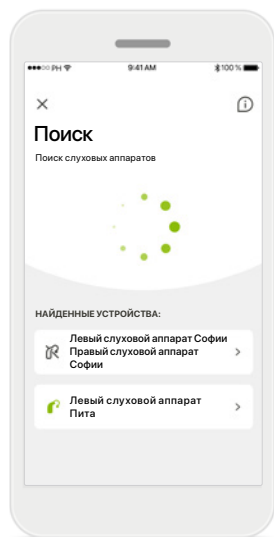


Несовместимые устройства

Приложение не может подключиться к слуховым аппаратам, поскольку они являются несовместимыми. Для получения более подробной информации обратитесь к вашему специалисту-сурдологу.

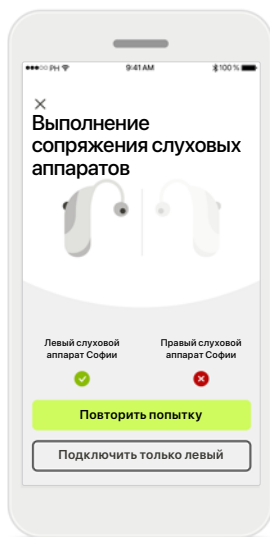


Ошибка подключения слухового аппарата

В случае сбоя сопряжения одного из слуховых аппаратов нажмите кнопку **Повторить попытку**, чтобы перезапустить процедуру сопряжения.

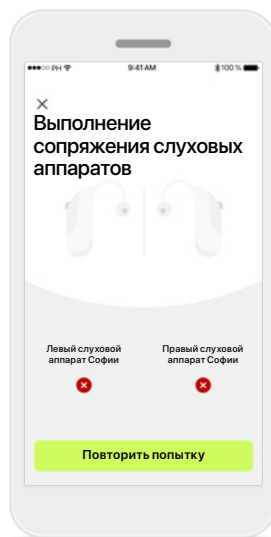

Не удастся подключить ни один из слуховых аппаратов

Нажмите кнопку **Повторить попытку**, чтобы перезапустить процедуру сопряжения, и следуйте инструкциям.

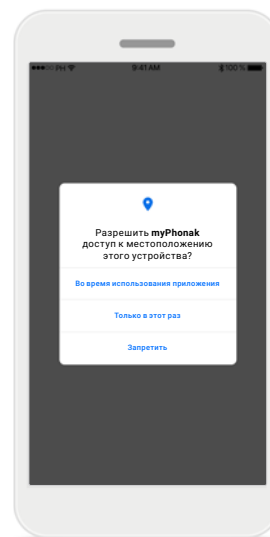


Местоположение

На устройствах Android при первом сопряжении с устройствами Bluetooth® необходимо включить функции определения местоположения. После начальной настройки вы можете снова отключить определение местоположения.


Главная – окно «Дистанционное управление»

Функциональные возможности, доступные для всех слуховых аппаратов.

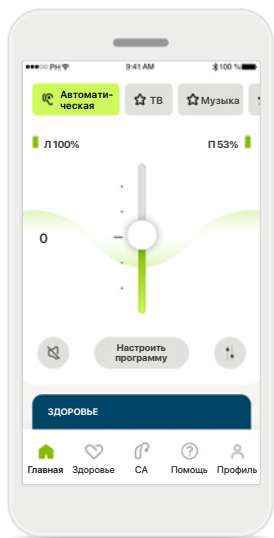


Настроить громкость слухового аппарата

Передвиньте этот ползунок вверх для увеличения громкости или вниз для уменьшения громкости. В случае использования двух слуховых аппаратов этот ползунок управляет обоими устройствами одновременно.

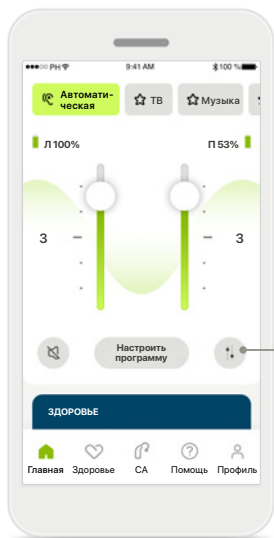


Разделение регулировки громкости

Нажмите пиктограмму **Разделить** для настройки громкости каждого слухового аппарата отдельно.

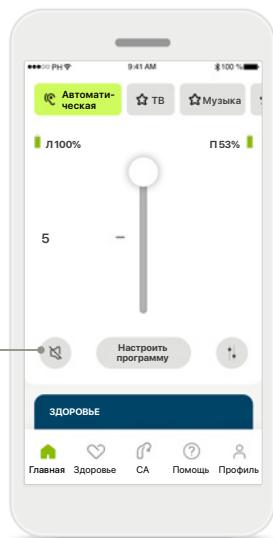

Выключить звук

Нажмите **Выключить звук**, чтобы выключить звук в слуховом(-ых) аппарате(-ах).

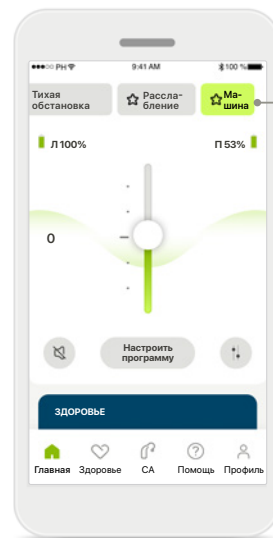


Карусель программ

Доступ к программам

Доступ к программам управления звуком осуществляется прямо с главного экрана приложения. Листайте карусель и выберите нужную программу, нажав на нее. Доступные программы:


- 🔊 Автоматическая программа
- 👤 Программы, созданные вашим специалистом-сурдологом
- ☆ Программы, созданные вами

Главная – окно «Дистанционное управление»*

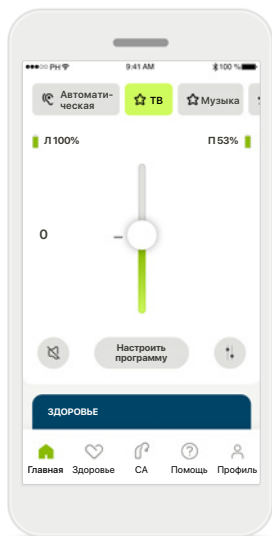


Дополнительные настройки

В зависимости от того, как были запрограммированы слуховые аппараты, и имеющихся у вас беспроводных аксессуаров вам могут быть доступны дополнительные настройки, в частности тиннитус-маскер и баланс акустической обстановки для потоковой передачи звука.

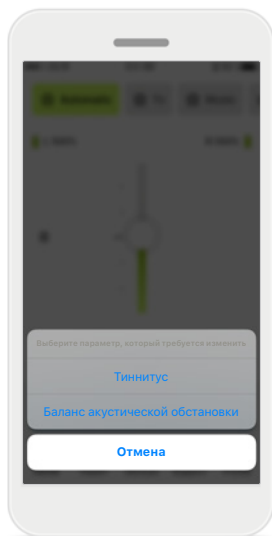


Пример

Например, если ваши слуховые аппараты поддерживают функции для коррекции тиннитуса и вы используете программу для потоковой передачи звука, вы можете изменять обе эти настройки на соответствующих экранах.

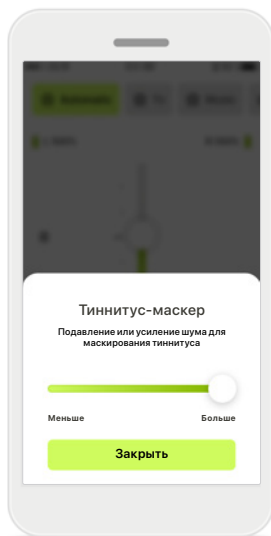


Тиннитус-маскер

Если у вас тиннитус и специалист-сурдолог проинструктировал вас относительно использования тиннитус-маскера, то вы можете отрегулировать громкость маскировки шума.

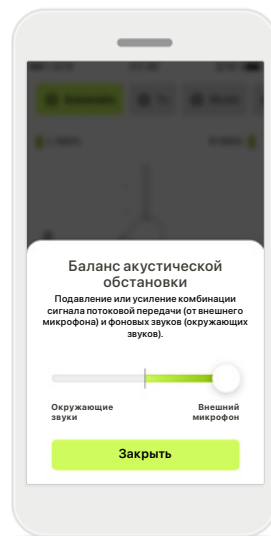

Баланс акустической обстановки

При использовании внешнего устройства потоковой передачи данных (например, ТВ-адаптера, устройства для прослушивания музыки) можно настроить фокусировку так, чтобы слышать больше потокового сигнала или наоборот – больше окружающих звуков.

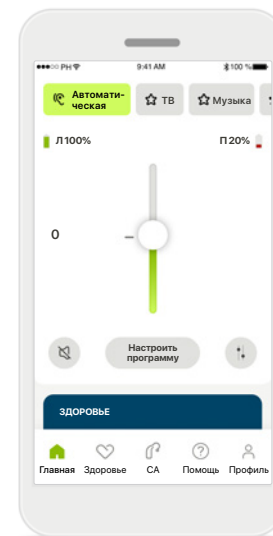


Уровень заряда элемента питания


Для перезаряжаемых слуховых аппаратов отображается текущий уровень заряда. Если уровень заряда элемента питания меньше 20%, пиктограмма становится красной. Постарайтесь зарядить устройство в ближайшее время.

* Для получения информации о функциях и совместимости слуховых аппаратов обращайтесь к вашему специалисту-сурдологу.


Главная – Расширенные настройки дистанционного управления

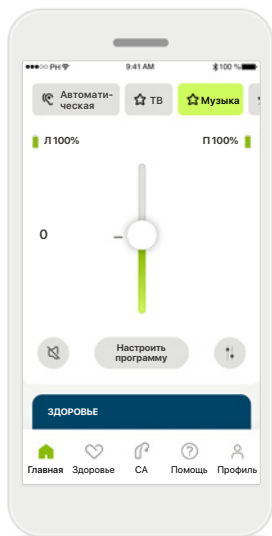


Настроить программу
С помощью кнопки **Настроить программу** и расширенных настроек звука вы можете изменять выбранную программу.

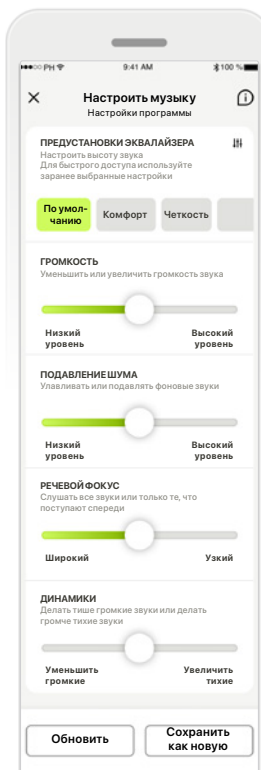

Настройки программы
Вы можете настраивать разные аспекты выбранной программы. Используйте ползунки для изменения каждой настройки: предустановки эквалайзера, громкость, подавление шума, речевой фокус и управление динамиком.

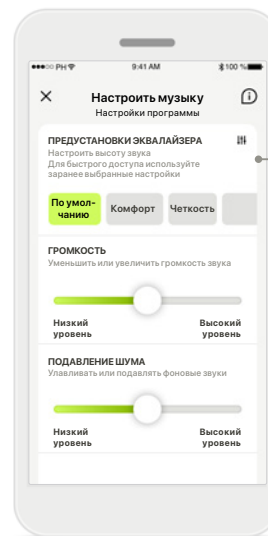


Предустановки эквалайзера
Предустановки эквалайзера позволяют быстро регулировать высоту звука в соответствии с акустической средой, в которой вы находитесь. Нажмите на пиктограмму эквалайзера, чтобы открыть дополнительные настройки.

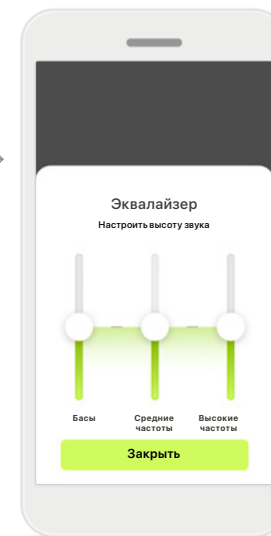


Изменение высоты звука
Изменяйте высоту (частоту) звука с помощью ползунков. Нажмите **Заккрыть**, чтобы вернуться в меню настроек.

Главная – Расширенные настройки дистанционного управления – Создать новую или обновить существующую программу*

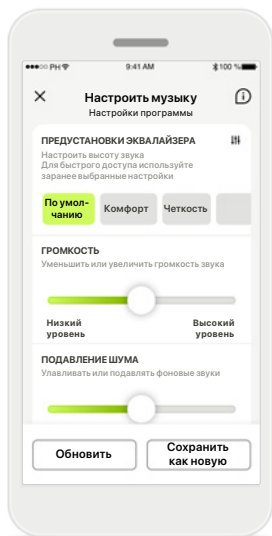


Пользовательские настройки

После изменения существующей программы ее можно обновить, нажав кнопку **Обновить**, или сохранить как новую программу, нажав кнопку **Сохранить как новую**.

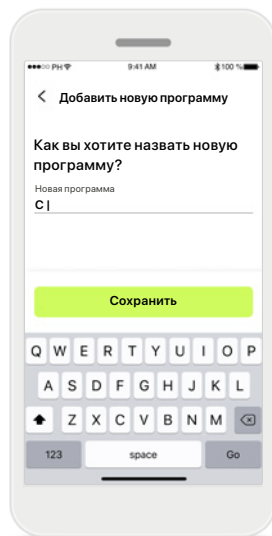


Присвоение имени вашим пользовательским настройкам

Вы можете сохранять пользовательскую настройку как новую программу и присваивать ей любое название.

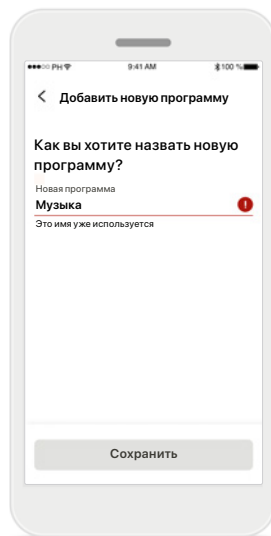

Недопустимое название программы

Нельзя использовать уже существующее название программы или оставить поле пустым. Допустимое название не может содержать более 22 символов или одни пробелы.

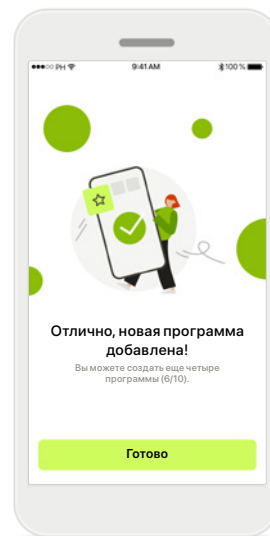


Программа сохранена

После успешного сохранения новая программа будет добавлена в ваш список программ и вы получите сообщение о количестве свободных слотов памяти. Нажмите **Готово**, чтобы вернуться на главный экран настройки дистанционного управления.

* Доступно только в определенных слуховых аппаратах


Расширенные настройки дистанционного управления – Поиск и устранение неисправностей

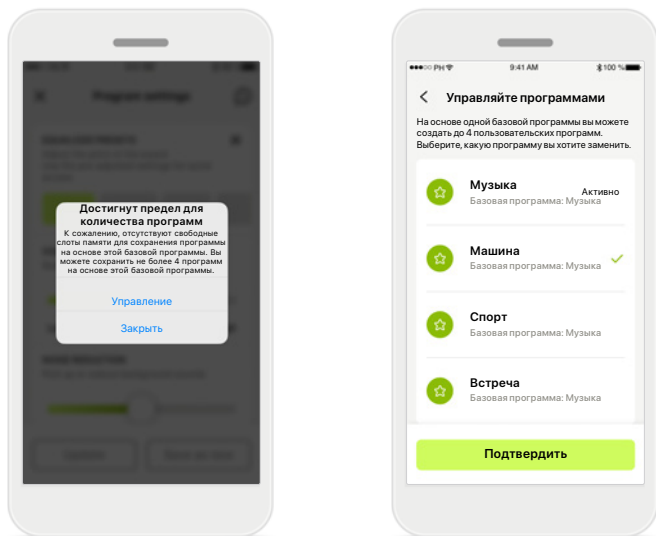

Достигнут предел для количества программ – максимальное количество для одной базовой программы

На основе одной базовой программы вы можете создать не более четырех программ.

Если вы достигли лимита, вы можете заменить одну из существующих программ, нажав **Управление**.

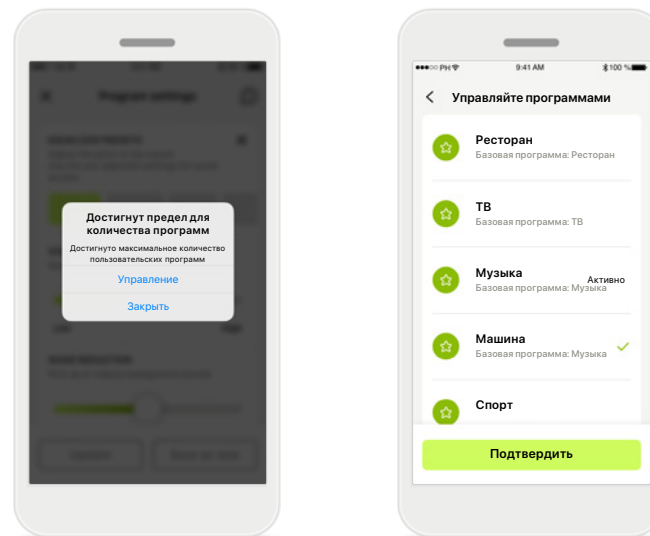


Достигнут предел для количества программ – максимальное количество программ

Вы можете сохранить в списке не более десяти индивидуальных программ.

Если вы достигли лимита, вы можете заменить одну из существующих программ, нажав **Управление**.


Здоровье – Настройка

Некоторые описываемые здесь функции раздела о здоровье доступны только для определенных моделей слуховых аппаратов. См. подробную информацию на сайте phonak.com.

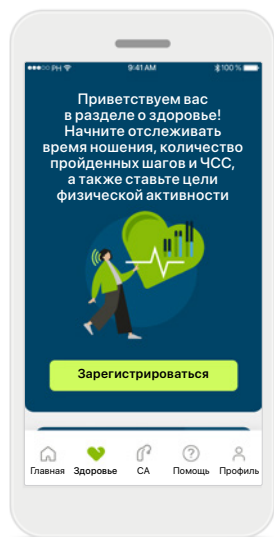


Зарегистрироваться

Для получения доступа к функциям раздела о здоровье вам необходимо зарегистрироваться с помощью учетной записи myPhonak.

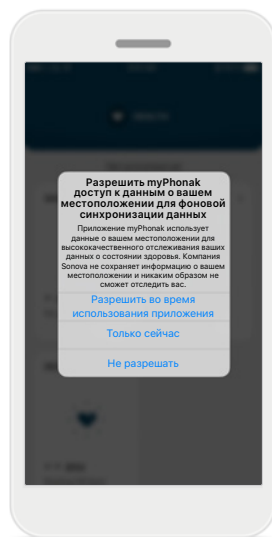

Включить функции определения местоположения






Включите функции определения местоположения в iPhone для обеспечения регулярной синхронизации данных и высококачественного отслеживания ваших данных о состоянии здоровья. Если вы запретите доступ к данным, вы не сможете отслеживать ваши данные о состоянии здоровья.

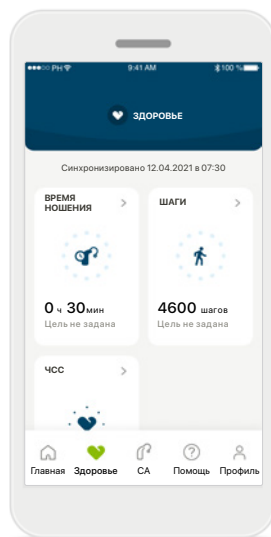

Откройте раздел «Здоровье»

После завершения настройки вы можете открыть панель инструментов «Здоровье» (главный экран раздела о здоровье).

Здоровье

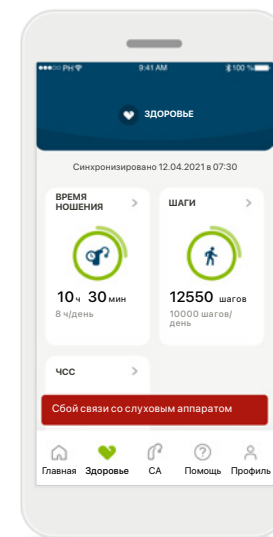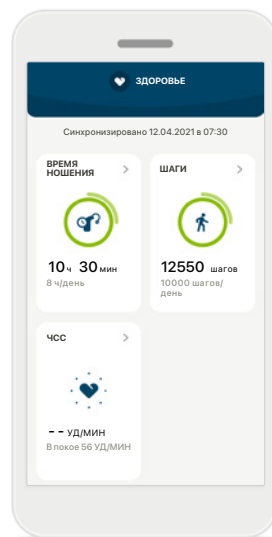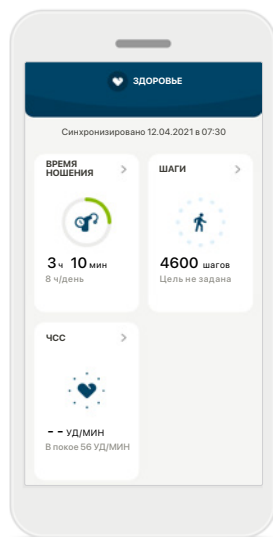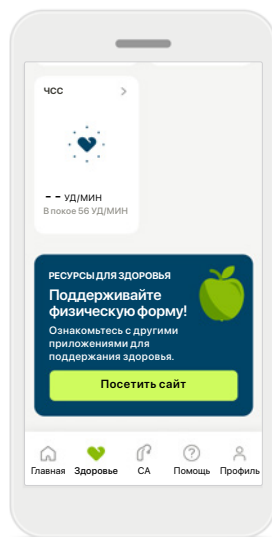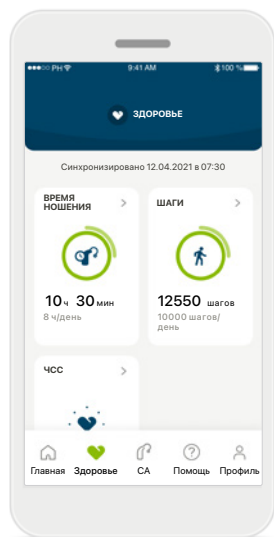

Содержание панели инструментов «Здоровье»

На панели инструментов «Здоровье» пользователь может:

- получить доступ к функциям контроля здоровья, поддерживаемым слуховыми аппаратами, и просматривать их значения в реальном времени;*
- следить за прогрессом в достижении целей, если таковые заданы;
- получить доступ к советам по поддержанию здоровья (другим рекомендуемым приложениям).

* Для получения доступа к данным в разделе «Шаги» в реальном времени пользователям совместимых моделей Paradise Audéo R и Audéo RT нужно обновить прошивку до последней версии. Пользователи Naida P-PR получат доступ к данным о времени ношения в реальном времени, а также графикам шагов, которые обновляются каждый час.

Примеры прогресса в достижении целей

Если вы задали цели, вы можете следить за прогрессом в их достижении с помощью зеленого круга, обрамляющего пиктограмму каждой функции.

В случае превышения максимального значения заданной цели вы увидите вокруг пиктограммы второй круг.


Подключение к слуховым аппаратам

Помните, что для контроля показателей состояния здоровья в реальном времени требуется подключение слуховых аппаратов. Регулярная синхронизация приложения со слуховыми аппаратами обеспечивает высокую точность данных по времени. В случае сбоя подключения или отсутствия возможности синхронизировать данные вы получите уведомление и будете перенаправлены на веб-сайт с вопросами и ответами для решения проблемы.

В этом разделе информация представлена исключительно для образовательных и ознакомительных целей. Не используйте данные, отображаемые в разделе о здоровье, в качестве альтернативы обращению к квалифицированному медицинскому работнику. Они не являются такой альтернативой.

Если у вас возникли вопросы относительно вашего здоровья или вы планируете начать программу тренировок, обязательно обратитесь к врачу или другому медицинскому работнику.

Подробное представление окон функций в разделе о здоровье – Время ношения, шаги, уровни физической активности*, расстояние, которое пользователь прошел или пробежал**

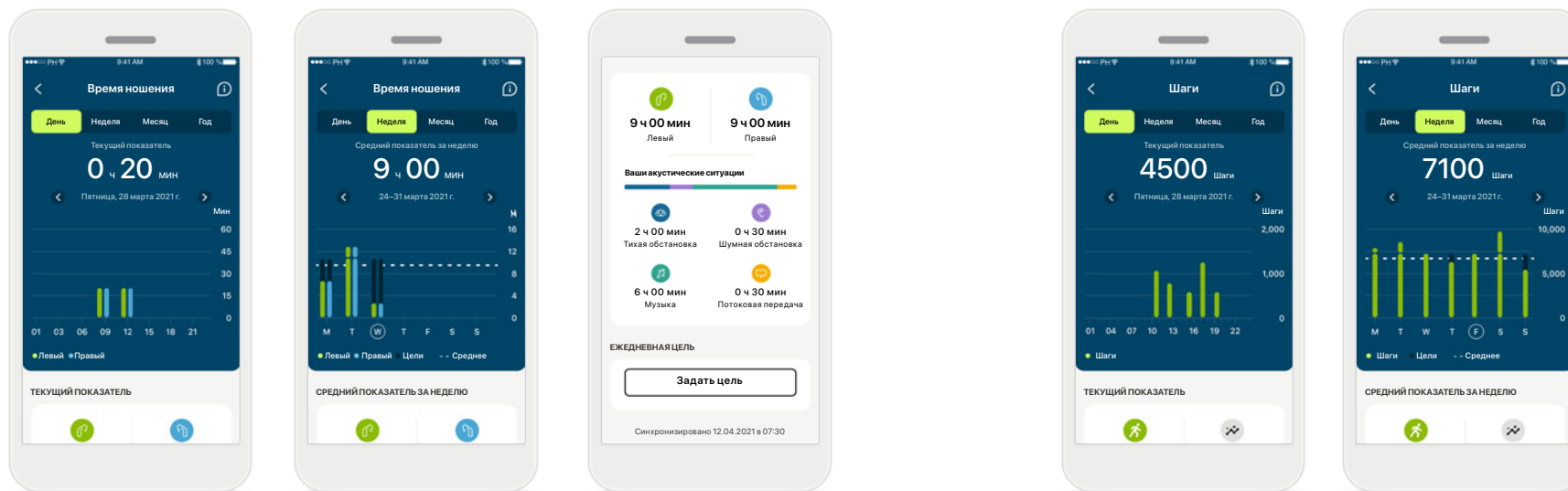

Время ношения

Если нажать на карточку «Время ношения» на панели, откроется суточный график времени ношения. Для того чтобы открыть график за неделю, месяц или год, нажмите на соответствующую вкладку. Она станет зеленой.

Если вы носите два устройства, на графике отображаются значения для левого и правого слухового аппарата. Под вкладками отображается текущее (суточный график) или среднее (другие графики) значение, а также данные о времени ношения в разных акустических ситуациях.

Шаги, уровни физической активности и расстояние

Если на панели инструментов нажать на карточку «Шаги», откроется график, отображающий количество шагов в день. Для того чтобы открыть график за неделю, месяц или год, нажмите на соответствующую вкладку. Она станет зеленой.


Под вкладками отображается текущее (суточный график) или среднее (другие графики) значение, а также примерное расстояние, которое вы прошли или пробежали**.

Уровни физической активности демонстрируют время, в течение которого физическая активность отсутствовала или присутствовала на низком (обнаружена небольшая двигательная активность), среднем (ходьба) или высоком (бег) уровне.

* Для всех перезаряжаемых моделей Audéo Paradise и слуховых аппаратов Phonak Audéo Fit и Phonak Audéo Lumity.

** Для слуховых аппаратов Phonak Audéo Fit и Phonak Audéo Lumity.

Подробное представление окон функций в разделе о здоровье – ЧСС*

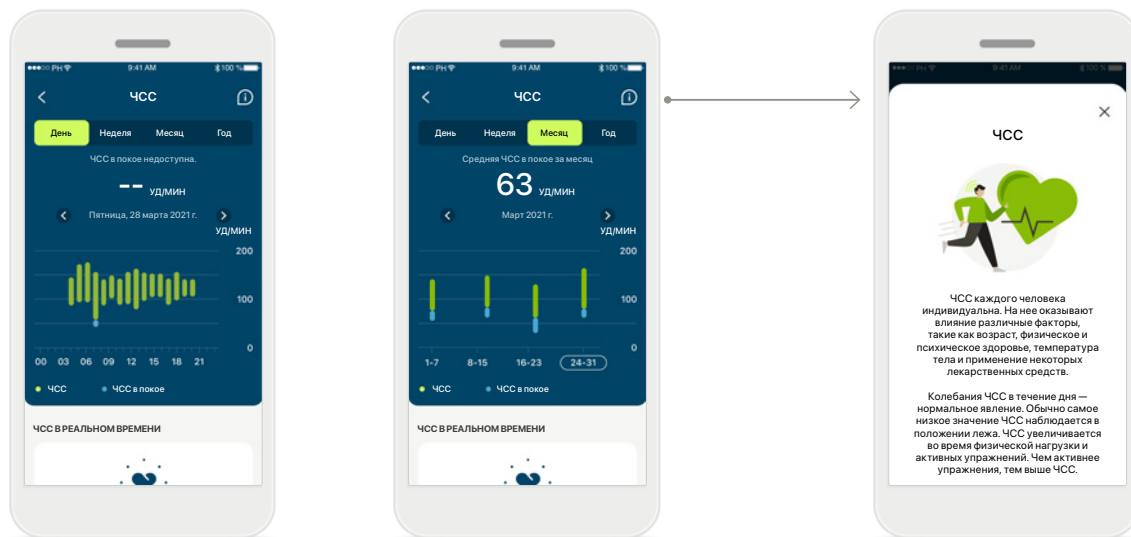

Отслеживание ЧСС

Во всех окнах ЧСС показана в реальном времени. На суточном графике отображаются минимальное значение ЧСС в покое и диапазон ЧСС в час. На недельном графике отображаются минимальное значение ЧСС в покое за день, ЧСС в реальном времени и диапазоны ЧСС за день.

Окна значений за неделю, месяц и год включают следующее:


- Суточные значения – отображение по часам (периодический диапазон ЧСС и диапазон ЧСС в реальном времени за час, одно минимальное значение ЧСС в покое за день).
- Значения за неделю / месяц / год – отображение суточных / недельных / месячных диапазонов ЧСС и ЧСС в покое.

Дополнительные сведения

Нажмите пиктограмму (i) в правом верхнем углу экрана, чтобы ознакомиться с дополнительной информацией и литературой о ЧСС и узнать, зачем нужно отслеживать ЧСС в покое.

* Только для слуховых аппаратов Phonak Audéo Fit™

Здоровье – Другие функции*

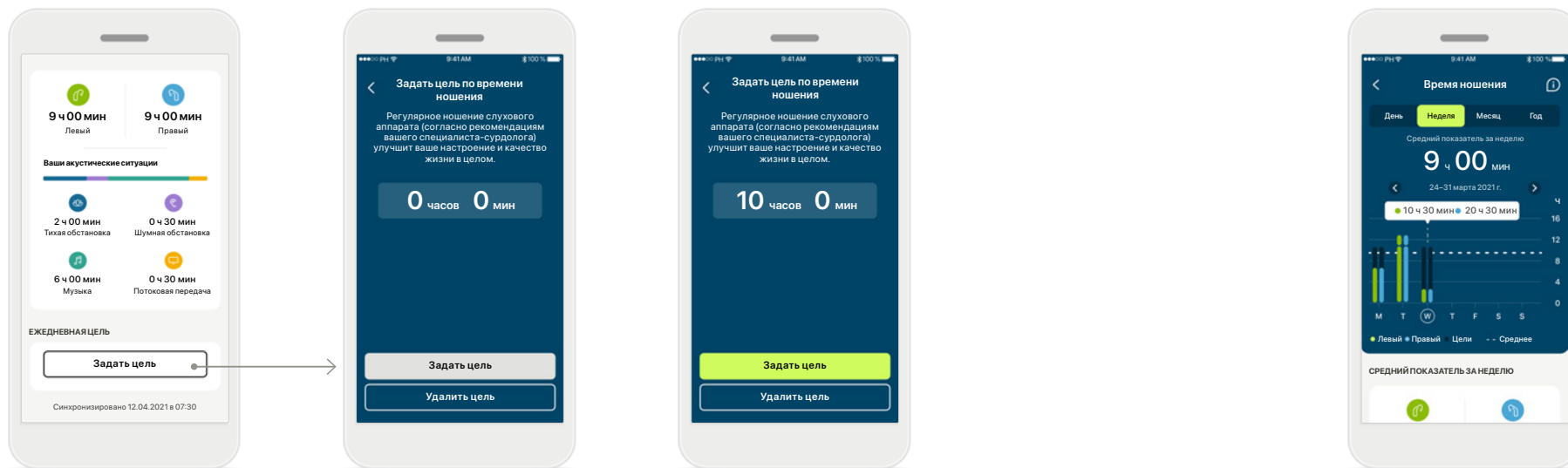

Задать, изменить и удалить цель*


Задание целей – дополнительная функция для опций «Шаги» и «Время ношения». Вы можете использовать ее во время настройки функций в разделе о здоровье, на панели инструментов «Здоровье» или в подробных представлениях окон данных функций.

Нажмите кнопку «Задать цель» или «Поменять цель», чтобы открыть серию экранов настройки, как показано в примере выше. Введите допустимое значение времени ношения или шагов и нажмите «Задать цель», чтобы сохранить изменения. Если вы хотите удалить цель, нажмите «Удалить цель».


Всплывающее описание

Нажмите на точку столбца графика, чтобы узнать точное значение, которое отображается на белом баннере (во всплывающем описании).


* Для перезаряжаемых моделей Audéo Paradise и слуховых аппаратов Phonak Audéo Fit и Phonak Audéo Lumity.

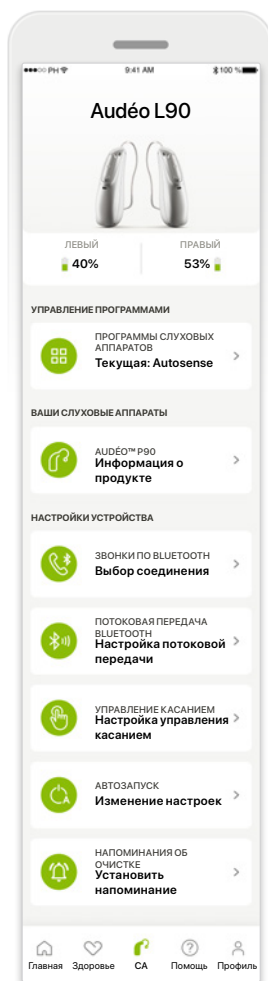


Главный экран «СА»
 В разделе «СА» находится все, что связано с вашими слуховыми аппаратами, например функции управления программами и настройки устройства. Кроме того, здесь отображается состояние элемента питания перезаряжаемых моделей.

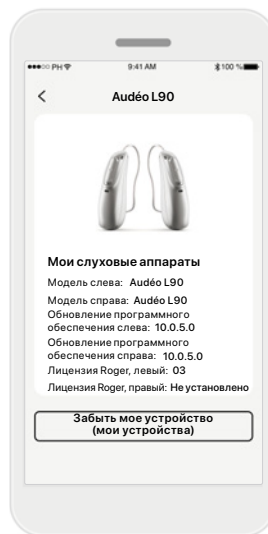

Забудьте устройства
 Чтобы удалить устройство(-а), перейдите на карточку «Ваши слуховые аппараты». После нажатия на кнопку «Забудьте мое устройство (мои устройства)» появится всплывающее сообщение с требованием подтвердить удаление. Обратите внимание, что для использования приложения после выполнения этого действия нужно будет повторно осуществить сопряжение ваших слуховых аппаратов.

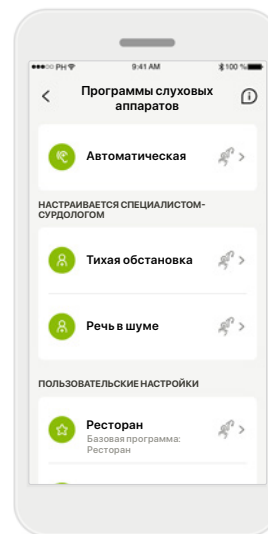


Управление программами
 Нажмите «Программы слуховых аппаратов», чтобы просмотреть все доступные программы. Чтобы изменить название или удалить программу, нажмите на нее. Доступно три типа программ: автоматические, программы, созданные вашим специалистом-сурдологом, и ваши пользовательские программы. Если рядом с названием программы имеется пиктограмма, это означает, что программу можно активировать кнопкой на слуховом аппарате.

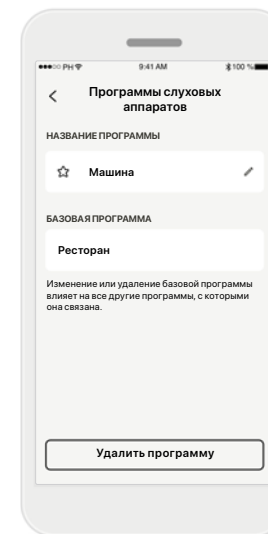


Программы слуховых аппаратов
 Вы можете изменить имя программы и удалить ее. Вы также можете просматривать информацию о базовой программе, с которой связана та или иная программа. Чтобы удалить программу, нажмите **Удалить программу**. Появится всплывающее сообщение с требованием подтвердить удаление.

Помощь и сеанс дистанционной поддержки

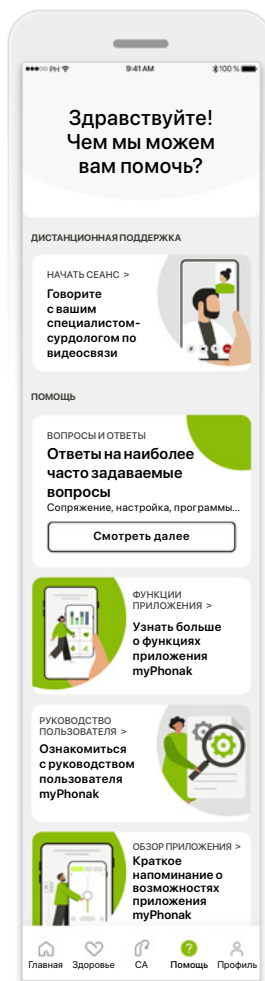

Раздел «Помощь»


На экране «Помощь» вам доступны разделы «Вопросы и ответы»*, «Руководство пользователя», веб-сайт с видеoinструкциями, «Юридические условия» и функция отправки отзыва. Вы также можете получить доступ к дистанционной поддержке, нажав «Начать сеанс».

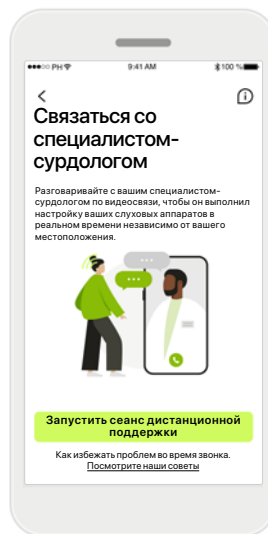

Дистанционная поддержка


Нажав на кнопку **Начать сеанс** на экране помощи, вы запустите сеанс дистанционной поддержки с вашим специалистом-сурдологом. Сеанс дистанционной поддержки должен быть заранее согласован с вашим специалистом-сурдологом.

Чтобы продолжить, нажмите **Начать сеанс дистанционной поддержки**.

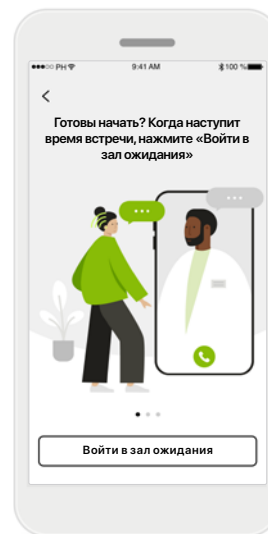

Начать сеанс

После начала сеанса необходимо нажать **Войти в зал ожидания**. Тогда ваш специалист-сурдолог сможет вам позвонить.

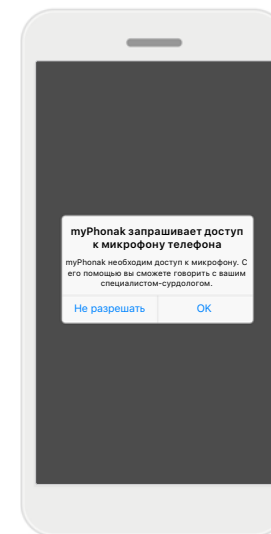


Доступ к микрофону и камере

Нажмите ОК, чтобы разрешить приложению myPhonak доступ к микрофону и камере.


* Ссылка на раздел «Вопросы и ответы»: <https://product-support.phonak.com/>

Запуск сеанса удаленной поддержки

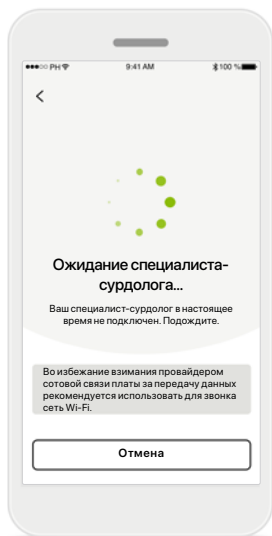


Принять видеозвонок

Приложение соединит вас с вашим специалистом-сурдологом. Подождите, пока специалист-сурдолог ответит на вызов.

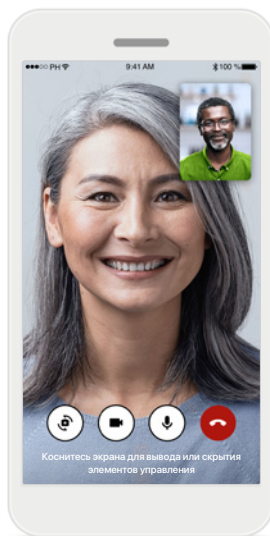


Текущий звонок

Через несколько секунд отобразится видеобразия, и вы сможете увидеть вашего специалиста-сурдолога и поговорить с ним. С помощью элементов управления вы можете включать и выключать звук, отключать видео, переключать камеру и завершать звонок.

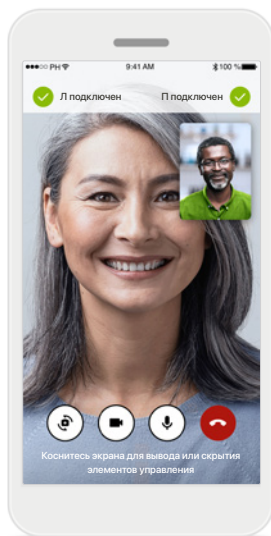

Подключенные слуховые аппараты


Если вашему специалисту-сурдологу необходимо подключиться к вашим слуховым аппаратам, это можно сделать удаленно с помощью смартфона. Ваш специалист-сурдолог сообщит вам о начале подключения к вашим слуховым аппаратам.

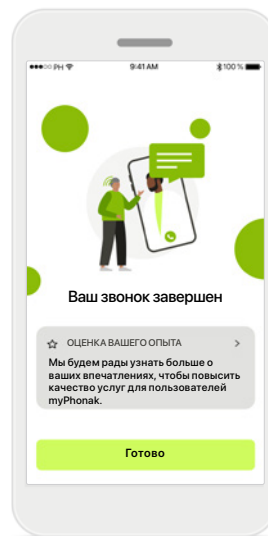


Завершение звонка

После завершения вы можете оценить ваш звонок. Нажмите на ссылку, чтобы отправить ваш отзыв. Нажмите **Готово**, чтобы вернуться на главный экран.


Поиск и устранение неисправностей во время сеанса дистанционной поддержки

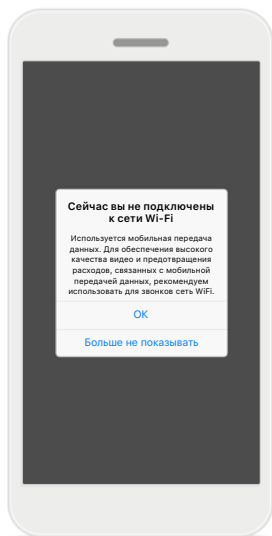


Подключение к сети Wi-Fi
Для сеанса дистанционной поддержки необходим Интернет. Для обеспечения высокого качества связи рекомендуем использовать Wi-Fi.

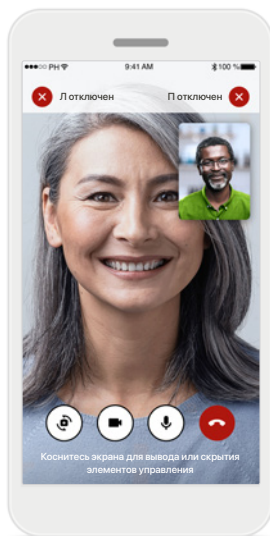

Соединение со слуховыми аппаратами прервано
Статус подключения к слуховым аппаратам отображается в верхней части экрана. В случае отключения слуховых аппаратов символ станет красным. В этом случае вашему специалисту-сурдологу нужно будет повторно подключиться к слуховым аппаратам.

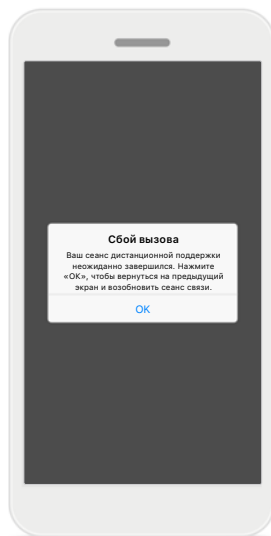


Сбой вызова
В случае сбоя нажмите **OK**. Вы вернетесь на главный экран и сможете оттуда возобновить звонок.

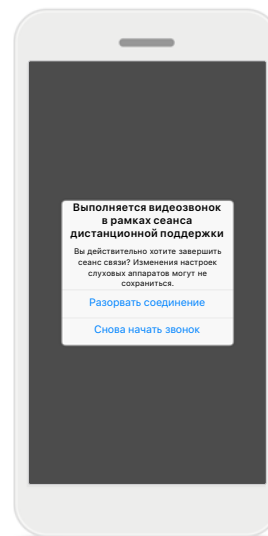

Преждевременное завершение сеанса
Если вы завершаете сеанс, когда выполняется звонок, вы увидите это всплывающее сообщение.


Профиль и конфиденциальность данных

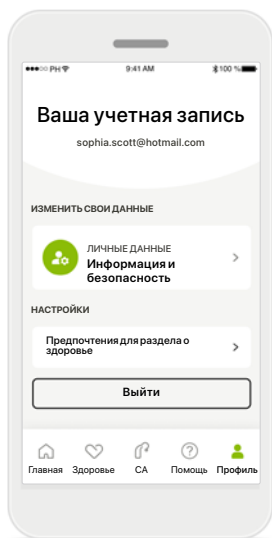

Раздел «Профиль»


На экране «Профиль» вы можете отредактировать информацию в профиле и настроить предпочтения, связанные с разделом «Здоровье».

Если вы хотите выйти из приложения, нажмите **Выйти**.

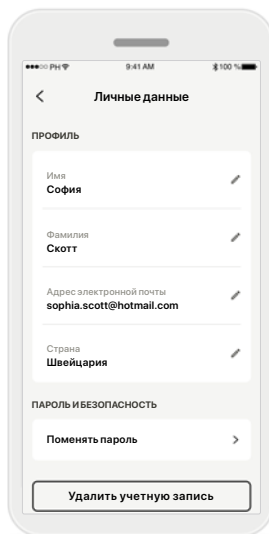

Личные данные

Вы можете изменять ваши персональные данные в разделе «Личные данные», а также редактировать данные по безопасности. Если вы хотите удалить вашу учетную запись, нажмите **Удалить учетную запись**. Для подтверждения действия вам нужно будет ввести пароль.

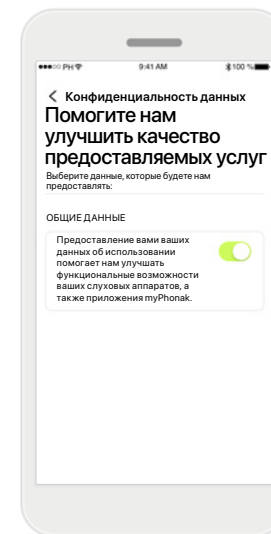

Конфиденциальность данных

Вы можете в любой момент перейти в раздел «Помощь» > «Конфиденциальность данных» и выбрать, какие данные вы хотите предоставлять компании Phonak.

Информация об обрабатываемых нами данных представлена в нашем Заявлении о конфиденциальности. Оно находится в свободном доступе на странице [Помощь > Юридическая документация](#).

Важная информация о безопасности

Перед началом использования приложения ознакомьтесь с соответствующей информацией о безопасности на следующих страницах.

Назначение

Приложение является независимым программным обеспечением, которое предназначено для пользователей слуховых аппаратов и позволяет выбирать, настраивать и сохранять настройки слуховых аппаратов в пределах, разрешенных программой настройки. Приложение также позволяет пользователям слуховых аппаратов связываться и общаться со специалистами-сурдологами, которые осуществляют дистанционную настройку слуховых аппаратов.

Предполагаемая категория пациентов

Данное устройство предназначено для пациентов от 17 лет с односторонней и двусторонней тугоухостью от легкой до тяжелой степени. Функция «Тиннитус» предназначена для пациентов от 18 лет с хроническим тиннитусом.

Предполагаемый пользователь

Лицо с тугоухостью, использующее совместимое устройство.

Показания

Обратите внимание: показания связаны не с приложением, а с совместимыми слуховыми аппаратами. Общеклинические показания к использованию слуховых аппаратов и функции «Тиннитус»:

- тугоухость
 - > одно- или двусторонняя;
 - > кондуктивная, нейросенсорная или смешанная;
 - > от легкой до тяжелой степеней.
- Хронический тиннитус (применяется только к устройствам, поддерживающим функцию «Тиннитус»)

Противопоказания

Обратите внимание: противопоказания связаны не с приложением, а с совместимыми слуховыми аппаратами. Общеклинические противопоказания к использованию слуховых аппаратов и функции «Тиннитус»:

- тугоухость, не вмещающаяся в диапазон подбора слухового аппарата (т. е. в его амплитудно-частотную характеристику);
- острый тиннитус;
- деформация уха (например, закрытый слуховой проход, отсутствие ушной раковины);
- невральная тугоухость (ретрокохлеарные патологии, такие как отсутствие/нефункционирование слухового нерва).

Основными критериями для направления пациента к врачу или другому специалисту за консультацией или назначением лечения являются:

- визуально заметная врожденная или травматическая деформация уха;
- активные выделения из уха в срок предыдущих 90 дней в анамнезе;
- внезапное или быстро прогрессирующее ухудшение слуха на одно или оба уха в срок предыдущих 90 дней в анамнезе;
- острое или хроническое головокружение;
- определенное с помощью аудиометрии значение костно-воздушного интервала, равное или превышающее 15 дБ на частотах 500 Гц, 1000 Гц и 2000 Гц;

- визуально заметные признаки значительного скопления серы или наличия инородного тела в слуховом проходе;
- боль или дискомфорт в ухе;
- внешний вид барабанной перепонки и слухового прохода, отличный от нормального, например:
 - > воспаление наружного слухового прохода;
 - > перфорация барабанной перепонки;
 - > другие отклонения, которые, по мнению специалиста-сурдолога, являются тревожными сигналами с медицинской точки зрения.

Специалист-сурдолог может решить, что направление на дополнительную консультацию нецелесообразно или неоптимально для пациента в следующих случаях:

- при наличии достаточных доказательств того, что врач полностью обследовал пациента в отношении этой проблемы, а также были предоставлены все возможные виды лечения;
- состояние не ухудшилось или существенно не изменилось с момента предыдущего обследования и/или лечения;
- если пациент принял осознанное и информированное решение о том, что он не будет следовать рекомендации обратиться за медицинским заключением, можно перейти к рекомендации соответствующих систем слуховых аппаратов с учетом следующих факторов:
 - > рекомендация не окажет неблагоприятного воздействия на здоровье или общее состояние пациента;

Важная информация о безопасности

Перед началом использования приложения ознакомьтесь с соответствующей информацией о безопасности на следующих страницах.

- > были учтены все необходимые факторы наиболее оптимального решения для пациента, о чем свидетельствуют соответствующие записи.

Пациент подписал отказ от ответственности, чтобы подтвердить, что он не будет следовать рекомендации обратиться к врачу и это решение является осознанным, если такой отказ требуется по закону.

Клиническая польза

Приложение предоставляет предполагаемым пользователям возможность изменять и сохранять настройки слуховых аппаратов в соответствии с индивидуальными потребностями в пределах разрешенных начальной настройкой.

Приложение предоставляет предполагаемым пользователям удобный способ связи со специалистом-сурдологом для осуществления дистанционной настройки слуховых аппаратов.

Побочные эффекты

Обратите внимание: побочные эффекты связаны не с приложением, а с совместимыми слуховыми аппаратами.

Уменьшить или устранить проявления физиологических побочных эффектов от использования слуховых аппаратов, таких как тиннитус, головокружение, скопление серы, слишком сильное давление, потоотделение или влажность, волдыри, зуд и/или сыпь, закупорка или заложенность, и их последствия, такие как головная боль и/или боль в ушах, может ваш специалист-сурдолог.

При использовании стандартных слуховых аппаратов пациенты могут подвергаться звуковому воздействию более высокого уровня, что может привести к сдвигу пороговых значений в частотном диапазоне, подверженном акустической травме.

Ограничения использования

Использование приложения ограничивают возможности совместимого устройства/устройств.

Обо всех серьезных инцидентах, связанных с приложением, необходимо сообщать представителю производителя и в компетентные органы страны проживания. Серьезным инцидентом считается инцидент, который прямо или косвенно привел или мог привести к любому из следующих событий:

- смерть пациента, пользователя или другого лица;
- временное или постоянное серьезное ухудшение состояния здоровья клиента, пользователя или другого лица;
- серьезная угроза здоровью населения.

Для того чтобы сообщить о непредусмотренной операции или событии, обратитесь к производителю или представителю.

Важная информация о безопасности

Перед началом использования приложения ознакомьтесь с соответствующей информацией о безопасности на следующих страницах.

Руководство пользователя для всех версий приложения на всех доступных языках представлено в электронной форме на веб-сайте. Для получения доступа к руководствам пользователя выполните следующие шаги:

- Нажмите ссылку <https://www.phonak.com/com/en/about-us/countries.html> и выберите нужную страну
- Перейдите в раздел Support (на английском языке) или его эквивалент на соответствующем языке
- Откройте страницу User Guides (на английском языке) или ее эквивалент на соответствующем языке
- Перейдите в раздел Apps (на английском языке) или его эквивалент на соответствующем языке
- Нажмите myPhonak app

Кроме того, доступ к действующей версии руководства пользователя myPhonak можно получить через приложение. Для этого в разделе «Помощь» необходимо нажать на карточку «Руководство пользователя». Руководство пользователя откроется во внешнем окне браузера.

Уведомление о безопасности

Данные пациентов представляют собой конфиденциальную информацию, и их защита чрезвычайно важна.

- Убедитесь, что на смартфоне установлены последние обновления безопасности операционной системы. Включите автоматическое обновление.
- Убедитесь, что у вас установлена последняя версия приложения.
- Используйте для слуховых аппаратов только оригинальное приложение Sonova из официальных магазинов.
- Устанавливайте только проверенные приложения из официальных источников.
- Обязательно используйте надежный пароль и храните данные входа в тайне.
- Блокируйте доступ к телефону с помощью PIN-кода и/или биометрических данных (например, отпечатка пальца, лица), а также установите автоматическую блокировку телефона через несколько минут бездействия.
- Убедитесь, что установленные приложения имеют только необходимые разрешения.
- Старайтесь избегать сопряжения ваших слуховых аппаратов с использованием Bluetooth в публичных местах. Это может создать риск нежелательного вмешательства со стороны третьих лиц. Мы рекомендуем выполнять сопряжение с использованием Bluetooth дома.

- НЕ используйте телефон со снятой защитой или с административным доступом.

Всегда обеспечивайте защиту данных. Имейте в виду, что данный перечень рекомендаций не является исчерпывающим.

- При передаче данных по небезопасным каналам выполняйте обезличивание или шифрование данных.
- Защищайте резервные копии данных смартфона не только от потери данных, но от кражи.
- Удаляйте все данные со смартфона, который вы больше не используете или который будет утилизирован.

Сопровождение программного обеспечения

Мы постоянно отслеживаем обратную связь от пользователей. Если у вас возникли какие-либо проблемы при использовании последней версии приложения, свяжитесь с местным представителем производителя и/или оставьте отзыв в Appstore или Google Play Store.

Важная информация о безопасности

Перед началом использования приложения ознакомьтесь с соответствующей информацией о безопасности на следующих страницах.



Изменение настроек, например уменьшение громкости или усиление подавления шумов, может привести к опасным ситуациям, в частности вы перестанете слышать входящий поток.



За бесплатным бумажным экземпляром инструкции по эксплуатации обращайтесь к региональному представителю компании Sonova. Экземпляр инструкции будет направлен вам в течение 7 дней.



Если слуховые аппараты не реагируют на устройство из-за необычных помех, отойдите от источника помех.



Если слуховые аппараты не реагируют, проверьте, включены ли они и не разряжен ли элемент питания.



Включите Bluetooth. Необходимо включить Bluetooth для подключения слуховых аппаратов.

Информация о соответствии

Европа: Декларация соответствия

Настоящим Sonova AG заявляет, что данное изделие отвечает требованиям Нормативного акта по медицинским изделиям (ЕС) 2017/745.

Используемые символы



Этот символ указывает, что пользователю следует прочитать и принять во внимание соответствующую информацию в данном руководстве пользователя.



Этот символ указывает, что пользователю следует обратить внимание на соответствующие предупреждения в руководстве пользователя.



Важная информация по обращению с изделием и безопасности.



С помощью маркировки CE Sonova AG подтверждает, что данное изделие отвечает требованиям Нормативного акта по медицинским изделиям (ЕС) 2017/745. Цифры после символа CE соответствуют коду сертифицированных учреждений, проводивших консультации, предусмотренные вышеуказанным нормативным актом.



Обозначает уполномоченного представителя в Европейском сообществе. Представитель в ЕС также является импортером в Европейский союз.



Обозначает, что изделие является медицинским изделием.



Имя, адрес, дата

Комбинированный символ «Производитель медицинского изделия» и «Дата производства» согласно требованиям нормативного акта ЕС (ЕС) 2017/745.



Указание на наличие электронных инструкций по эксплуатации. Инструкции можно получить на веб-сайте www.phonak.com/myphonakapp



Sonova AG · Laubisrütistrasse 28
CH-8712 Stäfa, Швейцария



Sonova Deutschland GmbH
Max-Eyth-Str. 20
70736 Fellbach-Oeffingen · Германия

Спонсор в Австралии:
Sonova Australia Pty Ltd
12 Inglewood Place,
Norwest NSW 2153 · Австралия

