

Phonak Fast Facts



Phonak ComPilot II

Was steckt dahinter?

Der Phonak ComPilot II ist eine Streaming- und Fernsteuerungslösung für Phonak Venture und Belong™ Hörgeräte. Der ComPilot II verbindet wirelessfähige Phonak Hörgeräte mit bluetoothfähigen Telefonen, Fernsehern, Navigationssystemen, MP3-Playern, usw. Er überträgt den Ton von diesen Audioquellen drahtlos und in Stereoqualität an beide Hörgeräte – für höchsten Hörerfolg und eine optimale Kommunikation. Er verbindet die Hörgeräte auch bei einer Übertragung mit einem Roger-/FM-Empfänger oder Verwendung des 3,5 mm Audioeingangs.

Neu: Der Phonak ComPilot II kann zwei Audioquellen zusätzlich zu einem TVLink oder RemoteMic unterstützen. Er bietet zudem eine verlängerte Streamingzeit mit bis zu 24 Stunden Laufzeit. Damit können Ihre Kunden ohne Unterbrechung Filme genießen oder am Computer spielen.



Welchen Vorteil bietet er?

Mit dem Phonak ComPilot II steigern Ihre Kunden die Leistung ihrer Hörgeräte. Das Richtmikrofon des Phonak ComPilot II ermöglicht beste Kommunikation am Telefon und sogar beim Telefonieren in lauten Hörumgebungen. Ihre Kunden können in herausragender Stereoqualität Fernsehen oder Musik hören.

Wie wende ich ihn an?

Der Phonak ComPilot II ist sofort als Streamer einsetzbar und kann in der Anpassungssoftware Phonak Target™ 5.0 (oder neuere Version) individuell auf die Kundenbedürfnisse eingestellt werden. Für den Gebrauch als Fernsteuerung muss der ComPilot II über die Phonak Target™ konfiguriert werden. Mit der Phonak RemoteControl App können die ComPilot II Einstellungen, inklusive der gesprochenen Meldungen (VoiceAlerts) und aller Bluetooth-Funktionen, einfach über das Smartphone eingestellt werden. Mit der integrierten Demo-Option können Sie Ihren Kunden die Funktionen des ComPilot II sofort in Ihrem Fachgeschäft vorführen. Legen Sie einfach die Induktionsschleife um den Hals des Kunden, drücken und halten Sie die Haupttaste, während Sie ComPilot II einschalten. Ihr Kunde hört und genießt sofort alle Vorteile, die ihm der Phonak ComPilot II in Bezug auf Hörleistung und Komfort bietet.

Nähere Informationen finden Sie auf www.phonakpro.de/compilot