

Phonak-liitettävyys.







Vaiheittaiset ohjeet puhelimen yhdistämiseen ja käyttöön kuulokojeiden kanssa

Yhdistäminen myPhonak-sovellukseen kuulokojeiden säätämistä ja puheluiden ja äänen suoratoistoa varten

1. Hae myPhonak-sovellus Google Play™ Kaupasta tai Apple App Storesta®, tai avaa puhelimesi kamerasovellus ja skannaa QR-koodi. Asenna sitten myPhonak-sovellus.
2. Avaa sovellus ja käy esittely läpi tai ohita se. Kun olet täyttänyt Tietosuoja- ja Käyttötiedot-osiot ja valinnut asuinmaasi (Yhdysvallat tai ei), voit jatkaa laiteparin muodostukseen.
3. Kun olet päässyt Aloitus-osion laiteparin muodostusnäyttöön, napauta Liitä kuulokojeet laitepariksi.
4. Sovellus antaa laiteparin muodostamiseen ohjeita sen mukaan, ovatko kuulokojeesi ladattavat vai paristokäyttöiset. Noudata ohjeita, jotta kuulokojeesi siirtyvät laiteparin muodostustilaan 3 minuutiksi. Näin sovellus pystyy löytämään ne.
5. Sovellus hakee nyt kuulokojeitasi. Jos käytät kahta kuulokojetta, odota, kunnes molemmat näkyvät näytössä. Jos vain toinen tulee näkyviin tai kumpaakaan ei näy, saat ohjeita napauttamalla näytön alaosan En näe laitteitani -painiketta. Kun laitteesi on havaittu, yhdistä ne sovellukseen napauttamalla Yhdistä-painiketta ja ota suoratoisto käyttöön.



Katso opasvideo siirtymällä osoitteeseen Phonak.com/support-bluetooth-setup tai skannaamalla QR-koodi.

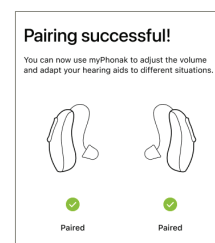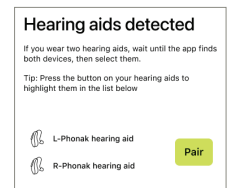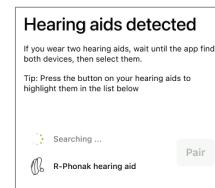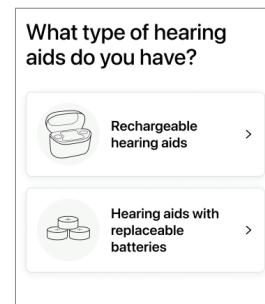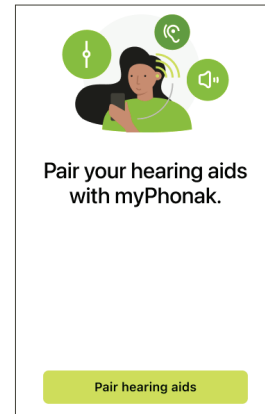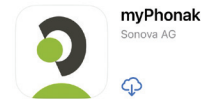

Kun laitteesi on yhdistetty sovellukseen, näet puhelimesi Bluetooth-valikossa kaksi Phonak-yhteyttä, joista toinen alkaa R-kirjaimella ja tarkoittaa oikeaa kuulokojetta ja toinen L-kirjaimella ja tarkoittaa vasenta kuulokojetta. Kun sovellus suljetaan, niiden kohdalla voi lukea "Ei yhdistetty". Ne yhdistetään automaattisesti, kun sovellus avataan. Jotta ne pysyvät yhdistettyinä, älä poista niitä, ellei ole tekemässä sovelluksen yhteysongelmien vianmääritystä.

Yhdistäminen puhelimeen puheluita ja äänentoistoa varten

Jos olet jo yhdistänyt Infinio Ultra -kuulokojeesi myPhonakin kautta, tämä vaihe ei ole enää tarpeen. Noudata alla olevia ohjeita, kun olet yhdistämässä kuukojeitasi suoratoistoa ja puheluita varten ilman myPhonak-sovellusta tai jos käytät aiempien sukupolvien kuulokojeita.

1. Avaa puhelimen Bluetooth®-valikko (löytyy usein asetuksista). Varmista, että Bluetooth on käytössä.
2. Sammuta kuulokoje(et) ja kytke ne takaisin päälle asettamalla ne seinään kytkettyyn laturiin vähintään 3 sekunniksi ja poistamalla ne siitä. Näin ne siirtyvät laiteparin muodostustilaan 3 minuutiksi ja puhelin voi löytää ne.
3. Puhelimen Bluetooth-laitteiden luetteloon tulee näkyviin yksi kuulokoje, jonka edessä näkyy R (oikea) tai L (vasen) sen mukaan, minkä puolen ja nimen kuuloolan ammattilainen on valinnut kuulokojeidesi yksilöimistä varten.



Huomautus: Yksi pariliitos riittää puheluita ja äänen suoratoistoa varten. Jos sinulla on kaksi kuulokojetta, kuulet äänen molemmissa kuulokojeissa yhdellä pariliitoksella.

Bluetooth®-kokemuksen parantaminen

Jos käytät Android-puhelinta, voit poistaa järjestelmän äänet käytöstä seuraavien ohjeiden mukaisesti*:

1. Asetukset > Äänet ja värinä > Järjestelmän äänet
2. Poista käytöstä
 - kosketustoimintojen äänet
 - numeronäppäimistön äänet
 - näppäimistön äänet
 - latausäänet
 - näytön lukituksen ja lukituksen avauksen äänet.
3. Asetukset > Sovellukset
4. Poista käytöstä yksittäisten sovellusten kohdalla:
 - Hiljennä ilmoitusäänet.

Jos käytät iPhone-puhelinta (iOS® 16:ta tai uudempaa), voit poistaa järjestelmän äänet käytöstä seuraavien ohjeiden mukaisesti:

1. Asetukset > Äänet ja tuntopalaute
2. Poista käytöstä
 - näppäimistön palaute
 - lukitusääni.
3. Asetukset > Ilmoitukset
4. Poista käytöstä yksittäisten sovellusten kohdalla:
 - äänet.

*Tässä esimerkissä on käytetty Samsung-puhelinta. Asetukset ovat samankaltaiset muissa puhelimissa. Käytä asetuksissa olevaa hakutoimintoa löytääksesi ne. Bluetooth®-sanamerkki ja -logot ovat Bluetooth SIG, Inc:n rekisteröityjä tavaramerkkejä, ja Sonova AG käyttää näitä merkkejä lisenssillä. iPhone on Apple Inc:n Yhdysvalloissa ja muissa maissa ja muilla alueilla rekisteröity tavaramerkki. Android ja Google Play ovat Google LLC:n tavaramerkkejä. App Store on Apple Inc:n Yhdysvalloissa ja muissa maissa ja muilla alueilla rekisteröity palvelumerkki. IOS on Cisco Systems, Inc:n ja/tai sen tytäryhtiöiden rekisteröity tavaramerkki tai tavaramerkki Yhdysvalloissa ja tietyissä muissa maissa.



Katso opasvideo siirtymällä osoitteeseen Phonak.com/support-bluetooth-setup tai skannaamalla QR-koodi.

iPhone®




Android™




Bluetooth



Ladattava Audéo

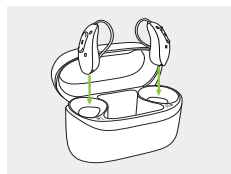

Ladattava Virto

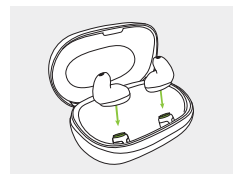

DEVICES ✱

R-Phonak hearing aid

Bluetooth pairing request

Pair with R-Phonak hearing aid?

Cancel

Pair



Järjestelmän äänien, kuten näppäimistöäänien, poistaminen käytöstä voi parantaa merkittävästi kokemustasi. Katso opasvideo siirtymällä osoitteeseen Phonak.com/support-bluetooth-sounds tai skannaamalla QR-koodi.

Vianmääritys ja vinkkejä

Jos yhteyden muodostamisessa ilmenee ongelmia, tarkista ensin, että

- puhelin ja kuulokojeesi on ladattu
- puhelimesi käyttöjärjestelmä on ajan tasalla.
- Poista sitten Bluetooth käytöstä ja aktivoi se uudelleen puhelimen Bluetooth-valikossa.
- Jos ongelma jatkuu, käynnistä puhelin uudelleen.
- Laitteet voi myös olla tarpeen liittää uudelleen laitepariksi. Katso ohjeet tähän siirtymällä osoitteeseen Phonak.com/support/bluetooth-repair tai skannaamalla alla oleva QR-koodi.




iPhone-puheluiden vianmääritys

Jos käytät iPhonea ja puhelu ei automaattisesti kuulu kuulokojeissa, muuta puheluiden äänireititystä siirtymällä kohtaan Asetukset > Käyttöäpu > Touch > Puheluiden äänireititys > Valitse Bluetooth-kuulokkeet.

Suoratoiston poistaminen käytöstä

Jos et halua käyttää kuulokojeitasi puheluihin ja äänentoistoon, voit poistaa tämän toiminnon käytöstä sovelluksessa. Siirry kohtaan Laitteet, valitse Toisto Bluetooth-yhteyden kautta ja poista Bluetooth-suoratoisto käytöstä.

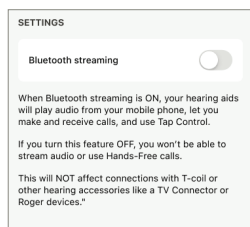

Lisäohjeita saat osoitteesta Phonak.com/support.



Jos tarvitset henkilökohtaista tukea Bluetooth-yhteyteen liittyen, täytä tämä [lomake](#) skannaamalla QR-koodi. Mikäli sinulla on muita kuulokojeisiin liittyviä huolia, suosittelemme kääntymään kuuloalan ammattilaisen puoleen.

