


# Phonak

## Fast Fact

### Évent acoustiquement optimisé (AOV)

#### De quoi s'agit-il ?

Introduit en 2009, l'évent acoustiquement optimisé (AOV) a été créé pour rationaliser le processus de commande des aides auditives sur-mesure. L'AOV prend en compte les caractéristiques uniques de chaque patient, y compris la configuration audiométrique, le risque d'effet Larsen, la probabilité d'occlusion, l'avantage du son direct et le gain de graves nécessaire. La formule brevetée crée ensuite une taille d'évent individuelle spécifique à chaque patient.

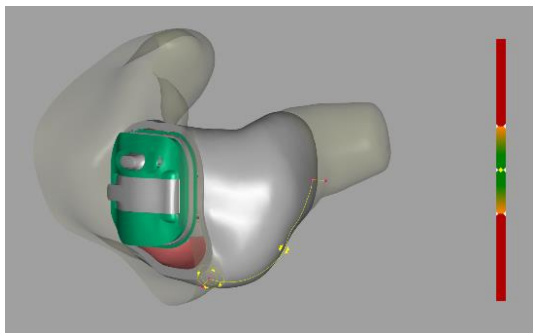

#### Quels sont les avantages ?

- L'AOV a été conçu pour offrir aux patients l'association idéale entre performances auditives et confort de port en fonction de leur perte auditive unique et de la configuration de l'aide auditive.
- Le choix de l'AOV élimine la nécessité de sélectionner manuellement la taille d'évent adéquate pour chaque patient.
- Une étude des données internes montre que les aides auditives avec AOV sont renvoyées moins souvent que celles avec un événement sélectionné manuellement.<sup>1</sup>

#### Comment l'utiliser ?

L'AOV est l'évent par défaut sélectionné pour toutes les aides auditives et tous les embouts personnalisés commandés auprès de Phonak. Cela implique que vous n'avez pas besoin d'effectuer des tâches supplémentaires pour bénéficier des avantages d'un événement personnalisé pour votre patient.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur [www.phonakpro.com](http://www.phonakpro.com) ou contactez votre représentant Phonak.

1. Leuthold, N. (2019). Rapport interne Phonak. Contactez [claims@phonak.com](mailto:claims@phonak.com) pour obtenir davantage d'informations.