

Écouteur Phonak ActiveVent™

Liste de contrôle d'éligibilité

Nom du patient :

Date :

DN :

Contexte

L'écouteur ActiveVent est équipé d'un événement commutable qui associe les avantages d'un appareillage ouvert et d'un appareillage fermé dans un seul écouteur. Étant donné la nature complexe de cette technologie, veuillez prendre en considération ce qui suit :


L'écouteur ActiveVent nécessite :

- des seuils d'audition situés dans la plage appropriée (voir le diagramme) ;
- des aides auditives Audéo Paradise rechargeables ;
- un nettoyage et un entretien plus poussés qu'avec un écouteur standard.

Un écouteur ActiveVent est-il idéal pour votre patient ?

Posez les questions suivantes afin de déterminer si ActiveVent est la solution idéale pour votre patient.

1. Les seuils d'audition du patient se situent-ils dans la plage indiquée ci-dessus ?
2. Le patient serait-il appareillé avec un dôme ouvert ou obturant en temps normal ?
3. Le patient possède-t-il la dextérité nécessaire pour remplacer les filtres anti-cérumen ?
4. Les oreilles du patient sont-elles exemptes d'humidité et de cérumen en excès ?
5. Le patient est-il disposé à désactiver les notifications sonores sur son téléphone ?
6. Le patient a-t-il signalé des acouphènes problématiques ?
7. Le patient a-t-il signalé ressentir des douleurs ou de l'inconfort causés par des sons intenses ?

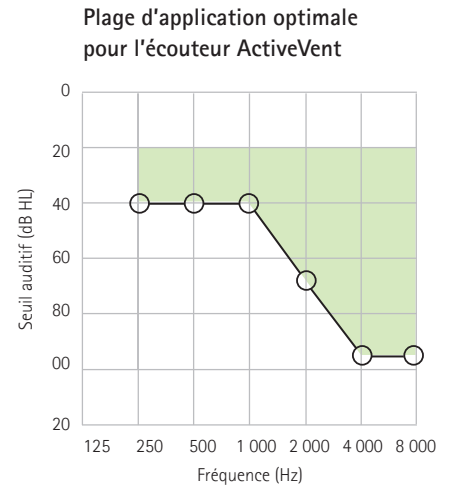

- | | |
|------------------------------|------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Oui | <input type="checkbox"/> Non |
| <input type="checkbox"/> Oui | <input type="checkbox"/> Non |
| <input type="checkbox"/> Oui | <input type="checkbox"/> Non |
| <input type="checkbox"/> Oui | <input type="checkbox"/> Non |
| <input type="checkbox"/> Oui | <input type="checkbox"/> Non |
| <input type="checkbox"/> Oui | <input type="checkbox"/> Non |
| <input type="checkbox"/> Oui | <input type="checkbox"/> Non |
| <input type="checkbox"/> Oui | <input type="checkbox"/> Non |

OK pour procéder à l'essai et à l'appareillage d'un écouteur ActiveVent ?

- | | |
|------------------------------|------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Oui | <input type="checkbox"/> Non |
|------------------------------|------------------------------|

Liste de contrôle des compétences pour l'écouteur ActiveVent

Avant de renvoyer le patient chez lui avec ses écouteurs ActiveVent, assurez-vous qu'il est capable de réaliser les actions suivantes par lui-même :

- Vérifier le confort du SlimTip Universel AV ou du SlimTip Titanium AV
- Insérer et retirer l'écouteur ActiveVent dans et hors de l'oreille
- Essuyer le SlimTip AV pour en éliminer le cérumen et les impuretés
- Remplacer le filtre anti-cérumen HF3
- Confirmer que le bruit de la fermeture de l'événement est acceptable
- (Facultatif) Reconnaître les rappels de nettoyage reçus dans l'application myPhonak app

Si le patient ne peut pas ou ne veut pas réaliser l'une de ces actions, nous recommandons de poursuivre l'appareillage avec un écouteur SDS 4.0 standard.