


# Phonak

# Anleitung

## Anleitung für Kunden: Ohrmessung

1. Im Bild rechts ist der Bereich dargestellt, der gemessen werden muss, um die geeignete Länge zu bestimmen.
  - a. Punkt 1: Oberer Rand der Gehörgangsöffnung
  - b. Punkt 2: Wo die Brille auf dem Ohr aufliegen würde

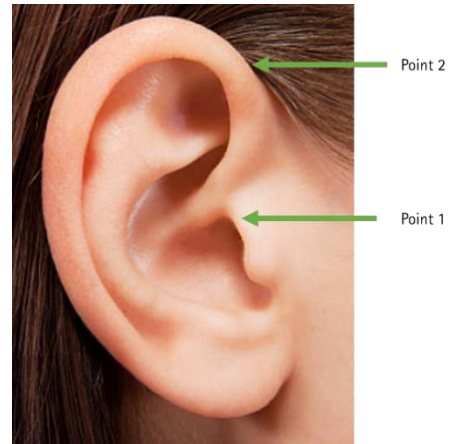

2. Legen Sie das Lineal flach an Ihren Kopf, sodass es sowohl den oberen als auch den unteren Bereich des Ohrs berührt.



3. Bitten Sie jemanden (wenn möglich), Fotos von Ihren beiden Ohren mit dem so platzierten Lineal zu machen.

### Empfehlungen für das Fotografieren:

- a. Fotografieren Sie mit der Kamera Ihres Smartphones an einem gut beleuchteten Ort
  - b. Die Kamera sollte direkt auf das Ohr fokussiert und ausgerichtet werden
  - c. Im Fokus sind das Ohr und das Lineal
  - d. Stellen Sie sicher, dass das Lineal senkrecht gehalten wird
  - e. Halten Sie die Kamera still, damit die Details klar erkennbar sind
4. Speichern Sie die Bilder und senden Sie sie per E-Mail oder MMS an Ihren Hörakustiker.
  5. Ihr Hörakustiker wird die Größenbestimmung bei Ihrer Remote-Sitzung oder einem persönlichen Folgetermin überprüfen.