

Kandidaten-Checkliste

Name: _____ Geb.-Datum: _____ Datum: _____

Hintergrund

ActiveVent Receiver verfügen über ein umschaltbares Vent, das die Vorteile einer offenen und einer geschlossenen Anpassung in einem Receiver vereint. Aufgrund der komplexen Technologie beachten Sie bitte Folgendes:


ActiveVent Receiver erfordern:

- Hörschwellen innerhalb des entsprechenden Bereichs (siehe Anpassbereich)
- Wiederaufladbare Audéo Paradise Hörgeräte
- Mehr Reinigung und Pflege als ein Standard-Receiver

Sind ActiveVent Receiver für Ihren Kunden geeignet?

Stellen Sie die folgenden Fragen, um zu prüfen, ob ActiveVent die richtige Lösung für Ihren Kunden ist.

1. Liegt die Hörschwelle des Kunden im oben dargestellten Anpassbereich?
2. Würde der Kunde normalerweise mit offenen statt geschlossenen Domes ausgestattet werden?
3. Verfügt der Kunde über ausreichende Fingerfertigkeit, um Cerumenfilter zu wechseln?
4. Sind die Ohren des Kunden frei von übermäßiger Feuchtigkeit und Cerumen?
5. Ist der Kunde bereit, Audio-Benachrichtigungen auf seinem Smartphone zu deaktivieren?
6. Leidet der Kunde an Tinnitus?
7. Empfindet der Kunde Schmerzen oder Unbehagen bei lauten Geräuschen?
8. Ist der Kunde bereit, Mehrkosten für ein optimales Hörerlebnis zu investieren?

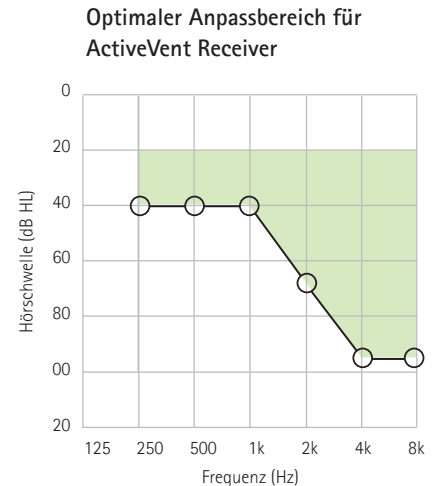

- | | |
|-----------------------------|-------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Ja | <input type="checkbox"/> Nein |
| <input type="checkbox"/> Ja | <input type="checkbox"/> Nein |
| <input type="checkbox"/> Ja | <input type="checkbox"/> Nein |
| <input type="checkbox"/> Ja | <input type="checkbox"/> Nein |
| <input type="checkbox"/> Ja | <input type="checkbox"/> Nein |
| <input type="checkbox"/> Ja | <input type="checkbox"/> Nein |
| <input type="checkbox"/> Ja | <input type="checkbox"/> Nein |
| <input type="checkbox"/> Ja | <input type="checkbox"/> Nein |

Der Kunde ist geeignet, um mit der Erprobung und Anpassung der ActiveVent Receiver fortzufahren. Ja Nein

Checkliste der für den ActiveVent Receiver erforderlichen Fertigkeiten

Bevor Ihr Kunde mit ActiveVent Receivern Ihr Fachgeschäft verlässt, sollte er in der Lage sein, selbstständig

- den Komfort der Universal SlimTips AV oder Titanium SlimTips AV zu überprüfen
- die ActiveVent Receiver einzusetzen bzw. zu entfernen
- Cerumen oder Ablagerungen auf den SlimTips AV abzuwischen
- den HF3 Cerumenfilter zu wechseln
- bestätigen, dass die Lautstärke beim Schließen des Vents akzeptabel ist
- (Optional) zu erkennen, wenn eine Reinigungserinnerung in der myPhonak App empfangen wird

Sollte der Kunde dazu nicht in der Lage oder nicht gewillt sein, empfehlen wir, die Anpassung mit Standard SDS 4.0 Receivern fortzusetzen.