

Phonak ActiveVent Receiver

Der weltweit erste intelligente Hörgeräte Receiver

Paradise ist für seine unvergleichbare¹ Klangqualität⁵ mit brilliantem Sprachverstehen^{4,5,6} und personalisierter Störgeräuschunterdrückung bekannt. Mit ActiveVent schlagen wir ein neues Paradise Kapitel auf.

Diese innovative Hörertechnologie zeichnet sich durch ein mechanisch schaltendes Vent aus, das nahtlos über AutoSense OS 4.0 gesteuert wird. ActiveVent vereint die Hörleistung einer geschlossenen Anpassung mit dem Komfort einer offenen Anpassung². Das Ergebnis ist eine kompromisslose Hörlösung, mit der Ihre Kunden die Umgebung bewusst wahrnehmen und die eigene Stimme als natürlich empfinden können, bei gleichzeitig verbessertem Sprachverstehen im Störgeräusch⁷.



ActiveVent Ankopplungsoptionen

1. Universal SlimTip AV

Dank dem neuen Universal SlimTip AV können Sie Ihren Kunden den ActiveVent Receiver ganz einfach demonstrieren. Universal SlimTips wurden auf der Grundlage von tausenden Ohrscans entworfen, was es den Entwicklern ermöglichte, vier Formen zu modellieren, die eine hohe Anpassrate bieten. Die Universal SlimTips sind als Übergangslösung für Demonstrationen und die Ausprobe konzipiert, während der Kunde auf seine individuell angefertigten SlimTips Titanium AV wartet.

2. Individuell gefertigte SlimTip Titanium AV

Um die akustische Leistung zu optimieren, wurde der ActiveVent Receiver für die langfristige kombinierte Verwendung mit SlimTip Titanium AV entwickelt. Er zeichnet sich durch eine vollständig individuelle Passform aus und besteht aus einem langlebigen, komfortablen Material.

Highlights


- Intelligent ausbalancierte Sprachverständlichkeit im Störgeräusch und Hörkomfort²
- Bietet hervorragende Klangqualität beim Audio-Streaming^{7,8}
- Intelligente Steuerung über AutoSense OS 4.0
- Mit allen wiederaufladbaren Audéo Paradise Hörgeräten kompatibel⁹

Informationen zur Anpassung von ActiveVent


- Für eine optimale Leistung sollte der Receiver alle sechs Monate ausgetauscht werden. Dies kann mit wenigen Handgriffen im Geschäft vorgenommen werden.
- Ideal für Kandidaten mit wenig Cerumenbildung und einer guten Feinmotorik.
- Regelmäßige Reinigung und Austausch des Cerumenfilters (HF3) sind erforderlich
- Nicht für Kunden mit schwergradigem Tinnitus und Hyperakusis geeignet

Wie funktioniert der ActiveVent Receiver?

Der ActiveVent ist ein Receiver mit integriertem Vent und einer kleinen Scheibe, die zwischen zwei Positionen bewegt wird: offen und geschlossen. Dies alles wird intelligent über AutoSense OS 4.0 gesteuert. Ein Klickgeräusch versichert dem Kunden, dass sich die Position der Scheibe verändert hat.

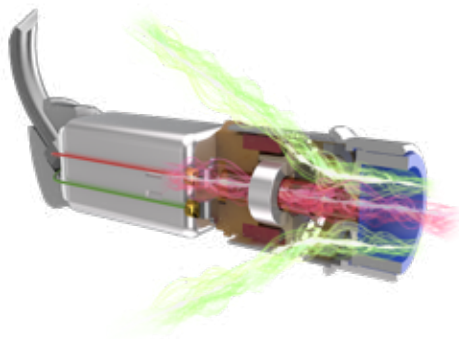

Befindet sich die Scheibe in geöffneter Position, werden Geräusche durch den im Receiver eingebauten Vent weitergeleitet und bieten somit den Komfort einer offenen Anpassung, bei der die Natürlichkeit der eigenen Stimme sowie der Klänge der Umgebung erhalten bleiben².

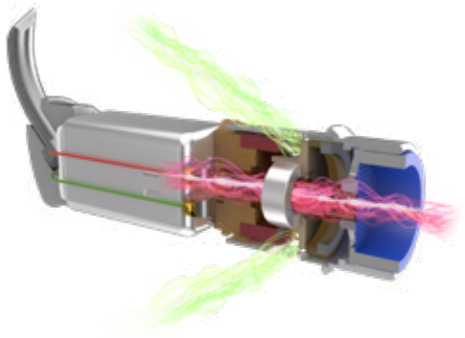

In schwierigen Hörumgebungen mit Verstehen im lauten Störgeräusch oder beim Medienstreaming, bewegt sich die Scheibe in die geschlossene Position und blockiert dadurch die direkte Weiterleitung von Umgebungsgeräuschen an das Ohr. Der Fokus wird auf das Gespräch mit dem Gegenüber oder den Streaminginhalt gelenkt.

ActiveVent Performance + Vorteile für Ihre Kunden

ActiveVent Receiver sind mit allen wiederaufladbaren Audéo Paradise Hörgeräten kompatibel und bieten verschiedene Vorteile in Abhängigkeit der Technologiestufe des jeweiligen Hörgeräts. ActiveVent Performance + ist die Sammlung der Vorteile, die Kunden dank ActiveVent Receiver erwarten können.


Intelligent ausbalancierte Sprachverständlichkeit im Störgeräusch und Hörkomfort²

ActiveVent Receiver sind ideal für Kunden, die einen aktiven Lebensstil pflegen und viel Zeit in lauten Umgebungen, wie Restaurants, auf Veranstaltungen oder an öffentlichen Orten mit hohem Lärmpegel, verbringen. An solchen Orten kann das Hören noch herausfordernder sein. Bei ActiveVent Receivern wird das Vent bei zunehmendem Geräuschpegel durch AutoSense OS 4.0 automatisch geschlossen, sodass der Hörgeräteträger von der verbesserten Leistung einer geschlossenen Anpassung profitiert (erhältlich in der Technologiestufe Premium). Sinkt der Geräuschpegel wieder, öffnet sich das Vent wieder, sodass die Kunden den Komfort einer offenen Anpassung genießen können. Mit ActiveVent Receivern haben Kunden auch Zugriff auf manuelle Hörprogramme bei geschlossenem Vent. (Erhältlich in den Technologiestufen Premium, Advanced und Standard, Essential).

Bietet hervorragende Klangqualität beim Audio-Streaming^{7,8}

Kunden können sich jetzt dank dem geschlossenen Vent über eine hervorragende Klangqualität beim Audio-Streaming freuen. Das wirklich Besondere ist, dass Ihre Kunden mühelos zwischen Streaming und einem Gespräch umschalten können. Durch einfaches Doppeltippen an die Ohrmuschel wird das Streaming pausiert und der ActiveVent Receiver öffnet den Belüftungskanal, um einen nahtlosen Übergang zu ermöglichen (in allen Technologiestufen erhältlich).

Vorteile

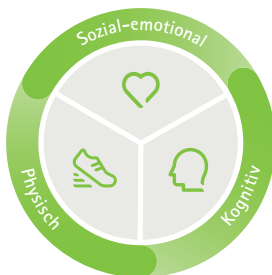

- Der ActiveVent Receiver bietet eine um durchschnittlich 10% verbesserte Sprachverständlichkeit im Störgeräusch bei natürlichem Klang in verschiedenen Hörsituationen⁷
- Mit dem Universal SlimTip wird die direkte Demonstration und die Ausprobe des ActiveVent Receivers zum Kinderspiel
- Mit ActiveVent Receivern bleiben Ihre Kunden sowohl in lauten als auch ruhigen Hörumgebungen mit der Welt verbunden, können an Gesprächen mit Familie und Freunden teilhaben und mit anderen Menschen in Kontakt bleiben

Life is on

Wir bei Phonak glauben, dass gutes Hören gleichbedeutend mit Wohlbefinden und Lebensqualität ist. Seit mehr als 70 Jahren arbeiten wir mit Leidenschaft daran, eine Welt zu schaffen in der jeder das Leben in vollen Zügen genießen kann. Unsere innovativen Hörlösungen sind für Menschen jeden Alters und jede Art von Hörminderung konzipiert, um jedem zu ermöglichen, sich sozial und emotional frei zu entfalten.

www.phonakpro.de

