

Brug af Roger™ DigiMaster X

Reference Sheet

roger

Den er perfekt til klasselokaler med andre Soundfield-installationer og sikrer, at alle lyttende opnår taleforståelse i Roger-kvalitet. Bare tilslut, tænd, og lær!








Indledende opsætning

- Tilslut Roger DigiMaster X til en strømkilde.
- Ved hjælp af medfølgende lyd-kabel og adapter tilsluttes Roger DigiMaster X til rummets forstærkersystem.
- Hold Roger Touchscreen Mic eller Roger inspiro inden for 10 cm (4") fra Roger DigiMaster X, og berør eller tryk på **Tilslut**.

Daglig brug

- Tryk på tænd/sluk-knappen på Roger DigiMaster X og hold den nede i 2 sekunder for at tænde den. Tænd for Roger mikrofonen. Tal ind i Roger mikrofonen.
- Tryk på tænd/sluk-knappen på Roger DigiMaster X og hold den nede i 2 sekunder for at slukke for den, når du er færdig.

Indikatorlys på Roger DigiMaster X

-  Konstant rød – Roger DigiMaster X er slukket
-  Konstant blå – Almindelig driftsindstilling
-  Blinker blå – Roger mikrofonen er slukket eller uden for rækkevidde
-  Konstant grøn – Roger mikrofonen er slået fra
-  Grøn til rød – Lydstyrken er ved at blive justeret +/-
-  Blinker gult – Softwareopdatering
-  Blinker rødt – kontakt din Roger teknisk support

