

# Brug af Roger™ Multimedia Hub i klasseværelset

Reference Sheet

roger



I det moderne klasseværelse er lærernes undervisning ofte støttet af video- og audiokilder, såsom interaktive whiteboards eller MP3-afspillere. Det forventes, at børnene lytter til de enkelte lektioner, som om det var en lydbog eller computer. Roger Multimedia Hub kan nu anvendes til at understøtte både blandet (lærer og lyd) og individuel aflytning.

## Generel betjening

- For at tænde skal du trykke på on/off-knappen på siden af Roger Multimedia Hub i 3 sekunder. De grønne indikatorlys blinker, indtil den er helt opstartet. Strømindikatorlyset fortsætter med at fade ind og ud i grønt under brugen.
- For at slukke skal du trykke på on/off-knappen på siden af Roger Multimedia Hub i 3 sekunder. Indikatorlyset blinker grønt 3 gange og slukkes derefter.
- Ved opladning med enten en USB-ledning eller i Roger-ladestation blinker indikatorlyset grønt, og når den er fuldt opladet, lyser de konstant grønt.



**Klasseværelse udsendelse** – bruges, når alle Roger-bærere skal høre lyd-kilden.

- Tænd for Roger Multimedia Hub.
- Placer Roger Touchscreen Mic inden for 10 cm (4") fra Multimedia Hub'en, og tryk på ikonet **Tilslut** på Touchscreen Mic.
- Sæt Multimedia Hub i audio out-stikket på computeren eller anden lyd-kilde.
- Roger Multimedia Hub sender lyden samtidig med lyden fra Roger Touchscreen Mic. Både læreren og lyd-kilden kan høres på samme tid.

**Uafhængig aflytning** – bruges, når et barn har brug for at lytte til en lyd-kilde uafhængigt, dvs. en lektion i en lydbog eller computer.

- Hold Roger Multimedia Hub inden for 10 cm (4") fra barnets Roger modtager, og tryk på den store **Forbindelses**knop på Multimedia Hub. Gentag tilslutning for yderligere modtagere.
- Sæt Multimedia Hub i audio out-stikket på tabletten eller anden lyd-kilde.
- Afspil lyd-kilden. Roger Multimedia Hub sender kun til disse tilsluttede modtagere.
- Hvis barnet skal sluttes til klasseværelsets netværk igen, kan han eller hun forbinde via Roger WallPilot eller lærerens mikrofon.