

Brug af Roger™ Touchscreen Mic i mindre grupper

Reference Sheet

roger



Den nye, innovative gruppetilstand anvender et system bestående af tre indbyggede intelligente mikrofoner, som samarbejder avanceret og adaptivt. Når Roger Touchscreen Mic placeres på bordet mellem 2-5 elever, rettes mikrofonerne automatisk mod den elev i gruppen, der taler.

Gruppetilstand

- Klips Roger Touchscreen Mic fra halsbæreremmen.
- Placer Roger Touchscreen Mic fladt på bordet i midten af den lille gruppe*.
- Mikrofonen overfører automatisk stemmerne, der er tæt på.
- Når den lille gruppeaktivitet er afsluttet, klipses Roger Touchscreen Mic på bæreremmen igen.

* Når den primære Roger Touchscreen Mic bruges i gruppetilstand, vil den ikke længere sende en DigiMaster højttaler eller blive anvendt i et MultiTalker netværk.

